

FUJIFILM

ポータブルエックス線撮影装置

CALNEO Xair

清掃・洗浄および消毒ガイド

「取扱説明書(897N201417D)」より抜粋

消毒、清掃に対する警告と注意

警告

- 溶剤を含む消毒液の呼吸気濃度が法的制限を超えていないことを確認してください。消毒液によって健康を害するおそれがあります。消毒液の添付文書をよく読んで使用してください。
 - 消毒の際は、以下のものは使用しないでください。各装置にダメージを与え、品質・性能および安全性を保証できません。
 - ・ 金属やゴム部材に対して、強い腐食性のある塩素系消毒剤。
 - ・ 消毒剤の取扱説明書の注意事項で、金属、プラスチック、ゴム部材および塗装に対し、使用不可と記載されている消毒剤。
 - ・ 装置内部に入り込むおそれのあるホルマリンガスやスプレータイプの消毒剤。
- 使用する消毒剤には、消毒用エタノール(局方)を推奨します。消毒剤の添付文書をよく読んで実施してください。消毒剤の詳細については、弊社指定の業者またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。

第5章 日常の点検とお手入れ

5.1 お客様の行う保守点検

XD2000を最良の状態でご使用いただくため、保守点検を行う際には「第1章 お使いになる前に」の各項目の内容を守って、正しい取り扱いをお願いいたします。

5.1.1 日常点検

使用される前に次の項目は必ず点検し、装置が故障していないことを確認してください。装置に異常がある場合は、使用しないでください。

使用前の点検（確認）

No.	項目	作業内容
1	外観	<ul style="list-style-type: none">カバーにひび等を含む破損がないことを確認してください。コード類に異常、特にハンドスイッチのコード類にひねり、被服破損などの傷みがないことを確認してください。
2	ショルダーストラップ	<ul style="list-style-type: none">き裂などの破損、ほつれ、破れ、変形がないことを確認してください。
3	コリメータ	<ul style="list-style-type: none">光照射野スイッチを押して光照射野が点灯することを確認してください。コリメータのエックス線照射窓に汚れや異物付着がないことを確認してください。
4	バッテリー残量確認	<ul style="list-style-type: none">バッテリーインジケータが3つ以上点灯していることを確認してください。それ以下の時は、充電してください。

使用前の清掃

外装の清掃には、市販のエタノールを染み込ませて、固く絞った清掃用のウエスを使用してください。

⚠ 注意

- エックス線発生器の清掃および消毒は、必ず電源をOFFにしてから行ってください。電源を入れたまま実施すると、意図しない動作をする可能性があります。
- 多量のエタノールをつけると、外装隙間から浸入して装置が損傷したり、ラベルがはがれる恐れがあります。エタノールが機器内に浸入しないように注意してください。
- シンナーやベンジンなどの溶剤は、外装が侵されますので、使用しないでください。
- エタノールは無水または精製水で希釈された物を使用してください。
- 操作パネルを清掃および消毒するときは、以下の注意事項を必ず守ってください。
 - ・ 操作パネルは傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
 - ・ 操作パネルにほこりがついたときは、柔らかい布を湿らせて軽く拭き取ってください。