

製品別、新型コロナウイルス対応 使用可能消毒剤一覧（中水準以上）

下記でご紹介している消毒剤については弊社で機器の性能には影響が無いことを確認しております。それ以外の薬剤で清拭する場合はお客様の責任で実施して頂きますようお願い申し上げます。

清拭箇所	X線画像診断装置
製品外装部	<p><使用可能な消毒剤></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 日本薬局方消毒用エタノール CALNEO PU/PT を除く X線画像診断装置関連製品※へ使用可能です。 ※(株)三協製撮影台を含む CALNEO PU/PT は第四級アンモニウム塩（ベンザルコニウム塩化物）の使用をお願いします。 消毒用エタノール の使用は塗装を剥がすため使用しないでください。 ■ 次亜塩素酸ナトリウム 0.5%以下水溶液 以下の製品にて使用が可能です。 ※金属露出部への使用は腐食が起こる為、使用は控えて下さい。 <ul style="list-style-type: none"> ・ CALNEO Smart ・ CALNEO AQRO ・ AMULET Innovality ※ただし撮影台、圧迫板、フェースガードに限ります ・ (株)三協製撮影台

製品名 FUJIFILM DR CALNEO Smart C47

販売名 デジタルラジオグラフィ DR-ID 1200

（FUJIFILM DR CALNEO Smart C47 は、構成品 フラットパネルセンサ DR-ID 1211SE）

認証番号 226ABBZX00085000

製品名 FUJIFILM DR CALNEO AQRO

販売名 富士フィルム DR-XD 1000

認証番号 228ABBZX00132000

製品名 AMULET Innovality

販売名 デジタル式乳房用 X線診断装置 FDR MS-3500

認証番号 224ABBZX00182000

製品名 FUJIFILM DR CALNEO PU

販売名 リーダー撮影台 FM-PU1

届出番号 11B2X00011000041

製造販売業者 株式会社大林製作所

製品名 FUJIFILM DR CALNEO PT

販売名 昇降型フローティング撮影台 FM-PT1

届出番号 11B2X00011000042

製造販売業者 株式会社大林製作所

販売名 電動式撮影台 FM-PL1

届出番号 11B2X00011000043 号

製造販売業者 株式会社大林製作所

販売名：ロングパネル用立位撮影台 FSL-LP

届出番号 27B3X00066000022 号

製造販売業者 株式会社三協

販売名 手動式立位撮影台 LX-1

届出番号 27B3X00066000024

製造販売業者 株式会社三協

販売名 電動式立位撮影台 SRX-100

届出番号 27B3X00066000019

製造販売業者 株式会社三協

販売名 立位電動式撮影台 SR-1A

届出番号 27B3X00066000006

製造販売業者 株式会社三協

販売名 立位手動式撮影台 LD-3

届出番号 27B3X00066000017

製造販売業者 株式会社三協

販売名 臥位昇降式撮影台 ST-500

届出番号 27B3X00066000016

製造販売業者 株式会社三協

販売名 FPD 対応撮影装置 DR-B F3

届出番号 27B3X00066000015

製造販売業者 株式会社三協