

PROOFIT 1D バージョンアップに伴う一部改良のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配 を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年8月8日（木）のバージョンアップに伴い、下記の内容にて一部改良しましたので
ご案内いたします。

敬具


記

◆バージョンアップ後のソフトウェアバージョン

V01_00_06_00 （ログイン画面 バージョンアップボタンの左横に表示されます）

◆注意事項

- ・8月8日（木）の起動直後より、自動的にソフトウェアのダウンロードが開始されます。通常通りご使用頂けますが、3時間程度は電源を切らないようお願い致します。
- ・業務終了時に、ログイン画面のシャットダウンボタンを押すと「システムを終了する前にバージョンアップを実施しますか？」とメッセージが表示されます。バージョンアップを実施した場合は、通常よりシャットダウンまでの時間が長くなります。
- ・お急ぎの場合は、起動から3時間経過後にログイン画面のバージョンアップボタンを押してバージョンアップを実施ください。バージョンアップは20分程度かかり、完了するまでご使用頂けなくなります。
- ・ダウンロードが完了していない状態では、バージョンアップボタンを押しても「現在のバージョンは最新です」とメッセージが表示されます。ネットワーク回線が込み合っている場合、ダウンロードに時間が掛かり当日のバージョンアップができないことがあります。バージョンアップできない場合は、翌日の業務終了時に再度実施ください。
- ・常時起動している場合は、自動でダウンロードが開始されないため、再起動を実施ください。

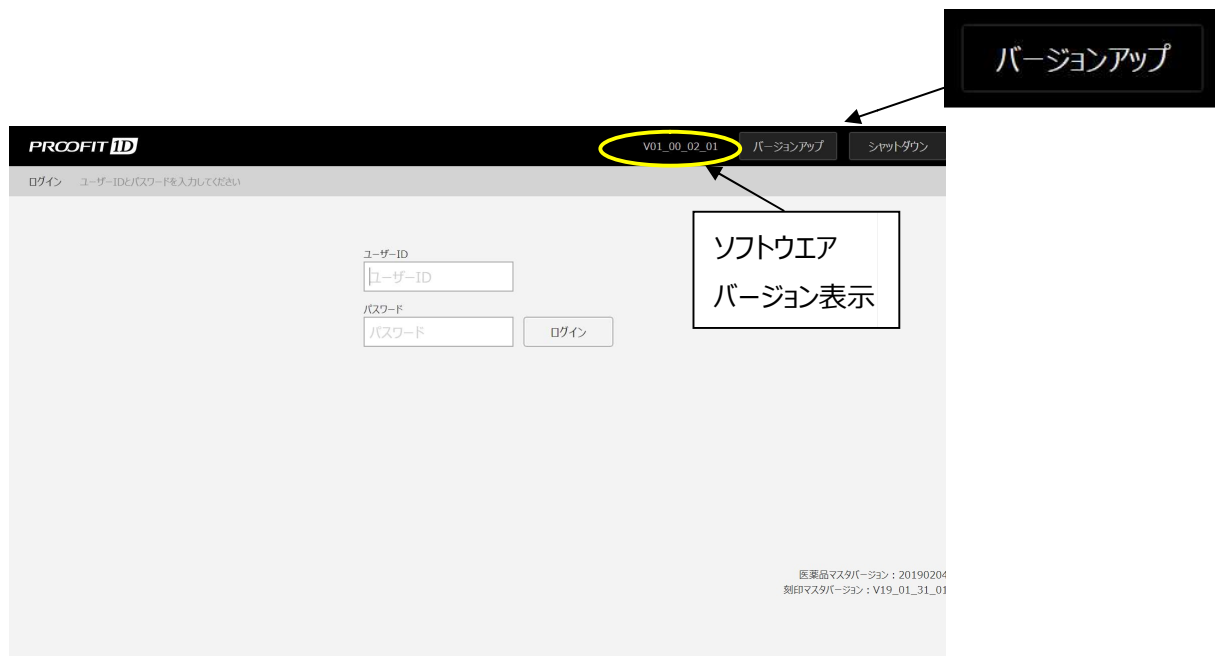

1. オリジナルのラベル印字フォーム作成機能追加

標準の 49 種類のラベルフォームに加えて、「文字サイズの変更」や今まで選択できなかった「病院・施設名」、「処方日」、1包あたりの錠数「○種○錠」の印字項目がラベルフォームとして作成、登録できるようになります。

メニュー画面にある「ラベルフォーム管理」(図1)の「ラベルフォーム編集」(図2)でレイアウト編集ができ、最大 999 種類まで登録できます。使用頻度が高いラベルは、お気に入り設定をすることでラベルフォームの選択がスムーズに行えます。

詳細手順は、PROOFIT 1D ホームページ掲載の「PROOFIT 1D ラベルレイアウト機能の使い方」を参照ください。

図1. ラベルフォーム管理画面



図2. ラベルフォーム編集画面



患者名、用法、薬剤名、服用開始日などの一覧から印字させたい項目を選択し、表示領域、文字サイズを選ぶことができます。

2. リモート接続による遠隔支援機能の追加


サポートセンターへ問い合わせ頂いた際に、お客様の承諾（PROOFIT-1D の画面操作と電話で認証番号の読み上げ）を頂くことで、サポートセンターと画面共有する機能を追加しました。お客様に状況説明して頂く時間の短縮、画面共有しながらの操作説明が可能となります。

※省令に定められたガイドラインに従った運用・管理を行います。

厚労省：医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

総務省：クラウドサービス業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン

図3. リモート接続の開始画面（メニューの一覧へボタンが追加されています。）

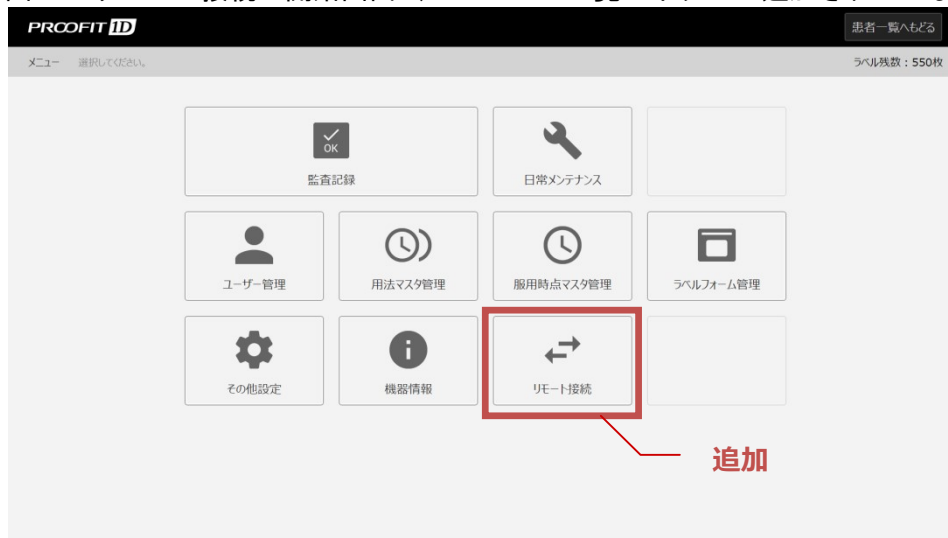

今後とも、さらなる品質の向上を目指し、お客様からの信頼にお応えできるよう一層努力をしてみたいです。

何卒末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上

【本件に対するお問い合わせ】

富士フイルム富山化学 医薬 IoT ソリューション部 鈴木 信之

携帯電話 090-2556-4299

メール nobuyuki.a.suzuki@fujifilm.com