

PROOFIT 1D バージョンアップに伴う一部改良のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配 を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年12月17日（火）のバージョンアップに伴い、下記の内容にて一部改良しましたので
ご案内いたします。

敬具

記

◆バージョンアップ後のソフトウェアバージョン

V01_00_09_01 （ログイン画面 バージョンアップボタンの左横に表示されます）

◆注意事項

- ・12月17日（火）の起動直後より、自動的にソフトウェアのダウンロードが開始されます。通常通りご使用頂けますが、3時間程度は電源を切らないようお願い致します。
- ・業務終了時に、ログイン画面のシャットダウンボタンを押すと「システムを終了する前にバージョンアップを実施しますか？」とメッセージが表示されます。バージョンアップを実施した場合は、通常よりシャットダウンまでの時間が長くなります。
- ・バージョンアップを早く実施する場合は、起動から3時間経過後にログイン画面のバージョンアップボタンを押してバージョンアップを実施ください。バージョンアップは20分程度かかり、完了するまでご使用頂けなくなります。
- ・ダウンロードが完了していない状態では、バージョンアップボタンを押しても「現在のバージョンは最新です」とメッセージが表示されます。ネットワーク回線が込み合っている場合、ダウンロードに時間が掛かり当日のバージョンアップができないことがあります。バージョンアップできない場合は、翌日の業務終了時に再度実施ください。
- ・常時起動している場合は、自動でダウンロードが開始されないため、再起動を実施ください。



1. スマホアプリ「1D サービス」向けに薬剤情報を保存する機能の追加

お客様の PROOFIT 1D で監査した分包品の薬剤情報（調剤月・薬剤名・数・用法）を PROOFIT クラウドサーバーへ保存する機能を追加しました。保存するデータは、バージョンアップ後（V01_00_09_01 以降）のバージョンで監査した分包品が対象で、個人情報はありません。

監査読込完了後、約 15 分で 1D サービスから参照できるようになります。包ラベルの 2 次元バーコードをスマホアプリ「1D サービス」で読み取ると、薬剤情報が確認できるようになります。



2. シャットダウン時に監査情報を削除する機能の変更

シャットダウン時に、確認画面（図 2）が表示されて「実施する」を選択したときに、削除する監査情報の条件を変更しました。

レセコンから受信したデータが不要な場合に、当日分も含めて削除することができます。

<バージョンアップ前（V01_00_08_03 以前）の削除条件>

レセコンで入力した調剤日が、シャットダウン当日の前日以前の未監査（保留中は除く）の監査情報

<バージョンアップ後（V01_00_09_01 以降）の削除条件>

レセコンで入力した調剤日が、シャットダウン当日以前の未監査（保留中は除く）の監査情報

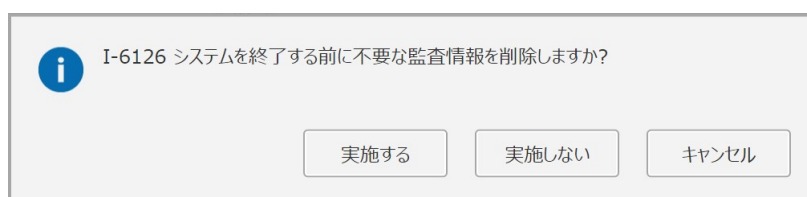


図 2. 監査情報の削除確認画面

今後とも、さらなる品質の向上を目指し、お客様からの信頼にお応えできるよう一層努力をしております。何卒末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上

【本件に対するお問い合わせ】

富士フイルム富山化学 医薬 IoT ソリューション部 鈴木 信之

携帯電話 090-2556-4299

メール nobuyuki.a.suzuki@fujifilm.com

※ 年末年始の PROOFIT サポートセンターは、12/27（金）まで営業致しております。
12/28（土）～ 1/5（日）の間は休止となりますので、併せてご連絡致します。