

## PROOFIT 1D バージョンアップに伴う一部改良のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配 を賜り、厚く御礼申し上げます。

**2019 年 4 月 8 日（月）正午のバージョンアップ**に伴い、下記の内容にて一部改良しましたので  
ご案内いたします。

敬具

記

◆バージョンアップ後のソフトウェアバージョン

V01\_00\_04\_00 （ログイン画面 バージョンアップボタンの左横に表示されます）

◆注意事項

- ・ 4 月 8 日正午以降、バージョンアップボタンを押してください。  
バージョンアップ処理は、約 20 分程度かかります。



### バージョンアップの内容

**1. 患者検索時に全角カタカナ・ひらがなを使用可**

「半角カタカナではソフトキーボードでの検索が手間」とのご意見を頂いていたため、全角カタカナまたはひらがなでの入力が可能となりました。

<従来 入力ボックス>

患者氏名  
氏名 (カナ)



<新 入力ボックス>

氏名(かな/カナ) ▾

**2. ラベルパターンを、分包品読込後でも変更可**

分包品を 1 本でも読み込んだ後は、他の分包品帯のラベルパターンの変更ができませんでしたが、変更可能となりました。

従来	新
① 朝食後、昼食後、夕食後の3本の分包品があり、朝食後のラベルパターンを選択 ② 朝食後の監査読込を実施 ③ 昼食後、夕食後のラベルパターンは変更できない	①朝食後、昼食後、夕食後の3本の分包品があり、朝食後のラベルパターンを選択 ②朝食後の監査読込を実施 ③昼食後、夕食後のラベルパターンは <u>変更可能</u>

### 3. 針代・容器代などの記載がある処方箋の取り込みが可能に

これまで、針代・容器代などの記載がある処方箋は1Dに取込むことができず、該当部分を除外して処方箋を飛ばす対応をしておりましたが、除外する必要がなくなりました。

### 4. 下記不具合に対する改善、対策を行いました。

- ①USBカメラ動作不良 ※ケーブルの接続はバージョンアップ完了後に行ってください。

撮影失敗、装置のフリーズなどの不具合を解消致しました。

なお、USBカメラのケーブルを、専用PC前面のUSB端子（黄色の場所にある端子、左右どちらでも良い）に接続してから、1Dを起動してください。

ハードディスク



専用 PC

- ②監査完了時に、「ラベルが貼られていない」と誤ったエラーが表示され完了できないことがある。

- ③搬送不良発生後、監査結果の薬剤や不明物がずれて表示されてしまうことがある。

など

今後とも、さらなる品質の向上を目指し、お客様からの信頼にお応えできるよう一層努力をしてまいります。

何卒末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上

#### 【本件に対するお問い合わせ】

富士フイルム富山化学 医薬 IoT ソリューション部 鈴木 信之

携帯電話 090-2556-4299

メール nobuyuki.a.suzuki@fujifilm.com

なお、GW中のサポートセンターは、4/30~5/2の三日間、通常通り9:00~17:40でオープンしておりますので、併せてご連絡致します。