

PROOFIT 1D_バージョンアップに伴う一部改良のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配 を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019 年 5 月 28 日（火）のバージョンアップに伴い、下記の内容にて一部改良しましたので
ご案内いたします。

敬具


記

◆バージョンアップ後のソフトウェアバージョン

V01_00_05_00 （ログイン画面 バージョンアップボタンの左横に表示されます）

◆注意事項

- ・ 5 月 28 日の業務終了時に、バージョンアップボタンを押してください。
バージョンアップ処理は、約 20 分程度かかります。

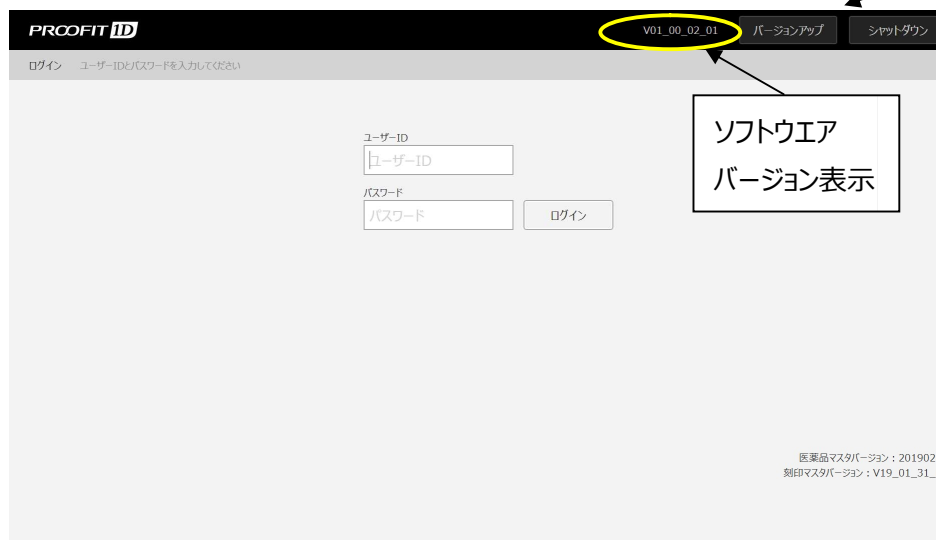


ネットワーク回線が込み合っている場合、ダウンロードに時間が掛かり当日のバージョンアップができないことがあります。バージョンアップできない場合は、翌日の業務終了時に再度、バージョンアップボタンを押してください。

バージョンアップの内容

1. ラベル印字内容のプレビュー表示追加

「撮影/ラベル」、「監査読込」開始時に 1 包目に貼り付けるラベルのプレビューを確認できるようになりました。実際の患者名、服用開始日、コメントなどが表示されます。


「分包品をセットしてください。」のメッセージ画面

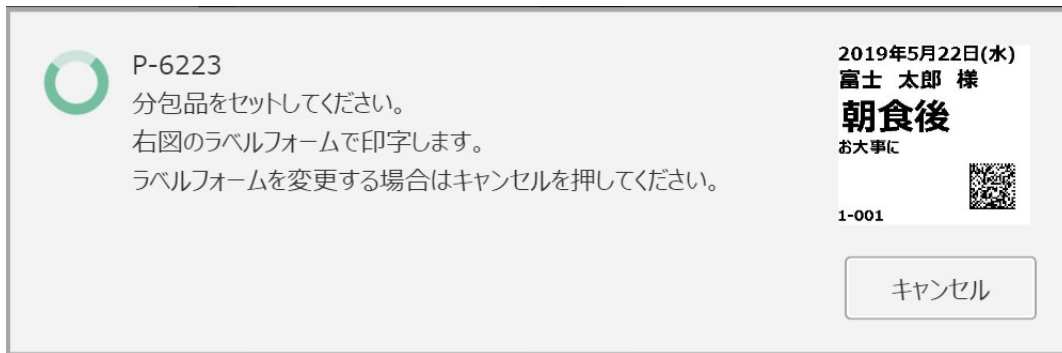


2. 画面表示内容の改善

- (1) メッセージ表示ダイアログの横幅を広げて、メッセージの改行表示を減らしました。
- (2) エラー発生後の操作内容がエラーメッセージとして表示されるように改善しました。

<変更前の表示例>

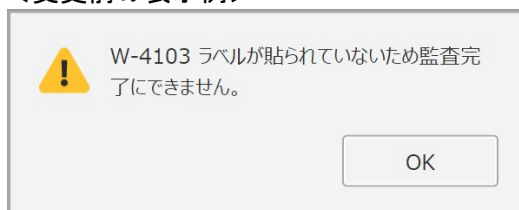

<変更後の表示例>

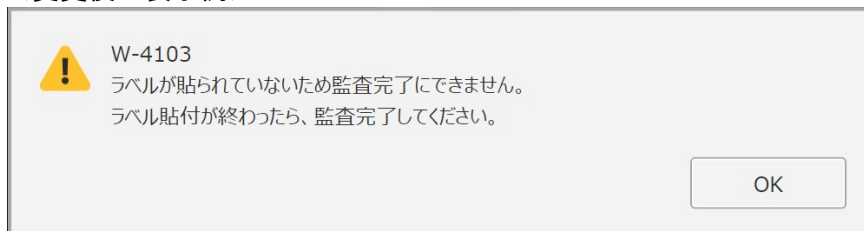

- (3) 「監査読込」ボタン周辺の配置間隔を広げて、誤操作を防止する微調整を行いました。

<変更前>



<変更後>




3. 下記不具合に対する改善、対策を行いました。

- (1) 隔日設定の監査不具合：隔日設定で全く服用しない日がある場合には、読込完了後に「読込結果へ」ボタンが押せず、読込結果が見られない。

<読込結果が見られなかった例>

隔日設定で火曜日と金曜日だけ服用する薬のみの分包品で処方日数と包数が不一致の場合

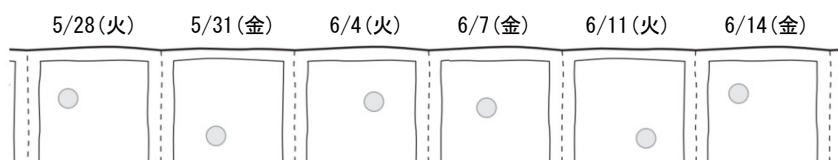

※分包編集の隔日設定で全く服用しない日があるように編集した場合、分包イメージへ表示される包数が実際の分包品と異なる処方日数の表示になっています。
実際の包数は、「監査読込」をすると分包品のタブへ表示されます。



(2) 監査読込中止後の分包編集不具合

これまでのバージョンでは、「読込中止」後に分包情報編集をした場合、「完了」操作でエラーが発生して編集内容を確定できない不具合があったため、対策しました。

なお、分包情報画面に分包品が複数ある場合は、最初に読込をした分包品のみ「読込中止」後の「編集」が可能です。既に読込が完了した分包品がある場合は、従来同様「編集」操作はできません。

など

今後とも、さらなる品質の向上を目指し、お客様からの信頼にお応えできるよう一層努力をしてまいります。

何卒末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上

【本件に対するお問い合わせ】

富士フイルム富山化学 医薬 IoT ソリューション部 鈴木 信之

携帯電話 090-2556-4299

メール nobuyuki.a.suzuki@fujifilm.com