


2020 Autumn 新機能のご案内

一包装監査支援システム
PROOFIT 1D

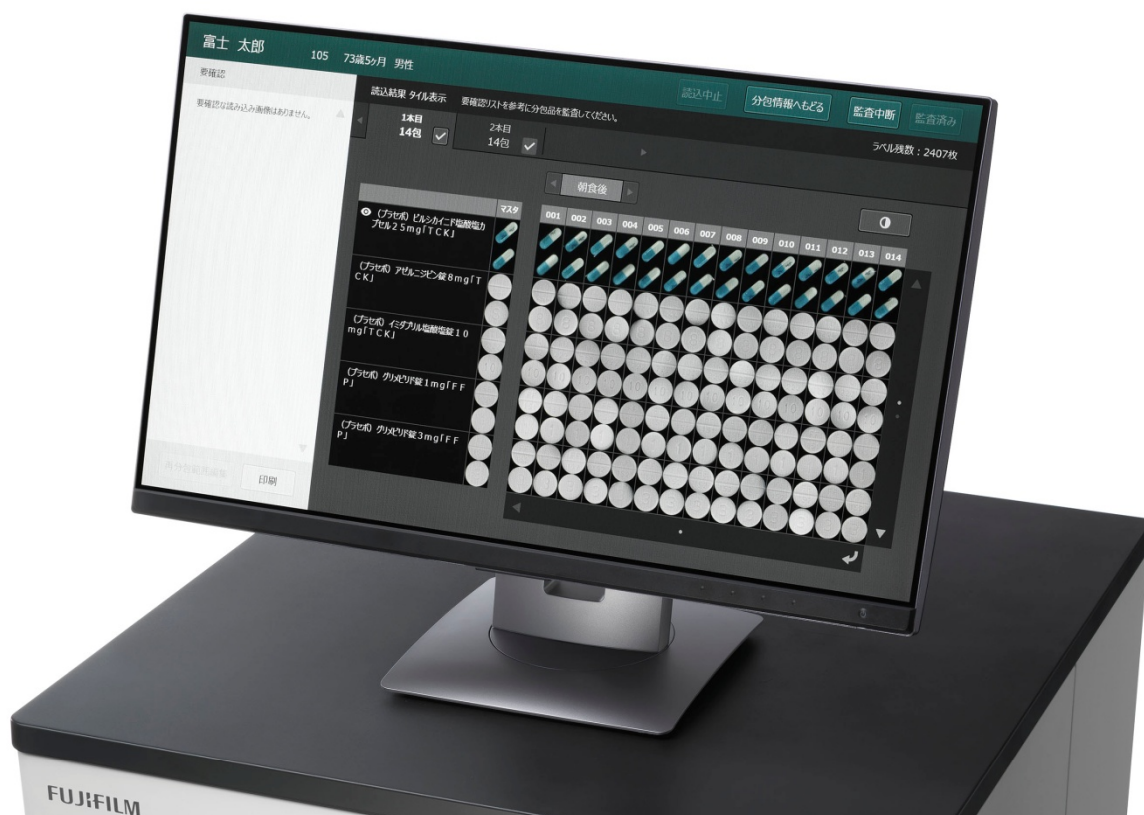

2020年10月のバージョンアップ機能をご紹介します！

- (1) ログイン画面へお知らせ表示
- (2) 患者一覧画面の操作性改善
- (3) 患者ごとのラベルフォーム引継ぎ機能
- (4) 医薬品マスタの更新タイミングを起動時へ変更



2020 Autumn 新機能のご案内

(1) ログイン画面へお知らせ表示



追加機能、操作方法説明、注意事項など新しいお知らせがある場合に、ログイン画面へ表示します。



新しいお知らせがある場合に、ログイン画面の左側へ表示します。
お知らせ表示は1週間後に自動的に消えます。

お知らせ 更新 2020/9/15

2020 Summer 新機能のご案内

PROFIT ID

2020年7月下旬のバージョンアップ機能をご紹介します！

- (1) 刻印変更前後の刻印マスタと照合
- (2) 医薬品マスタ/刻印マスタの自動更新
- (3) 画面操作性改善

お知らせ一覧

ユーザーID
ユーザーID

パスワード
パスワード

ログイン

医薬品マスタバージョン: 20200204
総マスタバージョン: V00_00_00_00

過去のお知らせは、「お知らせ一覧」から確認できます。

お知らせ お知らせを確認してください。

お知らせ一覧

2019-12-16 バージョンアップお知らせ

PROFIT ID ご利用の各店舗 様 2019年12月16日
富士フイルム富山化学株式会社

PROFIT ID バージョンアップに伴う一部改良のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2019年12月17日(火)のバージョンアップに伴い、下記の内容にて一部改良しましたので
ご案内いたします。

敬具

記

- ◆バージョンアップ後のソフトウェアバージョン
V01_00_06_01 (ログイン画面 バージョンアップボタンの左横に表示されます)
- ◆注意事項
・12月17日(火)の起動直後より、自動的にソフトウェアのダウンロードが開始されます。通常通りご使用頂けますが、3時間程度は電源を切らないようお願い致します。
・業務終了時に、ログイン画面のシャットダウンボタンを押すと「システムを終了する前にバージョンアップを実施しますか?」とメッセージが送信されます。バージョンアップを実施した場合は、通常よりシャットダウンまでの時間が長くなります。
・バージョンアップを早く実施する場合は、起動から3時間経過後にログイン画面のバージョンアップボタンを押してバージョンアップを実施ください。
バージョンアップは20分程度かかり、完了するまでご使用出来なくなります。
・ダウンロードが完了していない状態では、バージョンアップボタンを押しても「現在のバージョンは最新です」とメッセージが表示されます。ネットワーク回線が込み合っている場合、ダウンロードに時間がかかり当日のバージョンアップができないことがあります。バージョンアップできない場合は、翌日の業務終了時に再度実施ください。

印刷

2020 Autumn 新機能のご案内

(2) 患者一覧画面の操作性改善



検索機能と状態表示の細分化で操作性を改善しました。
患者一覧に多数表示されている場合でもすぐに見つけることができます。



① 患者一覧画面の左側へ検索画面を表示

<使い方>

- ① 「氏名」、「生年月日」などの検索条件を選択します。
- ② 検索条件の右側に検索ワードを入力します。
- ③ 「検索」ボタンを押すと、右側に最大100件表示します。

② 患者一覧画面の状態表示を細分化

状態	バージョンアップ前	バージョンアップ後
レセコンまたは分包機から受信直後の状態 分包情報は編集されていない	(表示なし)	(表示なし)
分包情報を編集して保存した状態 分包品は1本も読み込ませていない	保留中	編集済み
分包品の読込を開始した状態 複数分包品がある場合、未読込が残っている		読込中
全ての分包品の読込が完了した状態 監査完了ボタンをまだ押していない		読込完了
過去処方監査で監査完了した状態 処方箋との紐付けはまだしていない	監査済み	監査済み

2020 Autumn 新機能のご案内


(3) 患者ごとのラベルフォーム引継ぎ機能



患者様ごとに、最後に使用したラベルフォームを記憶し自動で選択します。
2回目以降の監査では、ラベルフォーム選択の手間が軽減されます。



患者様を選択したときに、前回選択したラベルフォームが自動で設定されます。
プレビュー画面で選択されたラベルフォームを確認し、変更が必要な場合のみ
「キャンセル」ボタンを押し、「ラベル設定」ボタンから変更してください。

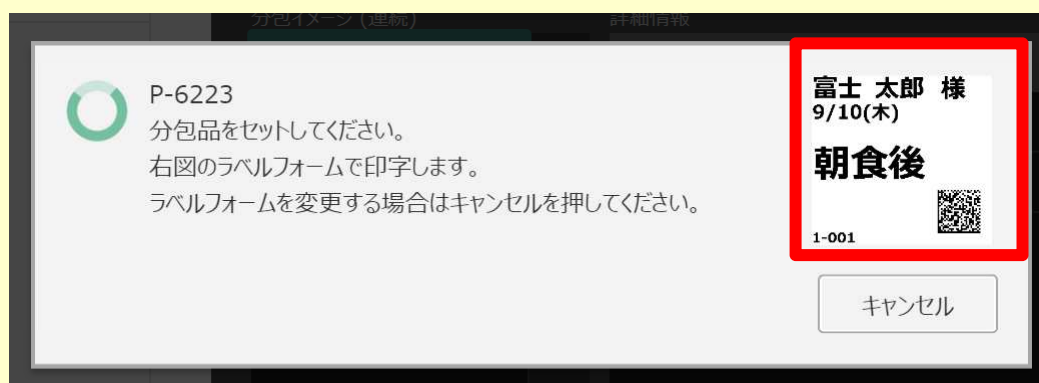

状態		バージョンアップ前	バージョンアップ後
初めての患者	処方情報監査	デフォルトラベル	デフォルトラベル
	分包機監査	デフォルトラベル	デフォルトラベル
2回目の患者	処方情報監査	デフォルトラベル	前回選択したラベル
	分包機監査	デフォルトラベル	前回選択したラベル
	過去処方監査	前回選択したラベル	前回選択したラベル

- ※ デフォルトラベルとは、「ラベルフォーム管理」画面でよく使うラベルフォームとして選択されているラベルフォームです。
- ※ 処方情報監査・分包機監査の場合、氏名・性別・生年月日が一致する患者を同一患者とみなします。一致する監査記録がある場合は、前回使用したラベルフォームを引継ぎます。
- ※ 過去処方監査の場合、コピー元のラベルフォームをそのまま引き継ぎます。
- ※ 同一患者の分包品で、1本目と2本目のラベルフォームを変えて読み込んだ場合は、最後に読み込んだ分包品のラベルフォームが引き継がれるのでご注意ください。

2020 Autumn 新機能のご案内

(4) 医薬品マスタの更新タイミングを起動時へ変更

 インターネット配信している医薬品マスタが起動時に適用されるように改善しました。



起動中に以下の画面が**最大3分**表示されることがあります。医薬品マスタを最新版へバージョンアップしているのので、そのままお待ち頂きますようお願い申し上げます。

