

PROOFIT 1D 「お知らせ」データ配信、その他機能追加のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2020年2月13日（木）のバージョンアップに伴い、下記の内容にて一部改良しましたのでご案内いたします。

敬具

記

◆バージョンアップ後のソフトウェアバージョン

V01_01_00_01



◆バージョンアップ項目一覧

No.	項目
1	ログイン画面、メニュー画面へ「お知らせ」表示の機能追加
2	監査結果画面の「要確認」リストを一括処理するボタン追加
3	患者一覧画面の「ユーザー切替」ボタン表示を「ログアウト」へ変更
4	分包機監査ダイアログからの画面遷移変更【分包機連携オプションのみ】
5	分包情報詳細画面へ「バーコード読取」ボタン追加【分包機連携オプションのみ】

1. ログイン画面、メニュー画面へ「お知らせ」表示の機能追加

お客様へ FAX 送信、ホームページ掲載でご案内していた「お知らせ」を PROOFIT 1D の画面で確認できるようになりました。新しい「お知らせ」がある場合は、ログイン画面に「更新」マークと配信日が青字で表示されます。

The image displays three screenshots of the PROOFIT 1D interface to illustrate the new notification feature.

Top Screenshot (Login Screen): Shows the login form with fields for 'ユーザーID' and 'パスワード'. A red box highlights the 'お知らせ' icon in the top right corner, which includes a blue arrow pointing to a notification dated '2020/1/17'. Below the form, a blue text box states: '新しい「お知らせ」が PROOFIT 1D へ配信されると「更新」アイコンと配信日が 1 週間表示され続けます'.

Middle Screenshot (Main Menu): Shows the main menu with various management options. A red box highlights the 'お知らせ' icon in the top row of the menu.

Bottom Screenshot (Notice Screen): Shows the 'お知らせ' screen. On the left, a list titled 'お知らせ一覧' includes '2019-12-16 バージョンアップお知らせ'. The main content area displays a detailed notice from '富士フイルム富士山化学株式会社' dated '2019年12月16日' regarding a 'PROOFIT 1D バージョンアップに伴う一部改良のお知らせ'. The notice includes details about the update process and a '印刷' button at the bottom right.

図 1. お知らせ画面表示

2. 監査結果画面の「要確認」リストを一括処理するボタン追加

要確認リストに表示されている包に問題がないことを確認し監査完了する場合は、1包ずつ「問題なし」の操作が必要でしたが、1本単位でまとめて「問題なし」の操作ができるようになりました。

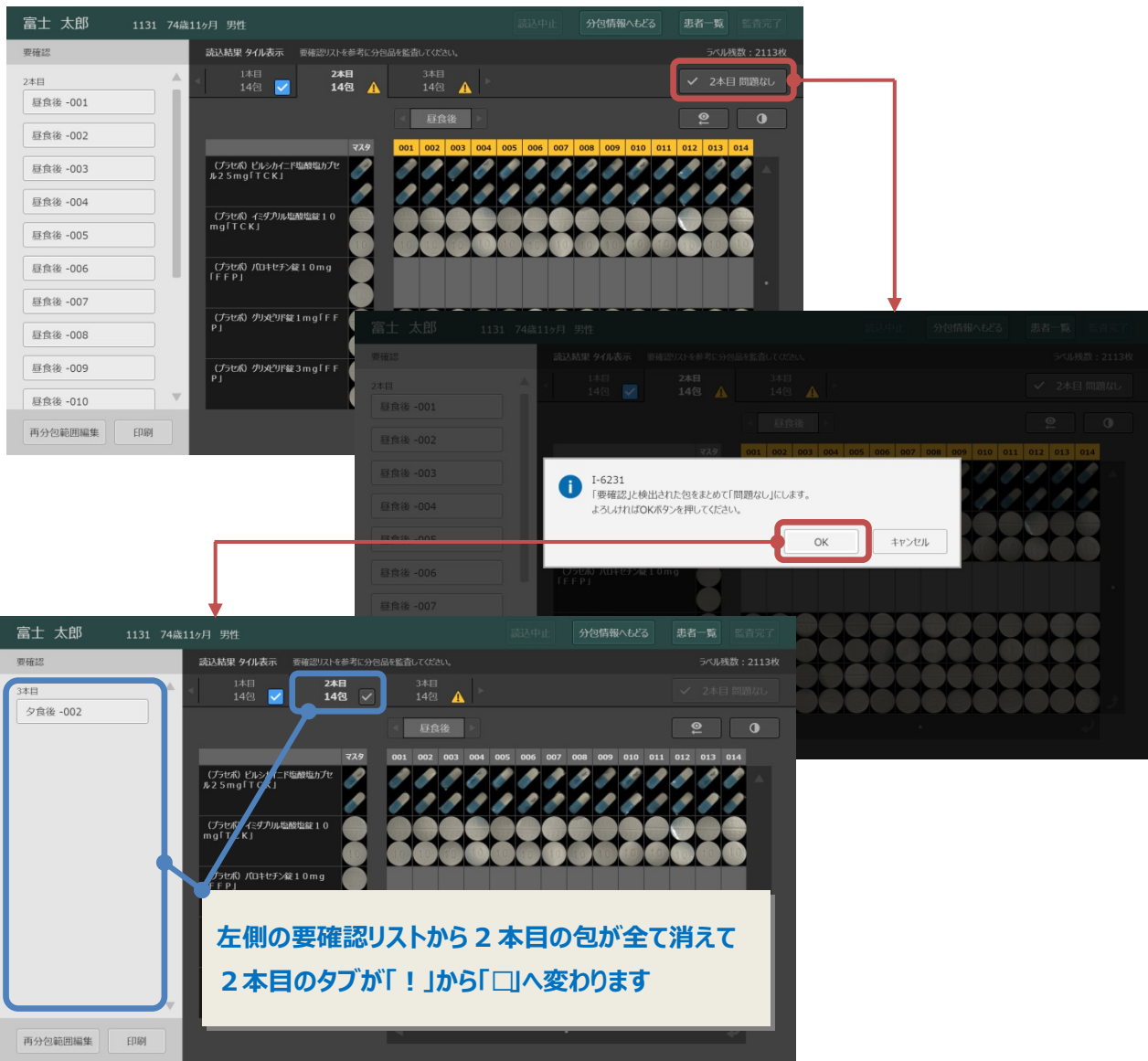


図2. 一括問題なしの画面操作 (2本目をまとめて問題なしとする例)

3. 患者一覧画面の「ユーザー切替」ボタン表示を「ログアウト」へ変更

「ユーザー切替」ボタンの表示を「ログアウト」へ変更しました。機能・画面遷移に変更はありません。

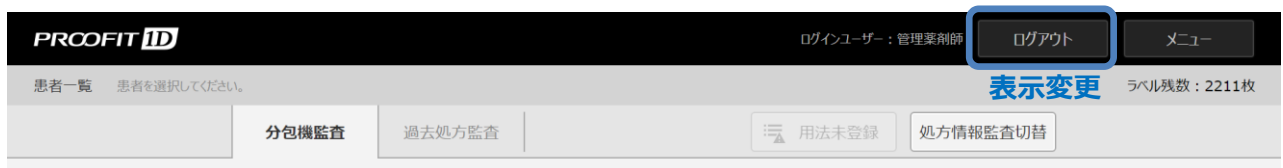


図3. 「ログアウト」ボタンの画面表示

4. 分包機監査ダイアログからの画面遷移変更【分包機連携オプションのみ】

分包機監査ダイアログから監査を開始した場合の画面遷移先を「患者一覧」から「分包情報」へ変更しました。通常監査の場合と同様に、読込完了後すぐに監査結果の確認が可能です。

5. 分包情報詳細画面へ「バーコード読取」ボタン追加【分包機連携オプションのみ】

分包品が複数ある場合に、続けて次の分包品のバーコードを読取り、監査が可能になりました。図4の「バーコード読取」から実行できます。



図4. 分包機監査ダイアログからの画面遷移

今後とも、さらなる品質の向上を目指し、お客様からの信頼にお応えできるよう一層努力をしております。
何卒末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上

【本件に対するお問い合わせ】

富士フイルム富山化学 医薬 IoT ソリューション部 鈴木 信之
携帯電話 090-2556-4299
メール nobuyuki.a.suzuki@fujifilm.com