

PROOFIT 1D バージョンアップに伴う一部改良のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配 を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年10月8日（火）のバージョンアップに伴い、下記の内容にて一部改良しましたので
ご案内いたします。

敬具

記

◆バージョンアップ後のソフトウェアバージョン

V01_00_08_01 （ログイン画面 バージョンアップボタンの左横に表示されます）

◆注意事項

- ・10月8日（火）の起動直後より、自動的にソフトウェアのダウンロードが開始されます。通常通りご使用頂けますが、3時間程度は電源を切らないようお願い致します。
- ・業務終了時に、ログイン画面のシャットダウンボタンを押すと「システムを終了する前にバージョンアップを実施しますか？」とメッセージが表示されます。バージョンアップを実施した場合は、通常よりシャットダウンまでの時間が長くなります。
- ・お急ぎの場合は、起動から3時間経過後にログイン画面のバージョンアップボタンを押してバージョンアップを実施ください。バージョンアップは20分程度かかり、完了するまでご使用頂けなくなります。
- ・ダウンロードが完了していない状態では、バージョンアップボタンを押しても「現在のバージョンは最新です」とメッセージが表示されます。ネットワーク回線が込み合っている場合、ダウンロードに時間が掛かり当日のバージョンアップができないことがあります。バージョンアップできない場合は、翌日の業務終了時に再度実施ください。
- ・常時起動している場合は、自動でダウンロードが開始されないため、再起動を実施ください。



1. 「一括修正」ボタンの誤操作防止対策

単一包画面で「一括修正」を行った場合、修正対象となる全ての包画像を確認しないまま他の包まで意図せず修正してしまうことがありました。誤操作防止のため、単一包画面の「一括修正」ボタンを廃止しました。(図1)



図1. 単一包画面の一括修正

単一包画面では修正対象の薬剤画像を長押しすると一包のみ修正することができます。(図2)

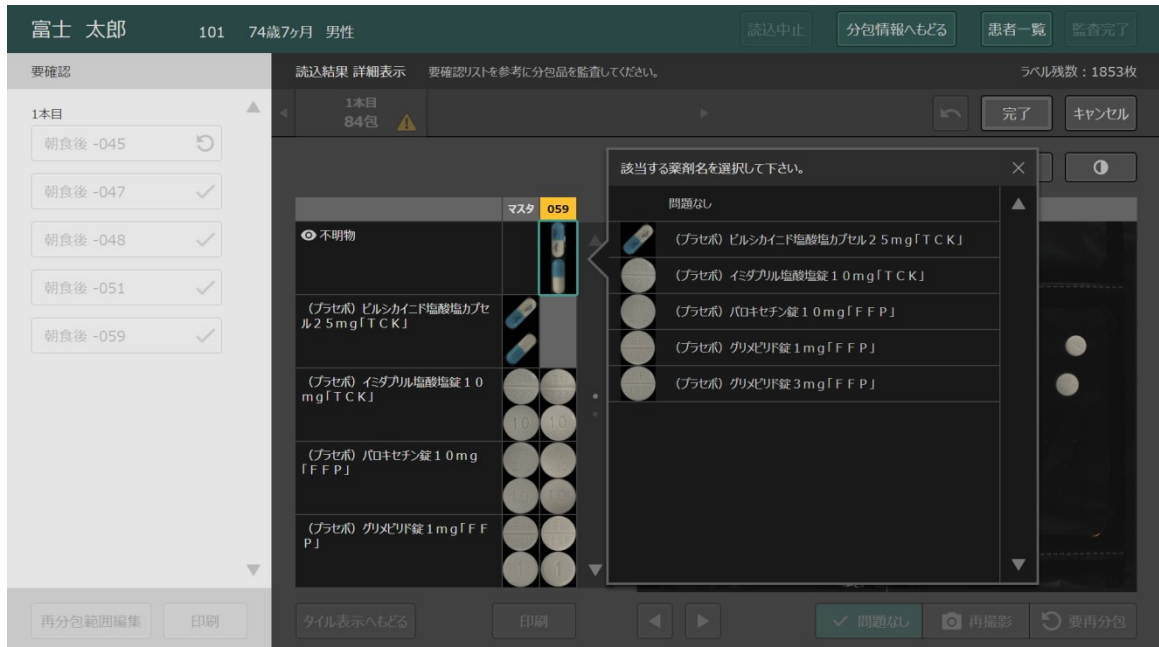


図2. 単一包画面の個別修正

2. 照合結果を修正した記録

照合結果を修正した薬剤画像の左上に「ㄟ」マーカを表示する機能を追加しました。監査記録を後日見直した際に、修正箇所が一目で判断できます。



図3. 照合結果の修正

3. 「再分包範囲編集」の操作性改善

分包品が複数ある場合に、全ての分包品を監査読込するまで「再分包範囲編集」ができない問題を改善しました。監査読込が完了した分包品はすぐに「再分包範囲編集」が可能になりました。

例) 分包品が3本ある場合

	操作	変更前 (修正可:○、修正不可:×)	変更後 (修正可:○、修正不可:×)
手順1	1本目を監査読込	1本目:× 2本目:× 3本目:×	1本目:○ 2本目:× 3本目:×
手順2	2本目を監査読込	1本目:× 2本目:× 3本目:×	1本目:○ 2本目:○ 3本目:×
手順3	3本目を監査読込	1本目:○ 2本目:○ 3本目:○	1本目:○ 2本目:○ 3本目:○

今後とも、さらなる品質の向上を目指し、お客様からの信頼にお応えできるよう一層努力をしてまいります。

何卒末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上

【本件に対するお問い合わせ】

富士フイルム富山化学 医薬 IoT ソリューション部 鈴木 信之

携帯電話 090-2556-4299

メール nobuyuki.a.suzuki@fujifilm.com