

バージョンアップのご案内 (V01.02.03.01)

2024年2月20日配信の新機能をご紹介します！

- (1) 外付けUSBカメラによる読込結果検索 → 詳細は2ページ参照
- (2) 1/4錠の表示改善 → 詳細は3ページ参照
- (3) ログイン画面に読取機本体のバージョン表示 → 詳細は4ページ参照

その他稀に起こるシャットダウン不良の改善対策等を行いました。



業務終了のタイミングで「シャットダウン」ボタンより「バージョンアップ」の実施をお願い致します。

PROOFIT ID II

V01_02_02_06 バージョンアップ シャットダウン

ログイン ユーザーIDとパスワードを入力してください

お知らせ

V01_02_03_01 シャットダウン

新しいお知らせはありません。

ユーザーID
ユーザーID
パスワード
パスワード

I-6128 システムを終了する前にバージョンアップを実施しますか?システム終了後、読取機はシャットダウンされます。

実施する 実施しない キャンセル

ログイン画面の「バージョンアップ」ボタンからも実施可能です。

なお、本バージョンアップには20分程度の時間がかかります。

※「バージョンアップ」ボタンから実施した場合はシャットダウンされませんので、ご注意ください。

PROOFIT ID II

V01_02_02_06 バージョンアップ シャットダウン

ログイン ユーザーIDとパスワードを入力してください

お知らせ

バージョンアップ

ユーザーID
ユーザーID
パスワード
パスワード

バージョンアップのご案内 (V01.02.03.01)

(1) 外付けUSBカメラによる読込結果検索


💡 分包機連携されている分包品の先頭バーコードを外付けUSBカメラで読み取ると対象データの読込結果画面を表示できるようになりました。



1. 「分包機監査」タブの【患者一覧】画面で「📷 読込結果検索」ボタンを押します。



2. 【読込結果検索】画面で分包品の先頭バーコードをガイドに合わせて、外付けUSBカメラで読み取ります。※バーコードリーダーでは読込結果検索はできません。

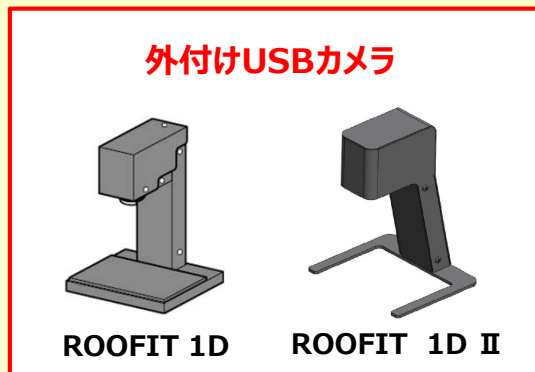

3. 該当データの【タイル表示読込結果】画面が表示されます。



バージョンアップのご案内 (V01.02.03.01)

(3) ログイン画面に読取機本体のバージョン表示

💡 ログイン画面に読取機本体のソフトバージョン情報も表示されるようになりました。



■ バージョンアップ後のログイン画面

PROFIT ID II V01_02_03_01 バージョンアップ シャットダウン

ログイン ユーザーIDとパスワードを入力してください

お知らせ

新しいお知らせはありません。

ユーザーID
ユーザーID

パスワード
パスワード

ログイン

医薬品マスタバージョン: 20240215
刻印マスタバージョン: V24_02_06_01
読取機ソフトバージョン: machine_V01_00_00_34

お知らせ一覧