

バージョンアップのご案内 (V01.03.02.00)



2025年6月16日配信の新機能をご紹介します！

- (1) 要確認包の画面表示改善 → 詳細は2ページ参照
- (2) 読込結果検索の方法選択追加 → 詳細は3ページ参照
- (3) 分包機連携データの取込失敗表示 → 詳細は4ページ参照
- (4) 「読込スキップ」ボタンの追加 → 詳細は5ページ参照
- (5) ログイン画面への表示追加 → 詳細は5ページ参照




業務終了のタイミングで「シャットダウン」ボタンより「バージョンアップ」の実施をお願い致します。

※バージョンアップは施設毎に順次配信されますので、最大3週間程度かかる場合があります。

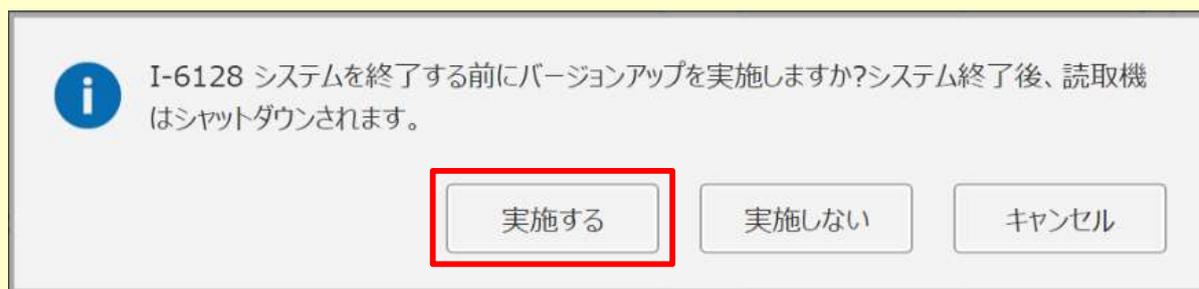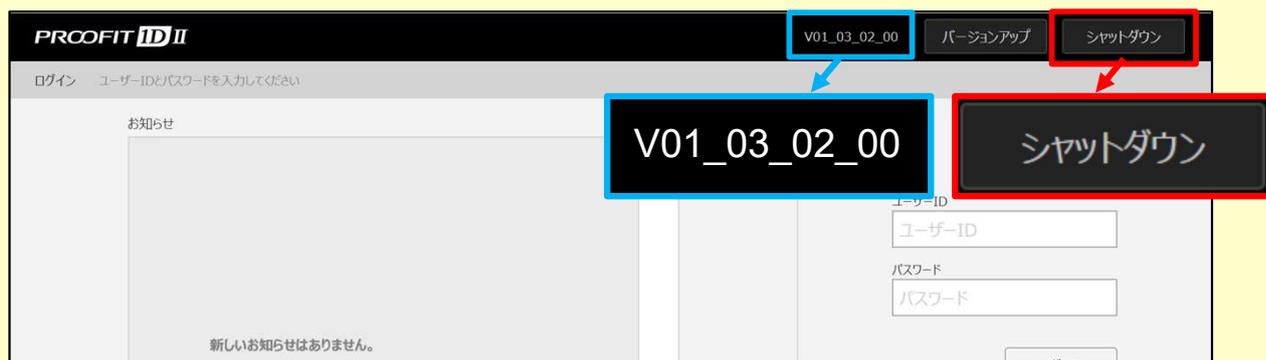

ログイン画面の「バージョンアップ」ボタンからも実施可能です。
なお、本バージョンアップには20分程度の時間がかかります。

※「バージョンアップ」ボタンから実施した場合はシャットダウンされませんので、ご注意ください。

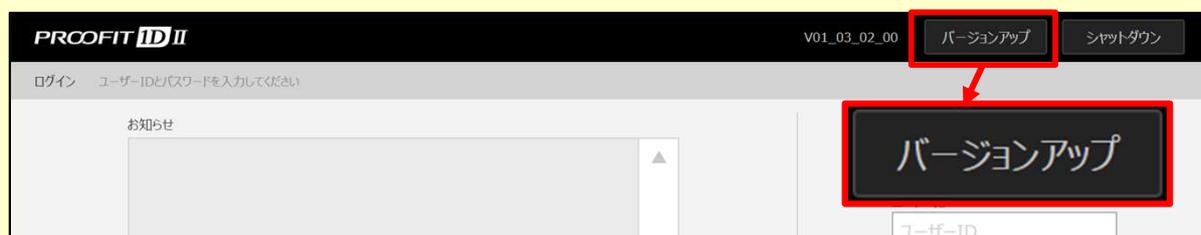

バージョンアップのご案内 (V01.03.02.00)

(1) 要確認包の画面表示改善



要確認包について、分包情報に対して検出した錠数が一致しない場合は**赤色表示**されるようになりました。

※バージョンアップ後に監査読込されたデータから反映されます。



■バージョンアップ後のタイル表示画面

分包情報に対して検出した錠数が一致しないため
赤色表示: 錠数エラーあり

分包情報に対して検出した錠数は一致しているが不明物があるため
黄色表示: 不明物あり

要確認

1本目
朝食後 -004
朝食後 -006
朝食後 -011

1本目
14包

不明物

不明物

(プラセボ) ビルシカイニド塩酸塩カプセル 2.5mg「TCK」

(プラセボ) イミダバル塩酸塩錠 1.0mg「TCK」

(プラセボ) パロセチン錠 1.0mg「FFFP」

再監査範囲指定 印刷

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

⚠ : 錠数エラーあり

⚠ : 不明物あり

■バージョンアップ後の患者一覧画面

PROCFIT II

ログインユーザー: テスト薬局 ログアウト メニュー

患者一覧 患者を選択してください。 ラベル残数: 2061枚

分機監査 過去処方監査

読込結果検索 取込失敗一覧 処方情報監査切替

氏名(かな/カナ) 生年月日 処方箋交付日

受付番号	患者氏名	年齢性別	医療機関診療科	情報	状態	時刻
101	富士 太郎	76歳3ヶ月 男性	東京クリニック【内科】		読込完了	2025/05/30 14:14
104	赤坂 涼子	51歳1ヶ月 女性	東京クリニック【内科】			2025/05/26 12:00:59
102	富山 花子	78歳7ヶ月 女性	東京クリニック【内科】		読込完了	2025/05/26 17:50:17
108	表 隆太郎	81歳5ヶ月 男性	東京クリニック【内科】			2025/05/26 12:00:59
107	渋谷 葵	58歳2ヶ月 女性	東京クリニック【内科】			2025/05/26 11:59:59
106	青山 翔馬	55歳0ヶ月 男性	東京クリニック【内科】			2025/05/26 11:58:59
105	麻布 太一	50歳8ヶ月 男性	東京クリニック【内科】			2025/05/22 17:35:35
103	六本木 真	65歳10ヶ月 男性	東京クリニック【内科】			2025/05/22 17:22:14

検索 クリア 除外

バーコード読取 11:15

不明物あり

錠数エラーあり

バージョンアップのご案内 (V01.03.02.00)

(2) 読込結果検索の方法選択追加



分包機連携されている分包品の先頭バーコードで読込結果検索する際に、外付けUSBカメラとバーコードリーダーを選択できるようになりました。



■バージョンアップ後の患者一覧画面

「読込結果検索」ボタンのアイコンがカメラマークからバーコードマークに変わります。



■バーコード読取り方法の設定

【メニュー】→【設定】画面で、専用PCと監査PCのそれぞれで設定ができます。
初期値はカメラに設定されていますので、必要に応じてご変更ください。



読込結果検索設定 (専用PC) : カメラ バーコードリーダー

読込結果検索設定 (監査PC) : カメラ バーコードリーダー

※専用PCの操作だけで、専用PCと監査PCの設定が可能です。

専用PC側は設定後すぐに変更が反映されますが、

監査PC側は設定後、監査PCのアプリを再起動することで設定が反映されます。

バージョンアップのご案内 (V01.03.02.00)

(3) 分包機連携データの取込失敗表示



分包機連携データが患者一覧画面に表示されない場合に、取込が失敗している原因を確認できるようになりました。



1. 「分包機監査」タブの【患者一覧】画面で「取込失敗一覧」ボタンを押します。

PROFIT ID II ログインユーザー：テスト薬局 ログアウト メニュー

患者一覧 患者を選択してください。 ラベル残数：2061枚

分包機監査 過去処方監査 読込結果検索 取込失敗一覧 処方情報監査切替

氏名(かな/カナ) 生年月日 処方箋交付日 YYYYYMMDD ~ YYYYYMMDD

受付番号	患者氏名	年齢性別	医療機関	情報	状態	受付日時
101	富士	76歳3ヶ月	東京クリニック			2025/05/30 14:14:47
104	赤坂					2025/05/27 14:57:26
102	富山					2025/05/26 17:50:17
108	表 隆太郎	81歳5ヶ月 男性	東京クリニック【内科】			2025/05/26 12:00:59
107	渋谷 葵	58歳2ヶ月 女性	東京クリニック【内科】			2025/05/26 11:59:59
106	青山 翔馬	55歳0ヶ月 男性	東京クリニック【内科】			2025/05/26 11:58:59
105	麻布 太一	50歳8ヶ月 男性	東京クリニック【内科】			2025/05/22 17:35:35
103	六本木 真	65歳10ヶ月 男性	東京クリニック【内科】			2025/05/22 17:22:14

検索 クリア 除外 バーコード読取 11:15

2. 取込一覧失敗リストが表示され、該当データの失敗原因が確認できます。

※取込失敗一覧のデータは24時間後に自動で削除されます。

PROFIT ID II ログインユーザー：テスト薬局 ログアウト メニュー

取込失敗一覧

失敗発生日時	ファイル名	ファイル更新日時	患者漢字氏名	患者カナ氏名	失敗原因
2025/05/30 14:37:30	20000268601.csv	2025/05/30 14:33:12	富山 太郎		必須項目に入力がありません。【患者情報部,患者カナ氏名】
2025/05/30 14:36:30	20000268501.csv	2025/05/30 14:32:08	てすと	テスト	Yコードが登録されていない薬剤があります。

閉じる

17:19:54

バージョンアップのご案内 (V01.03.02.00)

(4)「読込スキップ」ボタンの追加



分包機連携データで監査読込が不要となった未読込のデータを「読込スキップ」して監査完了にできるようになりました。



■バージョンアップ後の【分包機監査タブ】の分包情報画面

(5) ログイン画面への表示追加



ログイン画面に機器の設定値が表示されるようになりました。問い合わせの際などに確認させていただく場合があります。

