

製品別 使用可能消毒剤一覧

本稿では、製品の外表面に使用可能な消毒剤を記載しています。消毒液の調合および使用方法については、消毒液製造販売業者の指示に従ってください。詳細は、各製品の取扱説明書を参照してください。

製品	使用可能な薬剤
プロセッサ EP-8000	<ul style="list-style-type: none"> ・消毒用エタノール ・1%(10,000ppm)以下の次亜塩素酸ナトリウム溶液 <p>※1%とは装置の材料適合性です。一般的には0.05%程度で使用します。 参考：厚生労働省 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html ※電気コネクターソケット、メモリスロット、スコープコネクターソケットをリプロセスしないでください。</p>
光源・プロセッサ VP-7000、BL-7000 EP-6000	<ul style="list-style-type: none"> ・70%エタノール
機能拡張ユニット EX-1	<p><薬剤の種類（商品名の例）></p> <ul style="list-style-type: none"> ・消毒用エタノール（エタノール） ・イソプロピルアルコール（イソプロピルアルコール） ・塩化ベンザルコニウム（ウェルパス） ・グルタール（ステリハイド） ・アンモニア（アンモニア水） ・過酸化水素（過酸化水素水） ・アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩（サテニジン液） ・塩化ベンザルコニウム（ザルコニン液） ・塩化ベンゼトに生む（ベゼトン液）
軟性内視鏡全般 超音波プローブ P2220、P2226、 P2726、PB2020-M2	<ul style="list-style-type: none"> ・3.0～3.5% グルタルアルデヒド ・0.2～0.3% 過酢酸製剤実用液（エスサイド）
洗浄消毒機 ESR-100、ESR-110 ESR-200、ESR-210	<ul style="list-style-type: none"> ・消毒用エタノール <p>※アルコールフラッシュは内視鏡管路の乾燥を目的としています。アルコールフラッシュで使用可能なアルコール（消毒用エタノール、消毒用エタノール IP、エコ消エタ）が入手困難な場合は、シリンジを用いて空気を送気するか、エンドプッシュ（内視鏡送気送水管路クリーニング用圧縮空気缶）を使用して水分の除去をおこなってください。 ※適用内視鏡の消毒には専用の「エスサイド消毒液 6%」を装置に装填して使用してください。</p>

プロセッサ EP-8000 一般の名称：送気送水機能付内視鏡用光源・プロセッサ装置 販売名：プロセッサ EP-8000 認証番号：305AABZX00037000

プロセッサ VP-7000 一般の名称：内視鏡ビデオ画像プロセッサ 販売名：プロセッサ VP-7000 届出番号：14B1X10022A0V014

光源装置 BL-7000 一般の名称：送気送水機能付外部電源式内視鏡用光源装置 販売名：光源装置 BL-7000 認証番号：227AABZX00041000

プロセッサ EP-6000 一般の名称：送気送水機能付内視鏡用光源・プロセッサ装置 販売名：プロセッサ EP-6000 認証番号：230AABZX00025000

ソノプローブ P2220 一般の名称：体腔向け超音波診断用プローブ 販売名：ソノプローブ P2220 認証番号：220AABZX00199000

ソノプローブ P2226 一般の名称：体腔向け超音波診断用プローブ 販売名：ソノプローブ P2226 認証番号：220AABZX00200000

ソノプローブ P2726 一般の名称：体腔向け超音波診断用プローブ 販売名：ソノプローブ P2726 認証番号：220AABZX00201000

ソノプローブ PB2020-M2 一般の名称：体腔向け超音波診断用プローブ 販売名：超音波プローブ PB2020-M 認証番号：22200BZX00609000

内視鏡洗浄消毒機 ESR-100 一般の名称：軟性内視鏡用洗浄消毒器 販売名：内視鏡洗浄消毒機 ESR-100 認証番号：22200BZX00609000

内視鏡洗浄消毒機 ESR-110 一般の名称：軟性内視鏡用洗浄消毒器 販売名：内視鏡洗浄消毒機 ESR-110 認証番号：303AABZX00043000

内視鏡洗浄消毒機 ESR-200 一般の名称：軟性内視鏡用洗浄消毒器 販売名：内視鏡洗浄消毒機 ESR-200 認証番号：225AABZX00223000

内視鏡洗浄消毒機 ESR-210 一般の名称：軟性内視鏡用洗浄消毒器 販売名：内視鏡洗浄消毒機 ESR-210 認証番号：305AABZX00064000