

重要：このクイックリファレンスガイド(QRG)では、内視鏡を正しくリプロセスするために必要な手順の概要を説明します。
詳しい手順は**取扱説明書（洗浄 / 消毒 / 滅菌編）**を参照してください。



参照：
第5章
▶5.7.3～5.7.6

警告：リプロセスを行う場合は、適切な保護具を着用してください。保護具の着用が不適切な場合、感染の原因となるおそれがあります。
付属品のリプロセスは取扱説明書を参照して実施してください。


A. マニュアル消毒

5.7.3

1 消毒液に浸漬する

5.7.3
(1)~(2)

消毒液

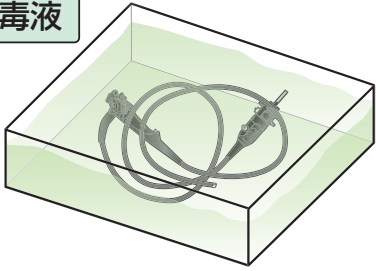

消毒液に内視鏡を完全に浸漬します。


警告：消毒液の使用法、使用条件および使用期限については、消毒液製造販売業者の『添付文書』および『取扱説明書』に従ってください。これに従わない場合、感染の原因となるおそれがあります。

注意：消毒中は内視鏡が完全に浸漬した状態を常に保ってください。

2 挿入部を拭く

5.7.3
(3)

内視鏡が完全に浸漬した状態を保ちます。

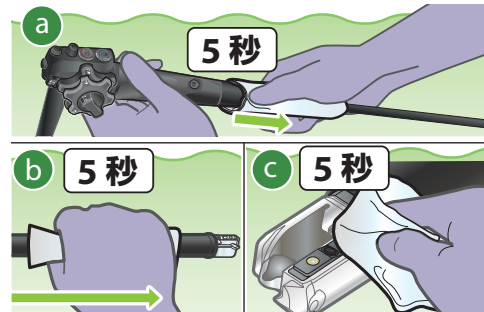


挿入部の各部を5秒間拭きます。

- a 軟性部 c 先端部
b わん曲部

3 鉗子起立台に消毒液を注入する

5.7.3
(4)~(6)

鉗子起立台を下げた状態

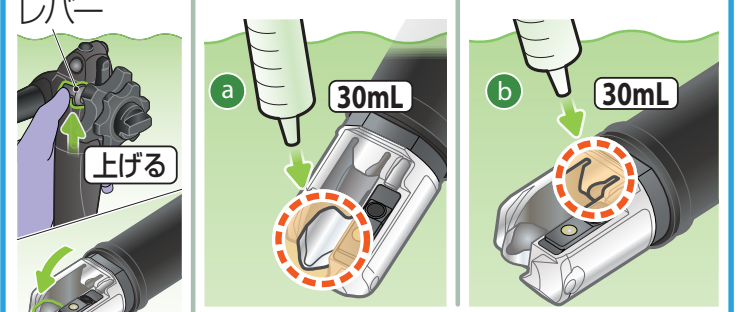


各部に30 mL (30 mL × 1回)の消毒液を注入します。

- a 鉗子起立台の前面
b 鉗子起立台の切り欠き

4 鉗子起立台に消毒液を注入する


5.7.3
(7)~(11)

鉗子起立台を上げた状態

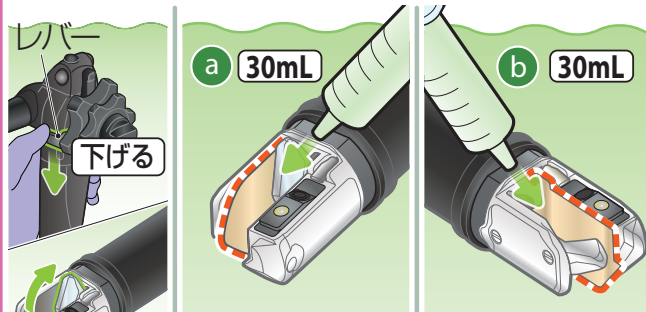

各部に30 mL (30 mL × 1回)の消毒液を注入します。

- a 左側の壁 b 右側の壁

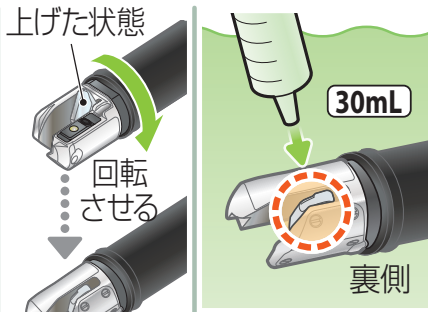

鉗子起立台の付け根の裏側に30 mL (30 mL × 1回)の消毒液を注入します。

- a 左側の壁 b 右側の壁




鉗子起立台を上げる

- a 左側の壁 b 右側の壁

5 洗浄アダプターを取り付ける


5.7.3
(12)

消毒液

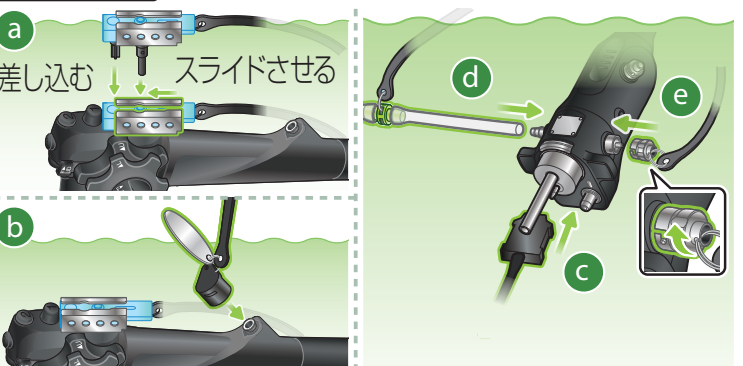


消毒液中で、洗浄アダプターのすべての部品を取り付けます。

6 管路に消毒液を注入する

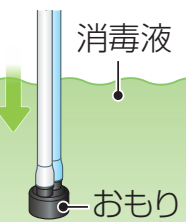5.7.3
(13)~(16)

消毒液中、おもりを浸漬します。

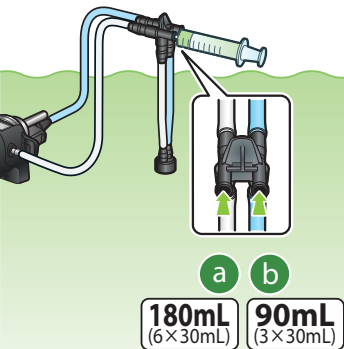


以下の管路に消毒液を注入します：

- a 吸引 180mL (6 × 30mL)
b 送気送水 90mL (3 × 30mL)




消毒液中で、洗浄アダプターのすべての部品を取り外します。

7 外表面から気泡を除去する

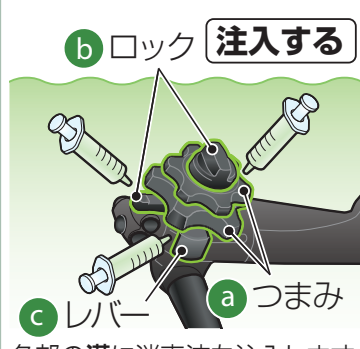5.7.3
(17)~(19)

各部の溝に消毒液を注入します：


- a 上下/左右アングルつまみ
b 上下ロックレバーおよび左右ロックつまみ
c 起立レバー

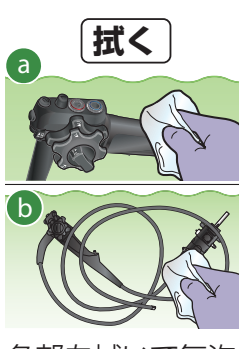

各部を拭いて気泡を除去します：

- a 操作部
b すべての外表面

8 気泡がないことを確認する

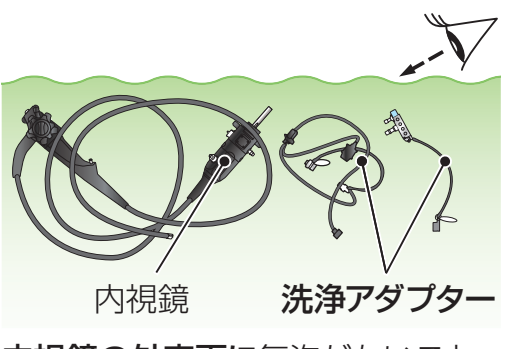5.7.3
(20)

内視鏡の外表面に気泡がないことを確認します。

注意：気泡が残っている場合は、気泡を清潔なガーゼで拭き取ります。


注意：内視鏡が完全に浸漬した状態を保ちます。

9 消毒液に浸漬する

5.7.3
(21)


消毒液

浸漬時間

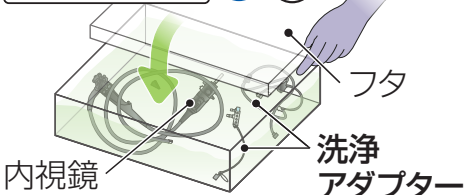


- a 容器にフタをします。
b 消毒液製造販売業者が推奨する浸漬時間を確認します。
c 内視鏡と洗浄アダプターを浸漬します。


10 洗浄アダプターを再び取り付け、管路に空気を注入する

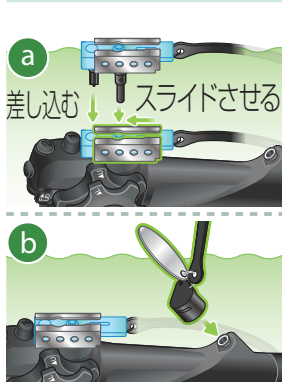5.7.3
(22)~(25)


消毒液中で、洗浄アダプターのすべての部品を取り付けます。

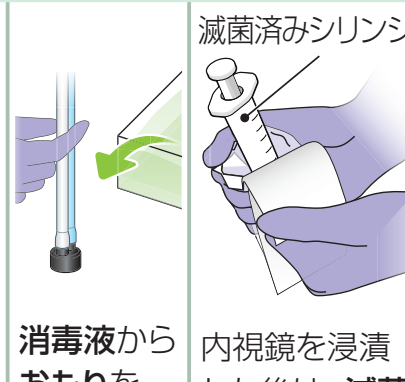

消毒液からおもりを取り出します。

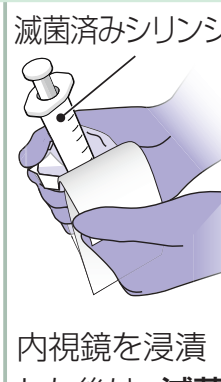

内視鏡を浸漬した後は、滅菌済みシリンジを使用します。

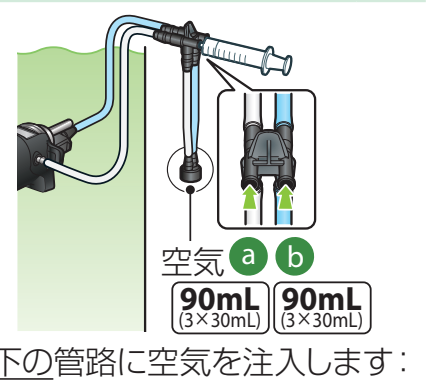

以下の管路に空気を注入します：

- a 吸引 90mL (3 × 30mL)
b 送気送水 90mL (3 × 30mL)

注意：空気を注入後、ただちに内視鏡の管路のすすぎを行います。

重要：

このクイックリファレンスガイド（QRG）では、内視鏡を正しくリプロセスするために必要な手順の概要を説明します。

詳しい手順は

取扱説明書（洗浄 / 消毒 / 滅菌編）

を参照してください。

参照：

第 5 章

▶ 5.7.3 ～ 5.7.6

B. 滅菌水によるすすぎ

5.7.4

1 滅菌水中で内視鏡と洗浄アダプターを拭く

5.7.4 (1)～(5)

滅菌水

消毒液

滅菌水

洗浄アダプターを取り付けた状態で内視鏡を取り出し、滅菌水に完全に浸漬します。

内視鏡

洗浄アダプター

滅菌水中で、洗浄アダプターのすべての部品を取り外します。

滅菌ガーゼ

内視鏡を浸漬した後は、滅菌ガーゼを使用します。

洗浄アダプター

内視鏡全体と洗浄アダプターの外表面を滅菌ガーゼで拭きます。

鉗子起立台を下げた状態

鉗子起立台の前面に 60 mL (30 mL × 2 回) の滅菌水を注入します。

2 管路に滅菌水を注入する

5.7.4 (6)～(9)

a

差し込む

スライドさせる

b

c

d

e

a b c d e

滅菌水中で、洗浄アダプターのすべての部品を取り付けます。

滅菌水

おもり

滅菌水に、おもりを浸漬します。

a b

180mL (6 × 30mL)

90mL (3 × 30mL)

以下の管路に滅菌水を注入します：

a 吸引 180mL (6 × 30mL)

b 送気送水 90mL (3 × 30mL)

3 空気を管路に注入し、外表面を拭く

5.7.4 (10)～(13)

滅菌水

空

洗浄アダプターを取り付けた状態で内視鏡を取り出し、滅菌済みの空の容器に入れます。

洗浄アダプター

内視鏡

空気 a b

90mL (3 × 30mL)

90mL (3 × 30mL)

以下の管路に空気を注入します：

a 吸引 90mL (3 × 30mL)

b 送気送水 90mL (3 × 30mL)

洗浄アダプター

内視鏡

洗浄アダプターを取り付けた状態で、内視鏡の外表面に残っている滅菌水を滅菌ガーゼで拭き取ります。

C. アルコールの注入

5.7.5

1 アルコールを注入する

5.7.5 (1)～(5)

アルコール

各管路の開口部からアルコールが飛び散らないように、先端部および操作部を滅菌ガーゼで包みます。

アルコール

おもり

アルコールに、おもりを浸漬します。

a b

90mL (3 × 30mL)

30mL (1 × 30mL)

以下の管路にアルコールを注入します：

a 吸引 90mL (3 × 30mL)

b 送気送水 30mL (1 × 30mL)

2 圧縮空気を管路に注入する

5.7.5 (6)～(8)

最大 230 kPa

30 秒

30 秒

アルコールからおもりを取り出します。

以下の管路に 200 ～ 230kPa のろ過済みの圧縮空気を 30 秒間注入します。

a 吸引

b 送気送水

⚠ アルコールフラッシュ後に圧縮空気を注入することで、管路の乾燥を容易に行えます。

3 洗浄アダプターを取り外す

5.7.5 (9)

a

b

c

d

e

a b c d e

洗浄アダプターのすべての部品を取り外します。

4 すべての外表面と開口部を拭く

5.7.5 (10)～(11)

a

滅菌ガーゼ

滅菌綿棒

b

洗浄アダプター

c

滅菌綿棒

a

滅菌ガーゼと滅菌綿棒を準備します。

b

内視鏡と洗浄アダプターの外表面に残っているアルコールを滅菌ガーゼで拭き取ります。

c

送気送水シリンダーと吸引シリンダー、および鉗子口の内側に残っている水滴を滅菌綿棒で拭き取ります。

「第 7 章 保管と廃棄」に従って、消毒済みの内視鏡を保管します。

⚠ 警告:消毒液をすすいだ後は、内視鏡を十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な場合、菌が繁殖し、感染の原因となるおそれがあります。

* 取扱説明書（洗浄 / 消毒 / 滅菌編）の記載箇所は変更されることがあります。

897N209718A