

電子内視鏡

取扱説明書

洗浄 / 消毒 / 滅菌編

第 1.0 版 2025 年 7 月

気管支鏡

EB-840S

EB-840T

この取扱説明書には、電子内視鏡の、洗浄 / 消毒 / 滅菌方法や注意事項を記載しています。製品のご使用前に、この取扱説明書および関連する取扱説明書を必ずお読みになり、ご理解した上で正しくご使用してください。
この取扱説明書をお読みになった後も、必要なときにすぐに見られるところに、大切に保管してください。

はじめに

- 1 安全にご使用いただくために
- 2 適用可能なリプロセス方法および使用する薬剤
- 3 リプロセスに使用する付属品
- 4 リプロセスの流れ
- 5 内視鏡のリプロセス
- 6 付属品のリプロセス
- 7 保管と廃棄
- 8 保証とアフターサービス

医用電気機器の使用上の注意事項

本製品を使用する際は、以下の注意事項を守って正しく取り扱ってください。

●「医用電気機器の使用上（安全及び危険防止）の注意事項」

1. 熟練した者以外は機器を使用しないこと。
2. 機器を設置するときには、次の事項に注意すること。
 - (1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
 - (2) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
 - (4) 電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注意すること。
 - (5) 電池電源の状態（放電状態、極性など）を確認すること。
 - (6) 保護接地を正しく接続すること。
3. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - (1) スイッチの接触状況、極性、ダイヤル設定、メーター類などの点検を行ない、機器が正確に作動することを確認すること。
 - (2) 保護接地が完全に接続されていることを確認すること。
 - (3) すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認すること。
 - (4) 機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこすおそれがあるので、十分注意すること。
4. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - (1) 診断、治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。
 - (2) 機器全般に異常のないことを絶えず監視すること。
 - (3) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
5. 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - (1) 定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻したのち、電源を切ること。
 - (2) コード類のとりはずしに際してはコードを持って引抜くなど無理な力をかけないこと。
 - (3) 保管場所については次の事項に注意すること。
 - i 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - ii 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む。）など安定状態に注意すること。
 - iii 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
 - (4) 付属品、コード、導子などは清浄にしたのち、整理してまとめておくこと。
 - (5) 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。
6. 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行ない、修理は専門家にまかせること。
7. 機器は改造しないこと。
8. 保守点検
 - (1) 機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
 - (2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。
9. その他
 - (1) 取扱説明書に従い、正しい操作をすること。

この取扱説明書の構成

はじめに

この章では、この取扱説明書の概要と読み方について説明します。

第 1 章 安全にご使用いただくために

この章では、内視鏡のリプロセスに関する警告・注意について説明します。

第 2 章 適用可能なリプロセス方法および使用する薬剤

この章では、本製品および付属品に適用可能なリプロセス方法と、使用する薬剤を説明します。

第 3 章 リプロセスに使用する付属品

この章では、内視鏡のリプロセスに必要な付属品の機能および点検方法について説明します。点検の結果、異常があるものは新品に交換してください。

第 4 章 リプロセスの流れ

この章では、リプロセスの流れと各リプロセス手順の参照項を説明します。各国専門機関のガイドラインを参照し、弊社の推奨内容に基づく施設の指針に従ってリプロセス方法を選択してください。

第 5 章 内視鏡のリプロセス

この章では、内視鏡のリプロセス手順およびリプロセスに必要な器材について説明します。

第 6 章 付属品のリプロセス

この章では、付属品のリプロセス手順を説明します。付属品には、使用前にリプロセスが必要なものと、使用後にリプロセスが必要なものがあります。

第 7 章 保管と廃棄

この章では、内視鏡と付属品の保管と廃棄について説明します。

第 8 章 保証とアフターサービス

この章では、保証とアフターサービスについて説明します。

目次

医用電気機器の使用上の注意事項	ii
この取扱説明書の構成	iii
はじめに	1
この取扱説明書について	1
本製品の取扱説明書の構成	2
取扱説明書の読み方	3
用語の説明	3
表記の説明	3
第 1 章 安全にご使用いただくために	1-1
1.1 一般的な注意事項	1-1
1.2 ベッドサイド洗浄に関する注意事項	1-4
1.3 気密テストに関する注意事項	1-5
1.4 マニュアル洗浄に関する注意事項	1-6
1.5 内視鏡洗浄消毒機に関する注意事項	1-8
1.6 消毒に関する注意事項	1-9
1.7 消毒後のすすぎに関する注意事項	1-10
1.8 滅菌に関する注意事項	1-11
1.9 保管に関する注意事項	1-13
第 2 章 適用可能なリプロセス方法および使用する薬剤	2-1
2.1 適用可能なリプロセス方法	2-1
2.2 清浄水	2-3
2.3 洗浄液	2-3
2.4 消毒液	2-4
2.5 すずぎに用いる水	2-5
2.6 アルコール	2-5
2.7 エチレンオキサイドガス滅菌	2-6
2.8 ステラッド滅菌	2-7
2.9 オートクレーブ滅菌	2-8
第 3 章 リプロセスに使用する付属品	3-1
3.1 洗浄アダプター (CA-616)	3-1
3.1.1 洗浄アダプター (CA-616)	3-2
3.1.1.1 機能	3-2
3.1.1.2 点検	3-3
3.2 洗浄ブラシ (WB11003FW)	3-6
3.2.1 機能	3-6
3.2.2 点検	3-6
3.3 洗浄ブラシ (WB7024FW)	3-7

3.3.1	機能	3-7
3.3.2	点検	3-7
3.4	通気アダプター (AD-7)	3-9
3.4.1	機能	3-9
3.4.2	点検	3-9
第 4 章	リプロセスの流れ	4-1
4.1	内視鏡洗浄消毒機を使用した洗浄と消毒の流れ	4-2
4.2	マニュアル洗浄とマニュアル消毒の流れ	4-4
4.3	マニュアル洗浄と滅菌の流れ	4-6
第 5 章	内視鏡のリプロセス	5-1
5.1	リプロセスを行う内視鏡の管路および管路の開口部	5-2
5.2	使用する器材の準備	5-3
5.2.1	洗浄、消毒、滅菌を行うときに使用する器材	5-3
5.2.2	気密テストを行うときに使用する器材	5-3
5.2.3	リプロセスで使用するその他の器材	5-4
5.2.4	保護具 (例)	5-4
5.3	ベッドサイド洗浄	5-6
5.3.1	ベッドサイド洗浄の流れ	5-7
5.3.2	必要な器材	5-8
5.3.3	準備	5-9
5.3.4	挿入部の拭き取り	5-10
5.3.5	チャンネルのベッドサイド洗浄	5-11
5.3.5.1	吸引チャンネルへの洗浄液吸引	5-11
5.3.6	内視鏡の取り外しと運搬	5-13
5.3.6.1	吸引器の取り外し	5-13
5.3.6.2	吸引ボタンの取り外し	5-13
5.3.6.3	鉗子栓の取り外し	5-14
5.3.6.4	内視鏡の取り外しと運搬	5-15
5.4	気密テスト	5-18
5.4.1	気密テストの流れ	5-20
5.4.2	必要な器材	5-21
5.4.3	気密テスターの点検	5-22
5.4.4	気密テストの実施	5-23
5.5	マニュアル洗浄	5-28
5.5.1	内視鏡のマニュアル洗浄の流れ	5-28
5.5.2	必要な器材	5-29
5.5.3	外表面洗浄	5-30
5.5.4	ブラッシング	5-32
5.5.4.1	ブラシの点検	5-33
5.5.4.2	先端部のブラッシング	5-36
5.5.4.3	シリンダーおよび鉗子口のブラッシング	5-37
5.5.4.4	吸引チャンネルのブラッシング	5-40
5.5.5	チャンネルの洗浄	5-42

5.5.5.1	洗浄アダプターの点検	5-42
5.5.5.2	洗浄アダプターの取り付け	5-44
5.5.5.3	洗浄液の送液	5-46
5.5.6	すすぎ	5-49
5.5.7	マニュアル洗浄が終わったら	5-53
5.6	内視鏡洗浄消毒機を使用した洗浄と消毒	5-54
5.6.1	内視鏡洗浄消毒機を使用した内視鏡の洗浄と消毒の流れ	5-56
5.6.2	必要な器材	5-57
5.6.3	気密テスト	5-57
5.6.4	マニュアル洗浄	5-58
5.6.5	自動洗浄消毒	5-58
5.6.6	保管	5-58
5.7	マニュアル消毒	5-59
5.7.1	内視鏡のマニュアル消毒の流れ	5-59
5.7.2	必要な器材	5-60
5.7.3	内視鏡の消毒	5-62
5.7.4	消毒後のすすぎ	5-68
5.7.5	アルコールフラッシュおよび乾燥	5-73
5.7.6	保管	5-76
5.8	滅菌	5-77
5.8.1	内視鏡の滅菌の流れ	5-77
5.8.1.1	内視鏡および洗浄アダプターのエチレンオキシドガス滅菌、 または内視鏡のステラッド滅菌	5-77
5.8.1.2	洗浄アダプターのオートクレーブ滅菌	5-77
5.8.2	必要な器材	5-78
5.8.3	滅菌の準備	5-79
5.8.4	内視鏡および洗浄アダプターのエチレンオキシドガス滅菌	5-83
5.8.5	内視鏡のステラッド滅菌	5-86
5.8.6	保管	5-87

第 6 章 付属品のリプロセス 6-1

6.1	リプロセスする付属品	6-2
6.2	付属品のリプロセスの流れ	6-3
6.3	使用する器材の準備	6-4
6.3.1	リプロセスで使用する器材	6-4
6.3.2	保護具（例）	6-5
6.4	付属品のマニュアル洗浄	6-6
6.4.1	付属品のマニュアル洗浄の流れ	6-6
6.4.2	洗浄アダプターのマニュアル洗浄	6-7
6.4.3	シリンダー用洗浄ブラシ、吸引チャンネル用洗浄ブラシの マニュアル洗浄	6-13
6.5	付属品のマニュアル消毒	6-17
6.5.1	付属品のマニュアル消毒の流れ	6-18
6.5.2	吸引ボタン（SB-607）のマニュアル消毒	6-19
6.5.2.1	吸引ボタン（SB-607）の消毒後のすすぎ	6-21
6.5.2.2	吸引ボタン（SB-607）のアルコールフラッシュ	6-22

6.5.3	洗浄アダプターのマニュアル消毒	6-25
6.5.3.1	洗浄アダプターの消毒後のすすぎ	6-27
6.5.3.2	洗浄アダプターのアルコールフラッシュ	6-30
6.5.4	シリンダー用洗浄ブラシ、吸引チャンネル用洗浄ブラシの マニュアル消毒	6-32
6.5.4.1	シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシの 消毒後のすすぎ	6-33
6.5.5	鉗子栓 (FOV-BU1) のマニュアル消毒	6-36
6.5.5.1	鉗子栓 (FOV-BU1) の消毒後のすすぎ	6-37
6.6	付属品の滅菌	6-40
6.6.1	付属品の滅菌の流れ	6-40
6.6.2	オートクレーブ滅菌	6-41
6.6.3	エチレンオキサイドガス滅菌	6-43
第 7 章	保管と廃棄	7-1
7.1	消毒済みの内視鏡および付属品の保管	7-3
7.2	滅菌済みの内視鏡および付属品の保管	7-5
7.3	廃棄	7-6
第 8 章	保証とアフターサービス	8-1
8.1	保証	8-1
8.2	アフターサービス	8-1
8.2.1	保証期間中の修理	8-1
8.2.2	保証期間後の修理	8-1
	製品のお問い合わせ窓口について	

はじめに

この章では、この取扱説明書の概要と読み方について説明します。

この取扱説明書について

この取扱説明書には、内視鏡の洗浄、消毒、滅菌方法および保管方法を記載しています。また、『取扱説明書（操作編）』には、内視鏡の概要、操作方法と操作上の注意事項など、本製品を使用するために必要な事柄を記載しています。本製品を初めてご使用になる方は、「取扱説明書」を必ずお読みいただいてから、実際の操作を行ってください。また、「取扱説明書」を読み終わった後も本製品の近くに保管してご利用ください。

この取扱説明書では、洗浄ブラシ WB11003FW、WB7024FW を、ブラッシングする部分を示すために、「シリンダー用洗浄ブラシ」、「吸引チャンネル用洗浄ブラシ」と呼びます。

この取扱説明書に記載されている方法、薬品、包装形態、条件でリプロセスを行ってください。これ以外では内視鏡や付属品が適切にリプロセスができること、薬剤への適合性および製品の完全性を保証できません。

これ以外のリプロセスを実施する場合は、使用者の責任において、それらの代替手段に関する適切な有効性確認試験が実施済みであることを確認してください。

「取扱説明書」の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
「取扱説明書」の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

商標

この取扱説明書に記載されている会社名、商品名は、富士フイルム株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です。

他社商標

その他、この取扱説明書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

(C) FUJIFILM Corporation 2025.

本製品の取扱説明書の構成

本製品の取扱説明書は、「取扱説明書（操作編）」と「取扱説明書（洗浄 / 消毒 / 滅菌編）」を1セットとして管理および保管してください。

内視鏡 取扱説明書（操作編）

対象機種：EB-840S、EB-840T

内視鏡の概要、操作方法と操作上の注意事項など、本製品を使用するために必要な内容を記載しています。

内視鏡 取扱説明書（洗浄 / 消毒 / 滅菌編）

対象機種：EB-840S、EB-840T

内視鏡のリプロセス方法および保管方法を記載しています。

❗ポイント

- この取扱説明書では「内視鏡 取扱説明書（洗浄 / 消毒 / 滅菌編）」を「この取扱説明書」とし、「内視鏡 取扱説明書（操作編）」を「取扱説明書（操作編）」とします。







取扱説明書の読み方

用語の説明

用語	説明
リプロセス	内視鏡および付属品をマニュアル洗浄した後に消毒や滅菌を行うことです。
ベッドサイド洗浄	検査または処置後にベッドサイドで行う洗浄です。
マニュアル洗浄	内視鏡洗浄消毒機（AER）を使用せずに、手作業で行う洗浄です。
マニュアル消毒	内視鏡洗浄消毒機（AER）を使用せずに、手作業で行う消毒です。
消毒	消毒のレベルを「高水準消毒」と定義してクラス分けしている国がありますが、内視鏡における消毒は「高水準消毒」が要求されています。この取扱説明書では「高水準消毒」を「消毒」とします。

表記の説明

この取扱説明書では、本文中で次の表記の規則を使っています。

表記	説明
 警告	回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を説明します。
 注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状況を説明します。 回避しないと、機器の損傷を招く可能性がある状況を説明します。
 1, 2, 3, ...	操作手順の連続する番号は、連続した操作を示します。
 ポイント	本製品の使用に関する重要な情報を示します。
 ヒント	使用者がスムーズに手順を行うための役立つ情報を示します。
 参照	使用者に役立つ情報を示します。

第 1 章 安全にご使用いただくために

この章では、内視鏡のリプロセスに関する警告・注意について説明します。

1.1 一般的な注意事項

⚠ 警告

- 内視鏡および再使用可能な付属品の使用後は、この取扱説明書の指示に従ってリプロセスを行ってください。指示に従ってリプロセスを行わないと、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のリプロセスには、この取扱説明書に記載の機器（洗浄アダプター、洗浄ブラシなど）および手順を使用してください。それ以外の機器または手順を使用すると、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 推奨する作業の流れに従わない場合は、内視鏡や付属品が適切にリプロセスができることおよび薬剤への適合性を保証できません。これ以外のリプロセスを実施する場合は、使用者の責任において、それらの代替手段に関する適切な有効性確認試験が実施済みであることを確認してください。
- リプロセスを行う場合は、適切な保護具（ゴーグル、フェイスマスク、耐薬品性のある防水性手袋、防汚性の防護服、帽子、靴用力バーなど）を着用してください。保護具の着用が不適切な場合、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のリプロセスには、この取扱説明書に記載の洗浄アダプターを使用してください。それ以外の洗浄アダプターを使用すると、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 洗浄アダプターの鉗子口ポートの内側に劣化または損傷がないことを点検してください。異常がある洗浄アダプターを使用すると、リプロセス中に鉗子口ポートが外れる場合があります。内視鏡のリプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 本製品は、出荷前にリプロセスが行われていません。初めて使用する場合、または修理から戻ってきた場合および使用後は、この取扱説明書の指示に従ってリプロセスを行ってください。指示に従ってリプロセスを行わないと、感染の原因となるおそれがあります。
- 検査中または処置中に使用する付属品（吸引ボタンおよび鉗子栓）を初めて使用する場合、この取扱説明書の指示に従ってリプロセスを行ってください。指示に従ってリプロセスを行わないと、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のすべての管路（吸引チャンネルおよび鉗子チャンネルを含む）は、検査中または処置中にその管路の使用の有無にかかわらず、検査または処置後に必ずリプロセスを行ってください。リプロセスを適切に行わないと、感染の原因となるおそれがあります。
- 検査中または処置中に内視鏡と一緒に使用した吸引ボタンおよび鉗子栓は、検査中または処置中の使用の有無にかかわらず、検査または処置後に必ず廃棄してください。再使用すると、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 警告

- 再使用可能な付属品は、異常や劣化の兆候が見られた時点で交換が必要になります。なんらかの異常が見られる場合は、付属品を交換してください。異常がある付属品を使用すると、故障の原因となったり、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- リプロセスが行われた内視鏡および付属品は、汚れた場所または床に接触させないでください。リプロセスが行われた内視鏡および付属品は、汚れた保護具で触れないでください。内視鏡および付属品が再汚染されて、感染の原因となるおそれがあります。
- クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、専用の機器として使用するか、使用後に適切な方法で廃棄してください。この取扱説明書に記載しているリプロセス方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の原因物質を取り除くことができないため、感染源となるおそれがあります。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応方法は、種々のガイドラインを参照してください。
- 吸引ボタンおよび鉗子栓は、再使用禁止の製品です。使用後の吸引ボタンおよび鉗子栓は廃棄してください。廃棄せず再使用すると、感染の原因となるおそれがあります。
- 気密テスターは、リプロセスが行われた内視鏡および付属品と一緒に保管しないでください。内視鏡および付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。
- 気密テスターは、トレーニングを受けていない人の手に触れない場所に保管してください。気密テスターに不用意に触れると、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡を修理のために返送する場合は、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。返送前には、必ずリプロセスを行ってください。リプロセスを行っていない製品が返送されると、使用者やサービススタッフ、その他の関係者が感染するおそれがあります。
- リプロセスが行われた内視鏡および付属品が汚れた機器と接触しないように、適切な方法で運搬および保管してください。汚れた機器に接触すると、リプロセスが行われた内視鏡および付属品が汚染され、それに触れる患者または使用者が感染するおそれがあります。
- 本製品を廃棄する場合は、廃棄前に必ずリプロセスを行ってください。リプロセスを行わずに廃棄すると廃棄関係者が感染するおそれがあります。

⚠ 注意

- 内視鏡を持つときは、操作部を保持してください。挿入部や LG 軟性部を握って持ち上げると、機器を保持しにくいばかりでなく無理な力が加わり、故障の原因となるおそれがあります。
- 再使用可能な付属品は、異常や劣化の兆候が見られた時点で交換が必要になります。なんらかの異常が見られる場合は、付属品を交換してください。異常がある付属品を使用すると、内視鏡や付属品が故障または損傷するおそれがあります。
- 「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」で「適用可能」とされている方法は、製造販売業者の指示に従った場合のみ、日常的に適用できます。内視鏡および付属品は繰り返し使用し、リプロセスを行うと劣化が徐々に生じます。侵食性のある化学薬剤および高温を使用するリプロセス方法では劣化が早くなります。一般的に、消毒に比べて滅菌は機器へよりダメージを与えます。各症例前には、この取扱説明書および『取扱説明書（操作編）』に従って内視鏡および付属品に故障または損傷がないことを確認してください。

▲ 注意

- この取扱説明書に示されたリプロセス方法および薬剤に関する指示は、富士フィルムが認定した施設以外で修理された内視鏡には適用できません。富士フィルム以外の部品で内視鏡を修理すると、リプロセス方法と薬剤への適合性に影響するおそれがあります。
- 内視鏡の挿入部は慎重に取り扱ってください。内視鏡のわん曲部を強く持ったり無理に曲げると、わん曲部が故障するおそれがあります。
- 内視鏡の挿入部に物やリプロセスで使用する器材を強く押し付けしないでください。内視鏡の挿入部が損傷し、水漏れを起こすおそれがあります。
- 内視鏡および付属品をオゾン水への浸漬やオゾン発生雰囲気中への暴露はしないでください。内視鏡および付属品が故障または損傷するおそれがあります。
- 処置具を内視鏡と一緒に浸漬しないでください。処置具を内視鏡と一緒に浸漬した場合、処置具の鋭利な箇所が内視鏡に接触して、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。

1.2 ベッドサイド洗浄に関する注意事項

⚠ 警告

- 検査または処置の終了後、ただちにこの取扱説明書に従ってベッドサイド洗浄を行ってください。ただちに行わないと、付着物が乾燥および固着して除去できなくなり、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 挿入部の外表面を消毒液やアルコールを含んだガーゼで拭かないでください。体液などが固着して、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 使用後の内視鏡は、周囲にぶつかけたり、内視鏡に残留している液を飛散させたりしないように、運搬用の清潔で大きなフタ付き容器に入れてフタをして運んでください。内視鏡が周囲に接触したり、残留している液が飛散して、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 光源装置からスコープコネクターを取り外した直後は、ライトガイド棒が非常に熱い場合があるので触らないでください。熱傷するおそれがあります。

1.3 気密テストに関する注意事項

▲ 注意

- 内視鏡のマニュアル洗浄を行う前に、必ず気密テストを行い、機器の異常を示す気密不良がないことを確認してください。気密不良がある状態で内視鏡のマニュアル洗浄を行った場合、内部に液体が入り、内視鏡が故障するおそれがあります。
- 異常が疑われる気密テスターで気密テストを行わないでください。内視鏡が故障するおそれがあります。
- 気密テスターを内視鏡に取り付ける場合、気密テスターの取り付け口金をしっかりと固定してください。気密テスターが適切に取り付いていないと、内部が十分に加圧されず、正確な気密テストができません。
- 気密テスターを内視鏡に取り付ける場合、気密テスターの取り付け口金および内視鏡の通気コネクター口金が完全に乾いていることを確認してください。内視鏡を水や薬液に浸漬しているときに、気密テスターを取り付けたり取り外したりしないでください。気密テスター内に水分が入ってしまった場合は、内視鏡を取り付けしないでください。気密テスターのコネクターやチューブに水滴が入ってしまった場合は、乾燥させてから使用してください。気密テスターの表面や内部に水滴が付いていると内視鏡に入り、内視鏡が故障するおそれがあります。
- 気密テスターで内視鏡内部に空気を送るときは、試験圧力（ $20 \pm 1.5 \text{kPa}$ ）内になるよう加圧してください。指定の試験圧力で気密テストを行わないと、正確な気密テストができない、または内視鏡が故障するおそれがあります。
- 気密テスターを内視鏡から取り外す場合、気密テスターのメーターの指針が下がり、指針が止まる（ 0kPa の位置になる）まで内視鏡内部の空気を十分に排出してください。十分に空気を排出せずに内視鏡から気密テスターを取り外すと、内部の空気が適切に抜けなくなり、内視鏡が故障するおそれがあります。
- 気密テストで気密不良が発見された場合は、気密テストを中止してください。気密不良が発見された内視鏡を気密不良状態のまま水や薬液に浸漬しないでください。内部に液体が入り、内視鏡が故障するおそれがあります。ただちに営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。
- 内視鏡を浸漬した状態で気密テスターを着脱しないでください。内部に液体が入り、内視鏡が損傷するおそれがあります。
- 気密テスターを取り付けたまま、内視鏡をマニュアル洗浄しないでください。内視鏡が故障するおそれがあります。

1.4 マニュアル洗浄に関する注意事項

⚠ 警告

- 洗浄に使用した清浄水は再使用しないでください。再使用すると洗浄が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 洗浄に使用した洗浄液は再使用しないでください。再使用すると洗浄が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 洗浄液が過度に泡立つ場合は内視鏡表面や管路内面への接触が不十分となり、十分な洗浄効果が得られないおそれがあります。
- 洗浄ブラシは、使用前に損傷や異常がないことを入念に点検してください。ブラッシング後は毎回、洗浄ブラシが損傷していないこと、および洗浄ブラシの破片が内視鏡の管路内に残留していないことを確認してください。感染やけがの原因となるおそれがあります。
- 吸引シリンダーまたは鉗子口を洗浄ブラシでブラッシングを行う前に、洗浄ブラシのブラシ部から付着物を取り除いてください。管路内および管腔内に再度付着物が入り込み、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡の鉗子チャンネル、鉗子口、吸引チャンネルおよび吸引シリンダーの内面を十分にブラッシングしてください。ブラッシングが不十分な場合、洗浄が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 洗浄中に洗浄ブラシが損傷し、ブラシ部が外れた場合は、予備の洗浄ブラシを使用して、管路内から残留物を取り除いてください。内視鏡に異常（チャンネルの損傷や気密不良など）があること、内視鏡のチャンネル内に異物（損傷した洗浄ブラシなど）が残っていること、または内視鏡の洗浄やリプロセスが十分に行われていないことが疑われる場合は、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にご連絡の上、内視鏡を点検または修理に出してください。感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡から洗浄ブラシを引き抜くときに洗浄液が飛散しないよう、内視鏡のブラッシングは、洗浄液に内視鏡を完全に浸漬した状態で行ってください。汚れた器具の洗浄に使用した洗浄液が飛散すると、使用者が感染するおそれや使用者を傷つけるおそれがあります。
- 洗浄後は、残留している洗浄液を清浄水ですすいでください。洗浄液が残っていると、次に行う消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 吸引チャンネルをブラッシングする場合、洗浄ブラシはまっすぐゆっくりと挿入し、まっすぐゆっくりと引き抜いてください。洗浄ブラシをまっすぐ挿入、または引き抜かないと、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。
- 内視鏡に洗浄ブラシを挿入または引き抜きを行う場合、ゆっくりと行ってください。勢いよく行うとシリンダー内部が削れたり、傷ついたり、損傷するおそれがあります。
- 吸引チャンネル用洗浄ブラシを内視鏡の先端部の鉗子出口から挿入しないでください。ブラシが引き抜けなくなったり、内視鏡を損傷するおそれがあります。
- シリンダー用洗浄ブラシを吸引シリンダーに挿入する場合、ブラシ部の半分以上を挿入しないでください。ブラシが引き抜けなくなるおそれがあります。

▲ 注意

- ブラッシングのときに、内視鏡の挿入部を直径 400mm 以下に丸めないでください。400mm 以下に丸めると、洗浄ブラシが挿通できず、内視鏡や洗浄ブラシが故障または損傷するおそれがあります。
- 洗浄ブラシの挿入時に管路内で異常な抵抗を感じたときは、ただちに内視鏡を修理に出してください。
- 洗浄液製造業者の指示に従って浸漬してください。記載条件より長く内視鏡を洗浄液に浸漬すると故障または損傷の原因となるおそれがあります。
- 洗浄中に洗浄ブラシが損傷し、ブラシ部が外れた場合は、予備の洗浄ブラシを使用して、管路内から残留物を取り除いてください。内視鏡に異常（チャンネルの損傷や気密不良など）があること、内視鏡のチャンネル内に異物（損傷した洗浄ブラシなど）が残っていること、または内視鏡の洗浄やリプロセスが十分に行われていないことが疑われる場合は、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にご連絡の上、内視鏡を点検または修理に出してください。検査または処置中に残留物が落下し、患者を傷つけるおそれがあります。

1.5 内視鏡洗浄消毒機に関する注意事項

⚠ 警告

- 内視鏡洗浄消毒機を使用して洗浄および消毒を行う場合は、富士フィルムが洗浄消毒効果を確認した内視鏡洗浄消毒機を使用してください。富士フィルムが洗浄消毒効果を確認していない内視鏡洗浄消毒機を使用すると、洗浄消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれや患者を傷つけるおそれがあります。
- 複数の内視鏡を同時処理可能な内視鏡洗浄消毒機で、本製品同士、あるいは本製品とほかの内視鏡とを組み合わせで2本同時に処理する場合は、内視鏡洗浄消毒機の『添付文書』や『取扱説明書』を参照し、2本同時でのリプロセスが適用される組み合わせであることを確認してください。2本同時でのリプロセスが適用されない組み合わせで行うと、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡洗浄消毒機による洗浄消毒を行う前に、内視鏡の各管路に詰まりがないことを確認してください。管路に詰まりがあると、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 内視鏡洗浄消毒機を使用した後は内視鏡のスコープコネクタの受電部、通信窓、送信窓とライトガイド入射端を滅菌ガーゼで拭いて、十分に乾燥させてください。受電部、通信窓、送信窓やライトガイド入射端に水滴残りや薬剤の残留物、水あかの堆積があると、内視鏡画像の異常や機器の誤作動の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡および付属品のリプロセスが完了したら、冷却後すみやかに内視鏡洗浄消毒機から取り出してください。内視鏡洗浄消毒機から取り出さずに放置すると、内視鏡内部の結露やレンズのくもり、付属品および構成部品の劣化やサビなどが起こり、内視鏡および付属品が故障または損傷するおそれがあります。

1.6 消毒に関する注意事項

⚠ 警告

- 洗浄アダプターが内視鏡から取り外されていることを確認してから、消毒液に浸漬してください。浸漬中は、内視鏡および洗浄アダプターのすべての外表面が消毒液に完全に浸漬していることを確認してください。洗浄アダプターが内視鏡に取り付いたままの状態では、内視鏡および洗浄アダプターの接続部に消毒液が十分に触れず、適切な消毒が行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 付属品の消毒を行う場合は、付属品のすべての表面が消毒液に完全に浸漬していることを確認してください。浸漬中は、付属品のすべての表面や溝、内部に消毒液をシリンジで注入し、外表面を拭いて、気泡を完全に除去してください。消毒液に触れない部分があると、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡の先端、吸引シリンダーポートの接続部から気泡が出なくなるまで、内視鏡のすべての管路に消毒液をシリンジで注入してください。気泡が残っていると消毒液が十分に触れないため、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のすべての開口部や溝に、シリンジおよび洗浄アダプターを使用して消毒液を注入し、外表面を拭いて、気泡を完全に除去してください。気泡が残っていると消毒液が十分に触れないため、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 付属品の消毒を行う場合は、付属品にシリンジが取り付けいていないことを確認してください。付属品にシリンジが取り付けいたままの状態では、シリンジおよび付属品の接続部に消毒液が十分に触れないため、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 消毒液の使用方法および使用条件については、消毒液製造販売業者の『取扱説明書』および『添付文書』に従ってください。これに従わない場合、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 消毒液の使用方法および使用条件については、消毒液製造販売業者の『取扱説明書』および『添付文書』に従ってください。これに従わない場合、内視鏡および付属品が故障または損傷するおそれがあります。

1.7 消毒後のすすぎに関する注意事項

⚠ 警告

- 消毒後のすすぎに使用した滅菌水は再使用しないでください。再使用した場合、内視鏡および付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡および付属品を消毒液に浸漬した後は、滅菌済みの器材（滅菌シリンジや滅菌ガーゼなど）を使用してください。滅菌済みの器材を使用しない場合、内視鏡および付属品が再汚染され感染の原因となるおそれがあります。
- 消毒液をすすいだ後は、内視鏡および付属品を十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な場合、菌が繁殖し、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 内視鏡および付属品の消毒後は、残留している消毒液を滅菌水ですすいでください。内視鏡および付属品に消毒液が残っていると、患者の体内に流れ込み患者を傷つけるおそれがあります。
- 内視鏡は十分に乾燥させてください。先端部の対物レンズの乾燥が不十分な場合、水あかが堆積し、内視鏡画像が不鮮明になるおそれがあります。
- アルコールの除去に使用する圧縮空気の圧力は 230kPa 以下に設定してください。それ以上の圧力で使用すると、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。
- すすぎの後に内視鏡のスコープコネクタの受電部、通信窓、送信窓とライトガイド入射端を滅菌ガーゼで拭いて、十分に乾燥させてください。受電部、通信窓、送信窓やライトガイド入射端に水滴残りや薬剤の残留物、水あかの堆積があると、内視鏡画像の異常や機器の誤作動の原因となるおそれがあります。

1.8 滅菌に関する注意事項

⚠ 警告

- 内視鏡および付属品のエチレンオキサイドガス滅菌を行う場合は、内視鏡および付属品の表面が完全に乾燥していることを確認してください。水分が残留したまま滅菌を行うと、乾燥していない部分の滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行う前に、内視鏡からすべての付属品を取り外してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡および付属品のエチレンオキサイドガス滅菌を行う場合は、滅菌後の無菌状態を保つため、滅菌の種類に適した滅菌パックまたは梱包材を使用してください。適した滅菌パックまたは梱包材を使用しないと、内視鏡および付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行った後に、滅菌パックに破れ、シール部のはがれがないことを確認してください。滅菌パックに破れ、シール部のはがれなどがあると、内視鏡または付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行う場合は、ISO 11135 に従って設定および保守している滅菌器を使用してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 富士フィルム製の内視鏡および付属品のエチレンオキサイドガス滅菌は、「表 2.7 チャンバー式 100% エチレンオキサイドガス滅菌の条件」に示す条件で行ってください。それ以外の条件を適用する場合は、適切な有効性確認試験が実施されていることを確認してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のステラッド滅菌を行う場合は、内視鏡の表面が完全に乾燥していることを確認してください。水分が残留したまま滅菌を行うと、乾燥していない部分の滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- ステラッド滅菌を行う前に、通気アダプターを除くすべての付属品を内視鏡から取り外してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のステラッド滅菌を行う場合は、ステラッド滅菌に適した梱包材を使用してください。適した器材を使用しないと、滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のステラッド滅菌を行う場合は、ステラッドの「添付文書」や「取扱説明書」に示す条件で行ってください。それ以外の条件を適用する場合は、適切な有効性確認試験が実施されていることを確認してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 富士フィルム製の内視鏡のステラッド滅菌は「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」に示すサイクルで行ってください。それ以外のサイクルを適用する場合は、適切な有効性確認試験が実施されていることを確認してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- ステラッド® NX/ ステラッド® 100NX システムで滅菌すると、内視鏡の接着剤や樹脂部が劣化する場合があります。使用する前に、この取扱説明書に従って、使用前の点検および定期点検を行ってください。点検の結果、異常が見つかった機器は使用しないでください。正常ではない機器の使用は、誤診の原因となったり、患者に危害をおよぼすおそれがあります。

⚠ 警告

- オートクレーブ滅菌を行った後、滅菌パックに水分が付着している場合は、滅菌工程が適切に行われていないおそれがあり、感染の原因となるおそれがあります。滅菌パックから付属品を取り出し、新しい滅菌パックに入れて再滅菌を行ってください。
- オートクレーブ滅菌を行った後に、滅菌パックに破れ、シール部のはがれがないことを確認してください。滅菌パックに破れ、シール部のはがれなどがあると、付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 圧縮空気の圧力は 230kPa 以下に設定したろ過済み空気を使用して、内視鏡を乾燥させます。圧力が 230kPa を超えるろ過済み空気を使用すると、内視鏡が故障するおそれがあります。
- 富士フィルム製の内視鏡および付属品のエチレンオキサイドガス滅菌は、「表 2.7 チャンバー式 100% エチレンオキサイドガス滅菌の条件」に示す条件で行ってください。これを外れた条件で行うと、機器が故障するおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行う場合、内視鏡と他の付属品を一緒に滅菌パックに入れないでください。接触により内視鏡が故障するおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行う前に、内視鏡に通気アダプターを取り付けてください。通気アダプターを取り付けずにエチレンオキサイドガス滅菌を行うと、温度や圧力の変化により、わん曲部が損傷するおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行った後、残留した有毒物質を除去するためにすべての機器に対して適切なエアレーションを行ってください。人体に悪影響を与えるおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行った後は滅菌パックを開封し、通気アダプターを取り外してください。通気アダプターを取り付けたまま使用しリプロセスを行うと、内部に液体が入り、内視鏡が故障するおそれがあります。
- ステラッド滅菌を行う前に、内視鏡に通気アダプターを取り付けてください。通気アダプターを取り付けずにステラッド滅菌を行うと、温度や圧力の変化により、わん曲部が損傷するおそれがあります。
- 富士フィルム製の内視鏡のステラッド滅菌は「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」に示すサイクルで行ってください。それ以外のサイクルで行うと、機器が故障するおそれがあります。
- ステラッド滅菌を行った後は、通気アダプターを取り外してください。通気アダプターを取り付けたまま使用しリプロセスを行うと、内部に液体が入り、内視鏡が故障するおそれがあります。
- 内視鏡は熱に弱い構造のため、オートクレーブなどの高温で滅菌を行うことはできません。オートクレーブ滅菌を行うと、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。
- 富士フィルム製の付属品のオートクレーブ滅菌は、「表 2.9 オートクレーブ滅菌の条件」に示す条件で行ってください。これを外れた条件で行うと、付属品が損傷するおそれがあります。
- 付属品のオートクレーブ滅菌を行った後、オートクレーブ装置の温度を室温まで冷却するときは、ゆっくりと冷却してください。温度が急激に変化すると、付属品が損傷するおそれがあります。

1.9 保管に関する注意事項

⚠ 警告

- 専用の保管庫を清浄に保つため、専用の保管庫には適切にリプロセスを行った内視鏡および付属品のみを保管してください。専用の保管庫が汚染されると、感染の原因となるおそれがあります。
- 専用の保管庫の清掃および消毒方法、保管する物、利用者に関して、施設の指針を確立してください。保管庫の清浄性が確保できない場合、保管している物が再汚染される原因となるおそれがあります。
- 専用の保管庫は清潔で乾燥した換気の良い状態を維持してください。多湿な環境では菌が繁殖し、感染の原因となるおそれがあります。
- 専用の保管庫のドアは閉めておいてください。保管されている機器への利用者以外の人物による接触を避けるため、保管庫の利用を制限してください。不用意な接触があると、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡や付属品を内視鏡のキャリングケースに入れて保管しないでください。キャリングケースは患者に使用する内視鏡の保管環境として適切ではありません。患者に使用する内視鏡をキャリングケースに入れて保管すると、菌が繁殖し感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のキャリングケースは、内視鏡や付属品を輸送する場合だけに使用してください。キャリングケースから取り出した内視鏡や付属品は、患者へ使用する前または専用の保管庫で保管する前に必ずリプロセスを行ってください。リプロセスを行わない場合、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡および付属品は、保管前に外表面および内面（管路など）を十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な状態で保管すると、菌が繁殖し、感染の原因となるおそれがあります。
- 汚れた内視鏡および付属品と、リプロセスを行った内視鏡および付属品の混在を避けてください。交差感染するおそれがあります。

⚠ 注意

- 内視鏡は、『取扱説明書（操作編） - 付録』に記載の保管条件で保管してください。
- 適切にリプロセスを行った内視鏡および付属品は適切な保管環境で保管してください。適切な保管庫で保管しない場合、内視鏡および付属品が損傷または再汚染するおそれがあります。
- 適切にリプロセスを行った内視鏡および付属品は、直射日光にあたる場所、高温多湿な場所、オゾンまたは X 線や紫外線にさらされる場所で保管しないでください。それらの場所に保管すると、内視鏡および付属品の故障または損傷の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡の挿入部および LG 軟性部を直径 200mm より小さく丸めないでください。直径 200mm より小さく丸めて保管すると、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。
- 専用の保管庫のドアは閉めておいてください。保管されている機器への利用者以外の人物による接触を避けるため、保管庫の利用を制限してください。不用意な接触があると、機器が故障または再汚染するおそれがあります。

第 2 章 適用可能なリプロセス方法および使用する薬剤

この章では、本製品および付属品に適用可能なリプロセス方法と、使用する薬剤を説明します。

2.1 適用可能なリプロセス方法

内視鏡および付属品にはいくつかのリプロセス方法が適用可能です。適用できないリプロセス方法を行った場合、リプロセスが不適切になるか、または十分行われず、感染の原因となるおそれや機器が損傷するおそれがあります。適用可能なリプロセス方法については、「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」を参照し、各施設の指針に従ってリプロセス方法を選択してください。

▲ 注意

- 「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」で「適用可能」とされている方法は、製造販売業者の指示に従った場合のみ、日常的に適用できます。内視鏡および付属品は繰り返し使用し、リプロセスを行うと劣化が徐々に生じます。侵食性のある化学薬剤および高温を使用するリプロセス方法では劣化が早くなります。一般的に、消毒に比べて滅菌は機器へよりダメージを与えます。各症例前には、この取扱説明書および『取扱説明書（操作編）』に従って内視鏡および付属品に故障または損傷がないことを確認してください。
- この取扱説明書に示されたリプロセス方法および薬剤に関する指示は、富士フィルムが認定した施設以外で修理された内視鏡には適用できません。富士フィルム以外の部品で内視鏡を修理すると、リプロセス方法と薬剤への適合性に影響するおそれがあります。

表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法

✓: 適用可能 ×: 適用不可能

	洗浄		消毒	滅菌		
	薬液洗浄	超音波洗浄	薬液消毒 ^{※1}	エチレンオキサイドガス滅菌	オートクレーブ	ステラッド滅菌 ^{※4 ※5 ※6}
 内視鏡	✓	✓ ^{※2}	✓	✓	×	✓
 吸引ボタン	×	×	✓ ^{※3}	✓ ^{※3}	×	×
 洗浄アダプター	✓	×	✓	✓	✓	×
 洗浄ブラシ	✓	✓	✓	✓	×	×
 鉗子栓	×	×	✓ ^{※3}	✓ ^{※3}	✓ ^{※3}	×

※ 1 「2.4 消毒液」に従ってください。

※ 2 内視鏡の超音波洗浄を行う場合は、「5.6 内視鏡洗浄消毒機を使用した洗浄と消毒」に従って専用の内視鏡洗浄消毒機をご使用ください。

※ 3 使用前に消毒または滅菌を行います。使用後は廃棄してください。

※ 4 ステラッド[®] NX の場合はアドバンスドサイクル、ステラッド[®] 100NX の場合は DUO サイクルで滅菌してください。

※ 5 本製品とステラッド[®] NX/ ステラッド[®] 100NX の滅菌効果に関しては、ASP (Advanced Sterilization Products) によって確認されています。詳しくは ASP にお問い合わせください。また、ステラッド[®] NX/ ステラッド[®] 100NX の使用については、『添付文書』または『取扱説明書』を参照してください。

※ 6 ステラッド[®] NX/ ステラッド[®] 100NX の各サイクル条件で、富士フイルム製内視鏡の材料適合性を確認しています。

2.2 清浄水

⚠ 警告

- 洗浄に使用した清浄水は再使用しないでください。再使用すると洗浄が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

清浄水は、気密テストや内視鏡および付属品をマニュアル洗浄した後のすすぎに使用します。気密テストや内視鏡および付属品のマニュアル洗浄後のすすぎで使用する水は、清潔な清浄水または（フィルターによるろ過、脱イオン、または蒸留によって）化学物質や微生物を除去した水を使用してください。消毒後の内視鏡および付属品のすすぎには、「2.5 すすぎに用いる水」に記載されている滅菌水を使用してください。

2.3 洗浄液

⚠ 警告

- 洗浄に使用した洗浄液は再使用しないでください。再使用すると洗浄が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 洗浄液が過度に泡立つ場合は内視鏡表面や管路内面への接触が不十分となり、十分な洗浄効果が得られないおそれがあります。

内視鏡のベッドサイド洗浄およびマニュアル洗浄には、医療用で低発泡性の酵素系洗剤を使用します。内視鏡および付属品への適用が確認された洗浄液の具体的な製品名は、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。洗浄液の調合および使用方法については、洗浄液製造業者の指示に従ってください。

📌 ポイント

- 使用方法および有効期限については、洗浄液製造業者の指示に従ってください。

2.4 消毒液

市販の2.0～3.5% グルタルアルデヒド消毒液は、富士フィルム製内視鏡の材料適合性を確認しています。

内視鏡のマニュアル消毒にグルタルアルデヒド消毒液を使用する際は、製造販売業者の指示に従ってください。消毒液の具体的な名称については、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。

⚠ 警告

- 消毒液の使用方法および使用条件については、消毒液製造販売業者の『取扱説明書』および『添付文書』に従ってください。これに従わない場合、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 消毒液の使用方法および使用条件については、消毒液製造販売業者の『取扱説明書』および『添付文書』に従ってください。これに従わない場合、内視鏡および付属品が故障または損傷するおそれがあります。
- 内視鏡および付属品をオゾン水への浸漬やオゾン発生雰囲気中への暴露はしないでください。内視鏡および付属品が故障または損傷するおそれがあります。

📌 ポイント

- 消毒液の使用方法、使用条件および使用期限については、消毒液製造販売業者の『添付文書』および『取扱説明書』に従ってください。
- 使用前に消毒液製造販売業者の推奨する方法（試験紙など）で消毒液の効果（最低有効濃度を維持していること）を確認してください。消毒効果が不十分な消毒液は使用しないでください。

2.5 すすぎに用いる水

⚠ 警告

- 消毒後のすすぎに使用した滅菌水は再使用しないでください。再使用した場合、内視鏡および付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。

消毒後の内視鏡および付属品のすすぎには滅菌水を使用してください。

📌 ポイント

- 内視鏡の管路のすすぎ、乾燥の工程に使用する水質や空気の質、アルコールの要否については、各国専門機関のガイドラインを参照してください。

2.6 アルコール

内視鏡および付属品を完全に乾燥させるため、空気の注入後にアルコールフラッシュを行う場合は、各国専門機関のガイドラインに従って医療用エタノールを使用してください。エタノールの濃度については、各国専門機関のガイドラインを参照してください。

📌 ポイント

- アルコールの要否については、各国専門機関のガイドラインを参照してください。
- 70～90%濃度のエタノールが一般的には推奨されています。

2.7 エチレンオキサイドガス滅菌

エチレンオキサイドガス滅菌の適用可否は「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」を参照してください。

📖 参照

- 「2.1 適用可能なリプロセス方法」

⚠️ 警告

- 富士フィルム製の内視鏡および付属品のエチレンオキサイドガス滅菌は、「表 2.7 チャンバー式 100% エチレンオキサイドガス滅菌の条件」に示す条件で行ってください。それ以外の条件を適用する場合は、適切な有効性確認試験が実施されていることを確認してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行う場合は、ISO 11135 に従って設定および保守している滅菌器を使用してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

⚠️ 注意

- 富士フィルム製の内視鏡および付属品のエチレンオキサイドガス滅菌は、「表 2.7 チャンバー式 100% エチレンオキサイドガス滅菌の条件」に示す条件で行ってください。これを外れた条件で行うと、機器が故障するおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行った後、残留した有毒物質を除去するためにすべての機器に対して適切なエアレーションを行ってください。人体に悪影響を与えるおそれがあります。

市販されている滅菌器および付属品のみを使用してください。

ISO 11135 に準拠した、エチレンオキサイドガス滅菌器を使用してください。

ISO 11135 に従って、エチレンオキサイドガス滅菌を行ってください。

表 2.7 チャンバー式 100% エチレンオキサイドガス滅菌の条件

	温度	湿度	時間	エチレンオキサイドガス濃度	暴露時間
コンディショニング	55°C	60%RH	60 分	-	-
滅菌	55°C	60%RH	-	0.735mg/cm ³ (735mg/L)	60 分
エアレーション	55°C	-	12 時間	-	-

2.8 ステラッド滅菌

ステラッド滅菌の適用可否は「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」を参照してください。

⚠ 警告

- 富士フィルム製の内視鏡のステラッド滅菌は「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」に示すサイクルで行ってください。それ以外のサイクルを適用する場合は、適切な有効性確認試験が実施されていることを確認してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- ステラッド[®] NX/ ステラッド[®] 100NX システムで滅菌すると、内視鏡の接着剤や樹脂部が劣化する場合があります。使用する前に、この取扱説明書に従って、使用前の点検および定期点検を行ってください。点検の結果、異常が見つかった機器は使用しないでください。正常ではない機器の使用は、誤診の原因となったり、患者に危害をおよぼすおそれがあります。

⚠ 注意

- 富士フィルム製の内視鏡のステラッド滅菌は「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」に示すサイクルで行ってください。それ以外のサイクルで行うと、機器が故障するおそれがあります。

2.9 オートクレーブ滅菌

オートクレーブ滅菌の詳細については、「表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」を参照してください。

🚫ポイント

- オートクレーブ滅菌の条件については、各国専門機関のガイドラインを参照してください。「表 2.9 オートクレーブ滅菌の条件」と違う場合は、適切な有効性確認試験が実施済みであることを確認してください。
- オートクレーブ滅菌の方法は、オートクレーブ装置の『取扱説明書』、および種々のガイドラインを参照してください。

⚠️注意

- 内視鏡は熱に弱い構造のため、オートクレーブなどの高温で滅菌を行うことはできません。オートクレーブ滅菌を行うと、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。
- 富士フィルム製の付属品のオートクレーブ滅菌は、「表 2.9 オートクレーブ滅菌の条件」に示す条件で行ってください。これを外れた条件で行うと、付属品が損傷するおそれがあります。

オートクレーブ装置は、公的に認められたプレバキューム方式の装置および滅菌用品を使用してください。

表 2.9 オートクレーブ滅菌の条件

温度	132 ~ 134°C
暴露時間	5 分
乾燥時間	20 分

🚫ポイント

- 富士フィルムの有効性確認試験では、上記のオートクレーブ滅菌の条件（134 °Cで 5 分間）を使用しています。各医療施設では、業界標準、施設特有の手順およびオートクレーブ装置の製造販売業者の指示に従って、適切な滅菌処理を行ってください。
- 上記の条件に加えて、オートクレーブ装置の製造販売業者の指示に従ってください。
- オートクレーブ装置の設定温度が 134 °Cを超えていないことを確認してください。
- 滅菌パックの取り扱い方法については、滅菌パックの『取扱説明書』を参照してください。


第 3 章 リプロセスに使用する付属品

この章では、内視鏡のリプロセスに必要な付属品の機能および点検方法について説明します。点検の結果、異常があるものは新品に交換してください。

3.1 洗浄アダプター (CA-616)

⚠ 警告

- 内視鏡のリプロセスには、この取扱説明書に記載の洗浄アダプターを使用してください。それ以外の洗浄アダプターを使用すると、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 洗浄アダプターの鉗子口ポートの内側に劣化または損傷がないことを点検してください。異常がある洗浄アダプターを使用すると、リプロセス中に鉗子口ポートが外れる場合があります。内視鏡のリプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

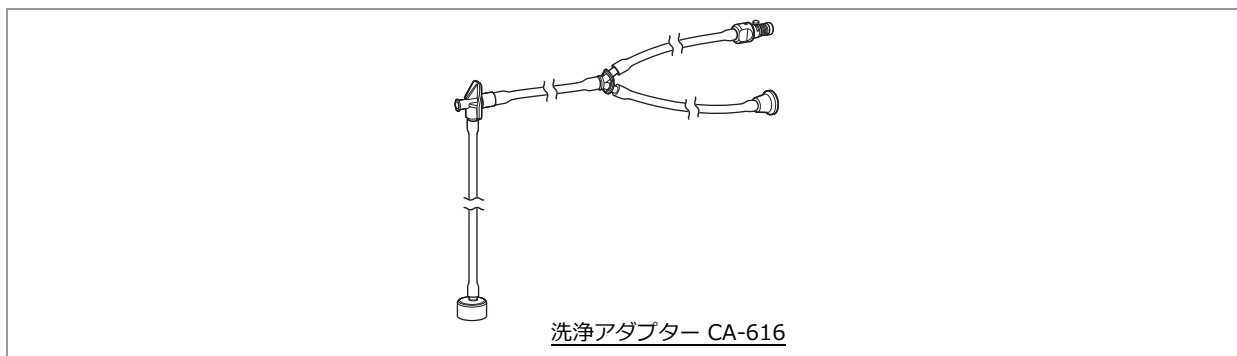


📌 ポイント

- ルアーロック式またはルアースリップ式のシリンジ (30mL) を用意してください。
- 洗浄アダプターは、マニュアル洗浄およびマニュアル消毒専用です。

📖 参照

- 他社製の内視鏡洗浄消毒機の付属品またはチャンネル洗浄の補助器具として洗浄アダプターの部品を使用した場合、富士フィルムでは洗浄消毒効果を確認していないため保証できません。他社製の内視鏡洗浄消毒機の付属品として洗浄アダプターの部品を使用する場合は、内視鏡洗浄消毒機の製造販売業者の責任で洗浄消毒効果を含めた有効性の確認が行われていることを製造販売業者に問い合わせてください。

3.1.1 洗浄アダプター (CA-616)

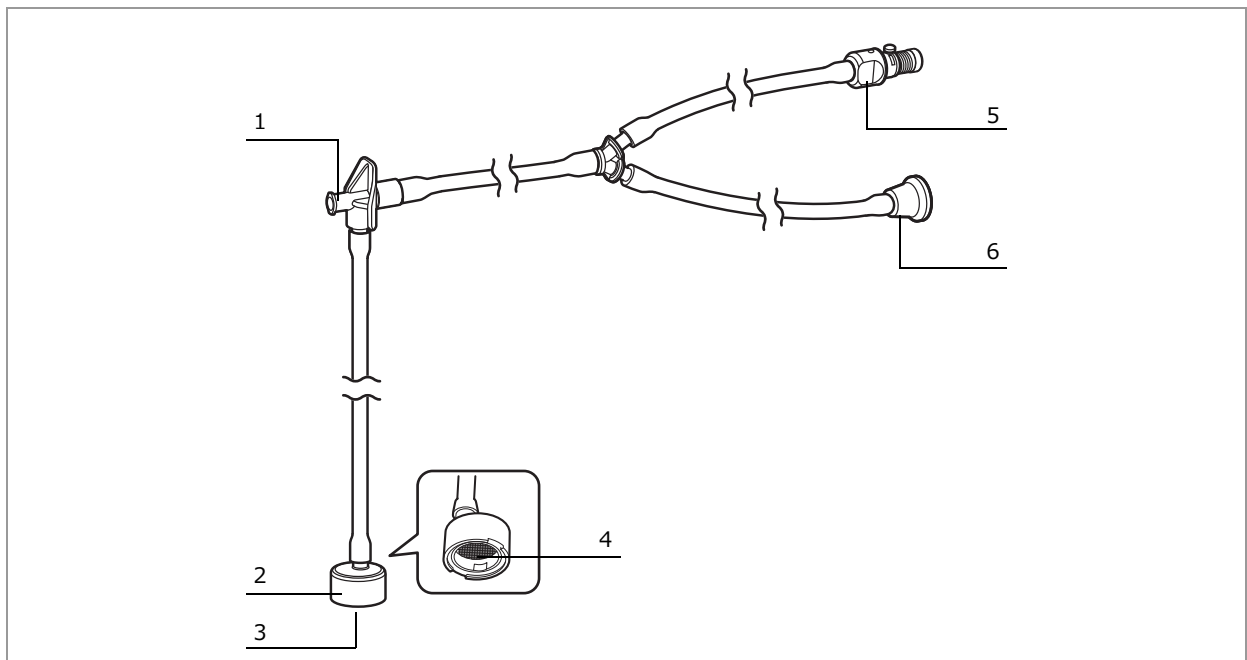


1	コネクター
2	おもり ^{※1}
3	吸入部
4	メッシュ
5	吸引シリンダーポート
6	鉗子口ポート

※ 1 この取扱説明書では、「おもり」とは重みを付けた吸入口を意味します。

3.1.1.1 機能

洗浄アダプターは内視鏡の鉗子チャンネルおよび吸引チャンネルにリブプロセス用の液体または空気を注入するために使用します。

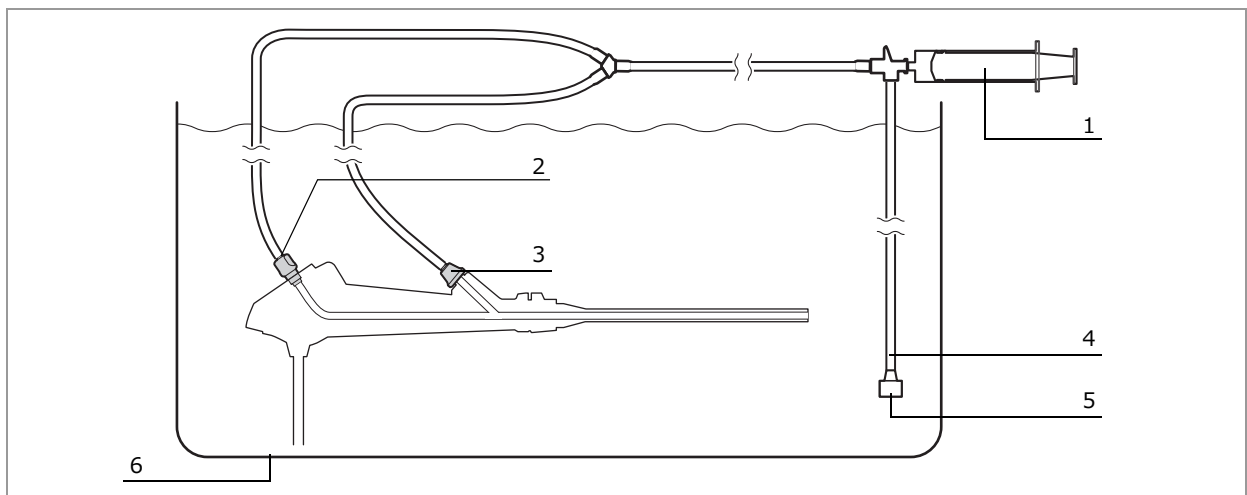

1	シリンジ
2	吸引シリンダーポート
3	鉗子口ポート
4	おもり
5	吸入部
6	容器


3.1.1.2 点検

1



外観に劣化、損傷、管路外れなどの異常がないことを確認します。

2

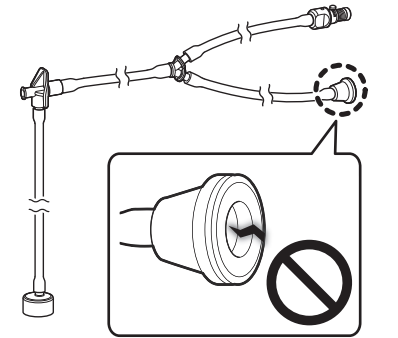


鉗子口ポートの内側に劣化、損傷などの異常がないことを確認します。

! ポイント


- 洗浄アダプターの鉗子口ポートの内側表面にざらつき、キズがある場合は劣化の兆候です。

3

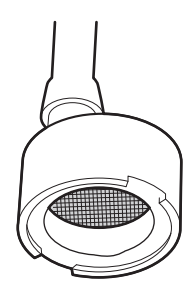


おもりの吸入部にメッシュフィルターが適切な位置に取り付けられていること、および繊維くずなどでふさがれていないことを確認します。

4

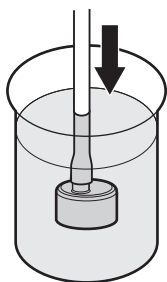


おもりの吸引部を、洗浄液などの液体に浸漬します。

5

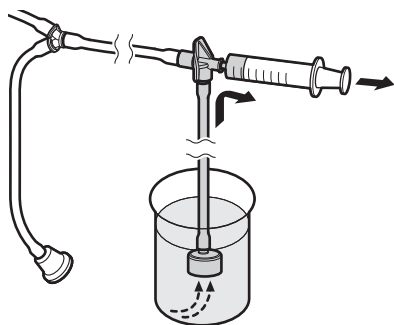


清潔なシリンジを洗浄アダプターのコネクタに取り付け、シリンジのピストンを引いて、シリンジ内に液体が吸引されることを確認します。

6

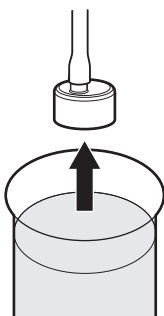

洗浄アダプターのおもりを、洗浄液などの液体から取り出します。

7

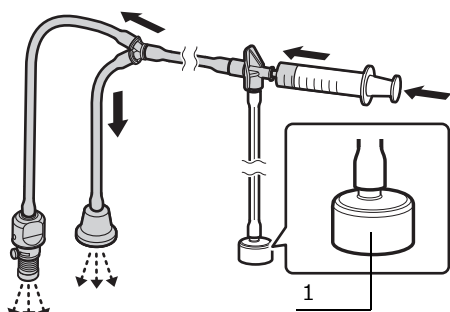


1: 吸入部

シリンジのピストンを押して、チューブに液体を注入し、以下を確認します。

- 液体がチューブから漏れない。
- チューブが詰まっていない。
- 吸入部から液体が垂れない。

8

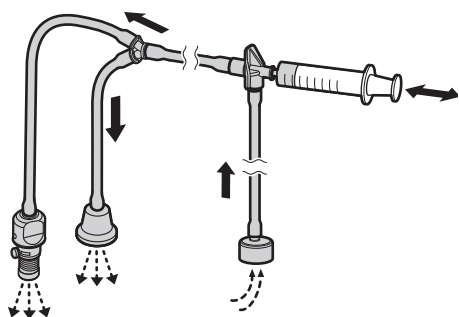

シリンジを引いたり押ししたりして、チューブに空気を送り、液体を排出します。


!ポイント

- 洗浄アダプターを初めて使用する前には、リプロセスを行う必要はありません。
- 点検の結果、異常があったものは交換してください。

3.2 洗浄ブラシ (WB11003FW)


洗浄ブラシ (WB11003FW) は、ブラッシングする部分を示すために「シリンダー用洗浄ブラシ」と呼びます。

シリンダー用洗浄ブラシ (WB11003FW)

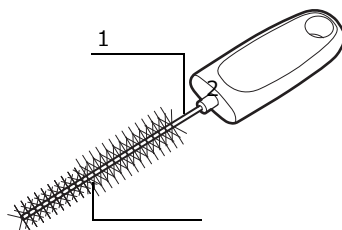

1	シャフト
2	ブラシ

3.2.1 機能

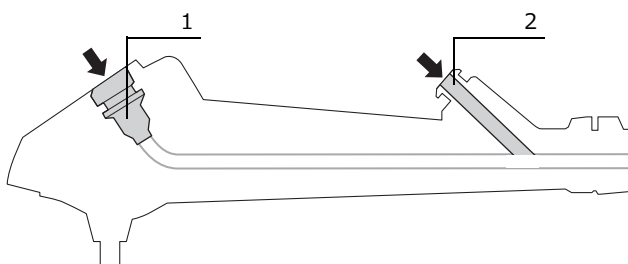

1	吸引シリンダー
2	鉗子口

シリンダー用洗浄ブラシは内視鏡の吸引シリンダーおよび鉗子口のブラッシングに使用します。

3.2.2 点検

シリンダー用洗浄ブラシの点検方法については、「5.5.4.1 ブラシの点検」を参照してください。

📖 参照

- 「5.5.4.1 ブラシの点検」


🚫 ポイント

- シリンダー用洗浄ブラシを初めて使用する前には、リプロセスを行う必要はありません。
- シリンダー用洗浄ブラシは消耗品です。繰り返し使用すると、使用中にブラシ部分が劣化により損傷するおそれがあります。
- 点検の結果、異常があったものは交換してください。

3.3 洗浄ブラシ (WB7024FW)


洗浄ブラシ (WB7024FW) は、ブラッシングする部分を示すために「吸引チャンネル用洗浄ブラシ」と呼びます。

吸引チャンネル用洗浄ブラシ (WB7024FW)

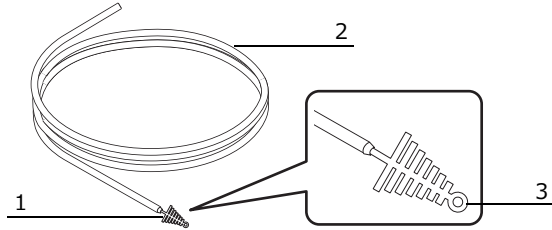

1	ブラシ
2	シャフト
3	玉

3.3.1 機能

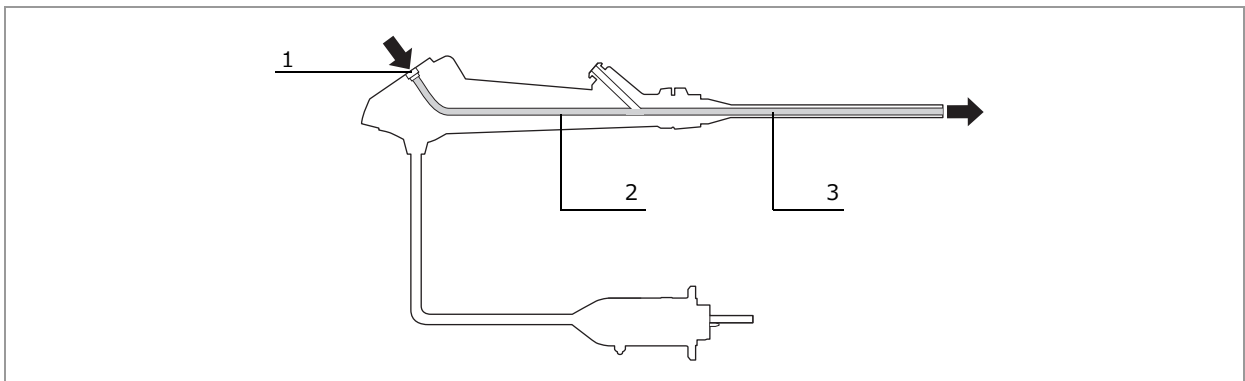

1	吸引シリンダー
2	吸引チャンネル
3	鉗子チャンネル

吸引チャンネル用洗浄ブラシは、内視鏡の鉗子チャンネルおよび吸引チャンネルのブラッシングに使用します。

3.3.2 点検

吸引チャンネル用洗浄ブラシの点検方法については、「5.5.4.1 ブラシの点検」を参照してください。

📖 参照

- 「5.5.4.1 ブラシの点検」


⚠️ ポイント

- 吸引チャンネル用洗浄ブラシを初めて使用する前には、リプロセスを行う必要はありません。


- 吸引チャンネル用洗浄ブラシは消耗品です。繰り返し使用すると、使用中にブラシ部分が劣化により損傷するおそれがあります。
- 点検の結果、異常があったものは交換してください。

3.4 通気アダプター (AD-7)

通気アダプターは、エチレンオキサイドガス滅菌またはステラッド滅菌を行うときに使用します。

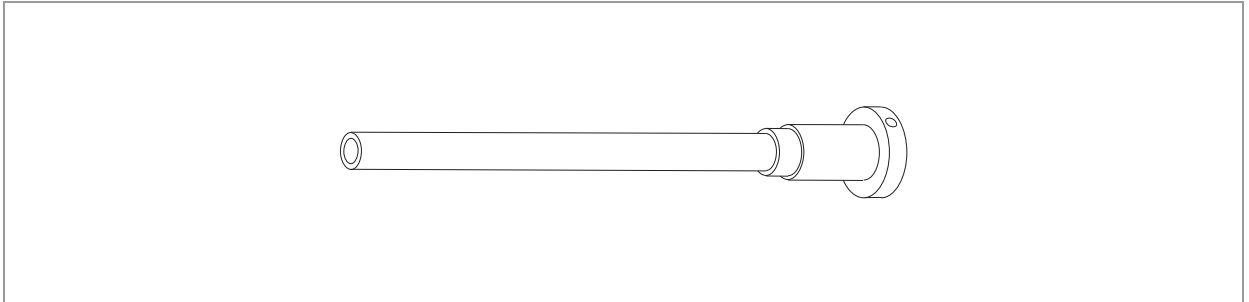

3.4.1 機能

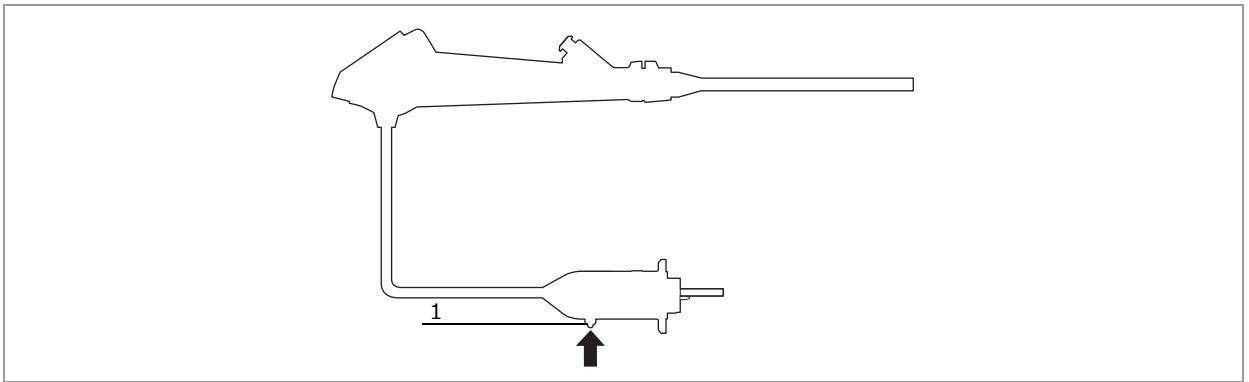

1 通気コネクター

通気アダプターを内視鏡の通気コネクターに取り付けることで、エチレンオキサイドガス滅菌またはステラッド滅菌時の、内視鏡内部と外気の圧力差による内視鏡の損傷を防ぎます。

3.4.2 点検

1



外観にカケ、亀裂やキズなどの異常がないか確認します。

❗ポイント

- 通気アダプターを初めて使用する前には、リプロセスを行う必要はありません。
- 点検の結果、異常があったものは交換してください。

第 4 章 リプロセスの流れ

この章では、リプロセスの流れと各リプロセス手順の参照項を説明します。各国専門機関のガイドラインを参照し、弊社の推奨内容に基づく施設の指針に従ってリプロセス方法を選択してください。

⚠ 警告

- 推奨する作業の流れに従わない場合は、内視鏡や付属品が適切にリプロセスができることおよび薬剤への適合性を保証できません。これ以外のリプロセスを実施する場合は、使用者の責任において、それらの代替手段に関する適切な有効性確認試験が実施済みであることを確認してください。

4.1 内視鏡洗浄消毒機を使用した洗浄と消毒の流れ

内視鏡洗浄消毒機を使用してマニュアル洗浄の補完および消毒を行う場合は、富士フィルムが洗浄消毒効果を確認した内視鏡洗浄消毒機を使用してください。富士フィルムが洗浄消毒効果を確認していない内視鏡洗浄消毒機を使用する場合は、使用する洗浄液、すべての管路を含む内視鏡全体が洗浄消毒できること、およびその洗浄消毒手順を、各製造販売業者にお問い合わせください。

	5.3 ベッドサイド洗浄	5.4 気密テスト	5.5 マニュアル洗浄
 内視鏡	※2	※3	※2
 吸引ボタン ※1 (SB-607)			
 洗浄アダプター (CA-616)			
 シリンダー用 洗浄ブラシ (WB11003FW)			
 チャンネル用 洗浄ブラシ (WB7024FW)			
 鉗子栓 ※1 (FOV-BU1)			


- ※ 1 使用前の吸引ボタン (SB-607) および鉗子栓 (FOV-BU1) はリプロセスを行います。使用後の吸引ボタンおよび鉗子栓は廃棄してください。
- ※ 2 内視鏡洗浄消毒機でリプロセスを行う前に、この取扱説明書に従って、内視鏡のベッドサイド洗浄およびマニュアル洗浄を行ってください。
- ※ 3 施設の指針に従って、気密テストの方法を選択してください。内視鏡自動洗浄消毒機の『添付文書』および『取扱説明書』で気密テストの方法を確認してください。他社製の気密テスター（自動洗浄消毒機に内蔵のものまたは独立型）を使用した場合、富士フィルムでは気密テストの有効性確認試験を行っていません。富士フィルム製の内視鏡の気密テストに対応していることを、気密テスターの製造業者に確認してください。

4.2 マニュアル洗浄とマニュアル消毒の流れ

	5.3 ベッドサイド洗浄	5.4 気密テスト	5.5 マニュアル洗浄	
 内視鏡				
 吸引ボタン ※1 (SB-607)		※2		
 洗浄アダプター (CA-616)				
 シリンダー用 洗浄ブラシ (WB11003FW)				
 チャンネル用 洗浄ブラシ (WB7024FW)				
 鉗子栓 ※1 (FOV-BU1)				

※ 1 使用前の吸引ボタン (SB-607) および鉗子栓 (FOV-BU1) はリプロセスを行います。使用後の吸引ボタンおよび鉗子栓は廃棄してください。


※ 2 施設の指針に従って、気密テストの方法を選択してください。内視鏡自動洗浄消毒機の『添付文書』および『取扱説明書』で気密テストの方法を確認してください。他社製の気密テスター (自動洗浄消毒機に内蔵のものまたは独立型) を使用した場合、富士フィルムでは気密テストの有効性確認試験を行っていません。富士フィルム製の内視鏡の気密テストに対応していることを、気密テスターの製造業者に確認してください。

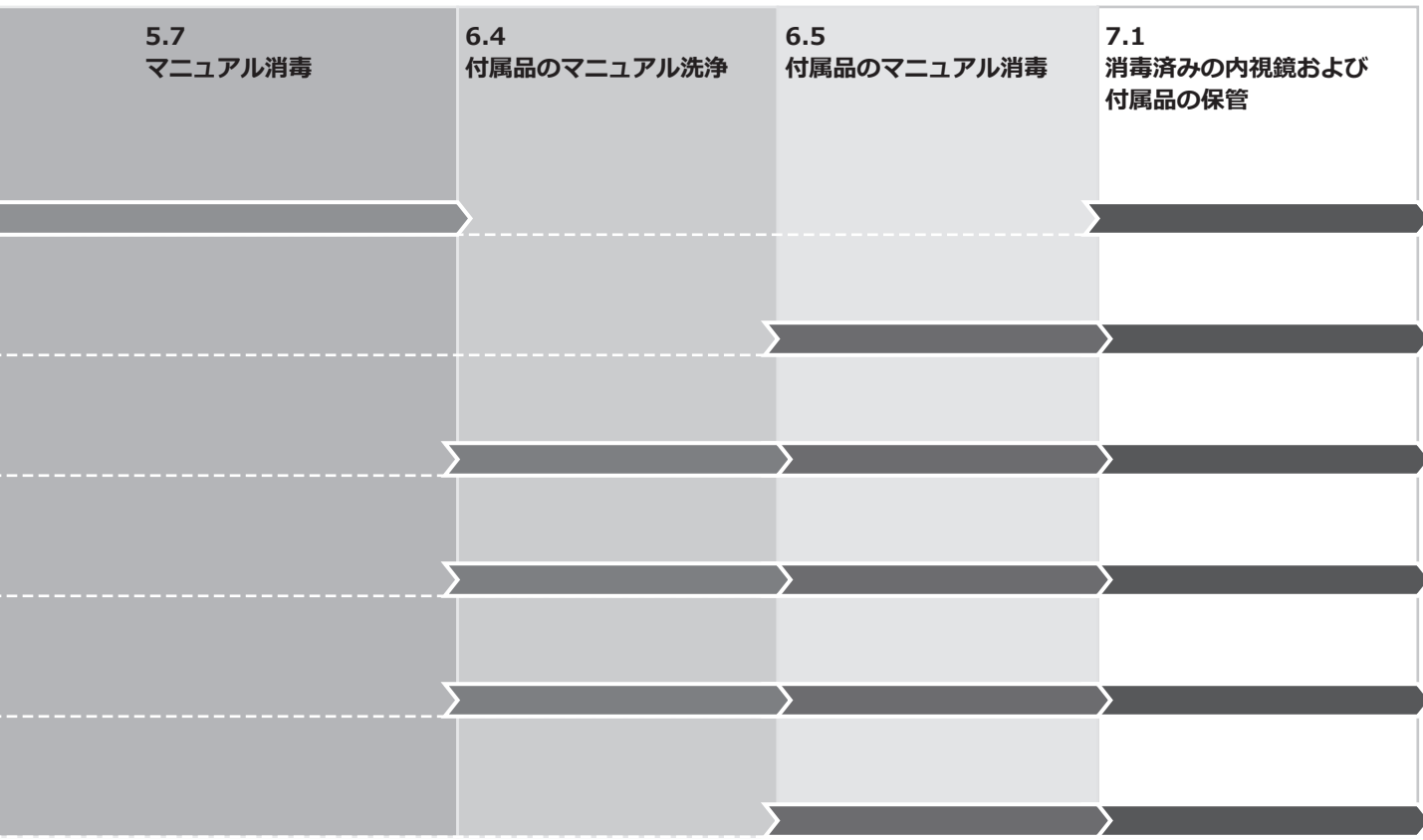

4.3 マニュアル洗浄と滅菌の流れ

	5.3 ベッドサイド洗浄	5.4 気密テスト	5.5 マニュアル洗浄	
 内視鏡	※2	※3	※2 ※4	
 吸引ボタン ※1 (SB-607)				
 洗浄アダプター (CA-616)				
 シリンダー用 洗浄ブラシ (WB11003FW)				
 チャンネル用 洗浄ブラシ (WB7024FW)				
 鉗子栓 ※1 (FOV-BU1)				

- ※ 1 使用前の吸引ボタン (SB-607) および鉗子栓 (FOV-BU1) はリプロセスを行います。使用後の吸引ボタンおよび鉗子栓は廃棄してください。
- ※ 2 滅菌を行う前に、この取扱説明書の手順に従って、内視鏡のベッドサイド洗浄とマニュアル洗浄を行ってください。
- ※ 3 施設の指針に従って、気密テストの方法を選択してください。内視鏡自動洗浄消毒機の『添付文書』および『取扱説明書』で気密テストの方法を確認してください。他社製の気密テスター（自動洗浄消毒機に内蔵のものまたは独立型）を使用した場合、富士フィルムでは気密テストの有効性確認試験を行っていません。富士フィルム製の内視鏡の気密テストに対応していることを、気密テスターの製造業者に確認してください。

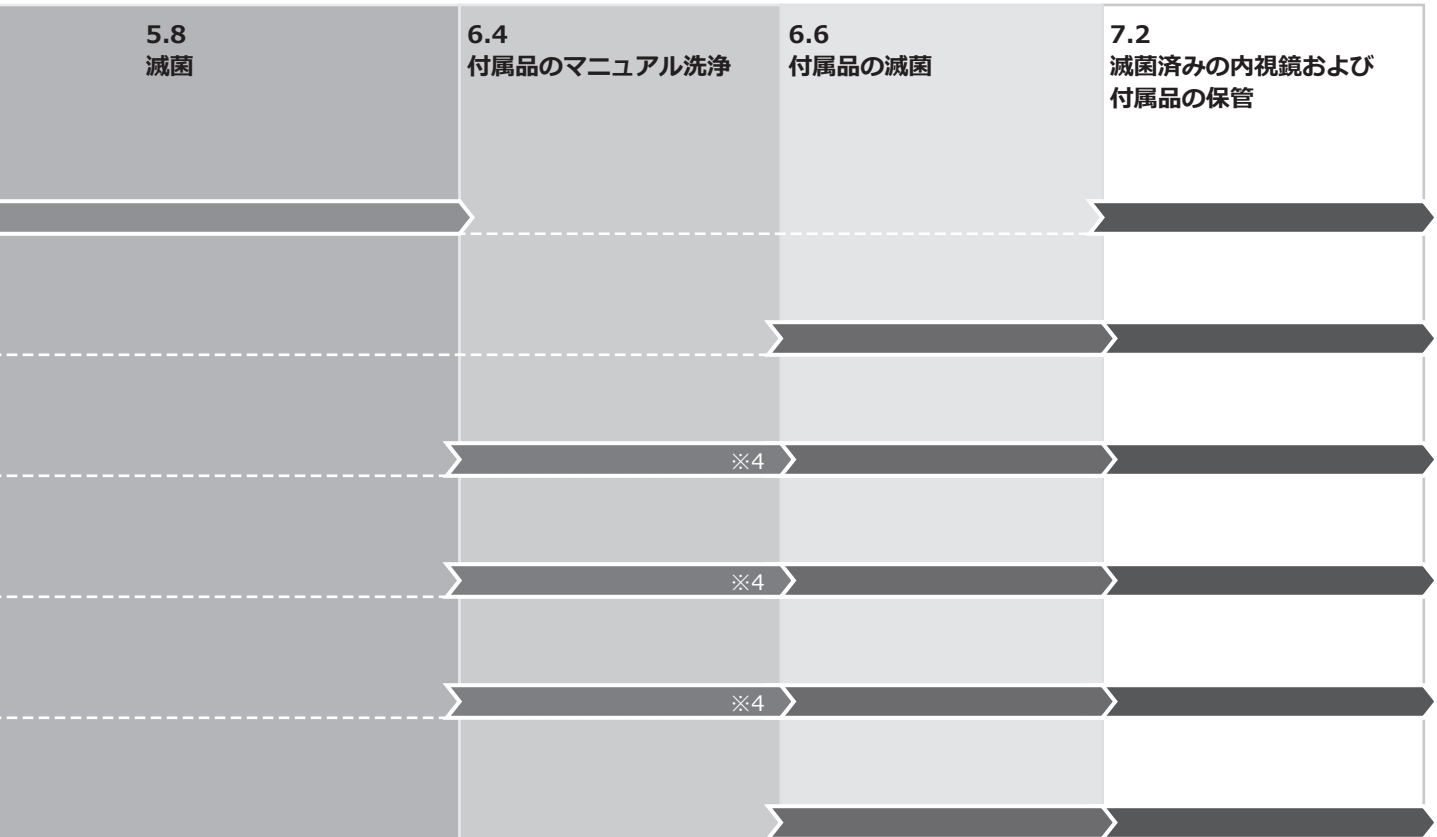

※ 4 施設の指針によりマニュアル洗浄後に消毒が必要な場合は、内視鏡および付属品のマニュアル消毒（「5.7 マニュアル消毒」「6.5 付属品のマニュアル消毒」）または内視鏡洗浄消毒機による洗浄消毒（「5.6 内視鏡洗浄消毒機を使用した洗浄と消毒」）を行ってください。

第 5 章 内視鏡のリプロセス

この章では、内視鏡のリプロセス手順およびリプロセスに必要な器材について説明します。


内視鏡を初めて使用する場合、患者に使用后、修理から戻ってきた場合、リプロセス済みの機器の再汚染が疑われる場合、または最長保管期間に関する施設の方針に応じて、内視鏡のリプロセスが必要になります。

▲ 注意

- 内視鏡の挿入部は慎重に取り扱ってください。内視鏡のわん曲部を強く持ったり無理に曲げると、わん曲部が故障するおそれがあります。
- 内視鏡の挿入部にリプロセスで使用する器材を強く押し付けしないでください。内視鏡の挿入部が損傷し、水漏れを起こすおそれがあります。
- 処置具を内視鏡と一緒に浸漬しないでください。処置具を内視鏡と一緒に浸漬した場合、処置具の鋭利な箇所が内視鏡に接触して、内視鏡が故障するおそれがあります。

5.1 リブプロセスを行う内視鏡の管路および管路の開口部

内視鏡のリブプロセスが必要な管路および管路の開口部です。

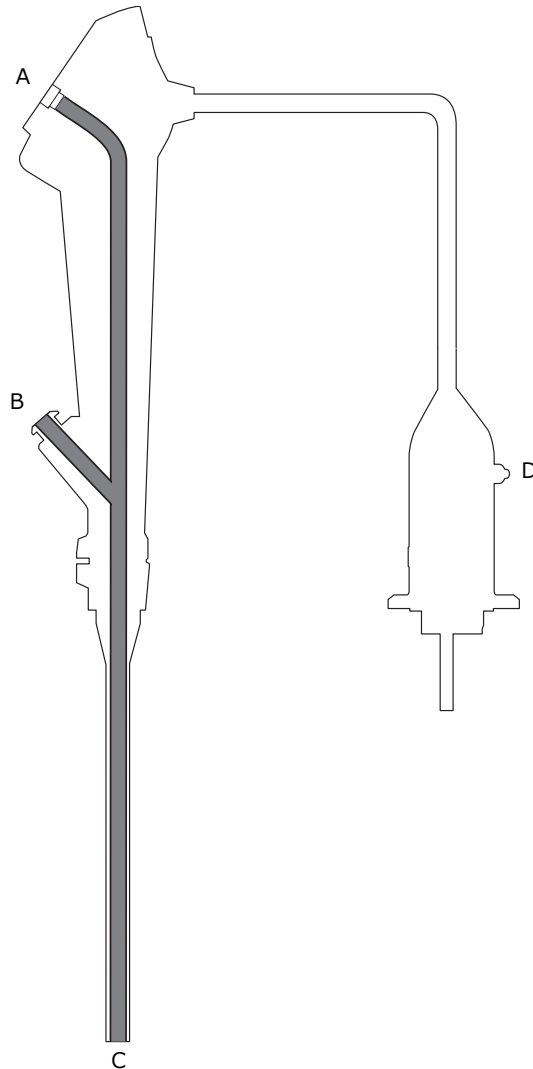

■ 開口部

A: 吸引シリンダー

B: 鉗子口

C: 先端部

D: 通気コネクター

■ 管路

A-C (■): 吸引チャンネル

B-C (■): 鉗子チャンネル

5.2 使用する器材の準備

本章で使用する器材です。

5.2.1 洗浄、消毒、滅菌を行うときに使用する器材

	通気アダプター AD-7
	洗浄アダプター CA-616
	シリンダー用洗浄ブラシ ※1 WB11003FW
	吸引チャンネル用洗浄ブラシ ※1 WB7024FW

※ 1 洗浄ブラシは、内視鏡に付属のものを使用してください。他社製の洗浄ブラシを使用した場合は、富士フィルムでは洗浄消毒効果を確認していないため保証できません。

5.2.2 気密テストを行うときに使用する器材

	気密テスター ※1 LT-7F (別売品)
---	--------------------------

※ 1 気密テスターは、別途購入する必要があります。

5.2.3 リプロセスで使用するその他の器材

- 清潔なガーゼ ※¹
- 滅菌ガーゼ ※¹
- 滅菌綿棒
- 清潔な歯ブラシ（軟らかいもの）
- 拡大鏡 / ルーペ

- 清潔なシリンジ（30mL） ※²
- 滅菌シリンジ（30mL） ※²


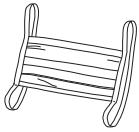

- 清潔な容器
- 清潔で大きな容器（縦 40× 横 40× 深さ 15cm 以上）
- 清潔で大きなフタ付き容器（縦 40× 横 40× 深さ 15cm 以上）
- 滅菌済みの大きな容器（縦 40× 横 40× 深さ 15cm 以上）
- アルコール用の容器

- 洗浄後のすすぎに用いる清浄水（「2.2 清浄水」参照）
- 洗浄液（「2.3 洗浄液」参照）
- 消毒液（「2.4 消毒液」参照）
- 消毒後のすすぎに用いる滅菌水（「2.5 すすぎに用いる水」参照）
- アルコール（「2.6 アルコール」参照）

※ 1 毛羽立ちのないガーゼを用意してください。

※ 2 ルアーロック式またはルアースリップ式のシリンジ（30mL）を用意してください。

5.2.4 保護具（例）

	ゴーグル
	マスク
	防護服 ※ ¹



耐薬品性のある防水性手袋 ※2

- ※ 1 消毒可能な靴、または再使用禁止の靴カバーも併せて使用することを推奨します。
- ※ 2 耐薬品性のある防水性手袋は、肌の露出を防止するために、十分な長さのものを準備してください。

5.3 ベッドサイド洗浄

内視鏡の検査終了後、ただちにベッドサイド洗浄を行ってください。


⚠ 警告

- 検査または処置の終了後、ただちにこの取扱説明書に従ってベッドサイド洗浄を行ってください。ただちに行わないと、付着物が乾燥および固着して除去できなくなり、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。




📌 ポイント

- 医療用で低発泡性の酵素系洗剤を、製造業者の指示に従って調製および使用します。
- ベッドサイド洗浄が終了するまで、光源装置から内視鏡を取り外さないでください。

5.3.1 ベッドサイド洗浄の流れ

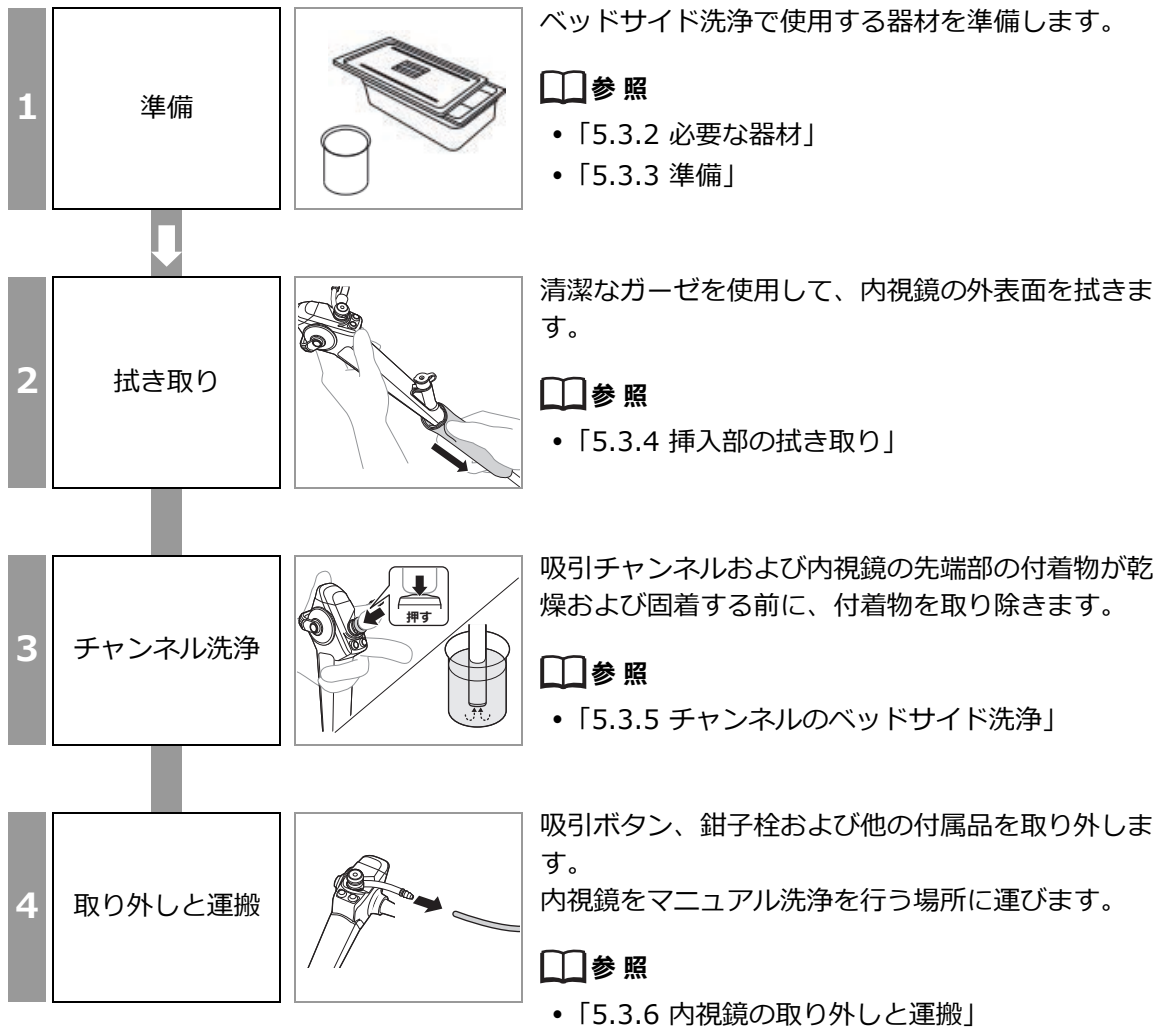

5.3.2 必要な器材

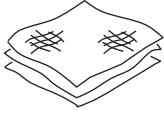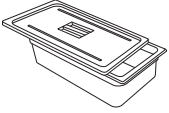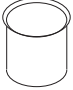
	清潔なガーゼ
	清潔で大きなフタ付き容器 ^{※1}
	清潔な容器

- 洗浄後のすすぎに用いる清浄水（「2.2 清浄水」参照）
- 洗浄液（「2.3 洗浄液」参照）

※ 1 縦 40× 横 40× 深さ 15cm 以上のものを使用してください。

- 1** ベッドサイド洗浄で使用する器材を準備します。

5.3.3 準備

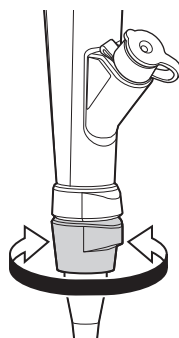1


回転リングの突起部と操作部の指標部（突起部）を合わせます。

5.3.4 挿入部の拭き取り

⚠ 警告

- 挿入部の外表面を消毒液やアルコールを含んだガーゼで拭かないでください。体液などが固着して、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

1

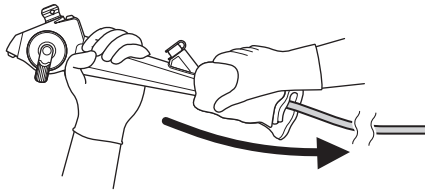

洗浄液を含んだ清潔なガーゼで、挿入部の外表面全体を拭きます。


5.3.5 チャンネルのベッドサイド洗浄

5.3.5.1 吸引チャンネルへの洗浄液吸引

参照

- 「5.1 リプロセスを行う内視鏡の管路および管路の開口部」

1

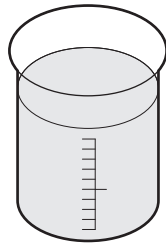


洗浄液製造業者が推奨する温度および濃度の洗浄液を約 1000mL、清潔な容器に入れます。

参照


- 「2.3 洗浄液」

2

FOV-BU1

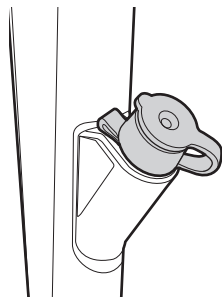


FV-003

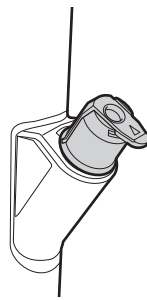

鉗子栓が取り付けられていることを確認します。


3

FOV-BU1

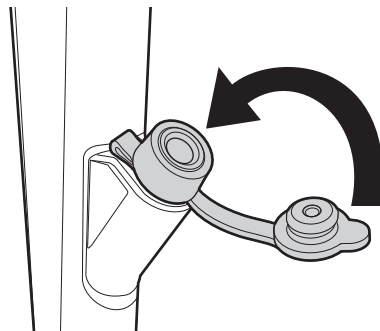


鉗子栓のフタが開いている場合は、閉じます。

4

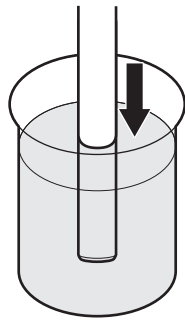


内視鏡の先端部を洗浄液に入れます。

5

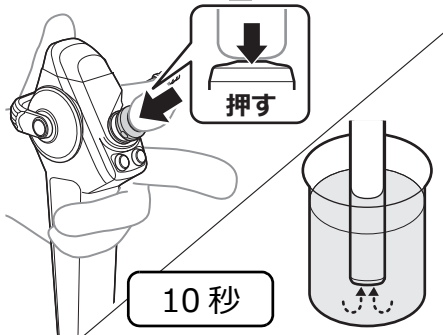

吸引ボタンを押したまま、少なくとも 10 秒間、吸引チャンネルに洗浄液を吸引します。

6

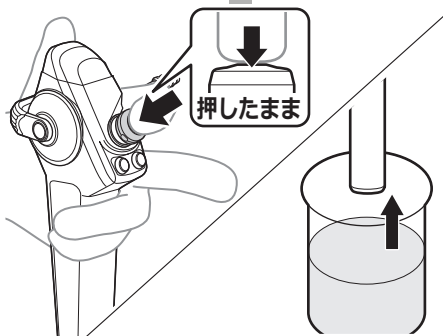

吸引ボタンを押したまま、内視鏡の先端部を洗浄液から出し、空気を吸引します。

7


繰り返し
(合計) 3回
(手順 4 から 6)

手順 4 から 6 を更に 2 回以上 (合計 3 回以上) 繰り返し、吸引チャンネルに少なくとも 200mL の洗浄液を吸引します。

5.3.6 内視鏡の取り外しと運搬

5.3.6.1 吸引器の取り外し

1

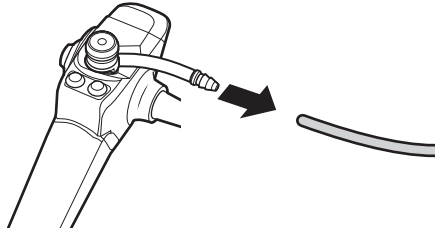


吸引チューブを吸引ボタンの吸引コネクターから取り外します。

5.3.6.2 吸引ボタンの取り外し

⚠ 警告

- 吸引ボタンは、再使用禁止の製品です。使用後の吸引ボタンは廃棄してください。廃棄せず再使用すると、感染の原因となるおそれがあります。

1

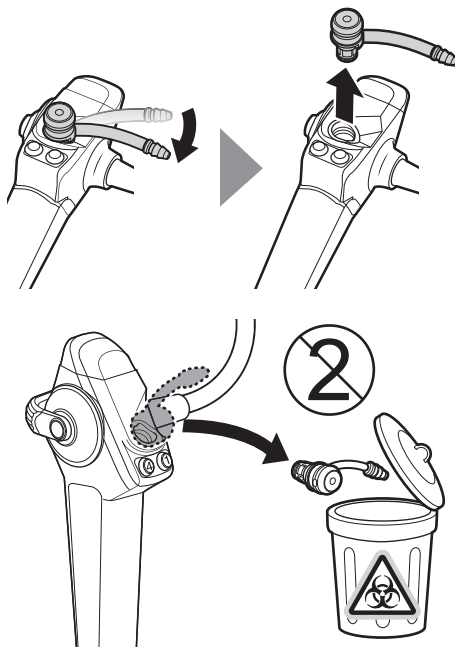

吸引ボタンを内視鏡から取り外し、適切な方法で廃棄します。

📖 参照


- 「7.3 廃棄」

5.3.6.3 鉗子栓の取り外し

⚠ 警告

- 鉗子栓は、再使用禁止の製品です。使用後の鉗子栓は廃棄してください。廃棄せず再使用すると、感染の原因となるおそれがあります。

FOV-BU1

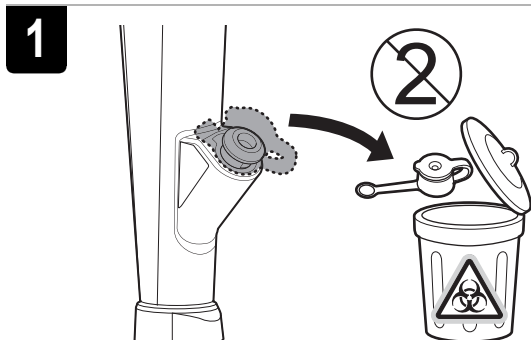


鉗子栓を内視鏡から取り外し、適切な方法で廃棄します。


📖 参照

- 「7.3 廃棄」

FV-003 (別売品)

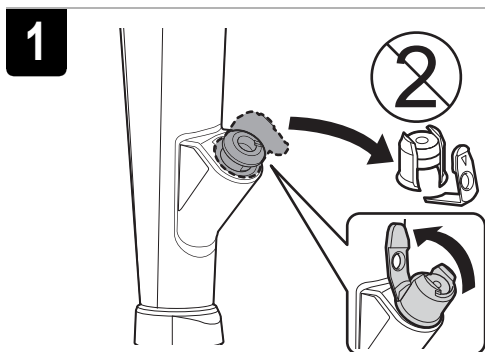

鉗子栓のつまみ部をめくり、内視鏡から取り外します。

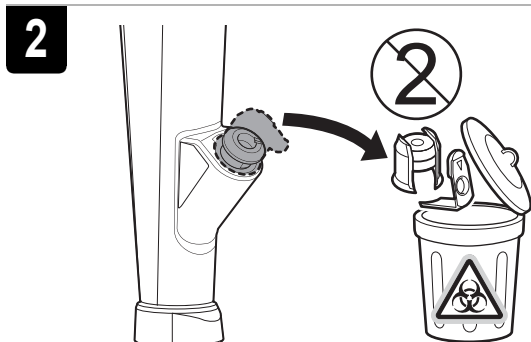

取り外した鉗子栓は、適切な方法で廃棄します。

📖 参照

- 「7.3 廃棄」

5.3.6.4 内視鏡の取り外しと運搬


警告

- 使用後の内視鏡は、周囲にぶついたり、内視鏡に残留している液を飛散させたりしないように、運搬用の清潔で大きなフタ付き容器に入れてフタをして運んでください。内視鏡が周囲に接触したり、残留している液が飛散して、感染の原因となるおそれがあります。

注意

- 光源装置からスコープコネクターを取り外した直後は、ライトガイド棒が非常に熱い場合があるので触らないでください。熱傷するおそれがあります。

1

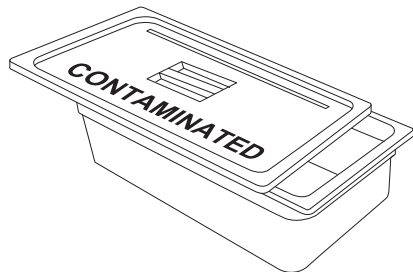


運搬用に清潔で大きなフタ付き容器を用意します。

ポイント

- “汚染物”の表示の付いた、清潔で大きなフタ付き容器を使用することを推奨します。

2

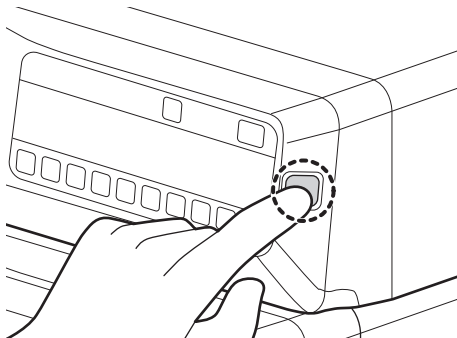


プロセッサおよび関連機器の電源を切ります。

ポイント


- プロセッサの検査表示灯が「準備」のときにも内視鏡を着脱できます。

3

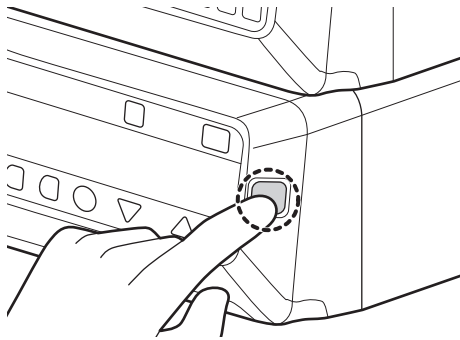


光源装置の電源を切ります。

4

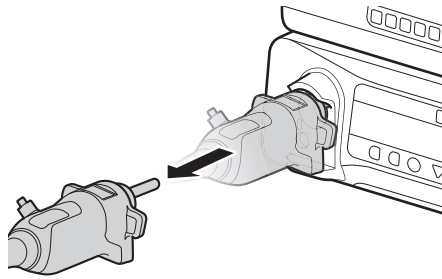


スコープコネクタをまっすぐ引き抜きます。

5

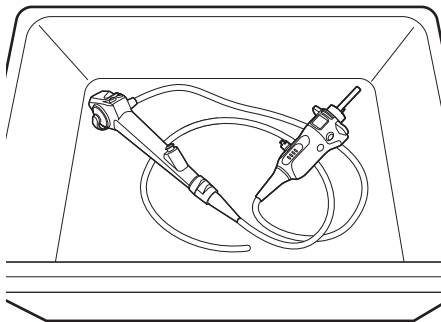


内視鏡を、清潔で大きなフタ付き容器に入れます。

6

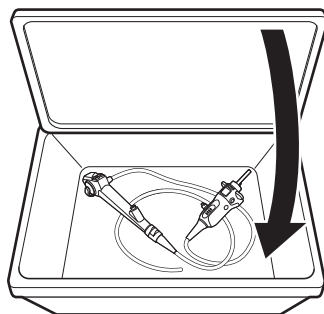

フタをします。

7

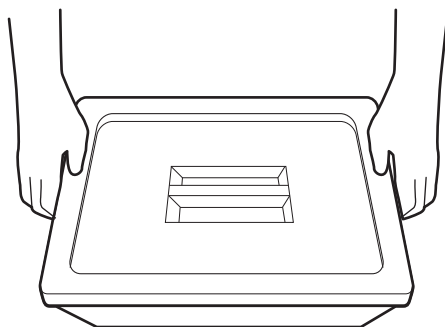

清潔で大きなフタ付き容器に入れた内視鏡をマニュアル洗浄を行う場所に運びます。

！ポイント

- 清潔で大きなフタ付き容器に入れた内視鏡をマニュアル洗浄を行う場所に運びます。

5.4 気密テスト

清浄水中で、内視鏡に気密不良が無いことを気密テスターで確認します。

⚠ 警告

- 気密テスターは、リプロセスが行われた内視鏡および付属品と一緒に保管しないでください。内視鏡および付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。
- 気密テスターは、トレーニングを受けていない人の手に触れない場所に保管してください。気密テスターに不用意に触れると、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 内視鏡のマニュアル洗浄を行う前に、必ず気密テストを行い、機器の異常を示す気密不良がないことを確認してください。気密不良がある状態で内視鏡のマニュアル洗浄を行った場合、内部に液体が入り、内視鏡が故障するおそれがあります。
- 異常が疑われる気密テスターで気密テストを行わないでください。内視鏡が故障するおそれがあります。
- 気密テスターを内視鏡に取り付ける場合、気密テスターの取り付け口金をしっかりと固定してください。気密テスターが適切に取り付いていないと、内視鏡内部が十分に加圧されず、正確な気密テストができません。
- 気密テスターを内視鏡に取り付ける場合、気密テスターの取り付け口金および内視鏡の通気コネクタ口金が完全に乾いていることを確認してください。内視鏡を水や薬液に浸漬しているときに、気密テスターを取り付けたり取り外したりしないでください。気密テスター内に水分が入ってしまった場合は、内視鏡を取り付けしないでください。気密テスターのコネクタやチューブに水滴が入ってしまった場合は、乾燥させてから使用してください。気密テスターの表面や内部に水滴が付いていると内視鏡に入り、内視鏡が故障するおそれがあります。
- 気密テスターで内視鏡内部に空気を送るときは、試験圧力（ $20 \pm 1.5 \text{ kPa}$ ）内になるよう加圧してください。指定の試験圧力で気密テストを行わないと、正確な気密テストができない、または内視鏡が故障するおそれがあります。
- 気密テスターを内視鏡から取り外す場合、気密テスターのメーターの指針が下がり、指針が止まる（ 0 kPa の位置になる）まで内視鏡内部の空気を十分に排出してください。十分に空気を排出せずに内視鏡から気密テスターを取り外すと、内部の空気が適切に抜けなくなり、内視鏡が故障するおそれがあります。
- 気密テスターを取り付けたまま、内視鏡をマニュアル洗浄しないでください。内視鏡が故障するおそれがあります。


📖 参照

- 気密テスター（LT-7F）の『取扱説明書』を参照してください。



⚠️ ポイント

- 富士フィルム製の気密テスターの使用を推奨します。
- 気密テスト中、内視鏡内部の空気圧上昇によってわん曲部の被覆部材が膨らむことがあります。異常ではありません。

5.4.1 気密テストの流れ

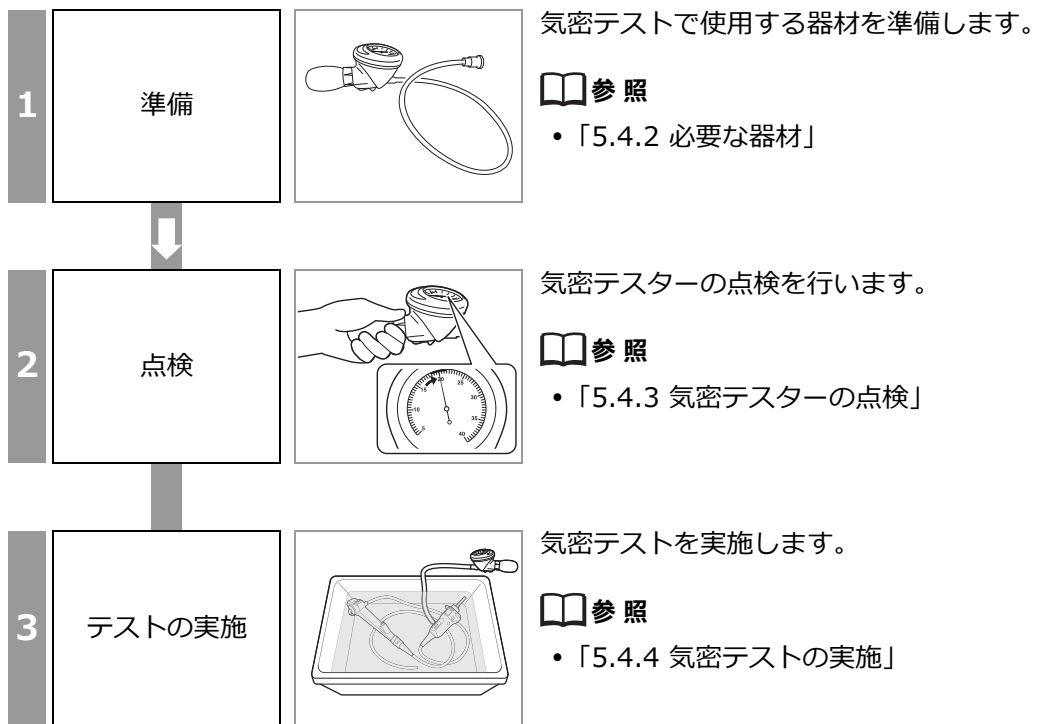

5.4.2 必要な器材

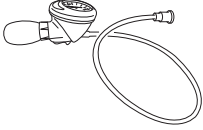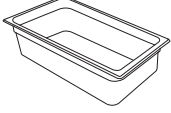	気密テスター LT-7F
	清潔で大きな容器
• 清浄水（「2.2 清浄水」参照）	


- 1** 気密テストで使用する器材を準備します。

5.4.3 気密テストの点検

気密テストの点検は、気密テスト LT-7F の側面に記載している 4 桁のロット番号を確認して気密テストの『取扱説明書』を参照してください。

- ロット番号が 2202 以前の場合は、文書番号^{※1}の末尾が「F」以前の取扱説明書
- ロット番号が 2203 以降の場合は、文書番号^{※1}の末尾が「G」以降の取扱説明書

※ 1 文書番号は 202B または 897N から始まる番号です。

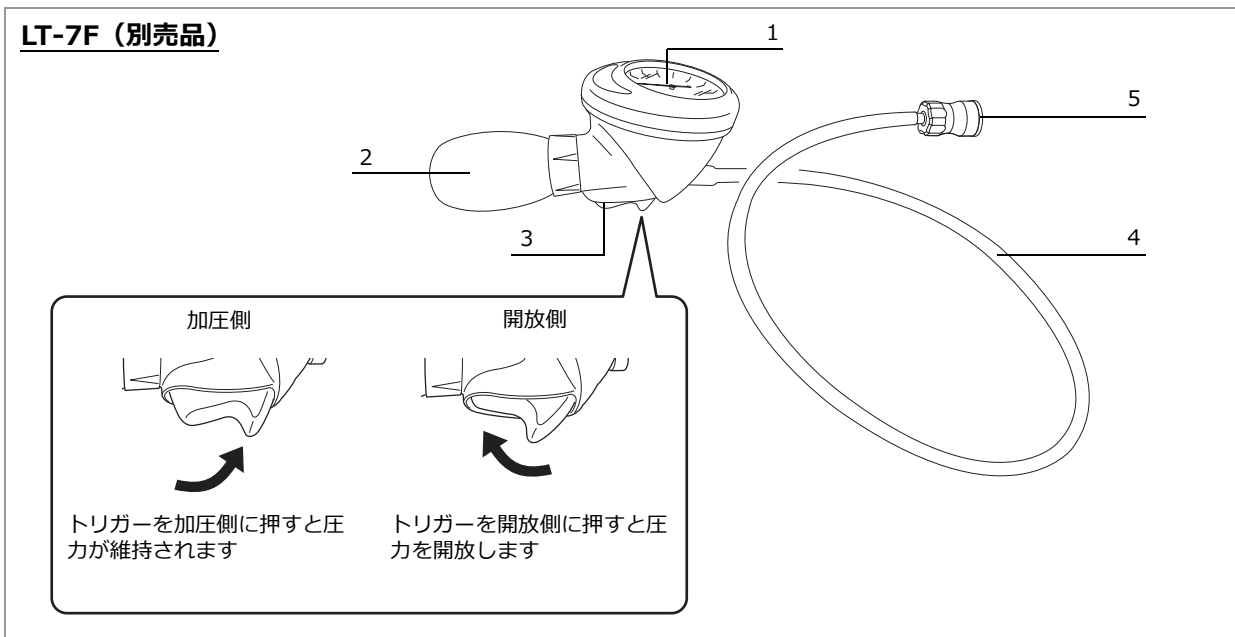


1	メーター
2	送気球
3	トリガー
4	チューブ
5	コネクター

5.4.4 気密テストの実施

⚠ 注意

- 気密テストで気密不良が発見された場合は、気密テストを中止してください。気密不良が発見された内視鏡を気密不良状態のまま水や薬液に浸漬しないでください。内部に液体が入り、内視鏡が故障するおそれがあります。ただちに営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。
- 内視鏡を浸漬した状態で気密テスターを着脱しないでください。内部に液体が入り、内視鏡が損傷するおそれがあります。

1

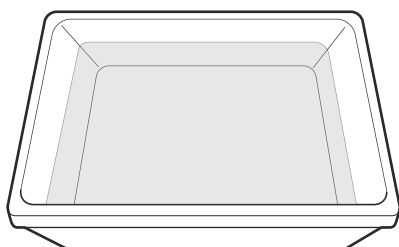


+10 ~ +40 °Cの清浄水を清潔で大きな容器に入れます。

📖 参照


- 「2.2 清浄水」

2

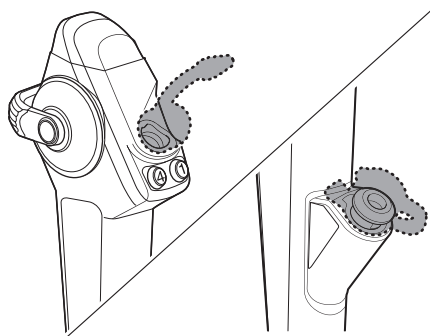

すべての取り外し可能な部品が内視鏡から取り外されていることを確認します。

3

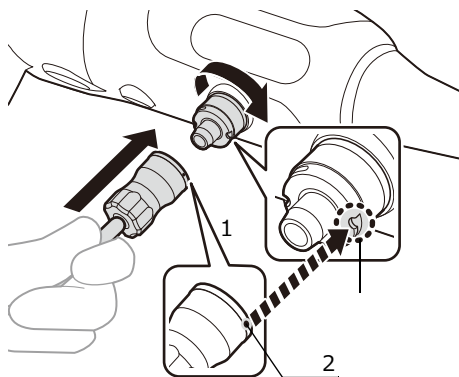


1: 切り欠き
2: 指標

内視鏡の通気コネクタに水分がないことを確認します。内視鏡の通気コネクタの切り欠きと気密テスターのコネクタの指標を合わせ、気密テスターのコネクタを押しながら止まる場所まで時計回りに回して固定します。

参照

- 気密テスター (LT-7F) の『取扱説明書』を参照してください。


4

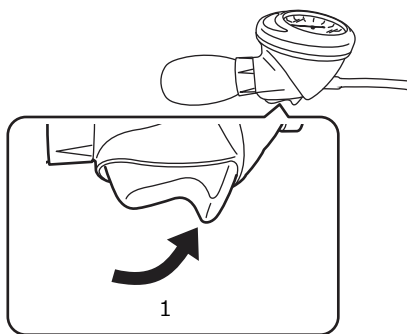

1: 加圧側

気密テスターのトリガーを加圧側に押します。

5

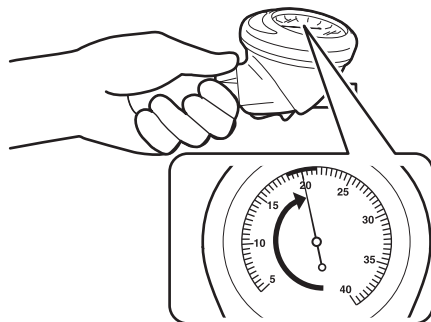


気密テスターの送気球を握り、メーターの指針が 20kPa になるまで空気を送ります。

ポイント

- 送気中は、トリガーから指を離してください。

6

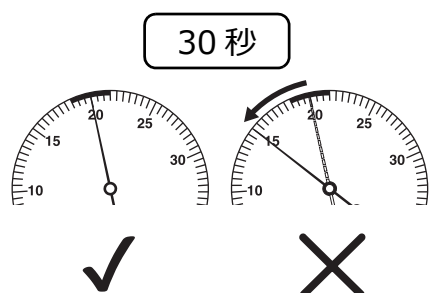


約 30 秒間待ち、メーターの指針の変化を確認します。

！ポイント


- 圧力が 15kPa 以下の場合、内視鏡の気密不良です。気密不良が発生している場合は、気密テストを中止して、ただちに営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。

7

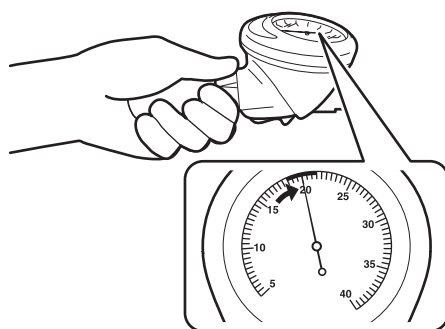

メーターの指針が 20kPa 以下になった場合、気密テストの送気球を握り、メーターの指針が 20kPa になるまで空気を送ります。

8

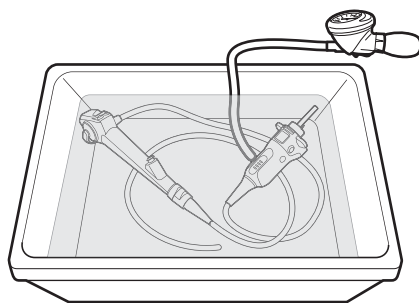

空気が漏れていないことを確認した後、清浄水に、内視鏡全体を完全に浸漬し、少なくとも 1 分以上浸漬および加圧したままにします。


！ポイント

- 気密テストのメーターおよび送気球を清浄水に浸漬しないでください。
- メーターの指針がゆっくりと下がってきた場合、気密テストの送気球を握り、メーターの指針が 20kPa になるまで空気を送ってください。

💡ヒント

- 次の手順 **9** は、内視鏡を少なくとも 1 分以上浸漬しているときに行います。

9

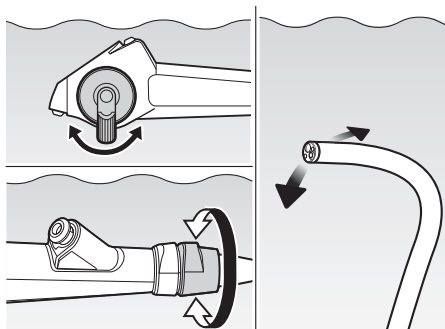


内視鏡の以下の部分进行操作して、挿入部やわん曲部をさまざまな方向に動かしながら点検し、内視鏡から連続して気泡が出ないことを確認します。


- アングルレバー
- 挿入部回転リング

❗ポイント

- 清浄水に浸漬している内視鏡から、連続して気泡が出る場合は気密不良です。内視鏡に気密不良が発生している場合は、気密テストを中止して、ただちに営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。

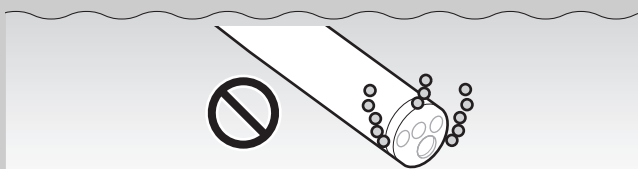


10

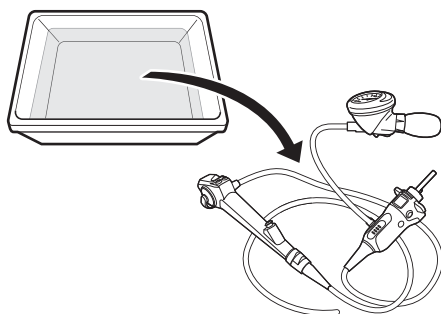

内視鏡を清浄水から取り出し、平らな場所に置きます。

11

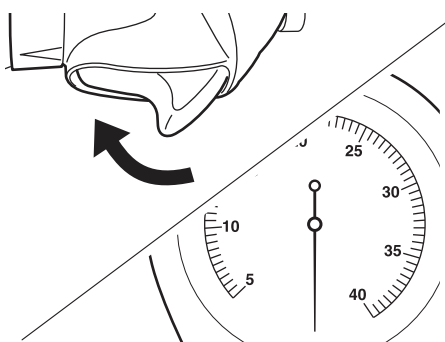


気密テスターのトリガーを開放側に押して、内視鏡に送った空気を排出します。

❗ポイント

- メーターの指針が下がりきって指針が止まるまで、十分に空気を排出してください。

12

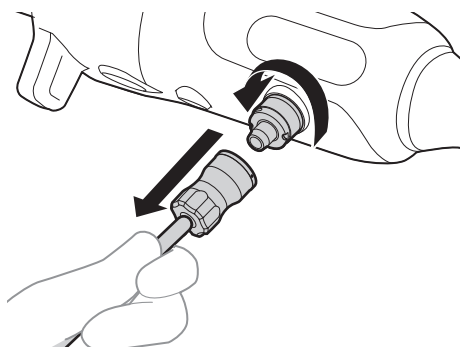


気密テストのコネクターを押し込んで反時計回りに回し、引き抜きます。

5.5 マニュアル洗浄

⚠ 警告

- 洗浄アダプターの鉗子口ポートの内側に劣化または損傷がないことを点検してください。異常がある洗浄アダプターを使用すると、リプロセス中に鉗子口ポートが外れる場合があります。内視鏡のリプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

5.5.1 内視鏡のマニュアル洗浄の流れ

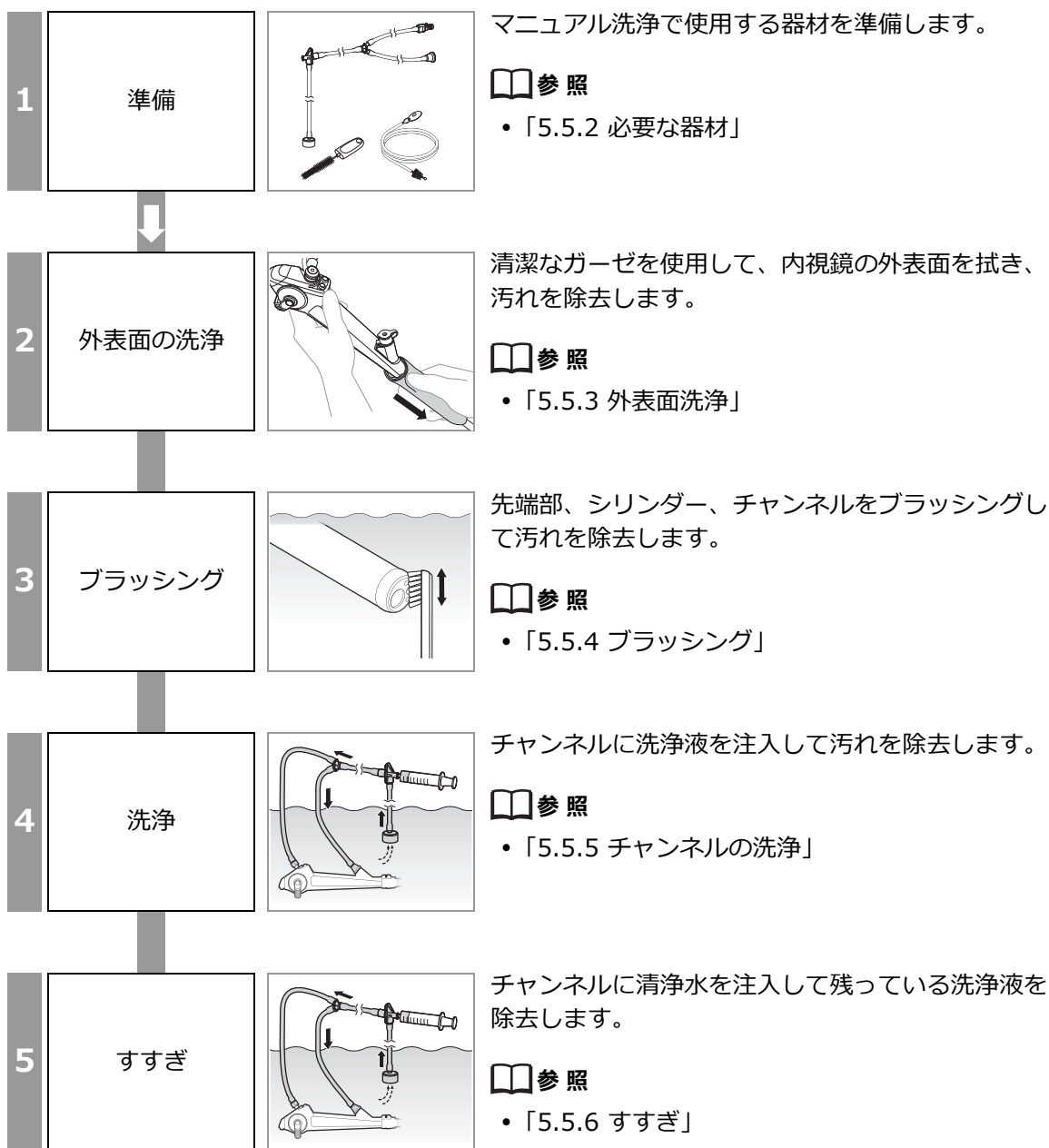

5.5.2 必要な器材

	洗浄アダプター CA-616
	清潔なシリンジ (30mL) ※1
	シリンダー用洗浄ブラシ WB11003FW
	吸引チャンネル用洗浄ブラシ WB7024FW
	清潔な歯ブラシ (軟らかいもの)
	拡大鏡 / ルーペ
	毛羽立ちのない清潔なガーゼ
	清潔で大きな容器 ※2


- 洗浄に用いる水 (「2.2 清浄水」参照)
- 洗浄液 (「2.3 洗浄液」参照)

※ 1 ルアーロック式またはルアースリップ式のシリンジ (30mL) を用意してください。

※ 2 縦 40× 横 40× 深さ 15cm 以上のものを使用してください。


1 マニュアル洗浄で使用する器材を準備します。

5.5.3 外表面洗浄

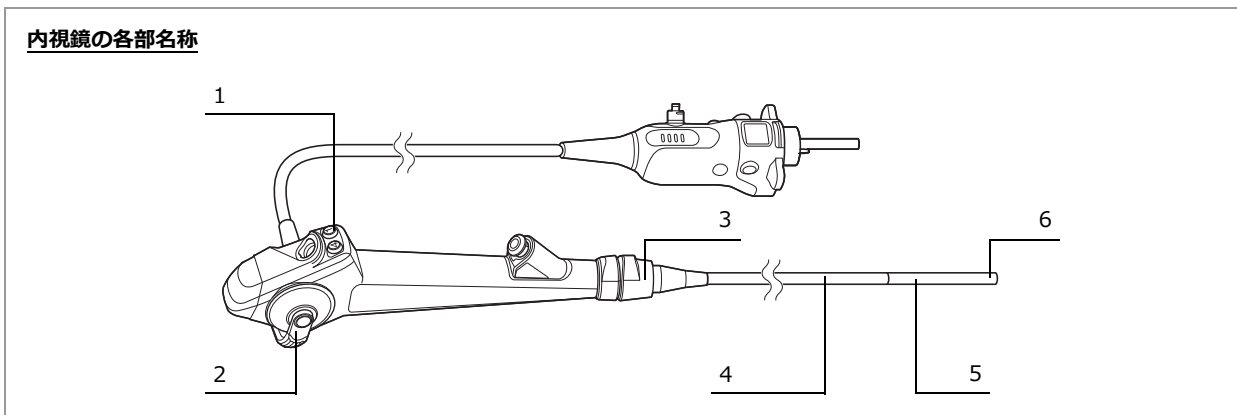

1	スコープスイッチ
2	アングルレバー
3	回転リング
4	軟性部
5	わん曲部
6	先端部

1

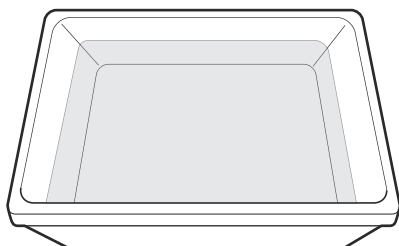


洗浄液製造業者が推奨する温度および濃度の新しい酵素系洗浄液を清潔で大きな容器に入れます。

📖 参照

- 「2.3 洗浄液」

2

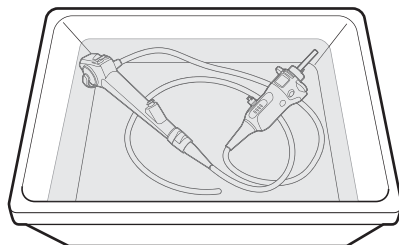

空気が漏れていないことを確認した後（「5.4 気密テスト」）、洗浄液に、内視鏡を完全に浸漬します。

📖 参照

- 「5.4 気密テスト」

1. 準備


2. 外表面の洗浄

3. ブラッシング

4. 洗浄

5. すすぎ


3

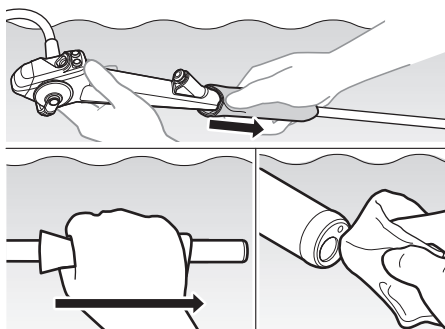

洗浄液中で、内視鏡の各部の汚れがなくなるまで、清潔なガーゼで拭きます。

- 軟性部
- わん曲部
- 先端部


4

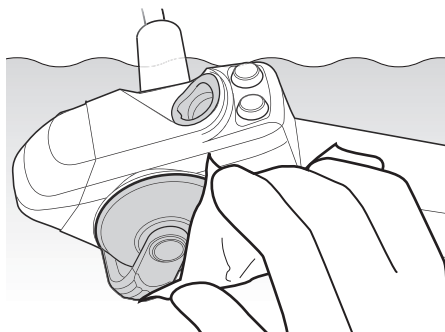

洗浄液中で、内視鏡の各部の汚れがなくなるまで、清潔なガーゼで拭きます。

- アングルレバー
- スコープスイッチ
- 吸引シリンダーの内部

5

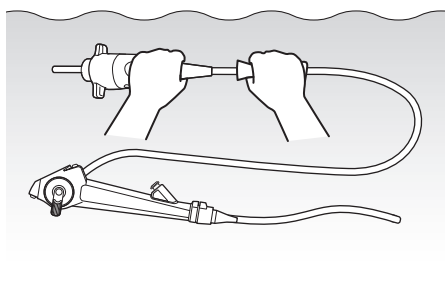

洗浄液中で、内視鏡の他の部分の汚れがなくなるまで、清潔なガーゼで拭きます。

5.5.4 ブラッシング

⚠ 警告

- 洗浄ブラシは、使用前に損傷や異常がないことを入念に点検してください。ブラッシング後は毎回、洗浄ブラシが損傷していないこと、および洗浄ブラシの破片が内視鏡の管路内に残留していないことを確認してください。感染やけがの原因となるおそれがあります。
- シリンダーや鉗子口を洗浄ブラシで洗浄を行う前に、洗浄ブラシのブラシ部分から付着物を取り除いてください。管路内および管腔内に再度付着物が入り込み、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡の鉗子チャンネル、鉗子口、吸引チャンネルおよび吸引シリンダーの内面を十分にブラッシングしてください。ブラッシングが不十分な場合、洗浄が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 洗浄中に洗浄ブラシが損傷し、ブラシ部が外れた場合は、予備の洗浄ブラシを使用して、管路内から残留物を取り除いてください。内視鏡に異常（チャンネルの損傷や気密不良など）があること、内視鏡のチャンネル内に異物（損傷した洗浄ブラシなど）が残っていること、または内視鏡の洗浄やリプロセスが十分に行われていないことが疑われる場合は、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にご連絡の上、内視鏡を点検または修理に出してください。感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 内視鏡に洗浄ブラシを挿入または引き抜きを行う場合、ゆっくりと行ってください。勢いよく行くとシリンダー内部が削れたり、傷ついたり、損傷するおそれがあります。
- 吸引チャンネル用洗浄ブラシを内視鏡の先端部の鉗子出口から挿入しないでください。ブラシが引き抜けなくなったり、内視鏡を損傷するおそれがあります。
- シリンダー用洗浄ブラシを吸引シリンダーに挿入する場合、ブラシ部の半分以上を挿入しないでください。ブラシが引き抜けなくなるおそれがあります。
- ブラッシングのときに、内視鏡の挿入部を直径 400mm 以下に丸めないでください。400mm 以下に丸めると、洗浄ブラシが挿通できず、内視鏡や洗浄ブラシが故障または損傷するおそれがあります。
- 洗浄ブラシの挿入時に管路内で異常な抵抗を感じたときは、ただちに内視鏡を修理に出してください。
- 洗浄中に洗浄ブラシが損傷し、ブラシ部が外れた場合は、予備の洗浄ブラシを使用して、管路内から残留物を取り除いてください。内視鏡に異常（チャンネルの損傷や気密不良など）があること、内視鏡のチャンネル内に異物（損傷した洗浄ブラシなど）が残っていること、または内視鏡の洗浄やリプロセスが十分に行われていないことが疑われる場合は、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にご連絡の上、内視鏡を点検または修理に出してください。検査または処置中に残留物が落下し、患者を傷つけるおそれがあります。


⚠ ポイント

- シリンダー用洗浄ブラシ、吸引チャンネル用洗浄ブラシは、「第6章 付属品のリプロセス」に従ってリプロセスを行います。

5.5.4.1 ブラシの点検


シリンダー用洗浄ブラシ

1

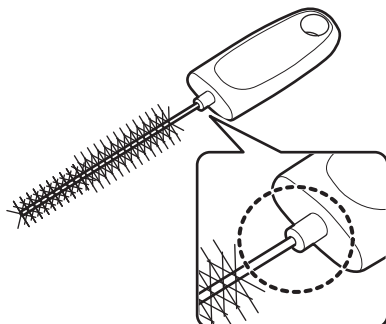

シャフトがブラシの把持部にしっかり付いていること、およびシャフトにブラシがしっかり付いていることを確認します。

2

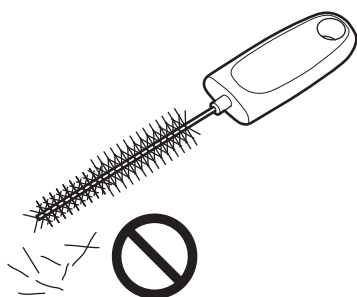


ブラシの毛が抜けていないこと、およびブラシの毛が倒れていないことを確認します。

!ポイント

- 毛が倒れている場合は、手袋をはめた指でまっすぐに戻します。

3

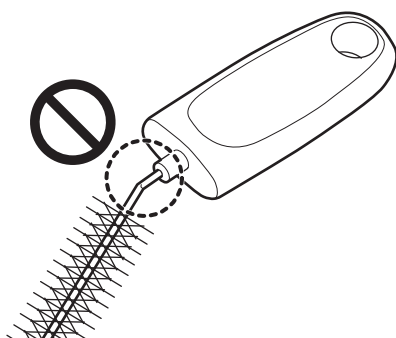


シャフトに折れ、キズなどがいないことを確認します。


!ポイント

- シリンダー用洗浄ブラシを初めて使用する前には、リプロセスを行う必要はありません。
- シリンダー用洗浄ブラシは消耗品です。繰り返し使用すると、使用中にブラシ部分が劣化により損傷するおそれがあります。
- シリンダー用洗浄ブラシはリプロセスを行います。
- 点検の結果、異常があったシリンダー用洗浄ブラシは交換してください。

吸引チャンネル用洗浄ブラシ

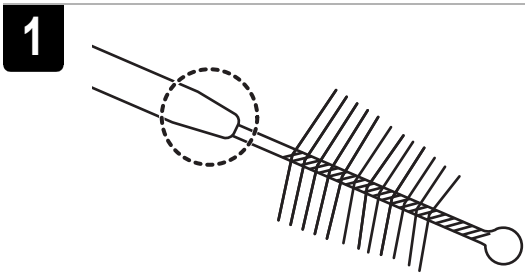


シャフトにブラシがしっかり付いていることを確認します。

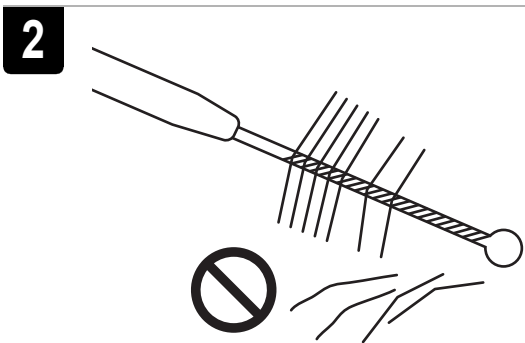

ブラシの毛が抜けていないこと、およびブラシの毛が倒れていないことを確認します。


!ポイント

- 毛が倒れている場合は、手袋をはめた指でまっすぐに戻します。

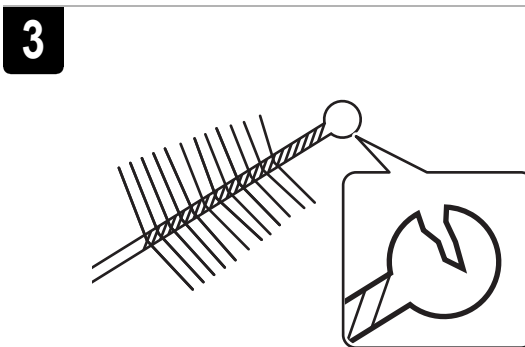

ブラシ先端の玉に損傷や脱落が無いことを確認します。

4

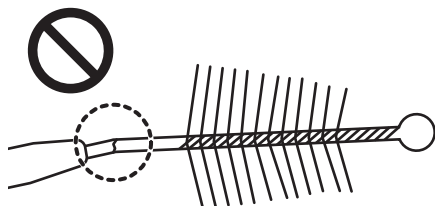


シャフトに折れ、キズなどがないことを確認します。

! ポイント

- 吸引チャンネル用洗浄ブラシを初めて使用する前には、リブプロセスを行う必要はありません。
- 吸引チャンネル用洗浄ブラシは消耗品です。繰り返し使用すると、使用中にブラシ部分が劣化により損傷するおそれがあります。
- 吸引チャンネル用洗浄ブラシはリブプロセスを行います。
- 点検の結果、異常があった吸引チャンネル用洗浄ブラシは交換してください。


5.5.4.2 先端部のブラッシング

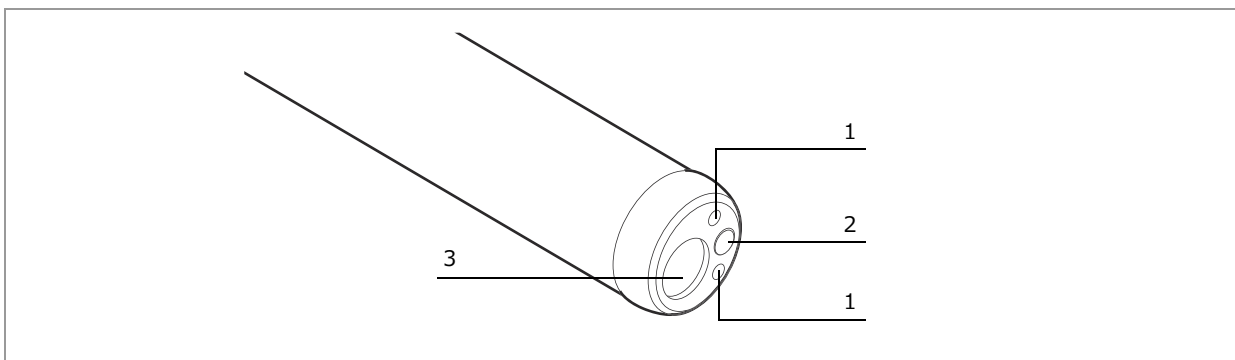


1	ライトガイド
2	対物レンズ
3	鉗子出口

❗ポイント

- 先端部のブラッシングは、洗浄液に内視鏡を完全に浸漬した状態で行います。
- 内視鏡の先端部のブラッシングは、清潔な歯ブラシを使用してください。
- ライトガイドなどの凹凸部は入念にブラッシングしてください。
- 先端部のすべての凹凸部を入念にブラッシングし、内視鏡の先端部に異物が残っていないことを確認してください。

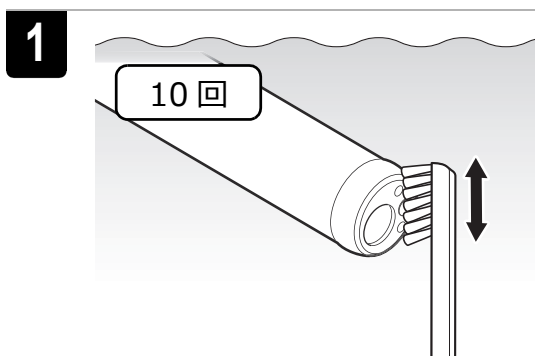

洗浄液中で、対物レンズおよびライトガイドをそれぞれ少なくとも10回ずつブラッシングします。

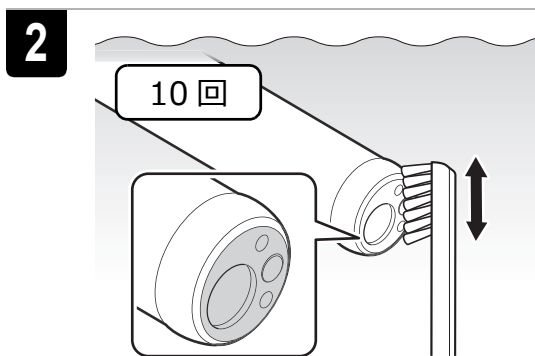

洗浄液中で、先端部の表面を少なくとも10回ブラッシングします。


5.5.4.3 シリンダーおよび鉗子口のブラッシング

❗ポイント

- シリンダーや鉗子口のブラッシングは、洗浄液に内視鏡を完全に浸漬した状態で行います。
- シリンダーや鉗子口のブラッシングは、内視鏡に付属のシリンダー用洗浄ブラシを使用します。
- すべてのチャンネル、シリンダーおよび開口部は、ブラッシングの手順を少なくとも3回繰り返し、汚れを除去してください。
- 使用したシリンダー用洗浄ブラシは、「第6章 付属品のリプロセス」に従ってリプロセスを行います。


吸引シリンダー

1

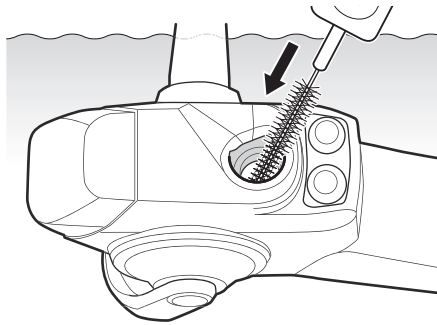


吸引シリンダーにブラシ部分が半分隠れるまで挿入します。

2

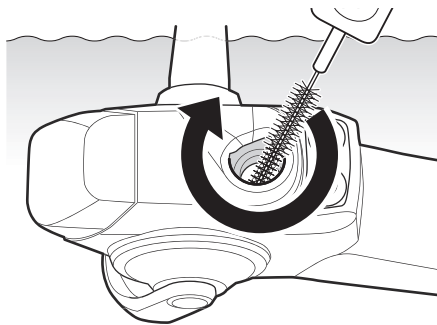


吸引シリンダーの内壁面をなぞるように、シリンダー用洗浄ブラシを時計回りに10回回します。

3

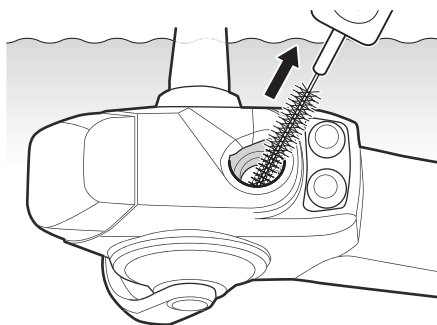


シリンダー用洗浄ブラシを、吸引シリンダーからゆっくり引き抜きます。

4

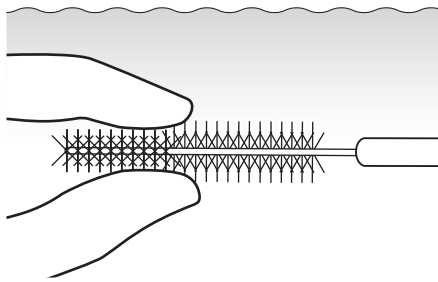


洗浄液中で、ブラシ部分の汚れを指でつまんで除去します。

5

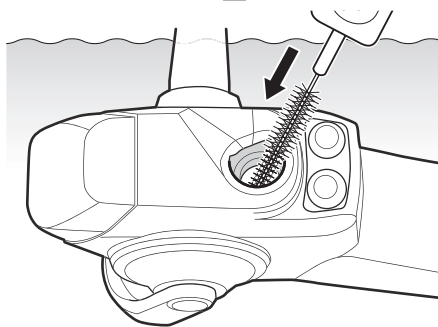


吸引シリンダーにブラシ部分が半分隠れるまで挿入します。

6

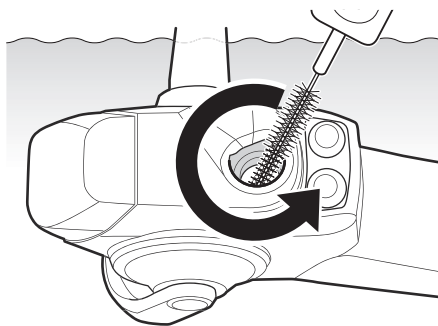


吸引シリンダーの内壁面をなぞるように、シリンダー用洗浄ブラシを反時計回りに10回回します。

7

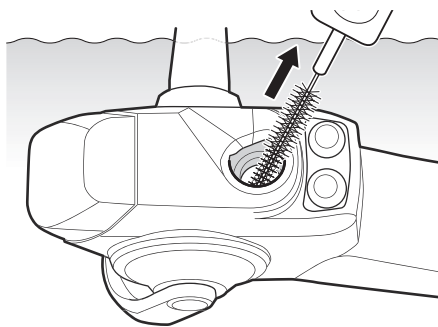

シリンダー用洗浄ブラシを、吸引シリンダーからゆっくり引き抜きます。

8

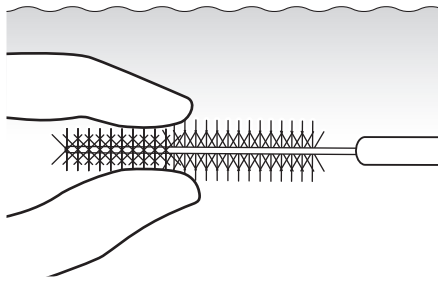

洗浄液中で、ブラシ部分の汚れを指でつまんで除去します。

1. 準備

2. 外表面の洗浄

3. ブラッシング

4. 洗浄

5. すすぎ


9

繰り返し
(合計) 3回
(手順 1 から 8)

手順 1 から 8 を更に 2 回以上 (合計 3 回以上) 繰り返し、吸引シリンダー内の異物を除去します。

鉗子口

1

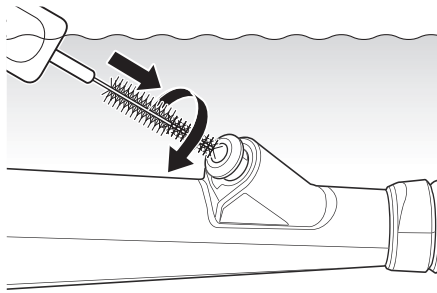


シリンダー用洗浄ブラシを回転させながら、鉗子口に完全に挿入します。

ヒント


- 鉗子口にシリンダー用洗浄ブラシが入りづらい場合は、ブラシ部分の先端側を持ち、少しずつ挿入してください。

2

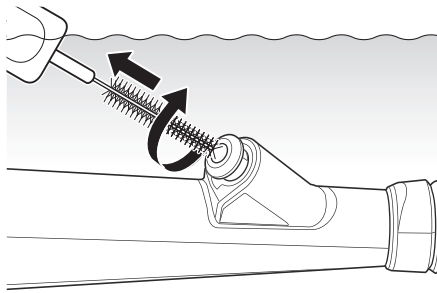

シリンダー用洗浄ブラシを回転させながら、鉗子口からゆっくり引き抜きます。

3

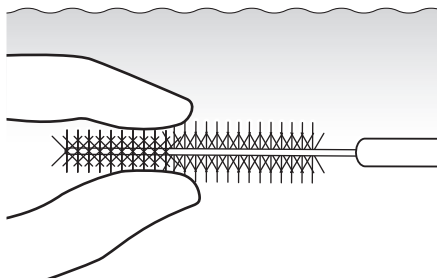

洗浄液中で、ブラシ部分の汚れを指でつまんで除去します。

4

繰り返し
(合計) 3回
(手順 1 から 3)

手順 1 から 3 を更に 2 回以上 (合計 3 回以上) 繰り返し、鉗子口内の異物を除去します。

5.5.4.4 吸引チャンネルのブラッシング


⚠ 注意

- 吸引チャンネルをブラッシングする場合、洗浄ブラシはまっすぐゆっくりと挿入し、まっすぐゆっくりと引き抜いてください。洗浄ブラシをまっすぐ挿入、または引き抜かないと、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。


📌 ポイント

- 吸引チャンネルのブラッシングは、洗浄液に内視鏡を完全に浸漬した状態で行います。
- 吸引チャンネルのブラッシングは、内視鏡に付属の吸引チャンネル用洗浄ブラシを使用します。
- すべてのチャンネル、シリンダーおよび開口部は、ブラッシングの手順を少なくとも 3 回繰り返し、汚れを除去してください。
- 使用した吸引チャンネル用洗浄ブラシは、「第 6 章 付属品のリプロセス」に従ってリプロセスを行います。

吸引チャンネル洗浄ブラシの挿入管路（先端へ）

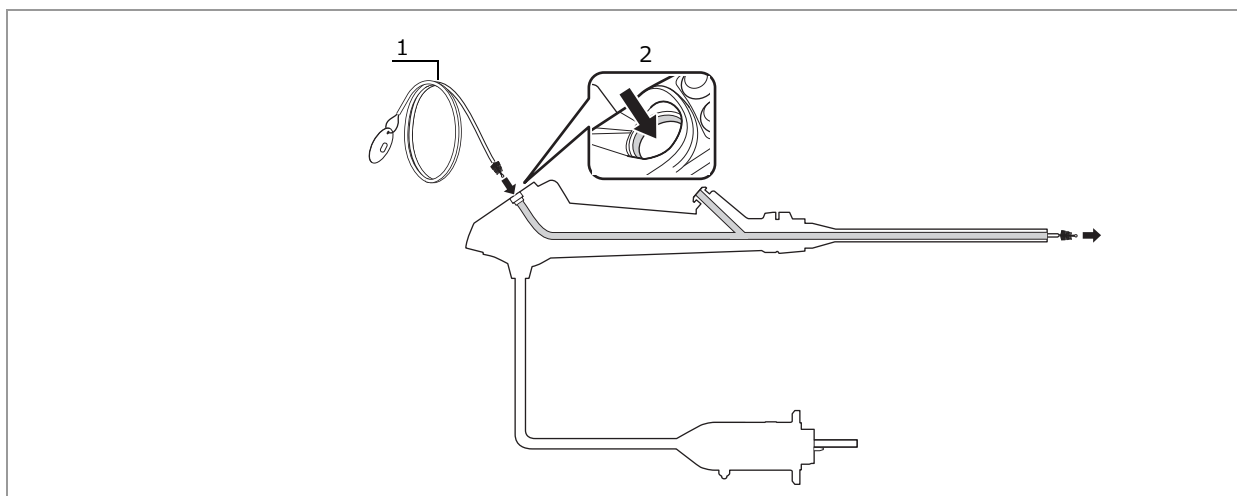

1	吸引チャンネル用洗浄ブラシ
2	吸引シリンダー

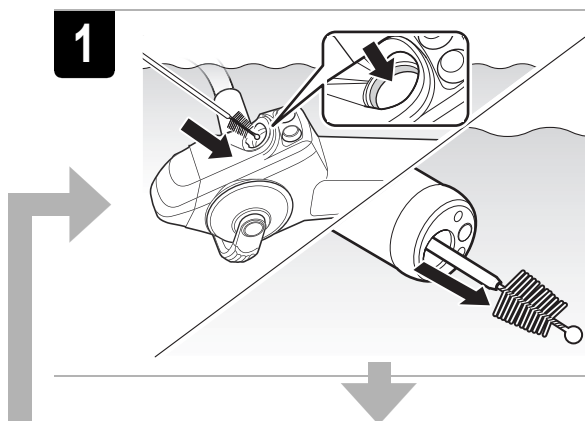

吸引シリンダーから、内視鏡の先端に向かってまっすぐゆっくりと吸引チャンネル用洗浄ブラシを挿入し、内視鏡の鉗子出口からブラシ部分を出します。

1. 準備


2. 外表面の洗浄

3. ブラッシング

4. 洗浄


5. すすぎ

2

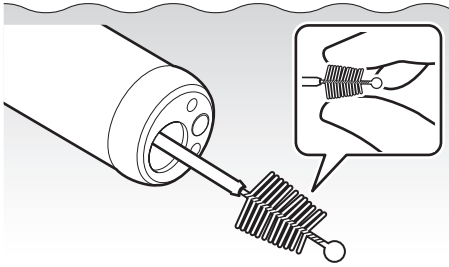


洗浄液中で、ブラシ部分の汚れを指でつまんで除去します。

3

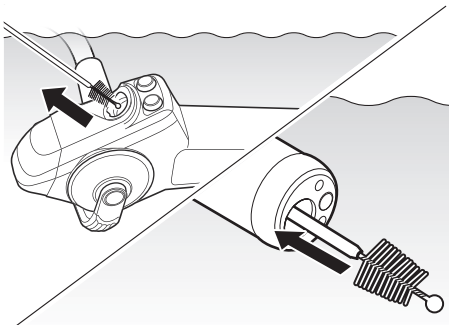

吸引シリンダーから吸引チャンネル用洗浄ブラシをゆっくり引き抜きます。

4

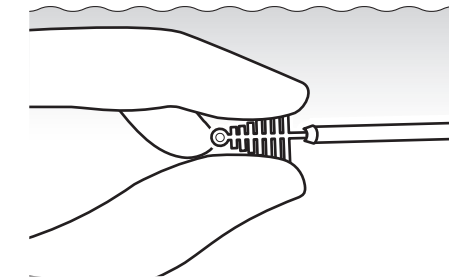

洗浄液中で、ブラシ部分の汚れを指でつまんで除去します。

5

**繰り返し
(合計) 3回
(手順 1 から 4)**

手順 **1** から **4** を更に 2 回以上 (合計 3 回以上) 繰り返し、吸引チャンネル内の異物を完全に除去します。

5.5.5 チャンネルの洗浄

 参照

- 「5.1 リプロセスを行う内視鏡の管路および管路の開口部」

 注意


- 洗浄液製造業者の指示に従って浸漬してください。記載条件より長く内視鏡を洗浄液に浸漬すると故障または損傷の原因となるおそれがあります。

 ポイント

- 送液後、洗浄アダプターのすべての部品が内視鏡に正しく取り付けられていることを確認してください。洗浄アダプターが正しく取り付けられていない場合は、取り付けなおして送液をもう一度繰り返します。


5.5.5.1 洗浄アダプターの点検

1

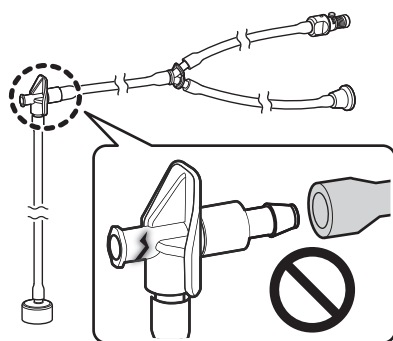

外観に劣化、損傷、管路外れなどの異常がないことを確認します。

2

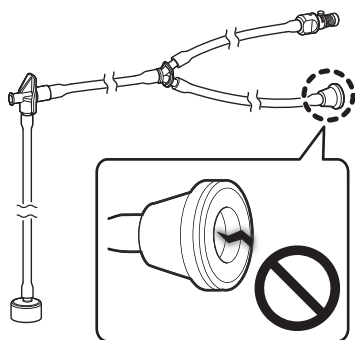


鉗子口ポートの内側に劣化、損傷などの異常がないことを確認します。

 ポイント


- 洗浄アダプターの鉗子口ポートの内側表面にざらつき、キズがある場合は劣化の兆候です。

3

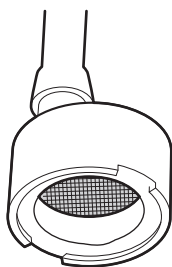


おもりの吸入部にメッシュフィルターが適切な位置に取り付けられていること、および繊維くずなどでふさがれていないことを確認します。

4

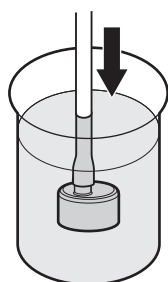


おもりの吸引部を、洗浄液などの液体に浸漬します。

5

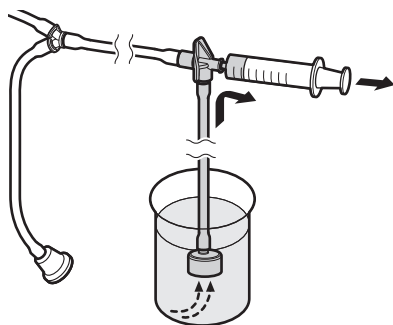


清潔なシリンジを洗浄アダプターのコネクタに取り付け、シリンジのピストンを引いて、シリンジ内に液体が吸引されることを確認します。

6

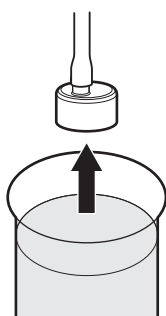

洗浄アダプターのおもりを、洗浄液などの液体から取り出します。

7

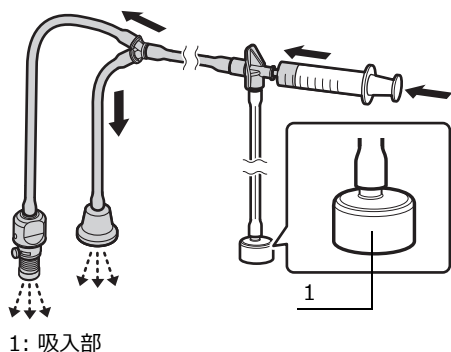


1: 吸入部

シリンジのピストンを押して、チューブに液体を注入し、以下を確認します。

- 液体がチューブから漏れない。
- チューブが詰まっていない。
- 吸入部から液体が垂れない。

8

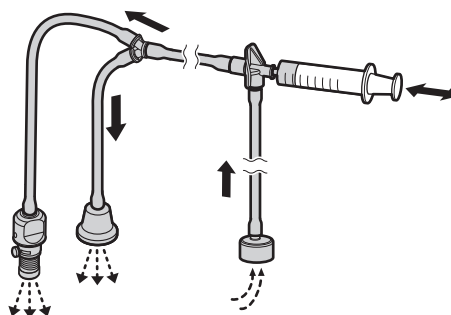


シリンジを引いたり押ししたりして、チューブに空気を送り、液体を排出します。

❗ポイント

- 洗浄アダプターを初めて使用する前には、リプロセスを行う必要はありません。
- 点検の結果、異常があったものは交換してください。

5.5.5.2 洗浄アダプターの取り付け

1

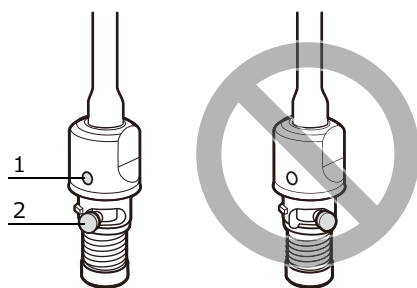

1: 指標
2: 突起部

洗浄アダプターの吸引シリンダーポートの指標と突起部が合っていることを確認します。

❗ポイント

- 吸引シリンダーポートの指標と突起部が合っていない場合は、必ず指標と突起部を合わせてください。

1. 準備


2. 外表面の洗浄

3. ブラッシング

4. 洗浄


5. すすぎ

2

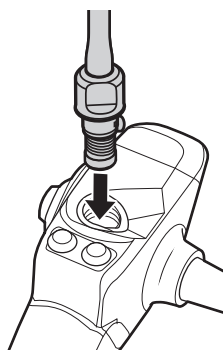

洗浄アダプターの吸引シリンダーポートの把持部を持ち、突起部を内視鏡の吸引シリンダーの溝部に合わせます。

3

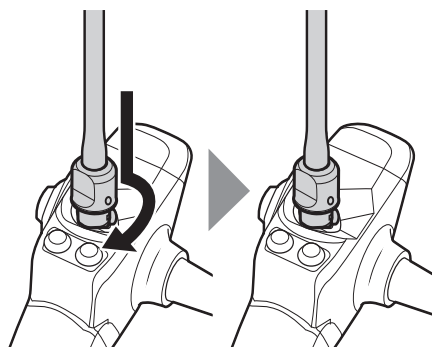


押し込みながら時計回りに回転させ、取り付けます。

! ポイント


- 吸引シリンダーポートが外れないことを確認します。

4

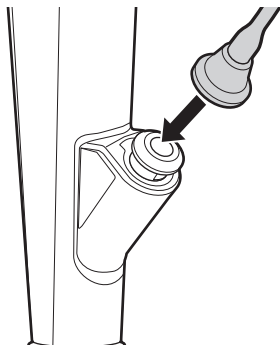

内視鏡の鉗子口に鉗子口ポートを取り付けます。


5.5.5.3 洗浄液の送液

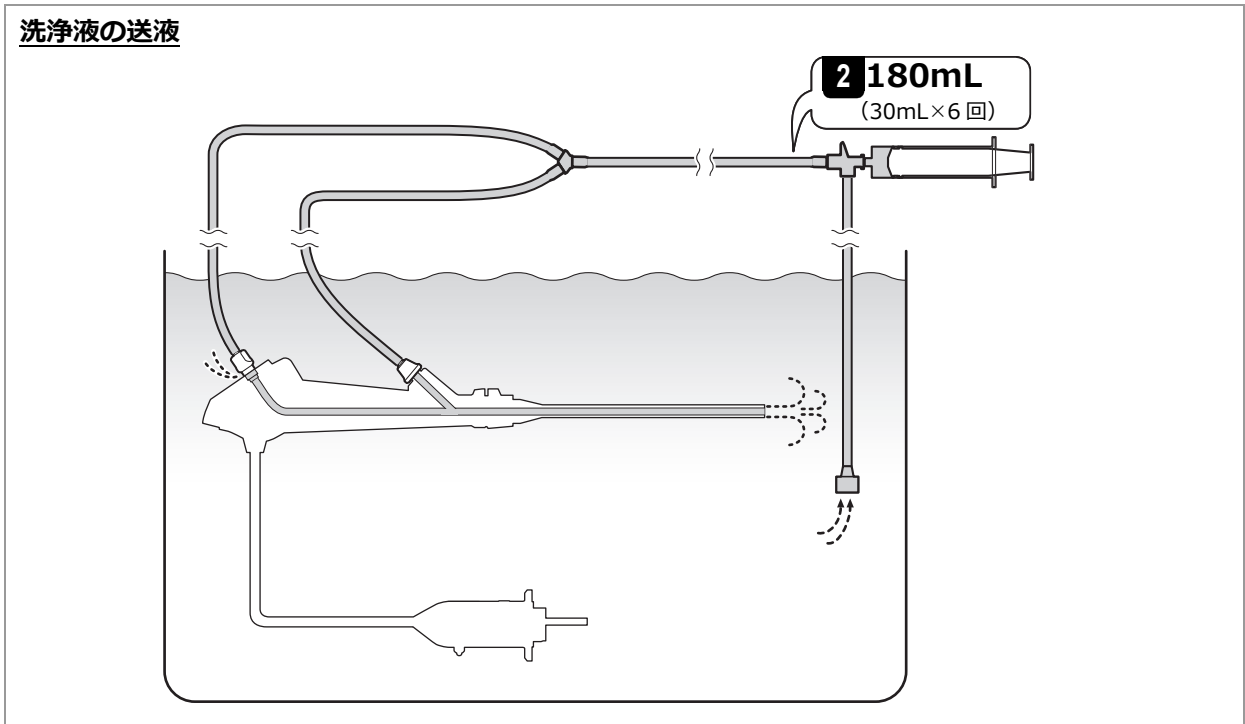

❗ポイント

- 管路への洗浄液の送液は、内視鏡を洗浄液に完全に浸漬した状態で行います。

1

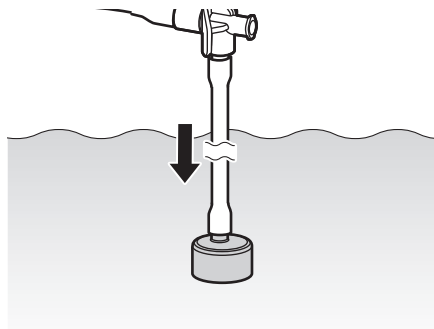

洗浄液に、洗浄アダプターのおもりを浸漬します。

1. 準備


2. 外表面の洗浄

3. ブラッシング

4. 洗浄

5. すすぎ

2

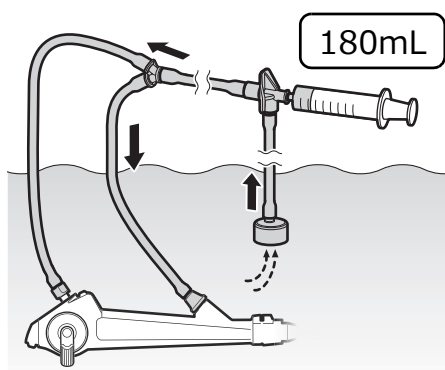


清潔なシリンジで洗浄アダプターのコネクタに、洗浄液を少なくとも 180mL 注入します。

 ヒント


- コネクタにシリンジを取り付け、ピストンを引いて洗浄液をシリンジに吸引します。

3

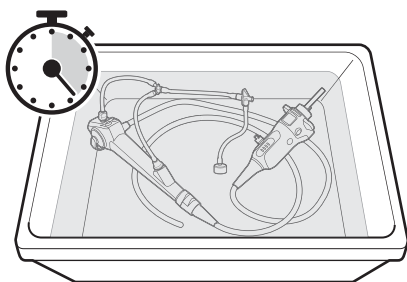


洗浄液製造業者が推奨する温度、濃度、時間に従って、洗浄液に洗浄アダプターを取り付けた内視鏡を完全に浸漬したままにします。

洗浄液のエアパージ

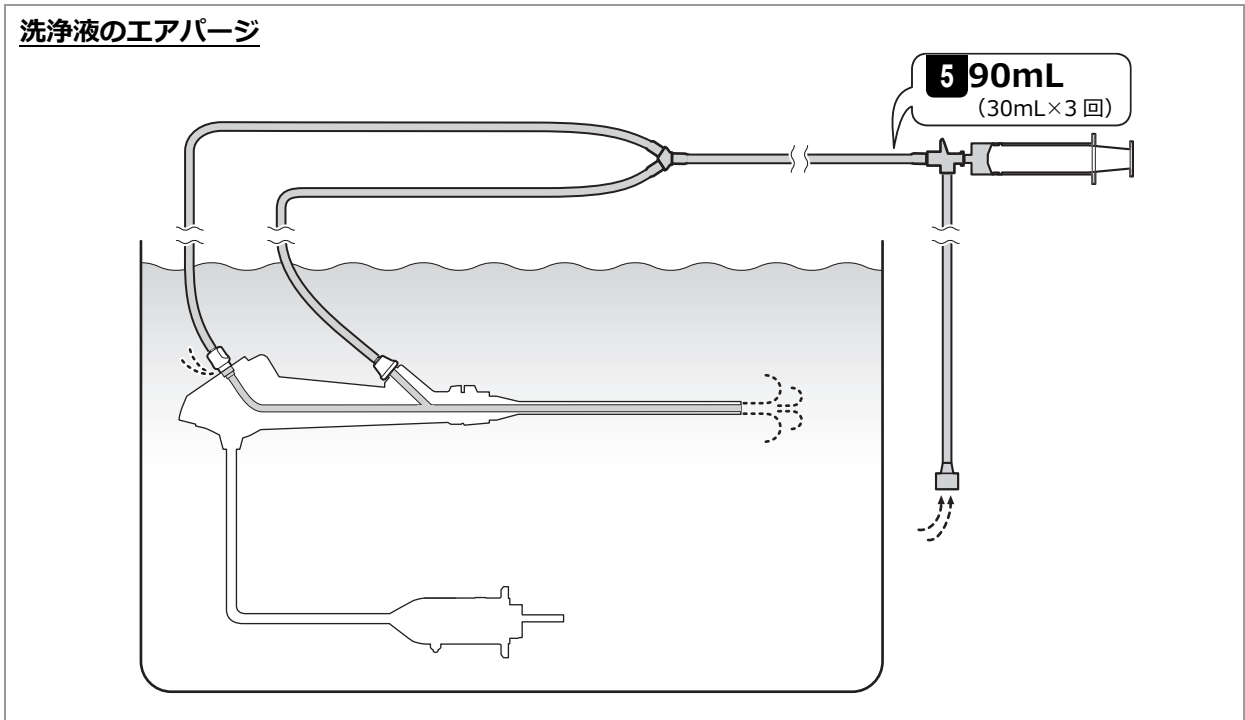


4

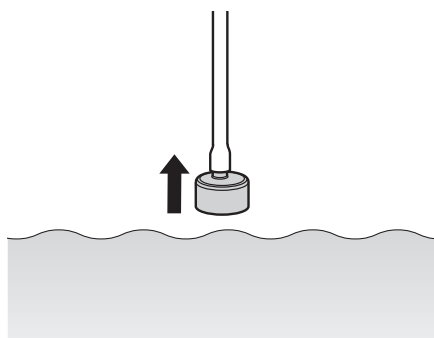

洗浄アダプターのおもりを洗浄液から空気中に取り出します。

5

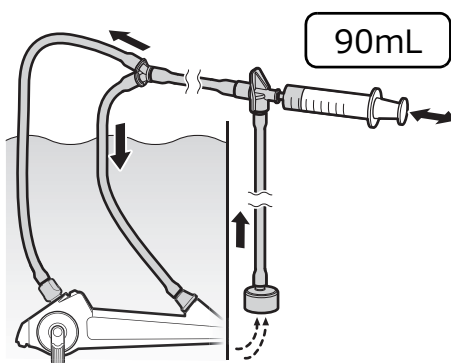

清潔なシリンジで洗浄アダプターのコネクタに、空気を少なくとも90mL注入します。

❗ポイント

- 空気を注入後、ただちに内視鏡の管路のすすぎを行います。

5.5.6 すすぎ


⚠ 警告

- 洗浄後は、残留している洗浄液を清浄水ですすいでください。洗浄液が残っていると、次に行う消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ ポイント

- 送液後、洗浄アダプターのすべての部品が内視鏡に正しく取り付けられていることを確認してください。洗浄アダプターが正しく取り付けられていない場合は、取り付けなおして送液をもう一度繰り返します。

1

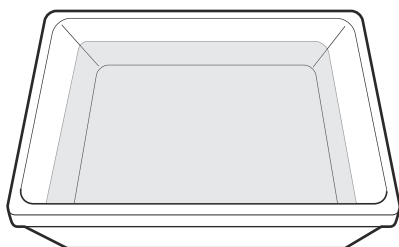


清浄水を清潔な大きな容器に入れます。

📖 参照


- 「2.2 清浄水」

2

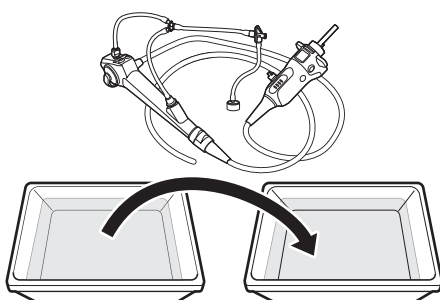


洗浄液から、洗浄アダプターを取り付けたまま内視鏡を取り出し、清浄水に浸漬します。

清浄水の注入

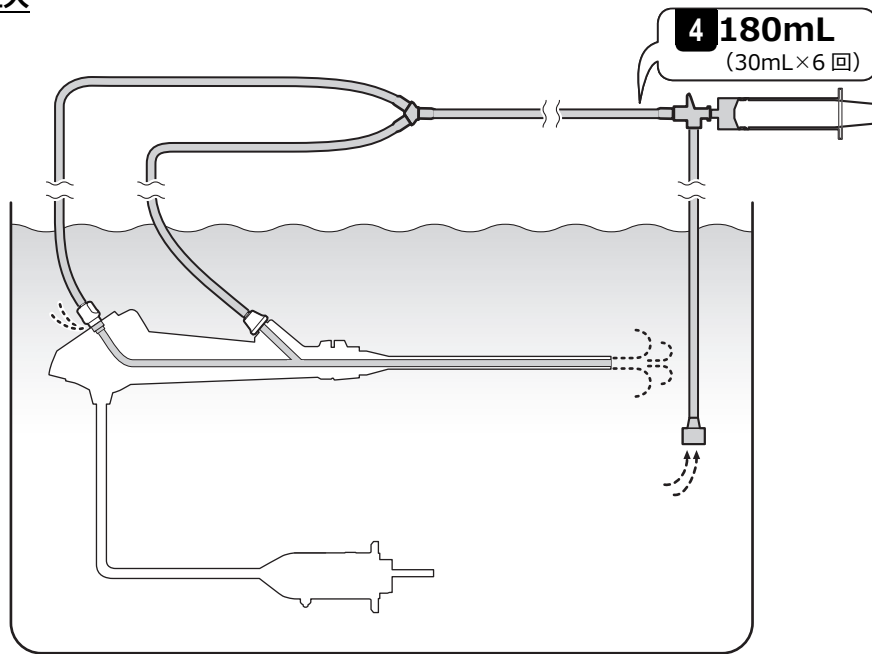


3

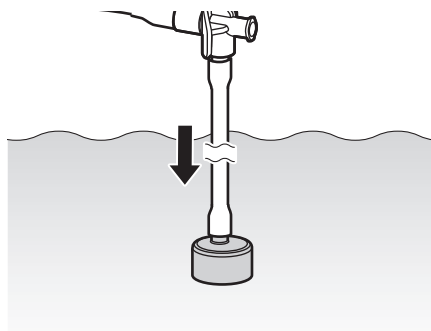

清浄水に、洗浄アダプターのおもりを浸漬します。

4

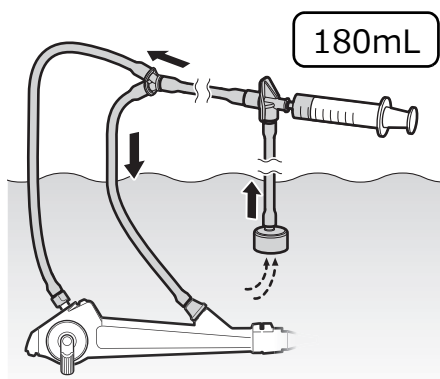

清潔なシリンジで洗浄アダプターのコネクタに、清浄水を少なくとも 180mL 注入します。

1. 準備


2. 外表面の洗浄

3. ブラッシング

4. 洗浄


5. すすぎ

5

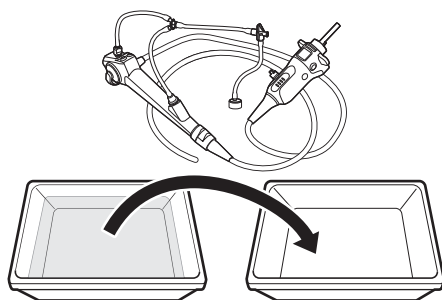


洗浄アダプターを取り付けたまま、内視鏡を清浄水から取り出して、清潔な空の容器に入れます。

清浄水のエアバージ

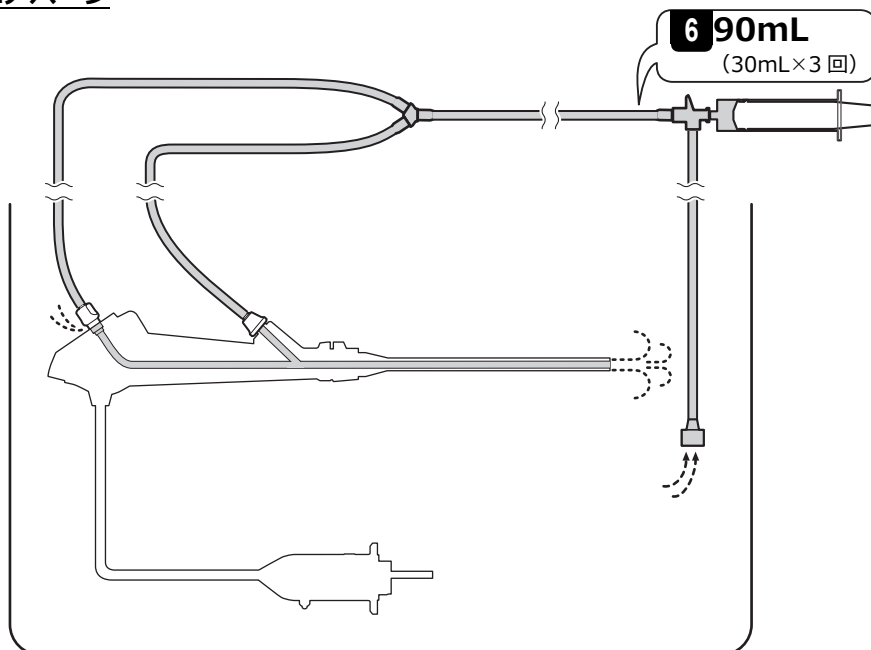


6

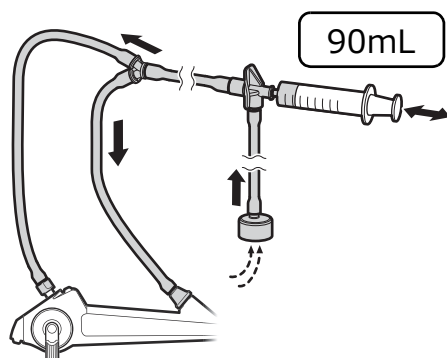


清潔なシリンジで洗浄アダプターのコネクタに、空気を少なくとも 90mL 注入します。

7

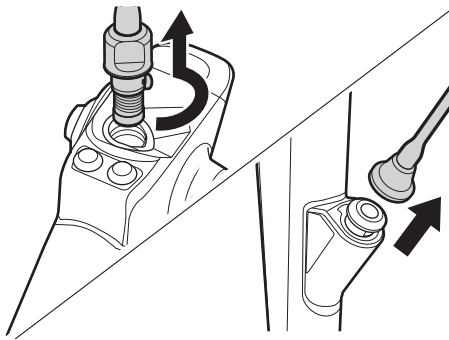


洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡から取り外します。

8

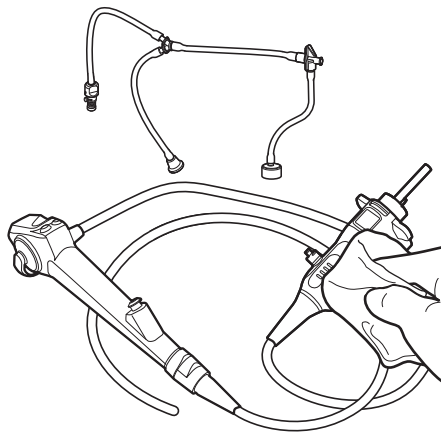

内視鏡と洗浄アダプターに残っている清浄水を乾いた清潔なガーゼで拭き取ります。

9

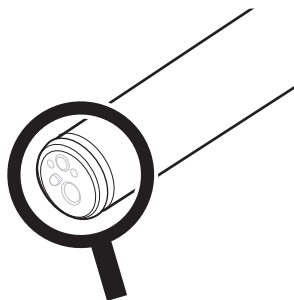

内視鏡の先端部に、汚物が付着していないことを十分に確認します。

!ポイント

- 明るい室内で、拡大鏡やルーペを使用して内視鏡を確認します。

10


汚物が付着している場合は、**繰り返す**

汚物が付着している場合は、マニュアル洗浄の手順をもう一度繰り返します。

5.5.7 マニュアル洗浄が終わったら

マニュアル洗浄が終了したら、内視鏡洗浄消毒機^{※1}を使用した自動洗浄消毒、マニュアル消毒または滅菌を行います。

※ 1 各製造販売業者の『添付文書』および『取扱説明書』に従ってください。

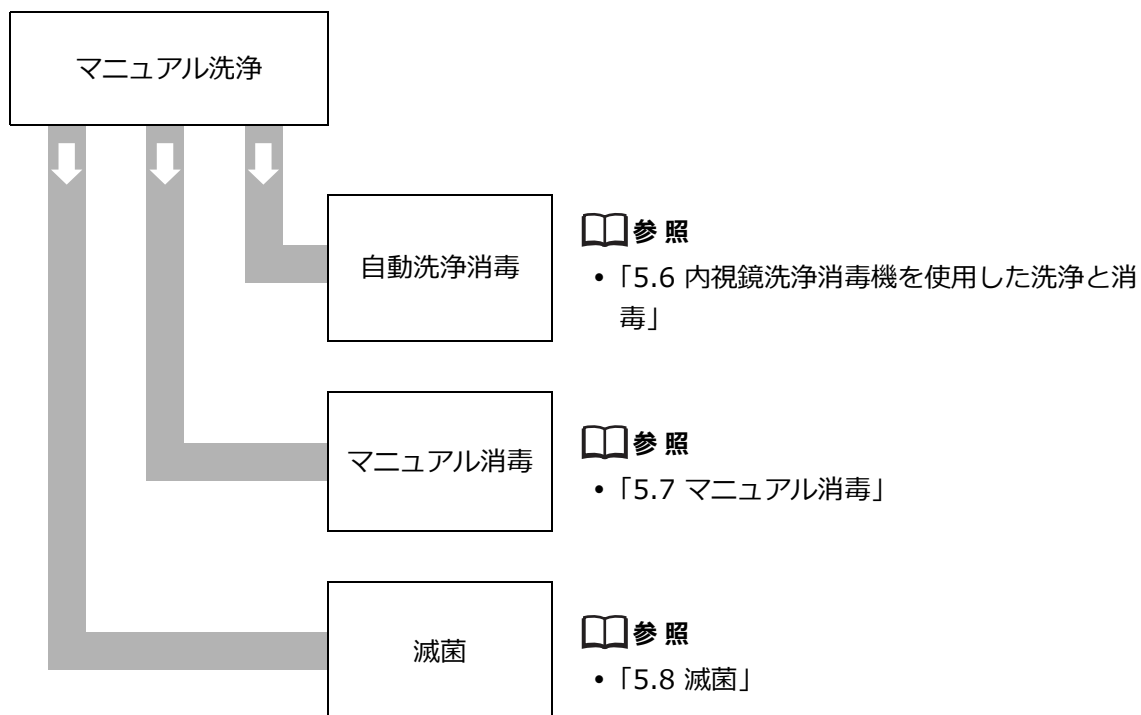

5.6 内視鏡洗浄消毒機を使用した洗浄と消毒

内視鏡洗浄消毒機でリプロセスを行う前に、この取扱説明書に従って、内視鏡のベッドサイド洗浄およびマニュアル洗浄を行ってください。

📖 参照

- 「5.3 ベッドサイド洗浄」
- 「5.5 マニュアル洗浄」

内視鏡洗浄消毒機を使用して洗浄および消毒を行う場合は、富士フィルムが洗浄消毒効果を確認した内視鏡洗浄消毒機 ESR-100、ESR-110、ESR-200 または ESR-210 を使用してください。内視鏡洗浄消毒機の『添付文書』および『取扱説明書』に従って、内視鏡に適応可能な洗浄チューブを使用してください。富士フィルムが洗浄消毒効果を確認していない内視鏡洗浄消毒機を使用する場合は、使用する洗浄液、すべての管路を含む内視鏡全体が洗浄消毒できること、およびその洗浄消毒手順を、各製造販売業者にお問い合わせください。

洗浄および高水準消毒の有効性については、内視鏡洗浄消毒機の製造販売業者にお問い合わせください。内視鏡洗浄消毒機の製造販売業者が確認済みの、リプロセスに関する推奨事項（適用内視鏡、取り外し可能な内視鏡の部品および付属品の洗浄方法など）に従ってください。

内視鏡洗浄消毒機によっては、リプロセス後に乾燥が十分に行われなかった場合があります。内視鏡を洗浄消毒機から取り外した後、内視鏡の表面に水分が残っていたり、管路から液が垂れている場合は、アルコールフラッシュおよびろ過済みの圧縮空気による乾燥手順の追加をご検討ください。

📖 参照

- 「5.7.5 アルコールフラッシュおよび乾燥」

⚠️ 警告

- 内視鏡洗浄消毒機を使用して洗浄および消毒を行う場合は、富士フィルムが洗浄消毒効果を確認した内視鏡洗浄消毒機を使用してください。富士フィルムが洗浄消毒効果を確認していない内視鏡洗浄消毒機を使用すると、洗浄消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれや患者を傷つけるおそれがあります。
- 複数の内視鏡を同時処理可能な内視鏡洗浄消毒機で、本製品同士、あるいは本製品とほかの内視鏡とを組み合わせて2本同時に処理する場合は、内視鏡洗浄消毒機の『添付文書』や『取扱説明書』を参照し、2本同時でのリプロセスが適用される組み合わせであることを確認してください。2本同時でのリプロセスが適用されない組み合わせで行うと、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡洗浄消毒機による洗浄消毒を行う前に、内視鏡の各管路に詰まりがないことを確認してください。管路に詰まりがあると、リプロセスが適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。

⚠️ 注意

- 内視鏡洗浄消毒機を使用した後は内視鏡のスコープコネクターの受電部、通信窓、送信窓とライトガイド入射端を滅菌ガーゼで拭いて、十分に乾燥させてください。受電部、通信窓、送信窓とライトガイド入射端に水滴残りや薬剤の残留物、水あかの堆積があると、内視鏡画像の異常や機器の誤作動の原因となるおそれがあります。

 参照

- 内視鏡洗浄消毒機の『取扱説明書』を参照してください。

5.6.1 内視鏡洗浄消毒機を使用した内視鏡の洗浄と消毒の流れ



5.6.2 必要な器材

ご使用の内視鏡洗浄消毒機の『添付文書』および『取扱説明書』に従って、使用する器材を準備します。

❗ポイント

- 富士フィルム製の内視鏡洗浄消毒機 ESR シリーズを使用する場合は、「表 5.6 適用可能な内視鏡洗浄消毒機と内視鏡に使用する洗浄チューブ」に記載の洗浄チューブを使用してください。
- 消毒液の使用法、使用条件および使用期限、および内視鏡洗浄消毒機特有のリプロセス手順については、各製造販売業者の『添付文書』および『取扱説明書』に従ってください。

表 5.6 適用可能な内視鏡洗浄消毒機と内視鏡に使用する洗浄チューブ

	内視鏡洗浄消毒機	洗浄チューブ
EB-840S、EB-840T	ESR-100, ESR-110, ESR-200, ESR-210	洗浄チューブ (吸引、鉗子口) ESR-000-BR

使用前に消毒液製造販売業者の推奨する方法（試験紙など）で消毒液の効果（最低有効濃度を維持していること）を確認してください。消毒効果が不十分な消毒液は使用しないでください。吸引ボタンを内視鏡洗浄消毒機でリプロセスを行う前に、付属品のマニュアル洗浄を行ってください。

📖参照

- 「6.4 付属品のマニュアル洗浄」

5.6.3 気密テスト

📖参照

- 「5.4 気密テスト」

❗ポイント

- 施設の指針に従って、気密テストの方法を選択してください。内視鏡自動洗浄消毒機の『添付文書』および『取扱説明書』で気密テストの方法を確認してください。
- 他社製の気密テスター（自動洗浄消毒機に内蔵のものまたは独立型）を使用した場合、富士フィルムでは気密テストの有効性確認試験を行っていません。富士フィルム製の内視鏡の気密テストに対応していることを、気密テスターの製造業者に確認してください。

5.6.4 マニュアル洗浄

この取扱説明書の手順に従って、内視鏡のマニュアル洗浄を行ってください。

参照

- 「5.5 マニュアル洗浄」

5.6.5 自動洗浄消毒

内視鏡洗浄消毒機でリプロセスを行う前に、この取扱説明書に従って、内視鏡のベッドサイド洗浄およびマニュアル洗浄を行ってください。

1

内視鏡洗浄消毒機の製造販売業者の指示に従って内視鏡洗浄消毒機に内視鏡を接続してください。

2

ご使用の内視鏡洗浄消毒機の『取扱説明書』に従って、内視鏡のリプロセスを行ってください。

注意

- 内視鏡および付属品のリプロセスが完了したら、冷却後すみやかに内視鏡洗浄消毒機から取り出してください。内視鏡洗浄消毒機から取り出さずに放置すると、内視鏡内部の結露やレンズのくもり、付属品および構成部品の劣化やサビなどが起こり、内視鏡および付属品が故障または損傷するおそれがあります。

ポイント

- リプロセス後、内部が高温になる内視鏡洗浄消毒機から内視鏡を取り出す場合、内視鏡の損傷を防ぐために、内視鏡洗浄消毒機の内部を室温まで冷却してください。

5.6.6 保管

内視鏡洗浄消毒機による洗浄消毒済みの内視鏡を保管します。


参照

- 「7.1 消毒済みの内視鏡および付属品の保管」

5.7 マニュアル消毒

マニュアル洗浄後、マニュアル消毒を行います。





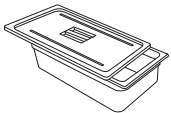
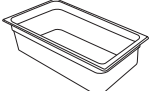
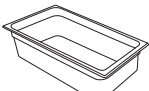
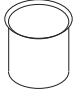
5.7.1 内視鏡のマニュアル消毒の流れ

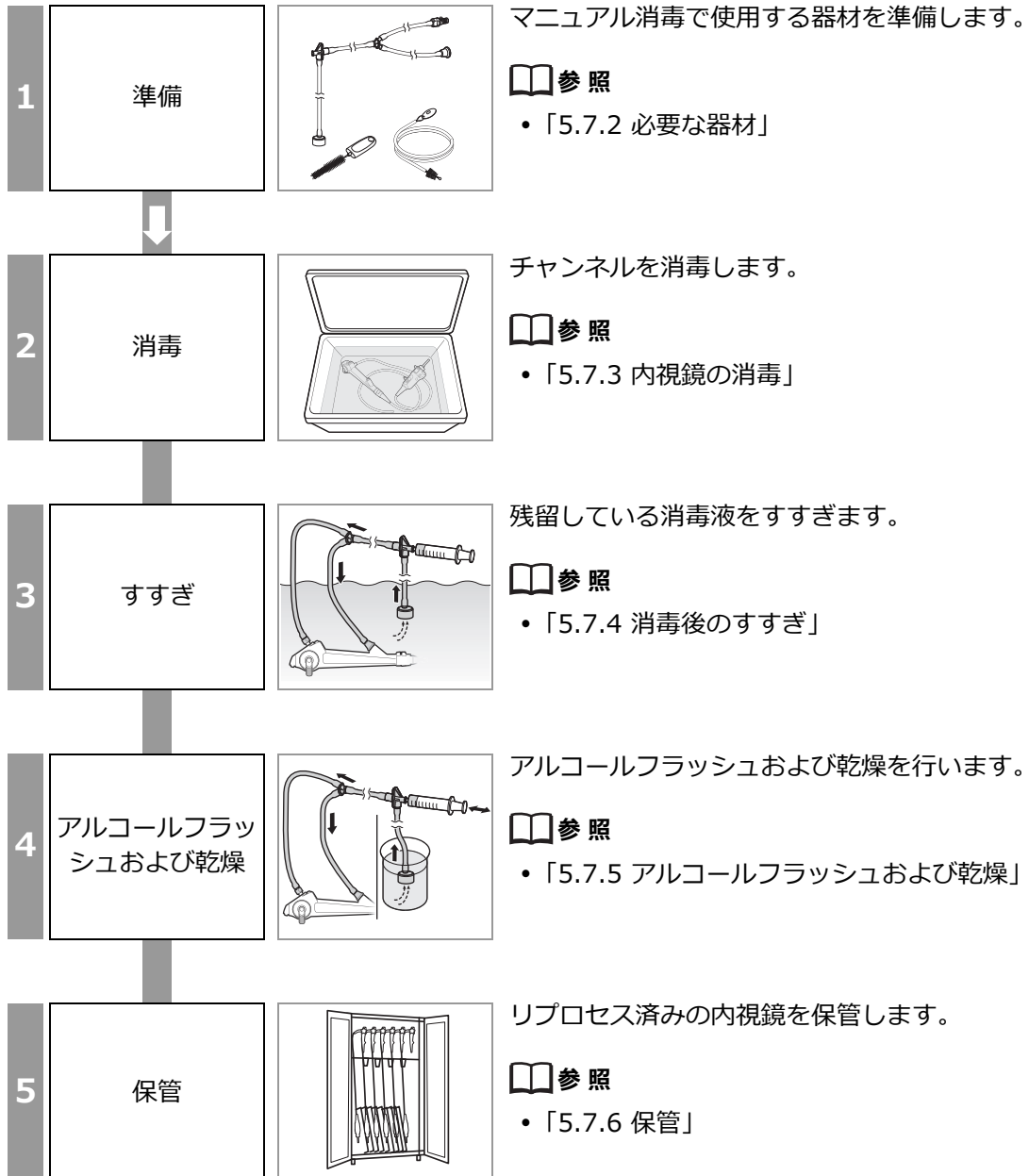

5.7.2 必要な器材

❗ポイント

- 消毒後の内視鏡および付属品が再汚染されないよう、内視鏡および付属品の消毒後のすすぎと乾燥には滅菌済み器材（容器、ガーゼ、シリンジなど）の使用を推奨します。滅菌済みの器材が使用できない場合は、感染の原因となる菌によって内視鏡および付属品が再汚染されないように、清潔な器材を使用してください。

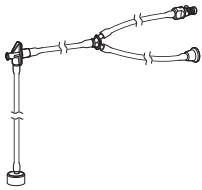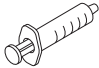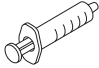	<p>洗淨アダプター CA-616</p>
	<p>清潔なシリンジ (30mL) ※1</p>
	<p>滅菌済みシリンジ (30mL) ※2</p>
	<p>滅菌ガーゼ</p>
	<p>清潔で大きなフタ付き容器（消毒液用）※3</p>
	<p>滅菌済みの大きな容器（滅菌水用）※3</p>
	<p>滅菌済みの大きな容器（アルコールフラッシュおよび乾燥用）</p>
	<p>滅菌済みの容器（アルコール用）</p>

1. 準備

2. 消毒

3. すすぎ

4. アルコールフラッシュおよび乾燥

5. 保管

- 滅菌綿棒
- 消毒液（「2.4 消毒液」参照）
- 消毒後のすすぎに用いる水（「2.5 すすぎに用いる水」参照）
- アルコール（「2.6 アルコール」参照）

- ※ 1 ルアーロック式またはルアースリップ式のシリンジ（30mL）を用意してください。消毒液の送液に使用します。
- ※ 2 ルアーロック式またはルアースリップ式のシリンジ（30mL）を用意してください。消毒後のエアパージ、すすぎ、アルコールフラッシュおよび乾燥に使用します。
- ※ 3 縦 40× 横 40× 深さ 15 cm 以上のものを使用してください。

1 マニュアル消毒で使用する器材を準備します。

❗ポイント

- 消毒液の使用方法、使用条件および使用期限については、消毒液製造販売業者の『添付文書』および『取扱説明書』に従ってください。
- 使用前に消毒液製造販売業者の推奨する方法（試験紙など）で消毒液の効果（最低有効濃度を維持していること）を確認してください。消毒効果が不十分な消毒液は使用しないでください。

5.7.3 内視鏡の消毒


⚠ 警告

- 洗浄アダプターが内視鏡から取り外されていることを確認してから、消毒液に浸漬してください。浸漬中は、内視鏡および洗浄アダプターのすべての外表面が消毒液に完全に浸漬していることを確認してください。洗浄アダプターが内視鏡に取り付いたままの状態では、内視鏡および洗浄アダプターの接続部に消毒液が十分に触れず、適切な消毒が行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡の先端、吸引シリンダーポートの接続部から気泡が出なくなるまで、内視鏡のすべての管路に消毒液をシリンジで注入してください。気泡が残っていると消毒液が十分に触れないため、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のすべての開口部や溝に、シリンジおよび洗浄アダプターを使用して消毒液を注入し、外表面を拭いて、気泡を完全に除去してください。気泡が残っていると消毒液が十分に触れないため、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡を消毒液に浸漬した後は、滅菌済みの器材（滅菌シリンジや滅菌ガーゼなど）を使用してください。滅菌済みの器材を使用しない場合、内視鏡が再汚染され感染の原因となるおそれがあります。

📌 ポイント

- 各管路への消毒液の送液は、内視鏡を消毒液に完全に浸漬した状態でいきます。
- シリンジで消毒液を吸引するとき、ゆっくりと行うことで気泡の発生を抑えることができます。
- 消毒液を勢いよく送液することで、気泡を除去しやすくなります。
- 送液後、洗浄アダプターのすべての部品が内視鏡に正しく取り付けられていることを確認してください。洗浄アダプターが正しく取り付けられていない場合は、取り付けなおして送液をもう一度繰り返します。

1

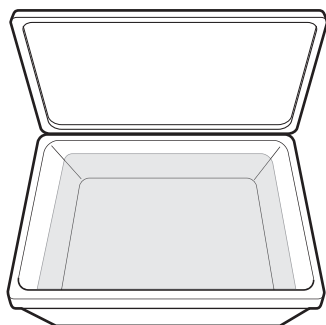

消毒液製造販売業者が推奨する温度および濃度の消毒液を清潔で大きなフタ付き容器に入れます。

📖 参照

- 「2.4 消毒液」

1. 準備


2. 消毒

3. すすぎ

4. アルコールフラッシュおよび乾燥


5. 保管

2

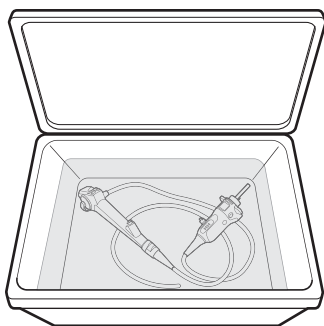

消毒液に、内視鏡を完全に浸漬します。


3

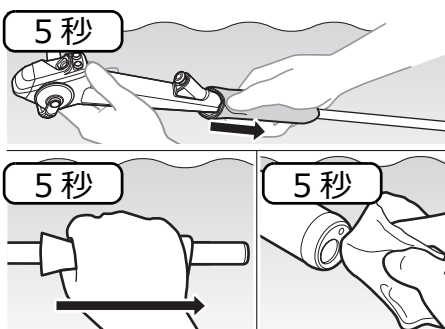

消毒液中で、内視鏡の各部を、清潔なガーゼで少なくとも5秒間ずつ拭きます。

- 軟性部
- わん曲部
- 先端部

4

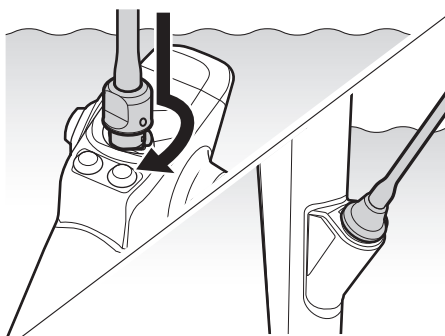


消毒液中で、洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡に取り付けます。


📖 参照

- 「5.5.5.2 洗浄アダプターの取り付け」

消毒液の送液

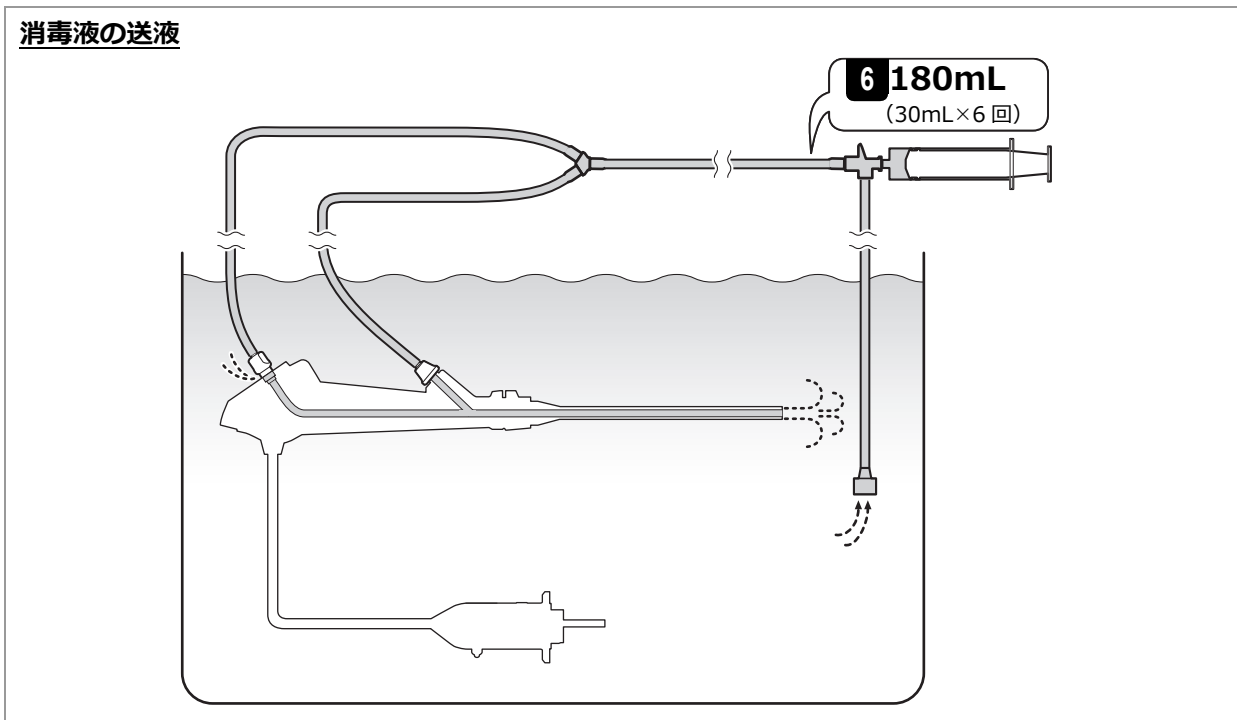

5

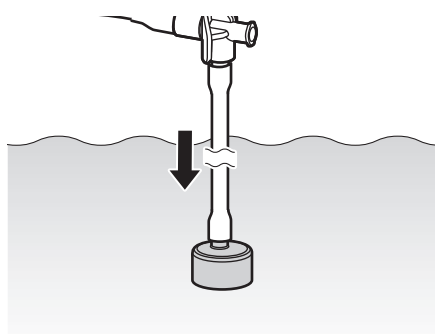


消毒液に、洗浄アダプターのおもりを浸漬します。

！ポイント

- 消毒液に内視鏡を完全に浸漬した状態で、手順 **6** から **15** を行います。

6

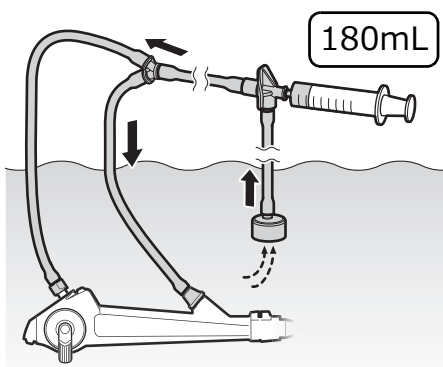

内視鏡の先端部、吸引シリンダーポートから気泡が出なくなるまで、洗浄アダプターのコネクタに、消毒液を少なくとも 180mL 注入します。

💡ヒント

- コネクタにシリンジを取り付け、ピストンを引いて消毒液をシリンジに吸引します。

1. 準備


2. 消毒

3. すすぎ

4. アルコールフラッシュおよび乾燥

5. 保管

7

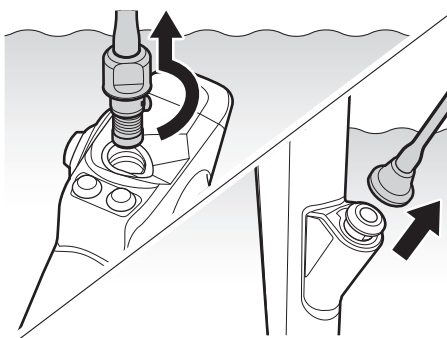


消毒液中で、洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡から取り外します。

！ポイント


- 洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡から取り外す場合、管路内に空気が入らないように、消毒液から内視鏡が露出しないように注意してください。

内視鏡の各部名称

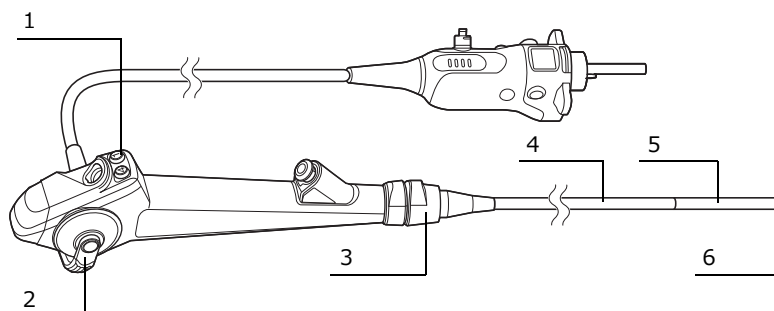

1	スコープスイッチ
2	アングルレバー
3	回転リング
4	軟性部
5	わん曲部
6	先端部


8

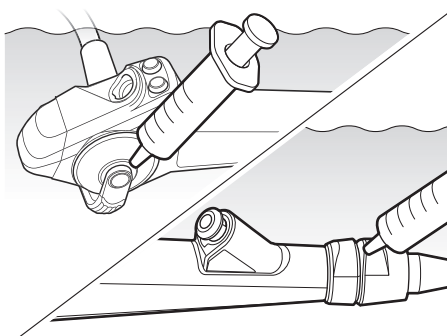

清潔なシリンジに消毒液を入れて、消毒液中で、内視鏡の各部の溝から気泡が出なくなるまで、消毒液を注入します。

- アングルレバー
- 回転リング


9

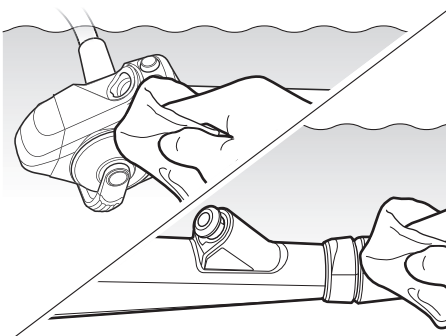

消毒液中で、内視鏡の各部を、清潔なガーゼで十分に拭きます。


- アングルレバー
- 回転リング
- スコープスイッチ

10

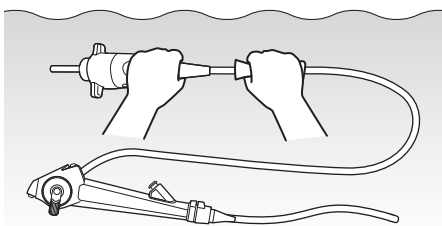


消毒液中で、内視鏡の他の各部を、清潔なガーゼで十分に拭きます。

11

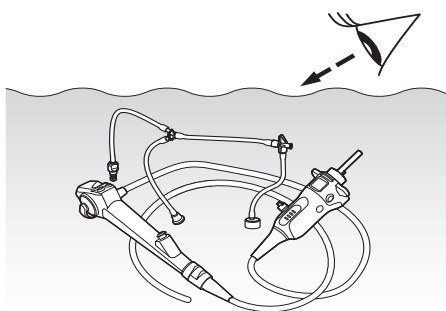


内視鏡の外表面に気泡がないことを確認します。気泡が残っている場合は、気泡を清潔なガーゼで拭き取ります。

12

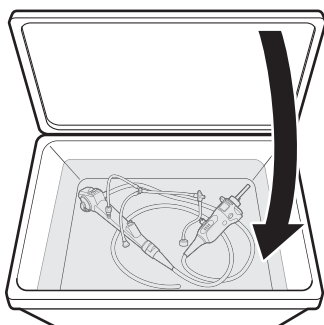

消毒液製造販売業者が推奨する温度、濃度、時間に従って、消毒液中に内視鏡および洗浄アダプターを完全に浸漬したままにします。消毒している間は、清潔で大きなフタ付き容器のフタをします。

13

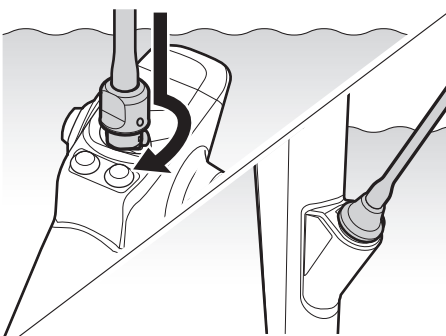

清潔で大きなフタ付き容器のフタを開けて、洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡に取り付けます。

1. 準備


2. 消毒

3. すすぎ


4. アルコールフラッシュおよび乾燥

5. 保管

消毒液のエアパージ

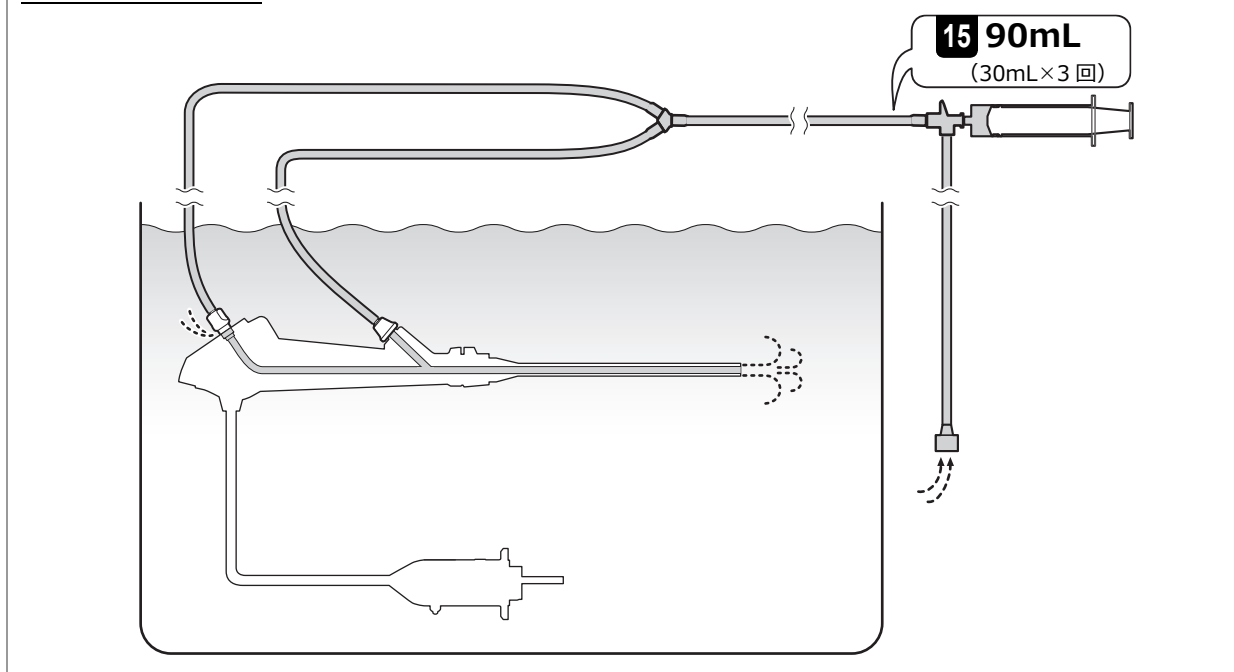

14

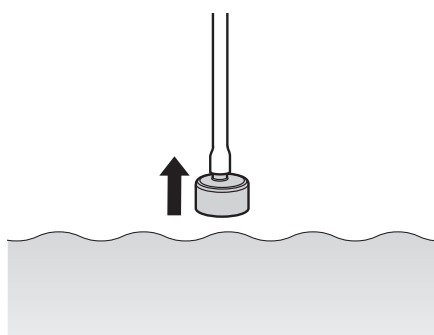


洗浄アダプターのおもりを消毒液から空気中に取り出します。

❗ポイント

- 以降の手順では滅菌済みシリンジを使用してください。

15

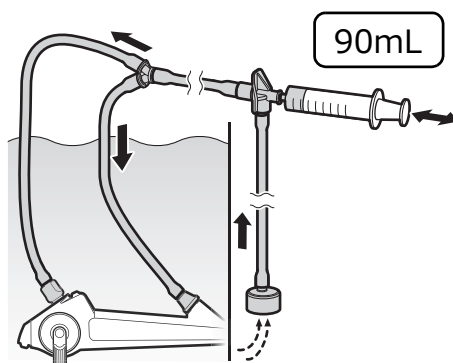

滅菌済みシリンジで洗浄アダプターのコネクタに、空気を少なくとも 90mL 注入します。

❗ポイント

- 空気を注入後、ただちに内視鏡の管路のすすぎを行います。

5.7.4 消毒後のすすぎ

⚠ 注意

- 内視鏡の消毒後は、残留している消毒液を滅菌水ですすいでください。内視鏡に消毒液が残っていると、患者の体内に流れ込み患者を傷つけるおそれがあります。


❗ ポイント

- 消毒後のすすぎでは滅菌済みシリンジを使用します。
- 送液後、洗浄アダプターのすべての部品が内視鏡に正しく取り付けられていることを確認してください。洗浄アダプターが正しく取り付けられていない場合は、取り付けなおして送液をもう一度繰り返します。

📖 参照

- 管路のすすぎ、乾燥の工程に使用する水質や空気の質、乾燥剤としてのアルコールの使用については、この取扱説明書を参照してください。
 - 「2.5 すすぎに用いる水」
 - 「2.6 アルコール」

1

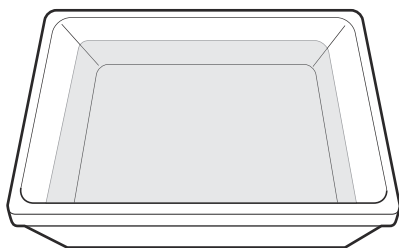


滅菌水を滅菌済みの大きな容器に入れます。

📖 参照

- 「2.5 すすぎに用いる水」

2

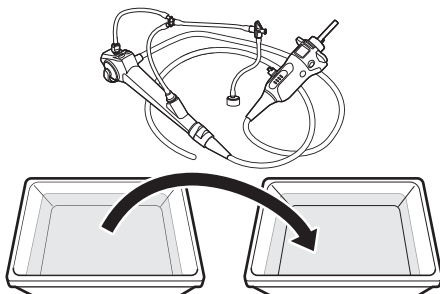

消毒液から、洗浄アダプターを取り付けたまま内視鏡を取り出し、滅菌水に入れます。

1. 準備


2. 消毒

3. すすぎ

4. アルコールフラッシュおよび乾燥

5. 保管

3

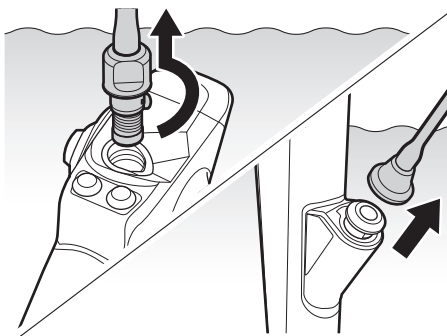


滅菌水中で、洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡から取り外します。

❗ポイント


- 以降の手順では滅菌済みガーゼを使用してください。

4

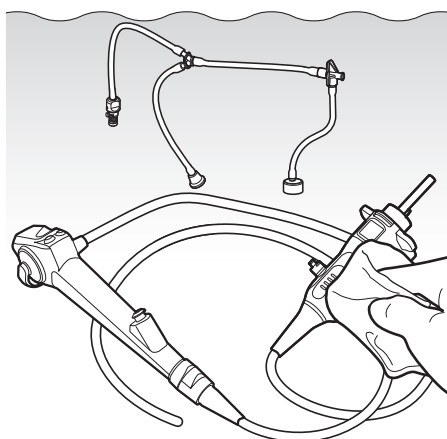

滅菌水中で、内視鏡および洗浄アダプターの表面を滅菌ガーゼで拭きます。

5

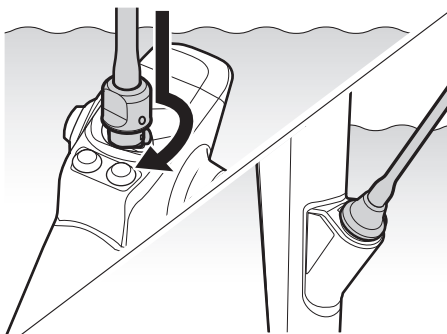


滅菌水中で、洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡に取り付けます。


📖参照

- 「5.5.5.2 洗浄アダプターの取り付け」

滅菌水の注入

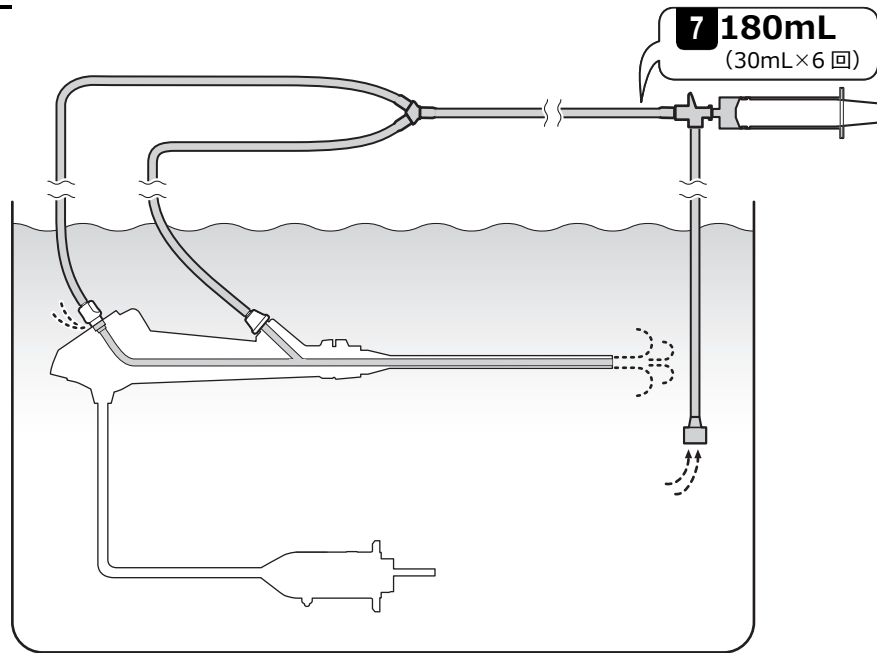


6

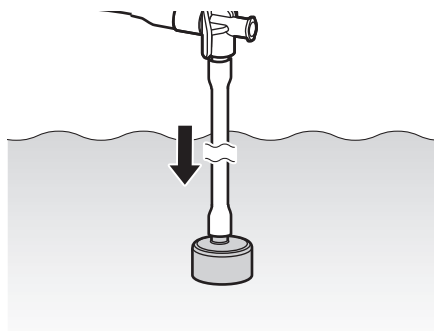

滅菌水に、洗浄アダプターのおもりを浸漬します。

7

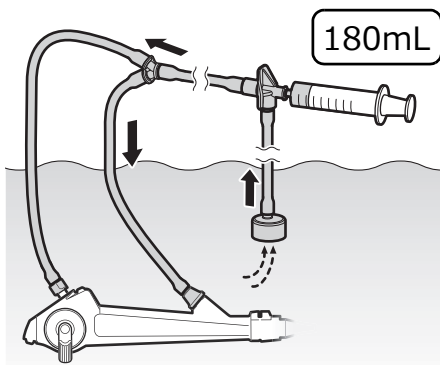

滅菌済みシリンジで洗浄アダプターのコネクタに、滅菌水を少なくとも180mL注入します。

1. 準備


2. 消毒

3.すすぎ

4. アルコールフラッシュおよび乾燥


5. 保管

8

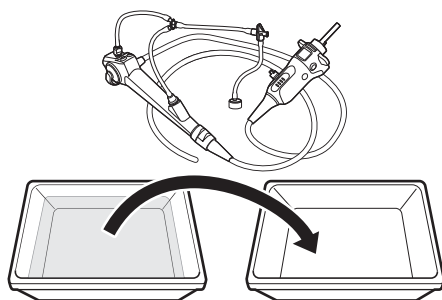


滅菌水から、洗浄アダプターを取り付けたまま内視鏡を取り出し、滅菌済みの空の容器に入れます。

滅菌水のエアバージ

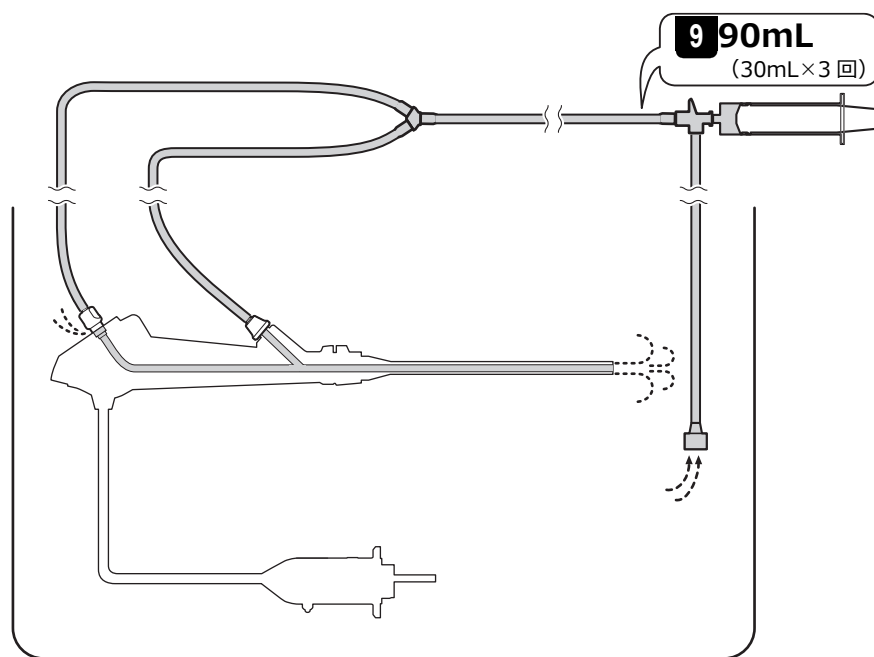


9

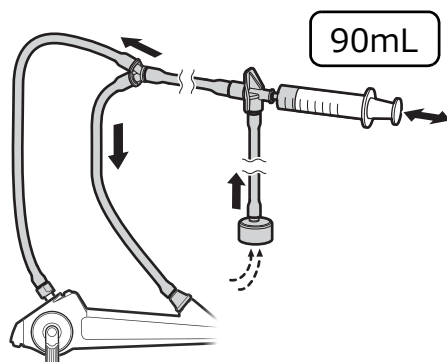

滅菌済みシリンジで洗浄アダプターのコネクタに、空気を少なくとも 90mL 注入します。

10

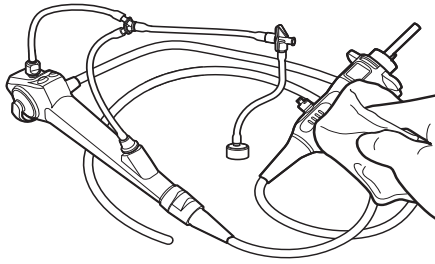

内視鏡と洗浄アダプターに残っている滅菌水を滅菌ガーゼで拭き取ります。

5.7.5 アルコールフラッシュおよび乾燥

⚠ 警告

- 消毒液をすすいだ後は、内視鏡を十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な場合、菌が繁殖し、感染の原因となるおそれがあります。


⚠ 注意

- 内視鏡は十分に乾燥させてください。先端部の対物レンズの乾燥が不十分な場合、水あかが堆積し、内視鏡画像が不鮮明になるおそれがあります。
- アルコールの除去に使用する圧縮空気の圧力は 230kPa 以下に設定してください。それ以上の圧力で使用すると、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。
- すすぎの後に内視鏡のスコープコネクタの受電部、通信窓、送信窓とライトガイド入射端を滅菌ガーゼで拭いて、十分に乾燥させてください。受電部、通信窓、送信窓やライトガイド入射端に水滴残りや薬剤の残留物、水あかの堆積があると、内視鏡画像の異常や機器の誤作動の原因となるおそれがあります。

❗ ポイント

- アルコールフラッシュおよびろ過済みの圧縮空気の注入により、内視鏡のすべてのチャンネルを完全に乾燥させてください。
- 送液後、洗浄アダプターのすべての部品が内視鏡に正しく取り付けられていることを確認してください。洗浄アダプターが正しく取り付けられていない場合は、取り付けなおして送液をもう一度繰り返します。

1

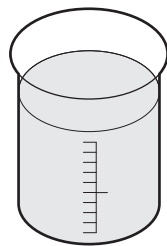


滅菌済みの小さな容器にアルコールを入れます。

📖 参照


- 「2.6 アルコール」

2

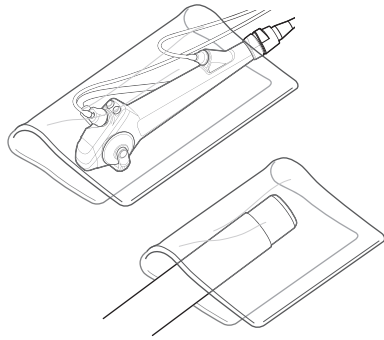


各管路の開口部からアルコールが飛び散らないように、内視鏡の先端部および操作部を滅菌ガーゼで包みます。

アルコールフラッシュ

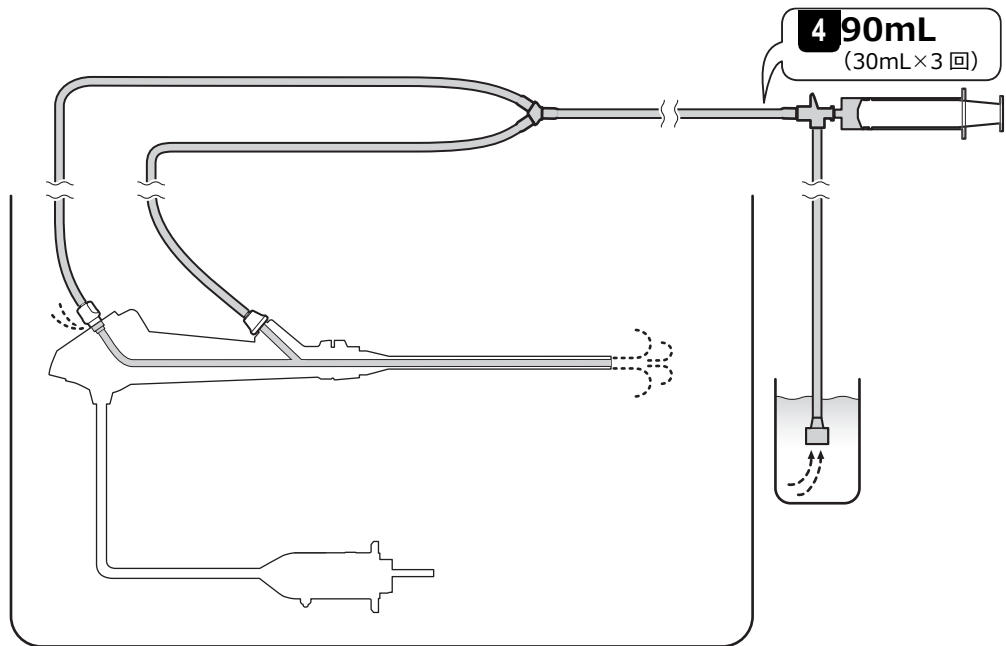

3

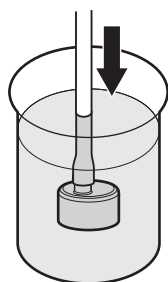

アルコールに、洗浄アダプターのおもりを浸漬します。

1. 準備


2. 消毒

3. すすぎ

4. アルコールフラッシュおよび乾燥


5. 保管

4

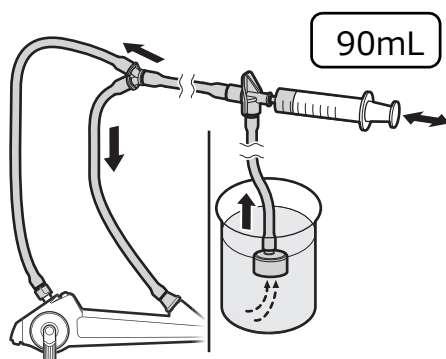


滅菌済みシリンジで洗浄アダプターのコネクターに、アルコールを少なくとも 90mL 注入します。

5

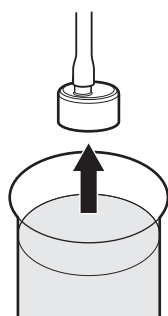

アルコールから、洗浄アダプターのおもりを取り出します。

6

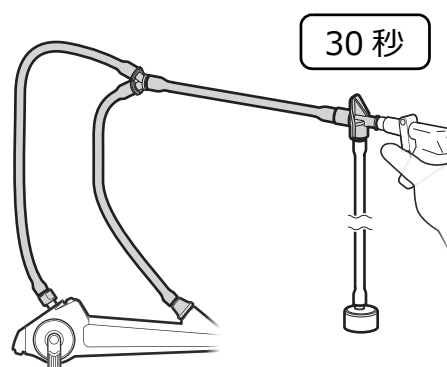


洗浄アダプターのコネクターに、200～230kPa の圧縮空気を少なくとも 30 秒間注入します。

❗ポイント


- アルコールフラッシュ後に圧縮空気を注入することで、管路の乾燥を容易に行えます。

7

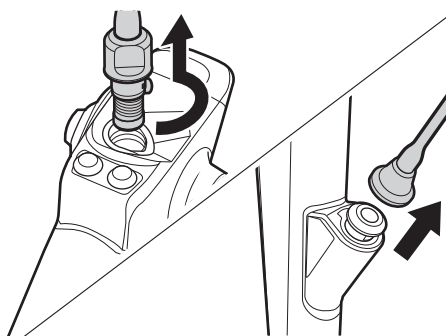


洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡から取り外します。

8

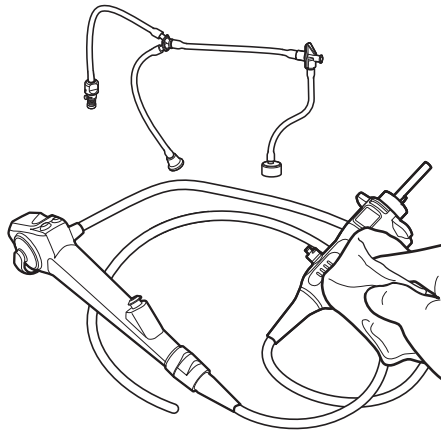

内視鏡と洗浄アダプターに残っているアルコールを滅菌ガーゼで拭き取ります。

9

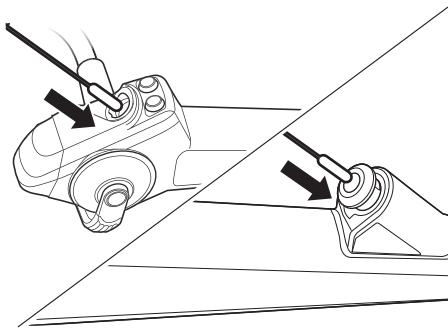

吸引シリンダーおよび鉗子口の内側に残っている水滴を滅菌綿棒で拭き取ります。

5.7.6 保管

消毒済みの内視鏡を保管します。

📖 参照


- 「7.1 消毒済みの内視鏡および付属品の保管」

5.8 滅菌

ベッドサイド洗浄、マニュアル洗浄および乾燥後、消毒の代わりに、エチレンオキシドガス滅菌またはステラッド滅菌を行うこともできます。

5.8.1 内視鏡の滅菌の流れ

5.8.1.1 内視鏡および洗浄アダプターのエチレンオキシドガス滅菌、または内視鏡のステラッド滅菌

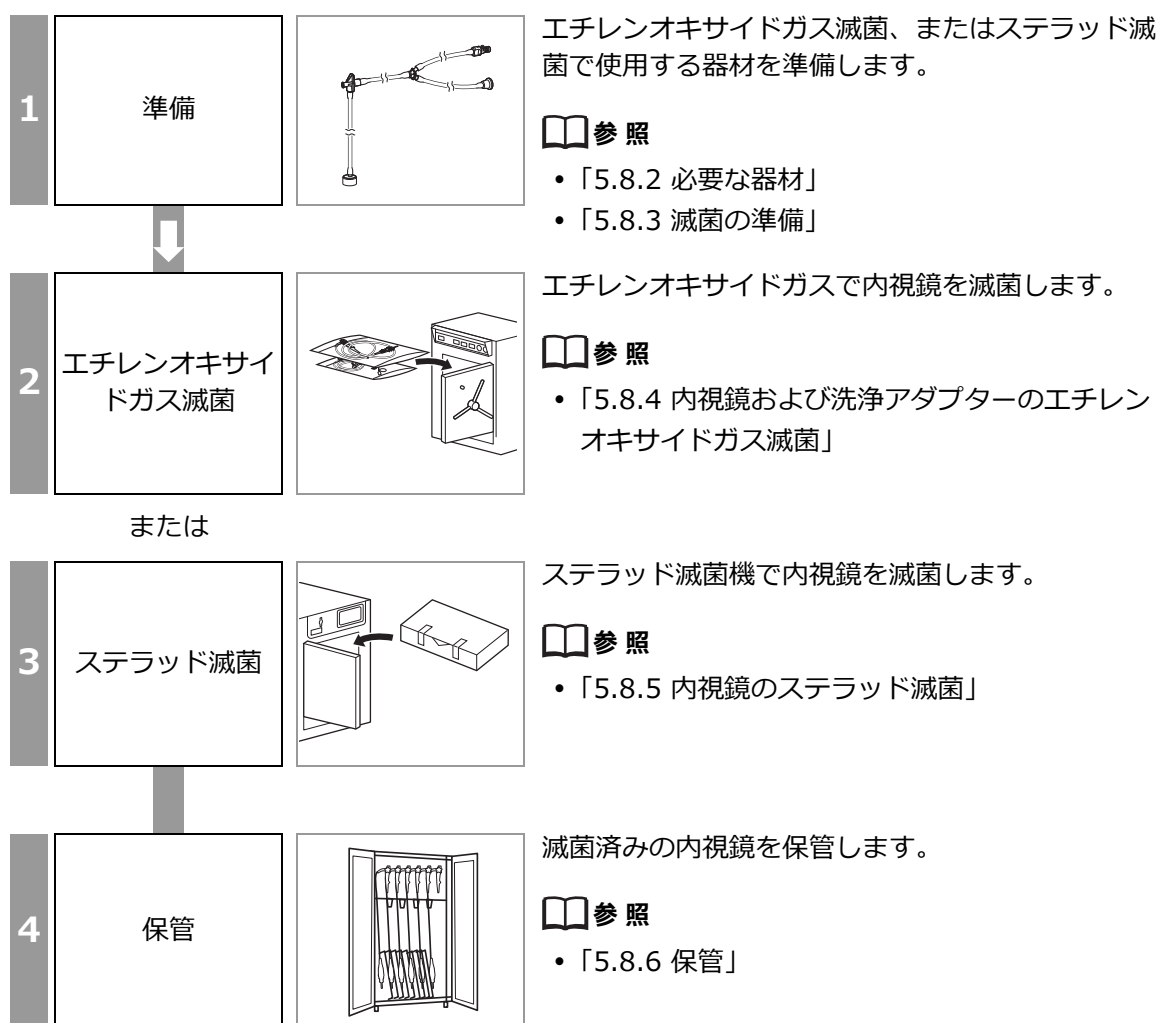

 参照

- 「5.8.2 必要な器材」
- 「5.8.3 滅菌の準備」

 参照

- 「5.8.4 内視鏡および洗浄アダプターのエチレンオキシドガス滅菌」

 参照

- 「5.8.5 内視鏡のステラッド滅菌」

 参照

- 「5.8.6 保管」


5.8.1.2 洗浄アダプターのオートクレーブ滅菌

洗浄アダプターのオートクレーブ滅菌は「6.6.2 オートクレーブ滅菌」を参照してください。

 参照

- 「6.6.2 オートクレーブ滅菌」

5.8.2 必要な器材

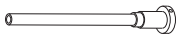	通気アダプター AD-7
	洗浄アダプター CA-616
	滅菌済みシリンジ (30mL) ※1
	滅菌ガーゼ

- 滅菌綿棒
- 滅菌パックまたはステラッド滅菌に適した梱包材

※ 1 ルアーロック式またはルアースリップ式のシリンジ (30mL) を用意してください。

1 滅菌で使用する器材を準備します。

5.8.3 滅菌の準備


⚠ 注意

- 圧縮空気の圧力は 230kPa 以下に設定したろ過済み空気を使用して、内視鏡を乾燥させます。圧力が 230kPa を超えるろ過済み空気を使用すると、内視鏡が故障するおそれがあります。

📌 ポイント

- 送液後、洗浄アダプターのすべての部品が内視鏡に正しく取り付けられていることを確認してください。洗浄アダプターが正しく取り付けられていない場合は、取り付けなおして送液をもう一度繰り返します。

1

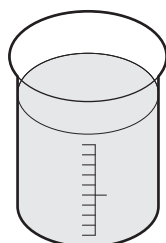


滅菌済みの小さな容器にアルコールを入れます。

📖 参照

- 「2.6 アルコール」

2

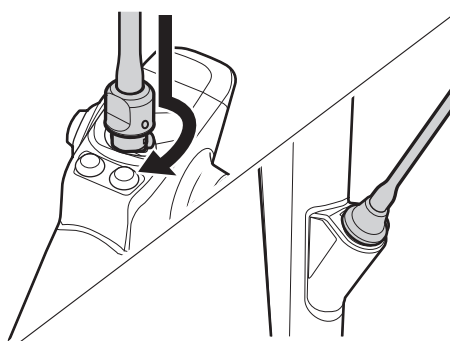


洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡に取り付けます。

📖 参照


- 「5.5.5.2 洗浄アダプターの取り付け」

3

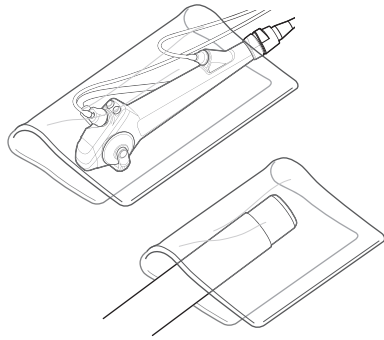


各管路の開口部からアルコールが飛び散らないように、内視鏡の先端部および操作部を滅菌ガーゼで包みます。

アルコールフラッシュ

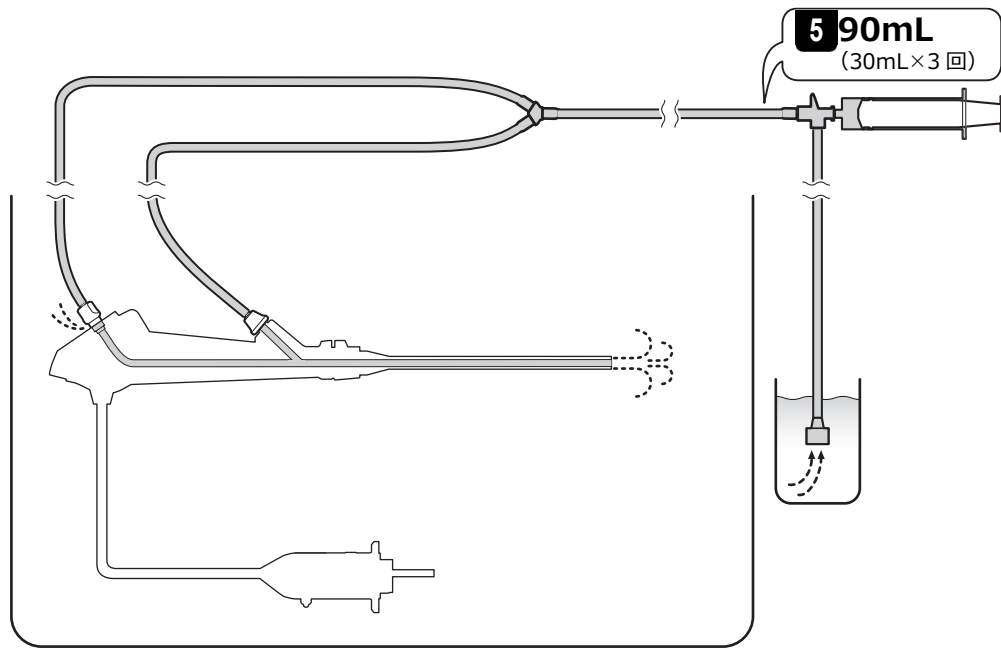


4

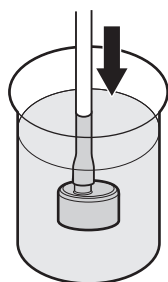

アルコールに、洗浄アダプターのおもりを浸漬します。

5

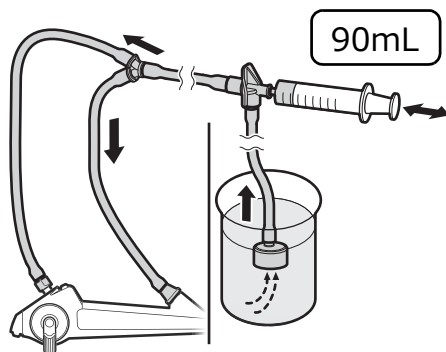


滅菌済みシリンジで洗浄アダプターのコネクターに、アルコールを少なくとも 90mL 注入します。

💡 ヒント


- コネクターにシリンジを取り付け、ピストンを引いてアルコールをシリンジに吸引します。

6

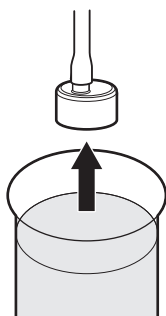

アルコールから、洗浄アダプターのおもりを取り出します。

7

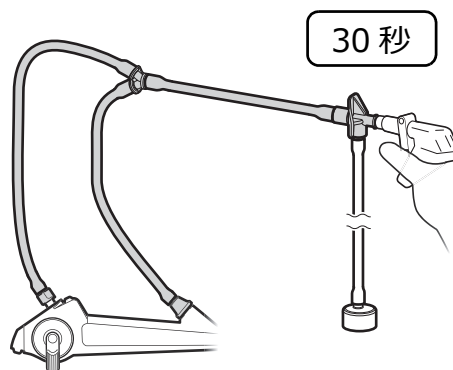


洗浄アダプターのコネクターに、200 ~ 230kPa の圧縮空気を少なくとも 30 秒間注入します。

⚠️ ポイント


- アルコールフラッシュ後に圧縮空気を注入することで、管路の乾燥を容易に行えます。

8

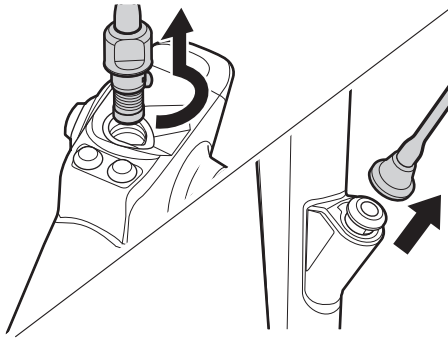


洗浄アダプターのすべての部品を内視鏡から取り外します。

9

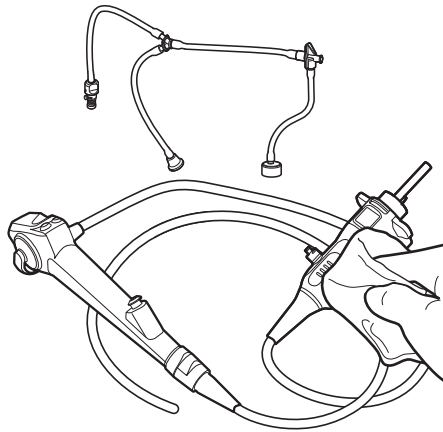


内視鏡と洗浄アダプターに残っているアルコールを滅菌ガーゼで拭き取ります。

10

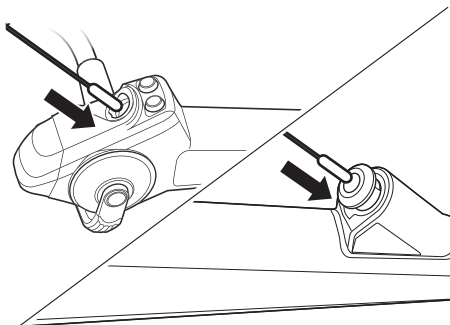

吸引シリンダーおよび鉗子口の内側に残っている水滴を滅菌綿棒で拭き取ります。

11

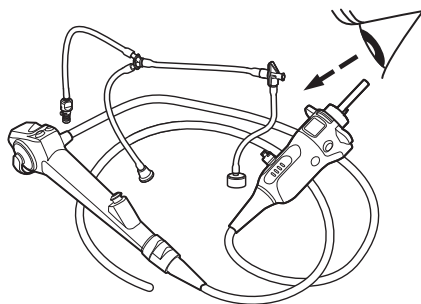

内視鏡および洗浄アダプターの外表面に水滴が付着していないことを目視で確認します。

5.8.4 内視鏡および洗浄アダプターのエチレンオキサイドガス滅菌

⚠ 警告


- 内視鏡のエチレンオキサイドガス滅菌を行う場合は、内視鏡の表面が完全に乾燥していることを確認してください。水分が残留したまま滅菌を行うと、乾燥していない部分の滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行う前に、すべての付属品を取り外してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のエチレンオキサイドガス滅菌を行う場合は、滅菌後の無菌状態を保つため、滅菌の種類に適した滅菌パックまたは梱包材を使用してください。滅菌済みの器材を使用しないと、内視鏡が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行った後に、滅菌パックに破れ、シール部のはがれがないことを確認してください。滅菌パックに破れ、シール部のはがれなどがあると、内視鏡が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- エチレンオキサイドガス滅菌を行う場合、内視鏡と他の付属品を一緒に滅菌パックに入れないでください。接触により内視鏡が故障するおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行う前に、内視鏡に通気アダプターを取り付けてください。通気アダプターを取り付けずにエチレンオキサイドガス滅菌を行うと、温度や圧力の変化により、わん曲部が損傷するおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行った後は滅菌パックを開封し、通気アダプターを取り外してください。通気アダプターを取り付けたまま使用しリプロセスを行うと、内部に液体が入り、内視鏡が故障するおそれがあります。

📌 ポイント

- 滅菌の有効性は、包装形態、滅菌器内の位置や置き方、搭載量など、さまざまな要因に応じて決まります。
- バイオロジカルインジケーターやケミカルインジケーターを使用して、滅菌の有効性を確認してください。
- 合法的に市販されている滅菌器および付属品のみを使用してください。
- 公共機関などが制定している滅菌のガイドラインや、滅菌器の『取扱説明書』の内容に従ってください。

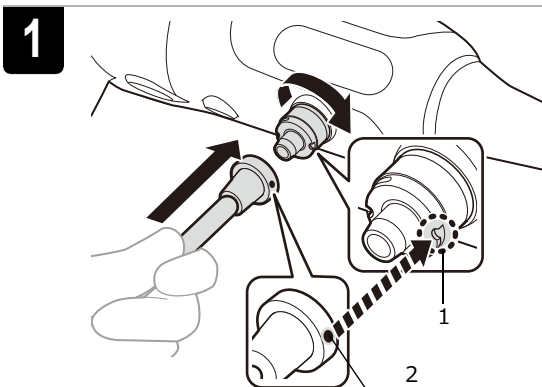


1: 切り欠き
2: 指標

内視鏡の通気コネクタの切り欠きと通気アダプターの指標を合わせ、通気アダプターを押しながら止まるところまで時計回りに回して固定します。

！ポイント


- 通気アダプターを内視鏡の通気コネクタに取り付けることで、エチレンオキサイドガス滅菌時の、内視鏡内部と外気の圧力差による内視鏡の損傷を防ぎます。

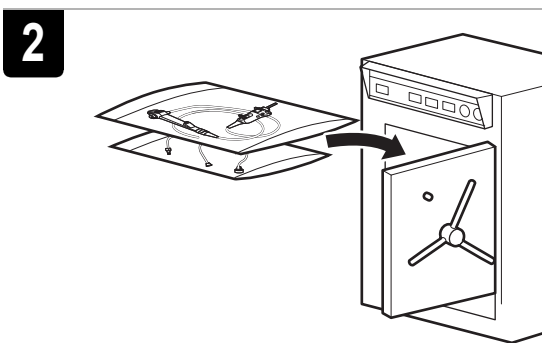

内視鏡および洗浄アダプターを、別々の滅菌パックに入れて密封し、エチレンオキサイドガス滅菌器に入れます。

！ポイント

- 滅菌方法に適した滅菌パックを使用してください。

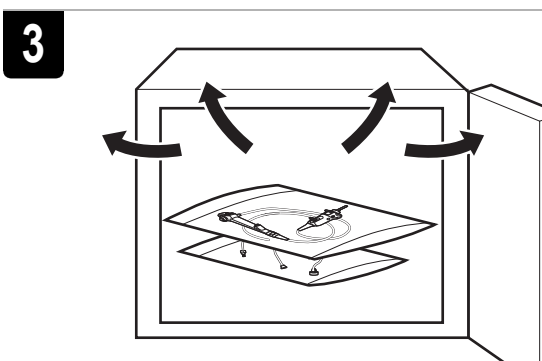

内視鏡および洗浄アダプターのエチレンオキサイドガス滅菌とエアレーションを行います。

📖 参照

- 「2.7 エチレンオキサイドガス滅菌」
- エチレンオキサイドガス滅菌器の『取扱説明書』を参照してください。


1. 準備

2. エチレンオキシドガス滅菌

3. ステラッド滅菌

4. 保管

4

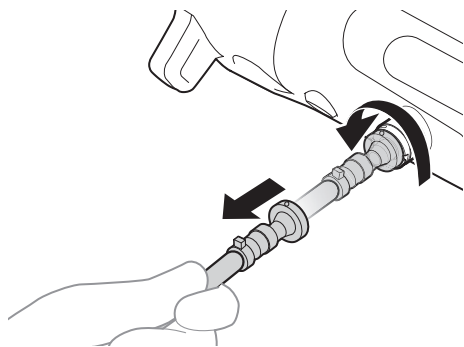

エアレーションが終了したら、通気アダプターを取り外します。

5.8.5 内視鏡のステラッド滅菌

洗浄アダプターは、ステラッド滅菌を行うことはできません。洗浄アダプターは、エチレンオキサイドガス滅菌またはオートクレーブ滅菌のみ行えます。

⚠ 警告

- 内視鏡のステラッド滅菌を行う場合は、内視鏡の表面が完全に乾燥していることを確認してください。水分が残留したまま滅菌を行うと、乾燥していない部分の滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- ステラッド滅菌を行う前に、通気アダプターを除くすべての付属品を内視鏡から取り外してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のステラッド滅菌を行う場合は、ステラッド滅菌に適した梱包材を使用してください。適した器材を使用しないと、滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のステラッド滅菌を行う場合は、ステラッドの「添付文書」や「取扱説明書」に示す条件で行ってください。それ以外の条件を適用する場合は、適切な有効性確認試験が実施されていることを確認してください。滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。


⚠ 注意

- ステラッド滅菌を行う前に、内視鏡に通気アダプターを取り付けてください。通気アダプターを取り付けずにステラッド滅菌を行うと、温度や圧力の変化により、わん曲部が損傷するおそれがあります。
- ステラッド滅菌を行った後は、通気アダプターを取り外してください。通気アダプターを取り付けたまま使用しリプロセスを行うと、内部に液体が入り、内視鏡が故障するおそれがあります。

📌 ポイント

- 滅菌の有効性は、包装形態、滅菌器内の位置や置き方、搭載量など、さまざまな要因に応じて決まります。
- バイオロジカルインジケーターやケミカルインジケーターを使用して、滅菌の有効性を確認してください。
- 合法的に市販されている滅菌器および付属品のみを使用してください。
- 公共機関などが制定している滅菌のガイドラインや、滅菌器の『取扱説明書』の内容に従ってください。

1

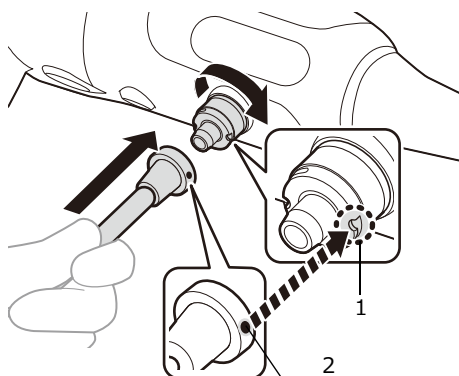


内視鏡の通気コネクタの切り欠きと通気アダプターの指標を合わせ、通気アダプターを押しながら止まるところまで時計回りに回して固定します。

1: 切り欠き
2: 指標

❗ポイント

- 通気アダプターを内視鏡の通気コネクタに取り付けることで、ステラッド滅菌時の内視鏡内部と外気の圧力差による内視鏡の損傷を防ぎます。

2

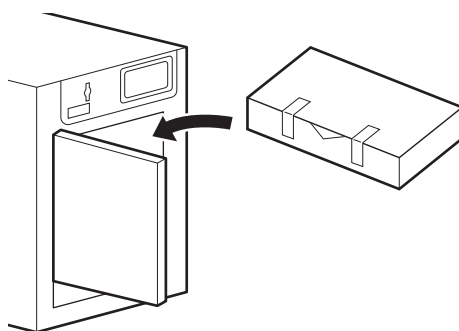


ステラッド用の梱包材で内視鏡を梱包し、ステラッド滅菌器に入れて、滅菌します。

❗ポイント

- ステラッド滅菌に適した梱包材を使用してください。

3

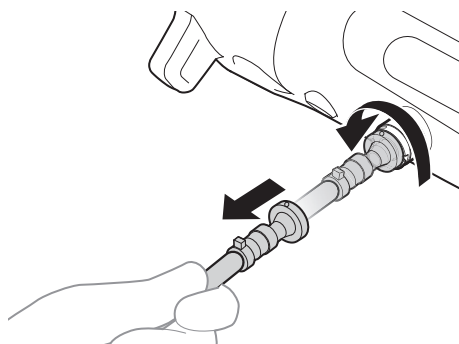

ステラッド滅菌が終了したら、通気アダプターを取り外します。

5.8.6 保管

滅菌済みの内視鏡および洗浄アダプターを保管します。

📖参照

- 「7.2 滅菌済みの内視鏡および付属品の保管」

第 6 章 付属品のリプロセス

この章では、付属品のリプロセス手順を説明します。付属品には、使用前にリプロセスが必要なものと、使用後にリプロセスが必要なものがあります。

内視鏡洗浄消毒機でリプロセスできない、またはステラッド滅菌が行えない付属品は、本章の手順に従ってマニュアル洗浄およびマニュアル消毒（または滅菌）を行ってください。

警告

- 再使用可能な付属品の使用後は、この取扱説明書の指示に従ってリプロセスを行ってください。指示に従ってリプロセスを行わないと、感染の原因となるおそれがあります。

参照

- 清浄水および滅菌水の水質、アルコールの使用については、この取扱説明書を参照してください。
 - 「2.5 すすぎに用いる水」
 - 「2.6 アルコール」

6.1 リプロセスする付属品

⚠ 警告

- 検査中または処置中に使用する付属品（吸引ボタンおよび鉗子栓）を初めて使用する場合、および再使用可能な付属品の使用後は、この取扱説明書の指示に従ってリプロセスを行ってください。指示に従ってリプロセスを行わないと、感染の原因となるおそれがあります。

📌 ポイント


- 滅菌済みの付属品はリプロセスしないでください。

表 6.1 リプロセスする付属品

	吸引ボタン ※1 ※2 ※3 SB-607
	鉗子栓 ※1 ※2 ※3 FOV-BU1
	洗浄アダプター ※3 CA-616
	シリンダー用洗浄ブラシ WB11003FW
	吸引チャンネル用洗浄ブラシ WB7024FW

- ※ 1 吸引ボタンおよび鉗子栓は、富士フィルムからの出荷前にリプロセスが行われていません。初めて症例に使用する前に、本章の手順に従ってリプロセスを行ってください。
- ※ 2 吸引ボタンおよび鉗子栓は、再使用禁止の製品です。使用後の吸引ボタンおよび鉗子栓は廃棄してください。
- ※ 3 吸引ボタン、鉗子栓および洗浄アダプターは、ステラッド滅菌の有効性が確認されていません。

6.2 付属品のリプロセスの流れ

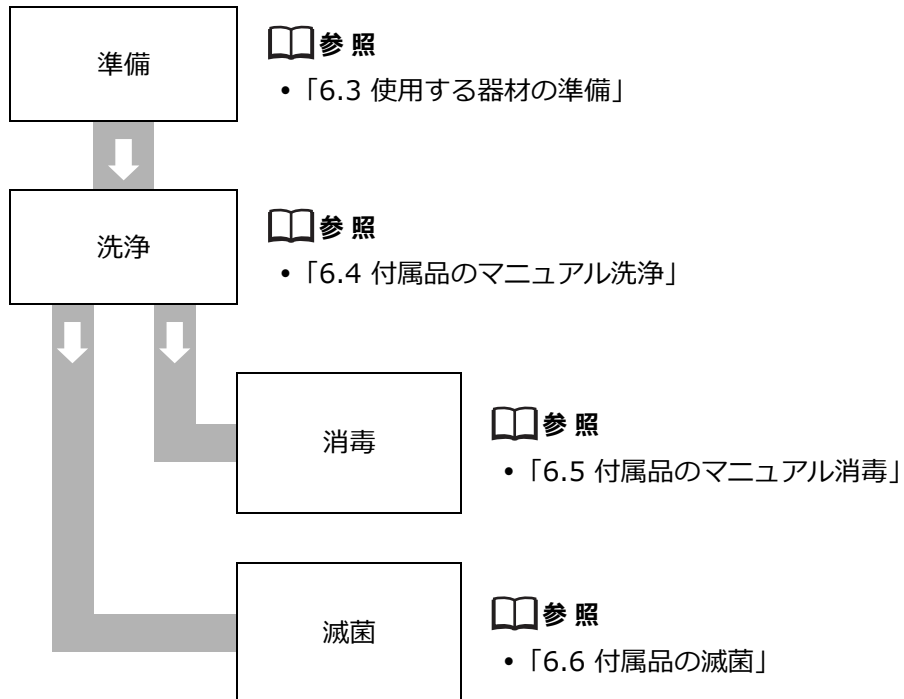

6.3 使用する器材の準備

付属品のリプロセスで使用する器材です。

●ポイント

- 消毒後の付属品が再汚染されないよう、付属品の消毒後のすすぎと乾燥には滅菌済み器材（容器、ガーゼ、シリンジなど）の使用を推奨します。滅菌済みの器材が使用できない場合は、感染の原因となる菌によって付属品が再汚染されないように、清潔な器材を使用してください。

6.3.1 リプロセスで使用する器材

- 清潔なガーゼ
- 滅菌ガーゼ
- 清潔な歯ブラシ（軟らかいもの）

- 清潔なシリンジ（30mL）※1
- 滅菌済みシリンジ（30mL）※1


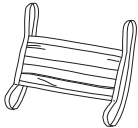


- 清潔な容器（洗浄液用）
- 清潔なフタ付きの容器（消毒液用）
- 滅菌済みの容器（滅菌水用）
- 滅菌済みの容器（アルコール用）

- 洗浄後に用いる水（「2.2 清浄水」参照）
- 洗浄液（「2.3 洗浄液」参照）
- 消毒液（「2.4 消毒液」参照）
- 消毒後のすすぎに用いる水（「2.5 すすぎに用いる水」参照）
- アルコール（「2.6 アルコール」参照）

- 滅菌パック

※ 1 ルアーロック式またはルアースリップ式のシリンジ（30mL）を用意してください。

6.3.2 保護具 (例)

	ゴーグル
	マスク
	防護服 ^{※1}
	耐薬品性のある防水性手袋 ^{※2}


※ 1 消毒可能な靴、または再使用禁止の靴カバーも併せて使用することを推奨します。

※ 2 耐薬品性のある防水性手袋は、肌の露出を防止するために、十分な長さのものを準備してください。

6.4 付属品のマニュアル洗浄


洗浄アダプターおよび洗浄ブラシの洗浄を行います。

6.4.1 付属品のマニュアル洗浄の流れ

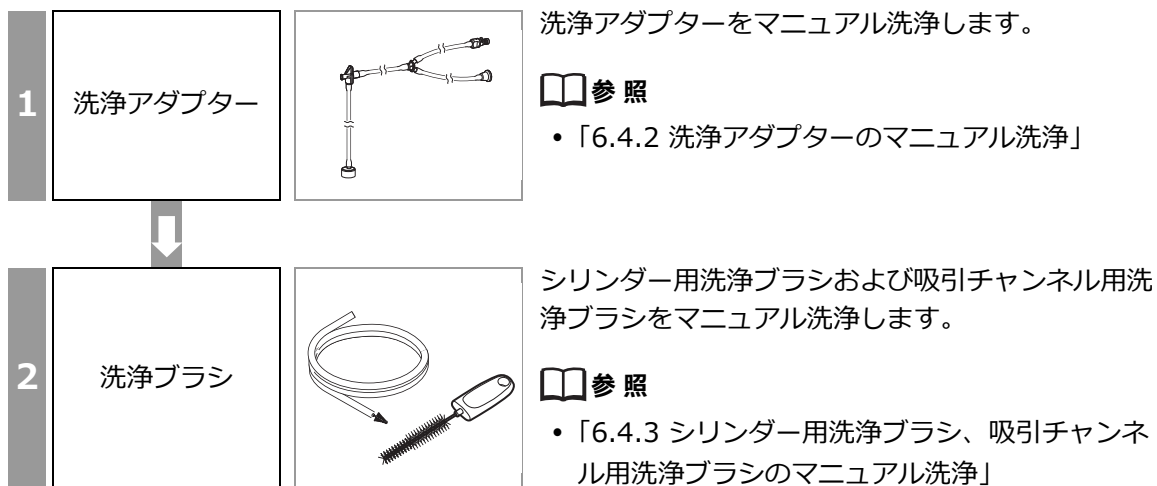

6.4.2 洗浄アダプターのマニュアル洗浄

1

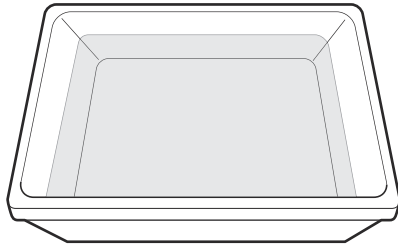


洗浄アダプターが入る大きさの清潔な容器に、洗浄液製造業者が推奨する温度および濃度の洗浄液を入れます。

参照


- 「2.3 洗浄液」

2

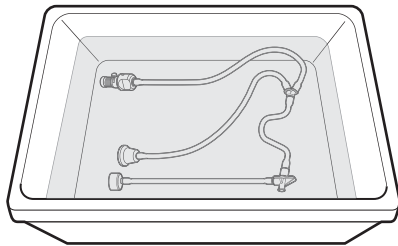


洗浄液中に、洗浄アダプターを浸漬します。

3

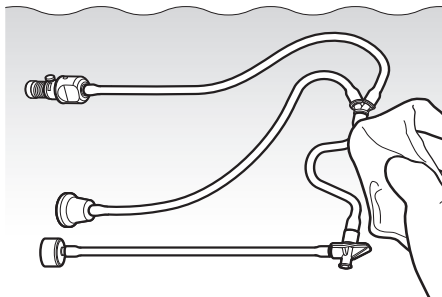

洗浄液中で、洗浄アダプターの外表面を汚れがなくなるまで清潔なガーゼで拭きます。


4

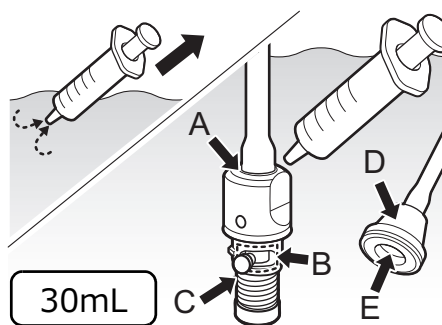

清潔なシリンジに洗浄液を入れて、洗浄液中で、洗浄アダプターの各部に洗浄液を注入します。


- A. 吸引シリンダーポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- B. 吸引シリンダーポートの指標部の溝：少なくとも 30mL
- C. 吸引シリンダーポートのバネ部：少なくとも 30mL
- D. 鉗子口ポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- E. 鉗子口ポートの内側：少なくとも 30mL

5

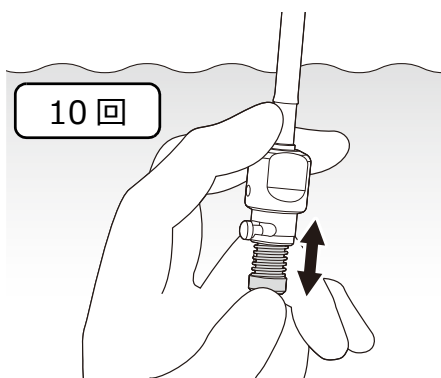

洗浄液中で、吸引シリンダーポートのバネ部を10回押しします。


6

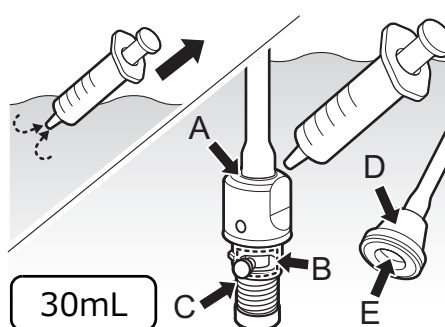

清潔なシリンジに洗浄液を入れて、洗浄液中で、洗浄アダプターの各部に洗浄液を注入します。


- A. 吸引シリンダーポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- B. 吸引シリンダーポートの指標部の溝：少なくとも 30mL
- C. 吸引シリンダーポートのバネ部：少なくとも 30mL
- D. 鉗子口ポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- E. 鉗子口ポートの内側：少なくとも 30mL

7

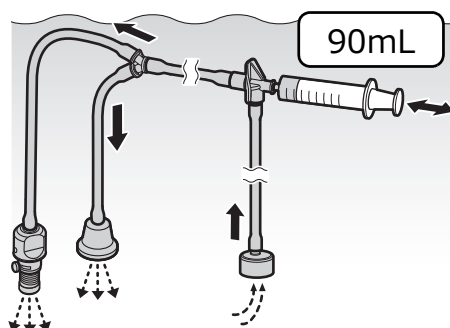


洗浄液中で、洗浄アダプターのコネクタに清潔なシリンジを取り付け、洗浄液を吸引し、洗浄液を少なくとも 90mL 注入します。

8

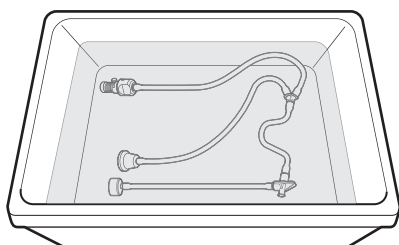


洗浄液製造業者が推奨する温度、濃度、時間に従って、洗浄アダプターを完全に浸漬したままにします。

9

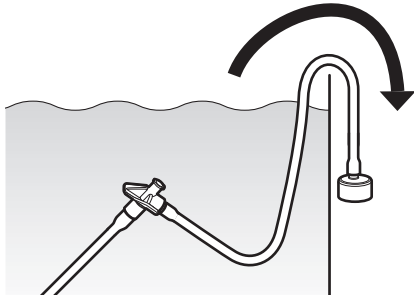


洗浄アダプターのおもりを洗浄液から取り出します。

10

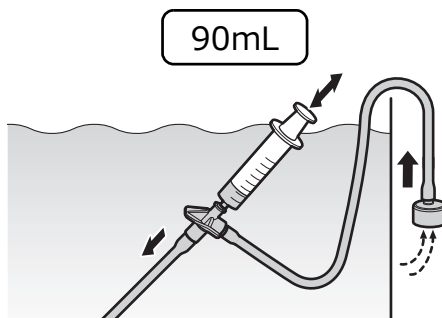

洗浄液中で、洗浄アダプターのコネクタに清潔なシリンジを取り付け、空気を吸引し、空気を少なくとも 90mL 注入します。

11

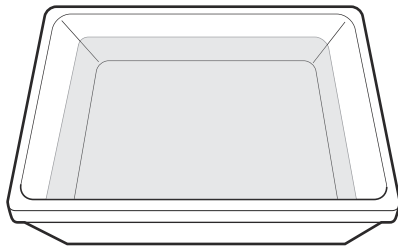


洗浄アダプターが入る大きさの清潔な容器に、清浄水を入れます。

📖 参照


- 「2.2 清浄水」

12

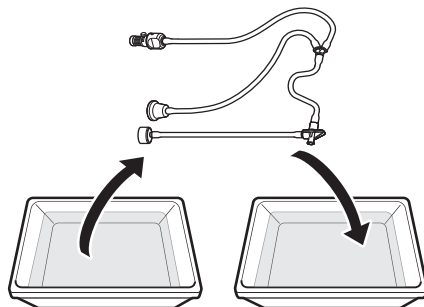

洗浄液から、洗浄アダプターを取り出し、清浄水に浸漬します。


13

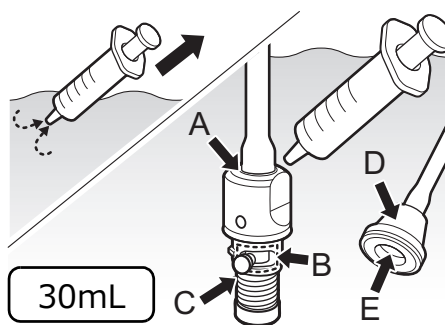

清潔なシリンジに清浄水を入れて、清浄水中で、洗浄アダプターの各部に清浄水を注入します。


- A. 吸引シリンダーポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- B. 吸引シリンダーポートの指標部の溝：少なくとも 30mL
- C. 吸引シリンダーポートのバネ部：少なくとも 30mL
- D. 鉗子口ポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- E. 鉗子口ポートの内側：少なくとも 30mL

14

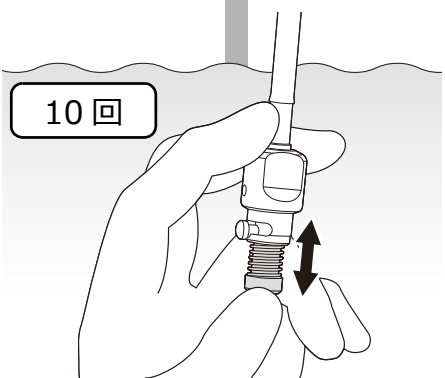

清浄水中で、吸引シリンダーポートのバネ部を 10 回押します。

15

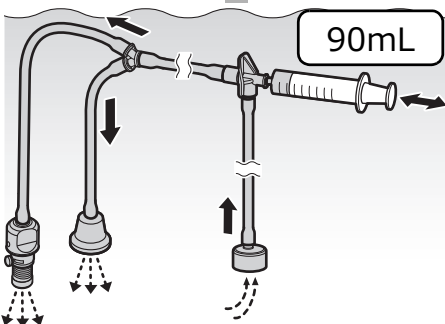


清浄水中で、洗浄アダプターのコネクタに清潔なシリンジを取り付け、清浄水を吸引し、清浄水を少なくとも 90mL 注入します。

16

**繰り返し
(合計) 2回
(手順 13 から 15)**


新しい清浄水に浸漬し、手順 **13** から **15** を更に 1 回以上 (合計 2 回以上) 繰り返します。

17

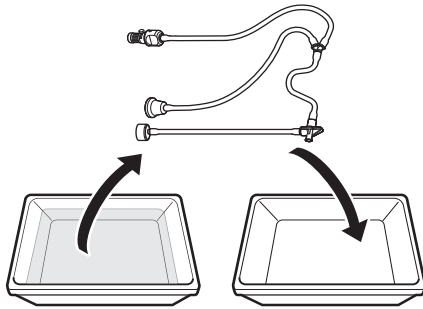


清浄水から、洗浄アダプターを取り出し、清潔で大きな容器に入れます。

18

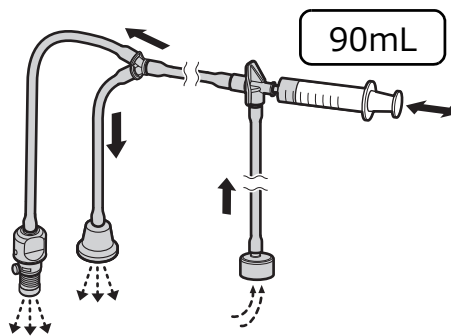


洗浄アダプターのコネクターに清潔なシリンジを取り付け、空気を吸引し、空気を少なくとも90mL注入します。

19

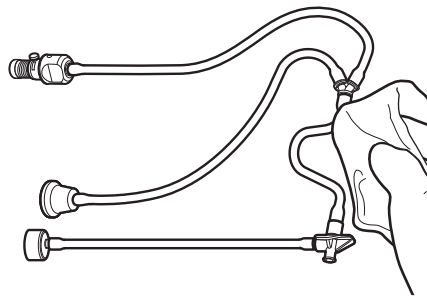

洗浄アダプターに残った清浄水を清潔なガーゼで拭き取ります。

20

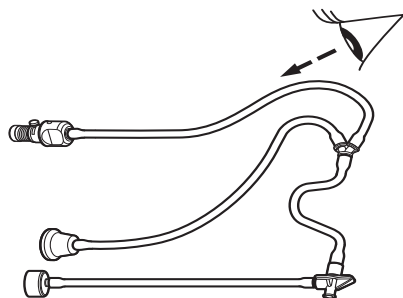

洗浄アダプターに、汚れがないことを確認します。

21

汚物が付着している
場合は、
繰り返す


洗浄アダプターに汚れが残っている場合は、汚れが除去できるまで、手順 1 から 20 を繰り返します。

❗ポイント

- マニュアル洗浄が終了したら、マニュアル消毒または滅菌を行います。
 - 「6.5.3 洗浄アダプターのマニュアル消毒」
 - 「6.6 付属品の滅菌」

6.4.3 シリンダー用洗浄ブラシ、吸引チャンネル用洗浄ブラシのマニュアル洗浄

1

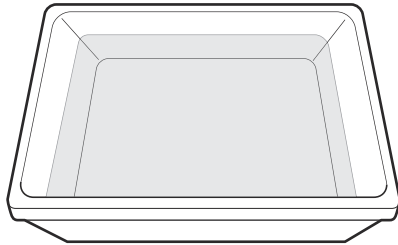


洗浄液製造業者が推奨する温度および濃度の洗浄液を清潔な容器に入れます。

参照


- 「2.3 洗浄液」

2

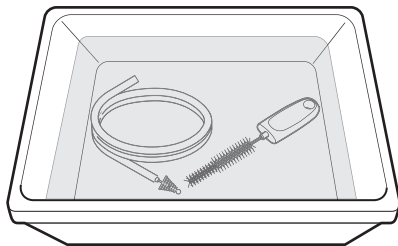


洗浄液中に、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを浸漬します。

3

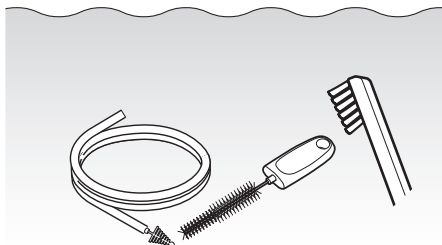

洗浄液中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシ全体を、清潔な歯ブラシでブラッシングします。

4

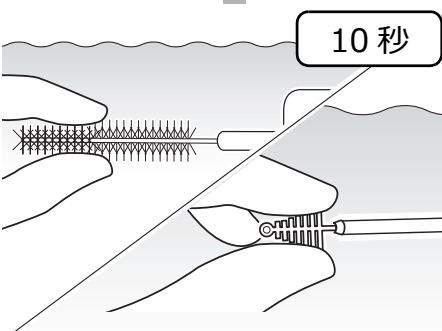


洗浄液中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシのブラシ部分を少なくとも 10 秒間もみ洗いします。

5

繰り返し
(合計) 3回
(手順 3 から 4)


手順 3 および 4 を更に 2 回以上 (合計 3 回以上) 繰り返し、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシの汚れを除去します。

6

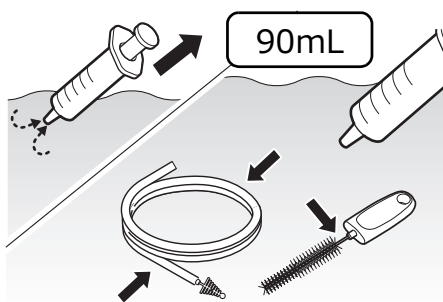


清潔なシリンジに洗浄液を入れて、洗浄液中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシ全体に、洗浄液を少なくとも 90mL 注入します。

7

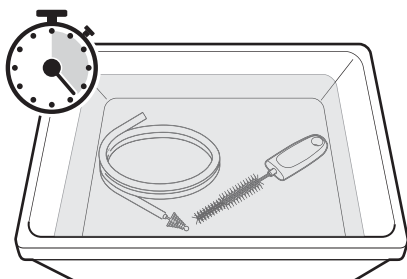

洗浄液製造業者が推奨する温度、濃度、時間に従って、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを完全に浸漬したままにします。

ヒント

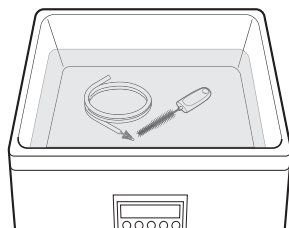


汚れが落ちにくい場合は、洗浄液を満たした超音波洗浄器に、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを完全に浸漬し、下表に示した周波数および時間で超音波洗浄を行うこともできます。

	シリンダー用洗浄ブラシ	吸引チャンネル用洗浄ブラシ
超音波洗浄の所要時間	33 ~ 48kHz 20 分間	33 ~ 48kHz 20 分間

ポイント

- 超音波洗浄機の使用方法は、超音波洗浄機の『取扱説明書』を参照してください。

8

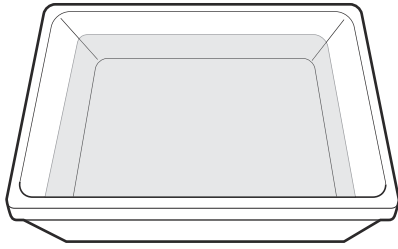


シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシが入る大きさの清潔な容器に、清浄水を入れます。

参照


・「2.2 清浄水」

9

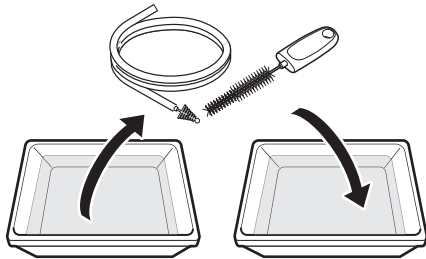

洗浄液から、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを取り出し、清浄水に浸漬します。


10

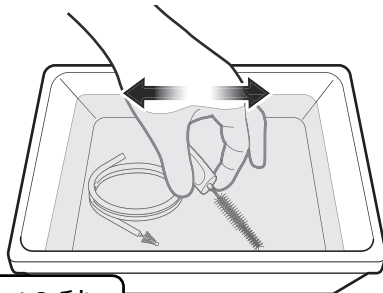

10 秒


清浄水中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを少なくとも 10 秒間ゆらしてすすぎます。

11

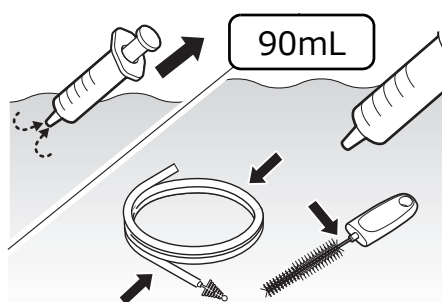


清潔なシリンジに清浄水を入れて、清浄水中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシ全体に、清浄水を少なくとも 90mL 注入します。

12

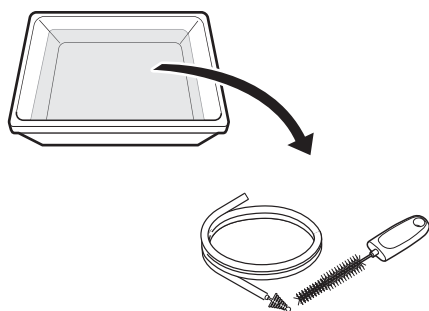

清浄水から、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを取り出します。

13

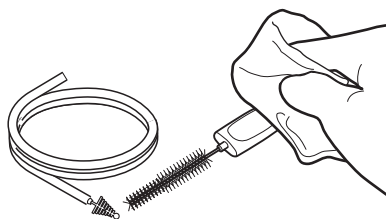

シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシに残った清浄水を清潔なガーゼで拭き取ります。

14

汚物が付着している
場合は、
繰り返す

シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシに汚れが残っている場合は、汚れが除去できるまで、手順 **1** から **13** を繰り返します。

！ポイント

- マニュアル洗浄が終了したら、マニュアル消毒または滅菌を行います。
 - 「6.5.4 シリンダー用洗浄ブラシ、吸引チャンネル用洗浄ブラシのマニュアル消毒」
 - 「6.6 付属品の滅菌」
- 歯ブラシは、再使用禁止の製品です。使用後は廃棄してください。
 - 「7.3 廃棄」

6.5 付属品のマニュアル消毒

吸引ボタン、洗浄アダプター、洗浄ブラシおよび鉗子栓の消毒を行います。吸引ボタンおよび鉗子栓は再使用禁止の製品です。使用後は破棄してください。

❗ポイント

- 滅菌済みの吸引ボタンおよび鉗子栓はリプロセスしないでください。

⚠警告

- 付属品の消毒を行う場合は、付属品のすべての表面が消毒液に完全に浸漬していることを確認してください。浸漬中は、付属品のすべての表面や溝、内部に消毒液をシリンジで注入し、外表面を拭いて、気泡を完全に除去してください。消毒液に触れない部分があると、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 付属品の消毒を行う場合は、付属品にシリンジが取り付けいていないことを確認してください。付属品にシリンジが取り付けいたままの状態では、シリンジおよび付属品の接続部に消毒液が十分に触れないため、消毒が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 付属品を消毒液に浸漬した後は、滅菌済みの器材（滅菌シリンジや滅菌ガーゼなど）を使用してください。滅菌済みの器材を使用しないと、付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。
- 消毒液をすすいだ後は、付属品を十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な場合、菌が繁殖し、感染の原因となるおそれがあります。


⚠注意

- 付属品の消毒後は、残留している消毒液を滅菌水ですすいでください。付属品に消毒液が残っていると、患者の体内に流れ込み患者を傷つけるおそれがあります。

📖参照

- 「2.5 すすぎに用いる水」
- 「2.6 アルコール」

6.5.1 付属品のマニュアル消毒の流れ

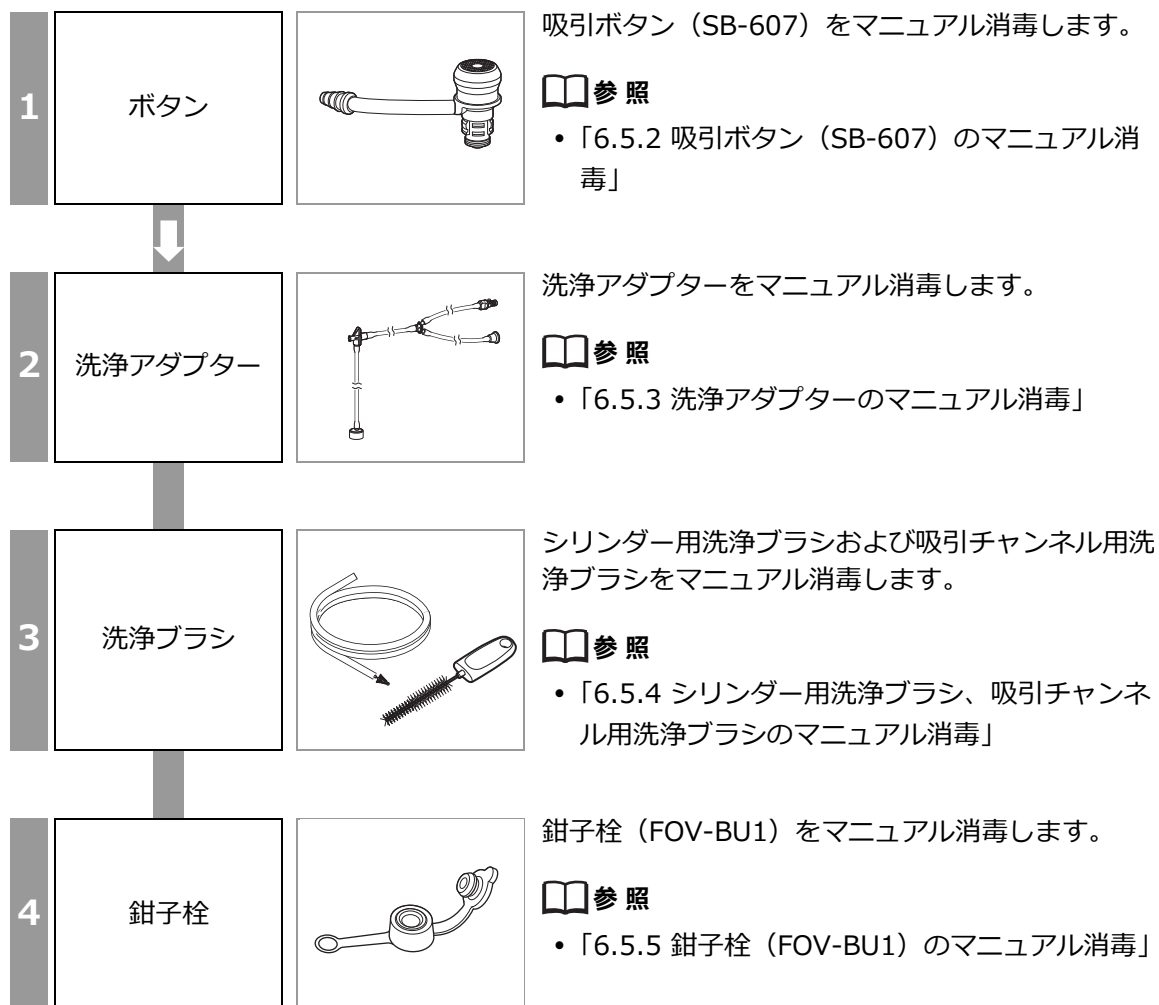


6.5.2 吸引ボタン (SB-607) のマニュアル消毒

⚠️ ポイント

- 未滅菌の吸引ボタンを使用する場合は、使用前にリプロセスしてください。
- 滅菌済みの吸引ボタンはリプロセスしないでください。
- シリンジに消毒液を吸引するときは、気泡が生じないようにゆっくりと吸引してください。また、注入するときは、気泡を放出しないように注意してください。

1

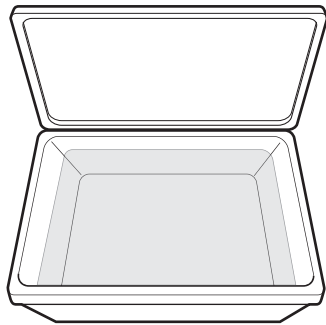


吸引ボタンが入る大きさの清潔で大きなフタ付き容器に、消毒液製造販売業者が推奨する温度および濃度の消毒液を入れます。

📖 参照


- 「2.4 消毒液」

2

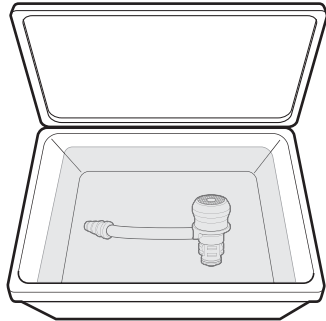


消毒液中に、吸引ボタンを浸漬します。

3

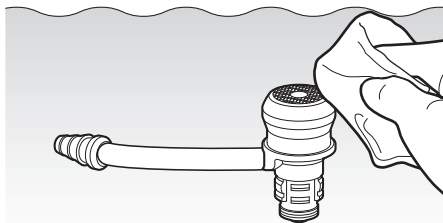


消毒液中で、吸引ボタンの外表面を清潔なガーゼで十分に拭きます。

4

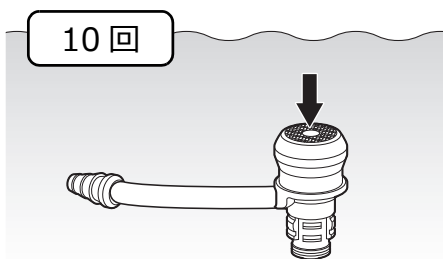

消毒液中で、吸引ボタンのボタンを少なくとも10回押します。


5

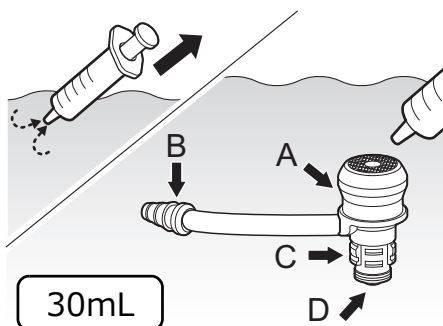

清潔なシリンジに消毒液を入れて、消毒液中で、吸引ボタンの各部に消毒液を注入して気泡を完全に除去します。

- A. ボタン頭 : 少なくとも 30mL
- B. 吸引コネクター : 少なくとも 30mL
- C. 取り付け部 : 少なくとも 30mL
- D. 取り付け部の底 : 少なくとも 30mL


6

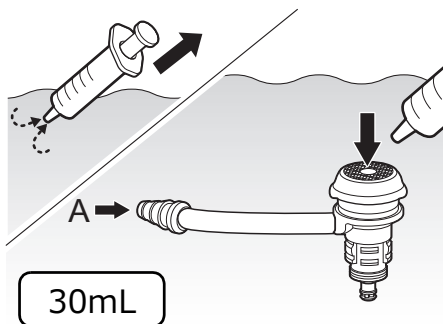

清潔なシリンジに消毒液を入れて、消毒液中でボタンを押した状態で、吸引コネクターに突き当てて消毒液を注入して気泡を完全に除去します。

- A. 吸引ボタンの内部 : 少なくとも 30mL


7

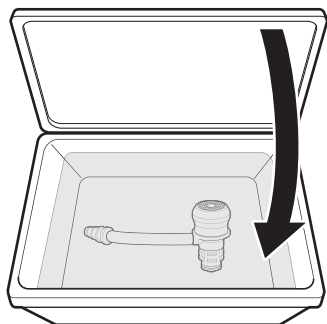

消毒液製造販売業者が推奨する温度、濃度、時間に従って、消毒液中に吸引ボタンを完全に浸漬して消毒します。消毒している間は、清潔で大きなフタ付き容器のフタをします。

6.5.2.1 吸引ボタン (SB-607) の消毒後のすすぎ

1

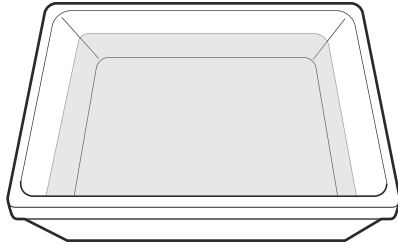


吸引ボタンが入る大きさの滅菌済み容器に、滅菌水を入れます。

参照


- 「2.5 すすぎに用いる水」

2

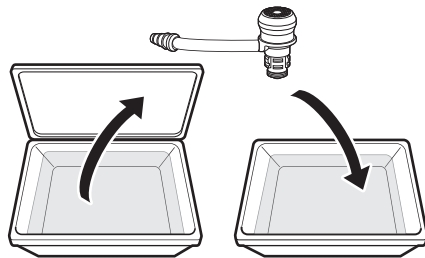


清潔で大きなフタ付き容器のフタを開けて、消毒液から、吸引ボタンを取り出し、滅菌水に浸漬します。

3

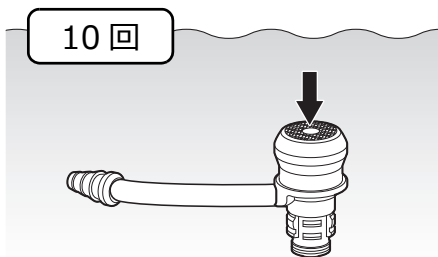

滅菌水中で、吸引ボタンのボタンを少なくとも10回押します。


4

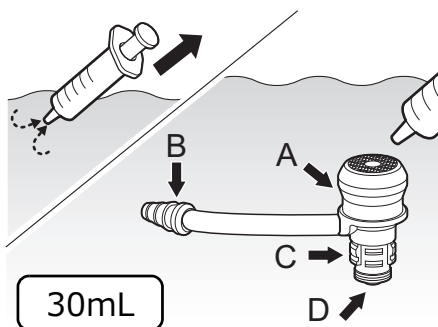

滅菌済みシリンジに滅菌水を入れて、滅菌水中で、吸引ボタンの各部に滅菌水を注入します。

- A. ボタン頭：少なくとも 30mL
- B. 吸引コネクター：少なくとも 30mL
- C. 取り付け部：少なくとも 30mL
- D. 取り付け部の底：少なくとも 30mL


5

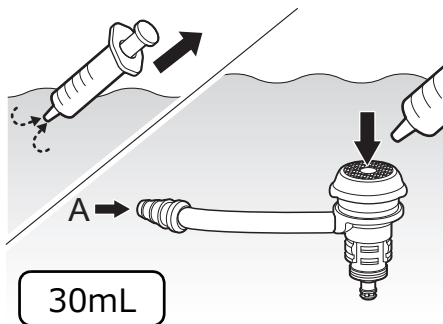

滅菌済みシリンジに滅菌水を入れて、滅菌水中でボタンを押した状態で、吸引コネクタに突き当てて滅菌水を注入します。


A. 吸引ボタンの内部：少なくとも 30mL

6

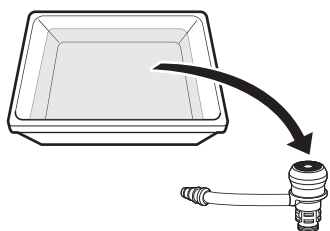

吸引ボタンを滅菌水から取り出します。


7

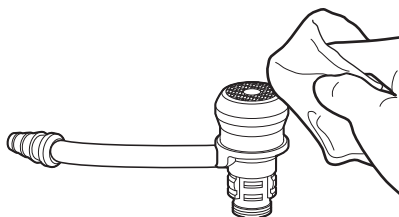

吸引ボタンに残っている滅菌水を滅菌ガーゼで完全に拭き取ります。

6.5.2.2 吸引ボタン (SB-607) のアルコールフラッシュ

1

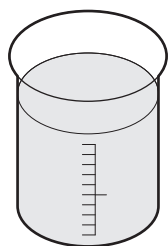

吸引ボタンが入る大きさの滅菌済み容器に、アルコールを入れます。

📖 参照

• 「2.6 アルコール」


1. ボタン

2. 洗浄アダプター

3. 洗浄ブラシ


4. 鉗子栓

2

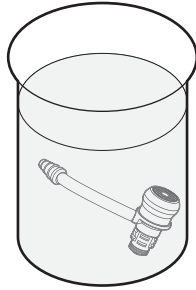


アルコール中に、吸引ボタンを浸漬します。

3

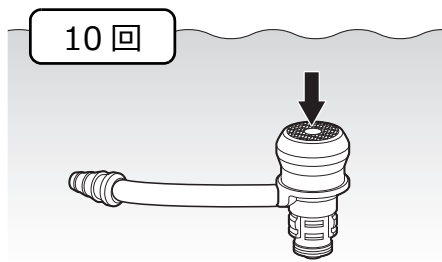


アルコール中で、吸引ボタンのボタンを少なくとも10回押します。

4

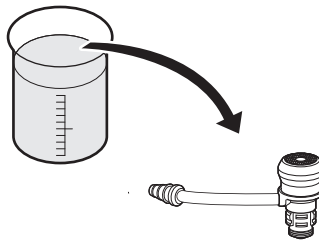


アルコールから、吸引ボタンを取り出します。

5

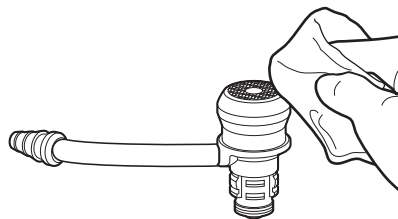

吸引ボタンに残ったアルコールを滅菌ガーゼで拭き取ります。


6

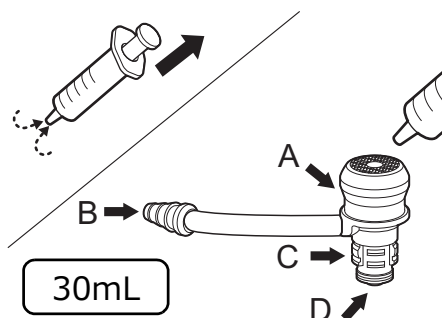

滅菌済みシリンジに空気を入れて、吸引ボタンの各部に空気を注入します。

- A. ボタン頭側面穴：少なくとも 30mL
- B. 吸引コネクターの内部：少なくとも 30mL
- C. 取り付け部：少なくとも 30mL
- D. 取り付け部の底：少なくとも 30mL

7

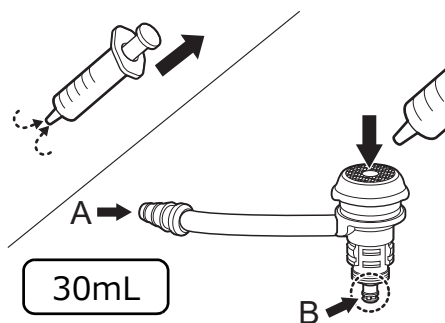


滅菌済みシリンジに空気を入れて、ボタンを押した状態で、吸引コネクタに突き当てて空気を注入します。

A. 吸引ボタンの内部：少なくとも 30mL


B. 取り付け部の底：少なくとも 30mL

8

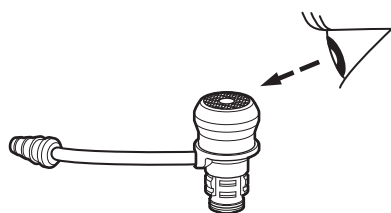

吸引ボタンが乾燥していることを確認します。

9

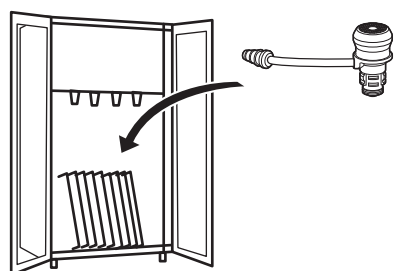

消毒済みの乾燥した吸引ボタンを保管します。

📖 参照


- 「7.1 消毒済みの内視鏡および付属品の保管」

⚠️ ポイント

- ガイドラインによっては、追跡管理を行うために、再使用可能なボタンを内視鏡と一緒にひとつのセットとして保管することを推奨しています。

6.5.3 洗浄アダプターのマニュアル消毒

1

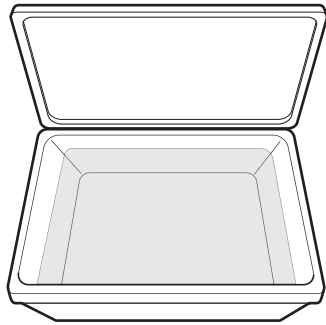


洗浄アダプターが入る大きさの清潔で大きなフタ付き容器に、消毒液製造販売業者が推奨する温度および濃度の消毒液を入れます。

参照


- 「2.4 消毒液」

2

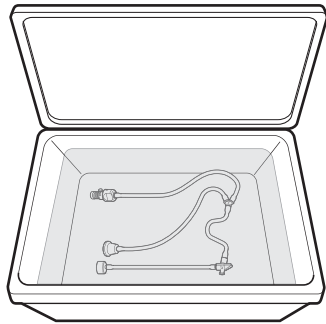


消毒液中に、洗浄アダプターを浸漬します。

3

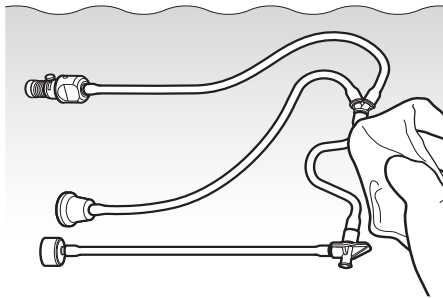

消毒液中で、洗浄アダプターの外表面を清潔なガーゼで十分に拭きます。


4

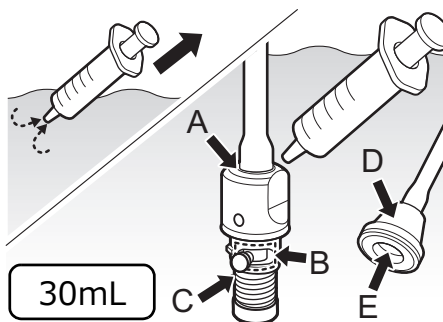

清潔なシリンジに消毒液を入れて、消毒液中で、洗浄アダプターの各部に消毒液を注入して気泡を完全に除去します。


- A. 吸引シリンダーポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- B. 吸引シリンダーポートの指標部の溝：少なくとも 30mL
- C. 吸引シリンダーポートのバネ部：少なくとも 30mL
- D. 鉗子口ポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- E. 鉗子口ポートの内側：少なくとも 30mL

5

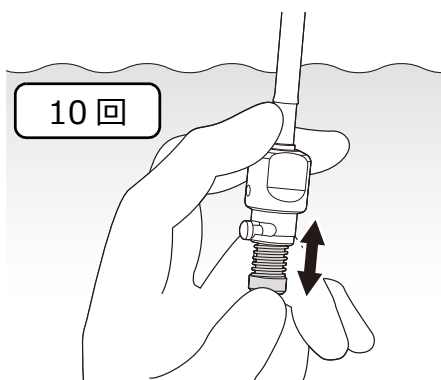

消毒液中で、吸引シリンダーポートのバネ部を10回押します。


6

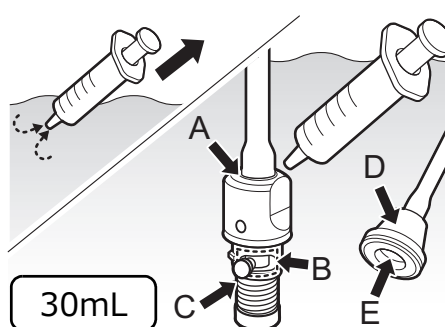

清潔なシリンジに消毒液を入れて、消毒液中で、洗浄アダプターの各部に消毒液を注入して気泡を完全に除去します。


- A. 吸引シリンダーポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- B. 吸引シリンダーポートの指標部の溝：少なくとも 30mL
- C. 吸引シリンダーポートのバネ部：少なくとも 30mL
- D. 鉗子口ポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- E. 鉗子口ポートの内側：少なくとも 30mL

7

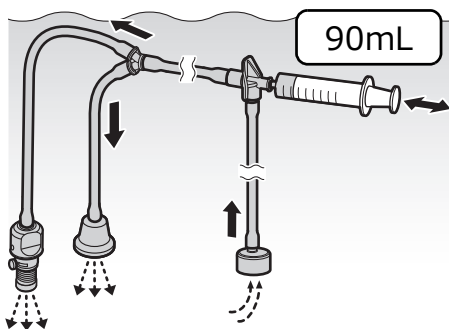

洗浄アダプターのコネクタに清潔なシリンジを取り付け、消毒液を吸引し、消毒液を少なくとも 90mL 注入して気泡を完全に除去します。

8

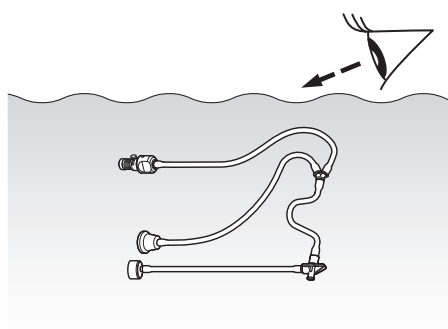


消毒液中で、洗浄アダプターの外表面に気泡がないことを確認します。

！ポイント


- 気泡が残っている場合は、気泡を清潔なガーゼで拭き取ります。

9

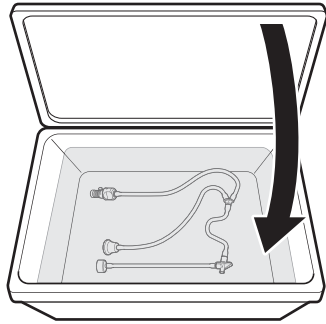

消毒液製造販売業者が推奨する温度、濃度、時間に従って、消毒液中に洗浄アダプターを完全に浸漬して消毒します。消毒している間は、清潔で大きなフタ付き容器のフタをします。


10

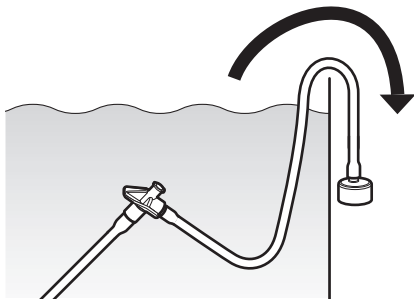

清潔で大きなフタ付き容器のフタを開けて、消毒液から、洗浄アダプターのおもりを取り出します。

11


90mL

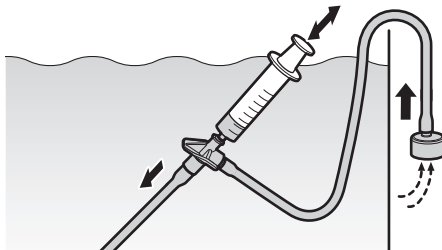

洗浄アダプターのコネクターに滅菌済みシリンジを取り付け、空気を吸引し、空気を少なくとも90mL注入します。

6.5.3.1 洗浄アダプターの消毒後のすすぎ

1

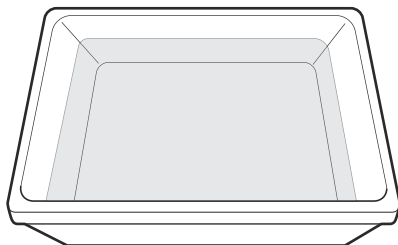


洗浄アダプターが入る大きさの滅菌済み容器に、滅菌水を入れます。

📖 参照


- 「2.5 すすぎに用いる水」

2

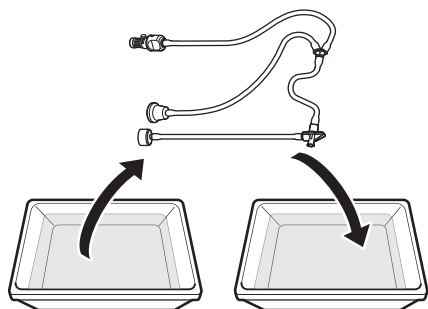

消毒液から、洗浄アダプターを取り出し、滅菌水に浸漬します。


3

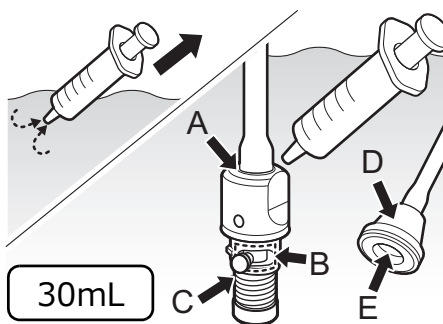

滅菌済みシリンジに滅菌水を入れて、滅菌水中で、洗浄アダプターの各部に滅菌水を注入します。


- A. 吸引シリンダーポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- B. 吸引シリンダーポートの指標部の溝：少なくとも 30mL
- C. 吸引シリンダーポートのバネ部：少なくとも 30mL
- D. 鉗子口ポートの取り付け部：少なくとも 30mL
- E. 鉗子口ポートの内側：少なくとも 30mL

4

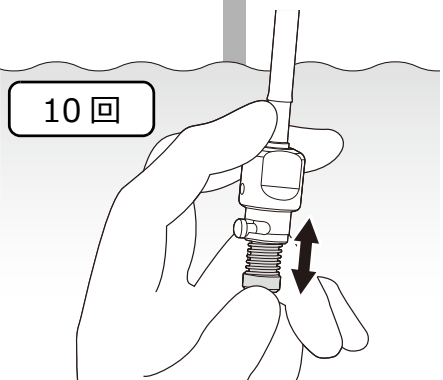

滅菌水中で、吸引シリンダーポートのバネ部を 10 回押します。

5

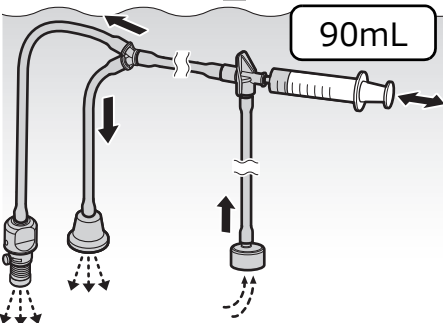

滅菌水中で、洗浄アダプターのコネクタに滅菌済みシリンジを取り付け、滅菌水を吸引し、滅菌水を少なくとも 90mL 注入します。

1. ボタン

2. 洗浄アダプター

3. 洗浄ブラシ


4. 鉗子栓

6

繰り返し
(合計) 2回
(手順 3 から 5)


新しい滅菌水に浸漬し、手順 3 から 5 を更に 1 回以上 (合計 2 回以上) 繰り返します。

7

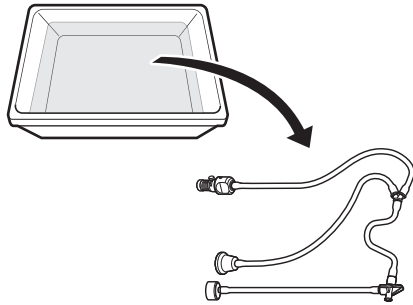


洗浄アダプターを滅菌水から取り出します。

8

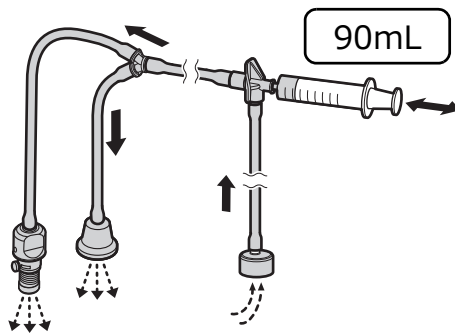

洗浄アダプターのコネクターに滅菌済みシリンジを取り付け、空気を吸引し、空気を少なくとも 90mL 注入して滅菌水を排出します。


9

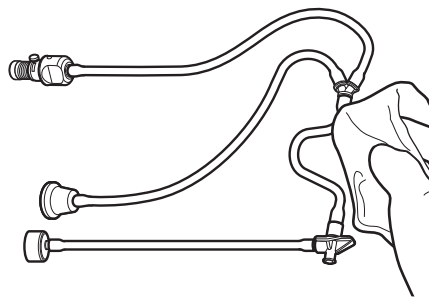

洗浄アダプターに残った滅菌水を滅菌ガーゼで拭き取ります。

6.5.3.2 洗浄アダプターのアルコールフラッシュ

1

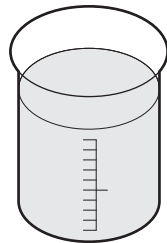


滅菌済みの小さな容器にアルコールを入れます。

参照


・「2.6 アルコール」

2

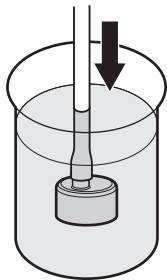


アルコールに、洗浄アダプターのおもりを浸漬します。

3

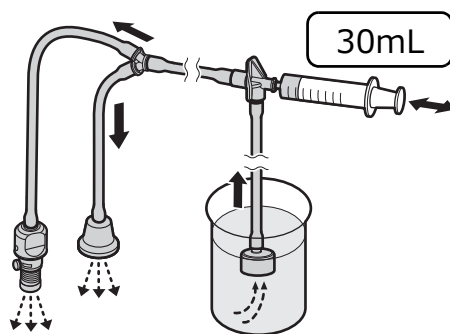


洗浄アダプターのコネクタに滅菌済みシリンジを取り付け、アルコールを吸引し、アルコールを少なくとも30mL注入します。

4

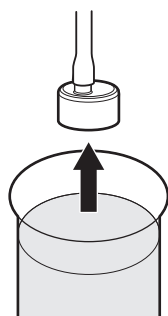

アルコールから、洗浄アダプターのおもりを取り出します。

5

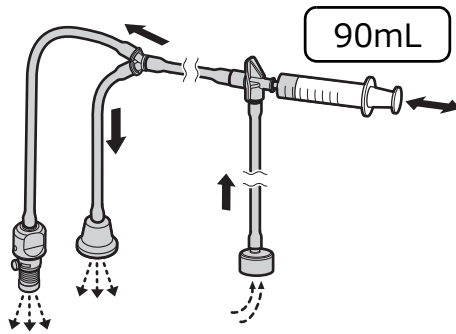


洗浄アダプターのコネクタに滅菌済みシリンジを取り付け、空気を吸引し、空気を少なくとも90mL注入します。

！ポイント


- 洗浄アダプターの各管路の乾燥をより確実にを行うためには、フィルターに通された圧縮空気（200～230kPa）で乾燥することを推奨します。

6

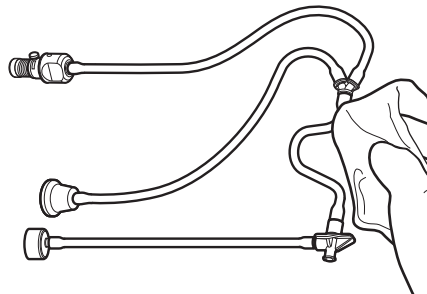


洗浄アダプターに残ったアルコールを滅菌ガーゼで拭き取ります。

7

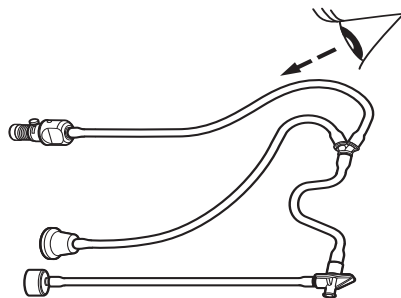

洗浄アダプターが乾燥していることを確認します。

8

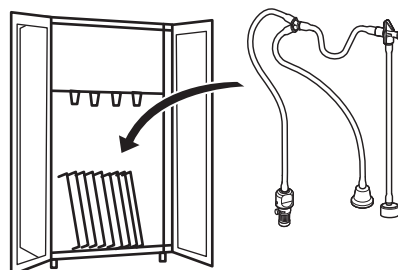


消毒済みの乾燥した洗浄アダプターを保管します。

📖 参照

- 「7.1 消毒済みの内視鏡および付属品の保管」

6.5.4 シリンダー用洗浄ブラシ、吸引チャンネル用洗浄ブラシのマニュアル消毒

1

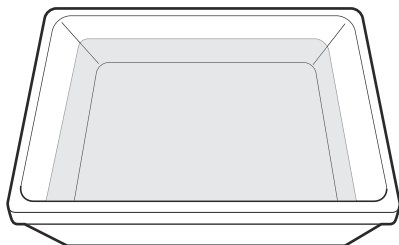


消毒液製造販売業者が推奨する温度および濃度の消毒液を清潔で大きなフタ付き容器に入れます。

参照


- 「2.4 消毒液」

2

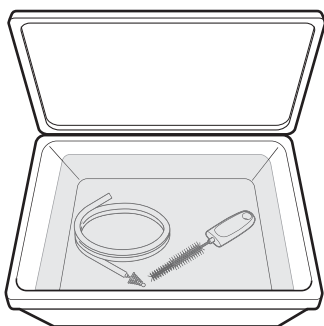


消毒液中に、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを浸漬します。

3

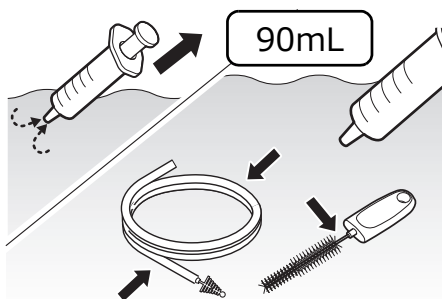

滅菌済みシリンジに消毒液を入れて、消毒液中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシ全体に、消毒液を少なくとも90mL 注入します。

4

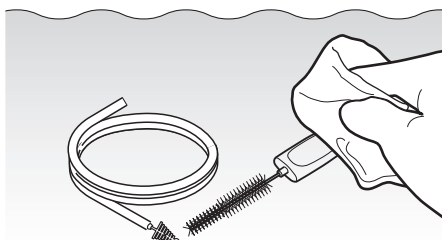

消毒液中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシの外表面を清潔なガーゼで十分に拭きます。


1. ボタン

2. 洗浄アダプター

3. 洗浄ブラシ

4. 鉗子栓


5

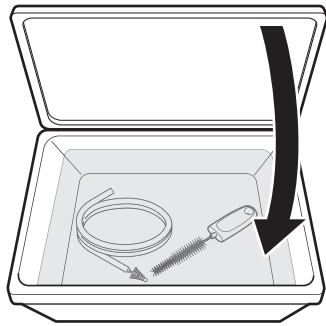

消毒液製造販売業者が推奨する温度、濃度、時間に従って、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを完全に浸漬したままにします。消毒している間は、清潔で大きなフタ付き容器のフタをします。

6.5.4.1 シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシの消毒後のすすぎ

1

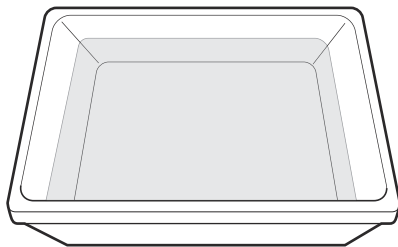


シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシが入る大きさの滅菌済み容器に、滅菌水を入れます。

参照


- 「2.5 すすぎに用いる水」

2

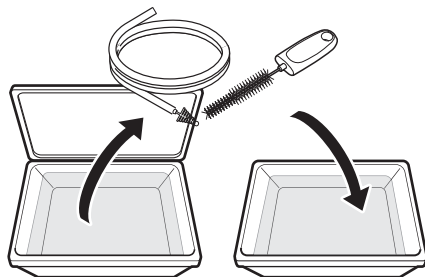


消毒液から、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを取り出し、滅菌水に浸漬します。

3

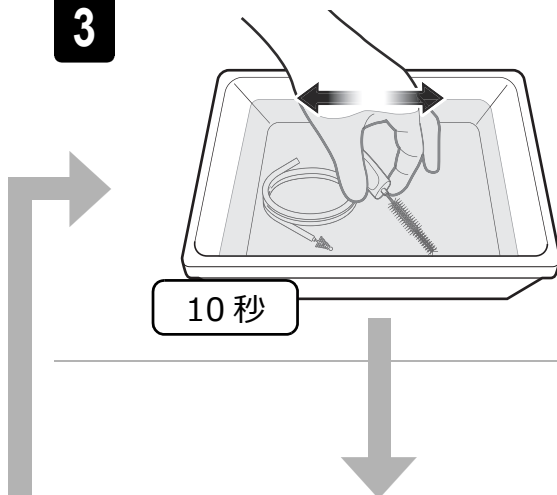

滅菌水中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを少なくとも 10 秒間ゆらしてすすぎます。

4

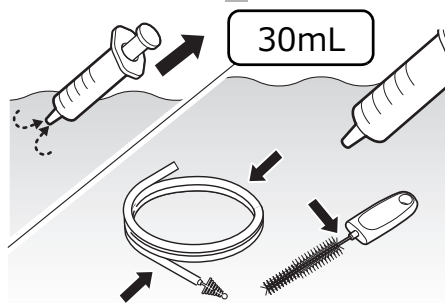


滅菌済みシリンジに滅菌水を入れて、滅菌水中で、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシ全体に、滅菌水を少なくとも30mL 注入します。

5

**繰り返し
(合計) 3回
(手順 3 から 4)**


手順 3 および 4 を更に 2 回以上 (合計 3 回以上) 繰り返し、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシの汚れを除去します。

6

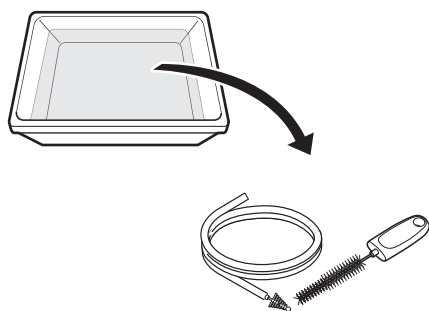


滅菌水から、シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを取り出します。

7

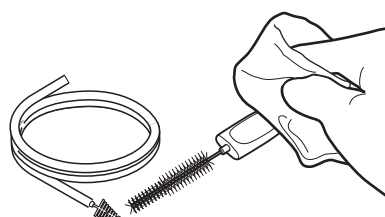


シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシに残った滅菌水を滅菌ガーゼで拭き取ります。

8

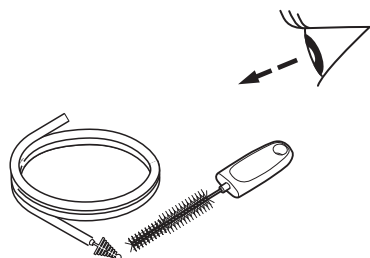

シリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシが乾燥していることを確認します。

9

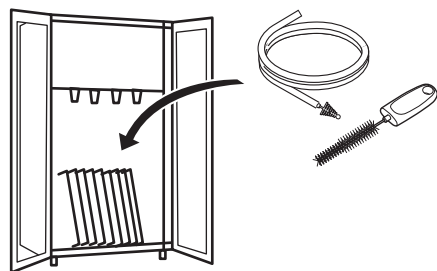

消毒済みのシリンダー用洗浄ブラシおよび吸引チャンネル用洗浄ブラシを保管します。

 参照


- 「7.1 消毒済みの内視鏡および付属品の保管」

6.5.5 鉗子栓 (FOV-BU1) のマニュアル消毒

❗ポイント

- 未滅菌の鉗子栓を使用する場合は、使用前にリプロセスしてください。
- 滅菌済みの鉗子栓はリプロセスしないでください。

1

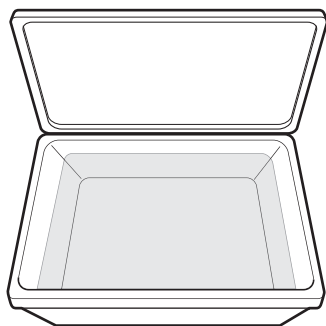


鉗子栓が入る大きさの清潔で大きなフタ付き容器に、消毒液製造販売業者が推奨する温度および濃度の消毒液を入れます。

📖参照


- 「2.4 消毒液」

2

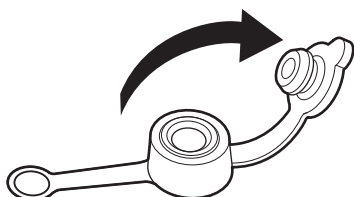


鉗子栓のフタが閉じている場合は、フタを開けます。

3

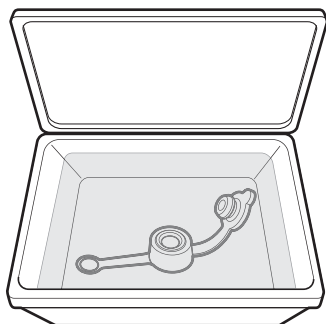


消毒液中に、鉗子栓を浸漬します。

4

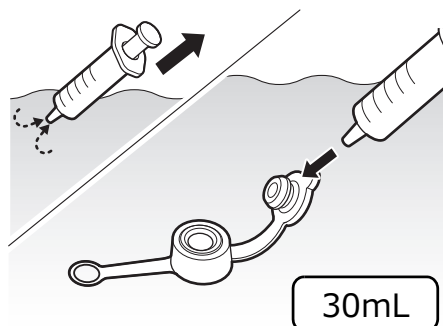


清潔なシリンジに消毒液を入れて、消毒液中で、鉗子栓の本体およびフタのすべての表面や開口部、溝に、消毒液を少なくとも 30mL 注入して気泡を完全に除去します。

5

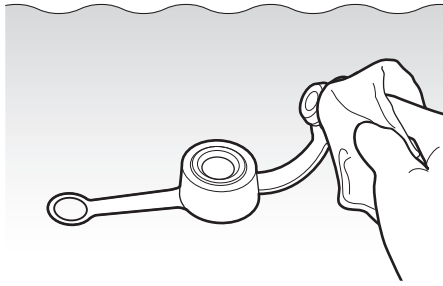

消毒液中で、鉗子栓の外表面を清潔なガーゼで十分に拭きます。


6

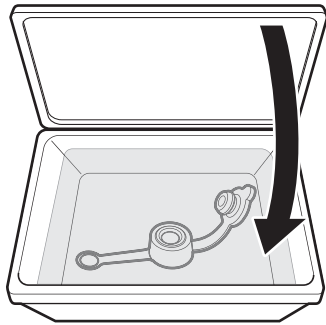

消毒液製造販売業者が推奨する温度、濃度、時間に従って、消毒液中に鉗子栓を完全に浸漬して消毒します。消毒している間は、清潔で大きなフタ付き容器のフタをします。

6.5.5.1 鉗子栓 (FOV-BU1) の消毒後のすすぎ

1

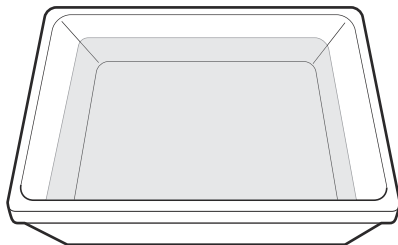


鉗子栓が入る大きさの滅菌済み容器に滅菌水を入れます。

参照


- 「2.5 すすぎに用いる水」

2

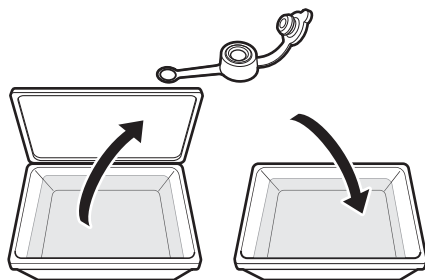


消毒液から、鉗子栓を取り出し、滅菌水に浸漬します。

3

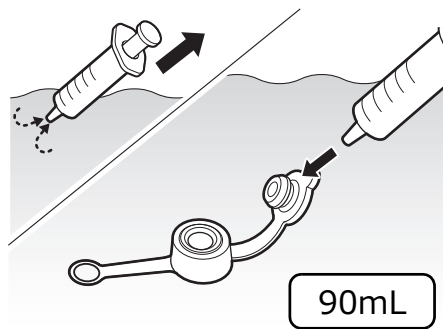


滅菌済みシリンジに滅菌水を入れて、滅菌水中で、鉗子栓の本体およびフタのすべての表面や開口部、溝に、滅菌水を少なくとも90mL注入します。

4

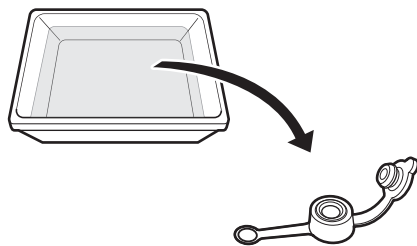


滅菌水から、鉗子栓を取り出します。

5

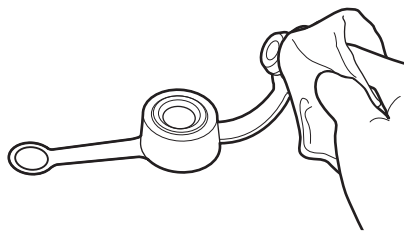


鉗子栓に残った滅菌水を滅菌ガーゼで拭き取ります。

6

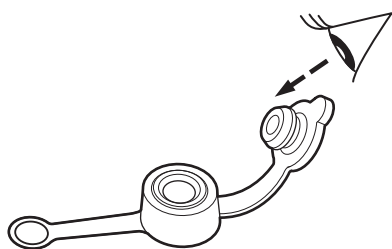

鉗子栓が乾燥していることを確認します。

7

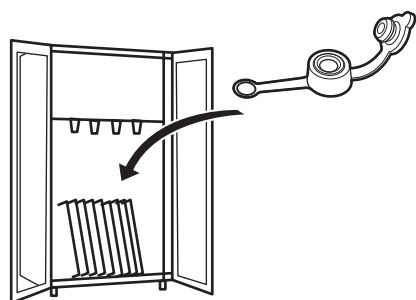


消毒済みの乾燥した鉗子栓を保管します。

 参照

- 「7.1 消毒済みの内視鏡および付属品の保管」

6.6 付属品の滅菌

6.6.1 付属品の滅菌の流れ

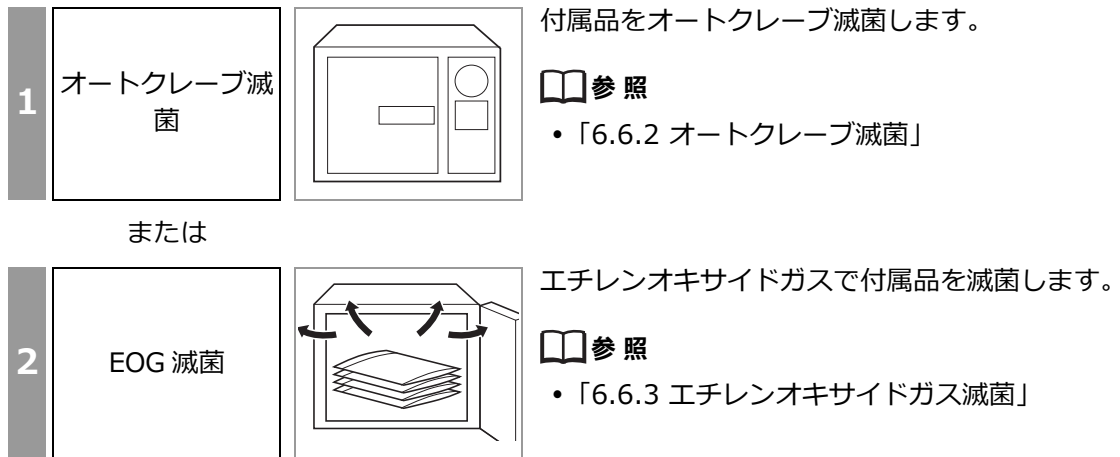

❗ポイント

- 付属品のステラッド滅菌は、有効性が確認されていないため行わないでください。

6.6.2 オートクレーブ滅菌

オートクレーブ滅菌が適用可能な付属品は、「2.1 適用可能なリプロセス方法 - 表 2.1 内視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」で確認してください。

📖 参照

- 「2.1 適用可能なリプロセス方法」

⚠️ ポイント

- 滅菌済みの付属品は滅菌しないでください。


⚠️ 警告

- オートクレーブ滅菌を行った後、滅菌パックに水分が付着している場合は、滅菌工程が適切に行われていないおそれがあり、感染の原因となるおそれがあります。滅菌パックから付属品を取り出し、新しい滅菌パックに入れて再滅菌を行ってください。
- オートクレーブ滅菌を行った後に、滅菌パックに破れ、シール部のはがれがないことを確認してください。滅菌パックに破れ、シール部のはがれなどがあると、付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。

⚠️ 注意


- 付属品のオートクレーブ滅菌を行った後、オートクレーブ装置の温度を室温まで冷却するときは、ゆっくりと冷却してください。温度が急激に変化すると、付属品が損傷するおそれがあります。

1

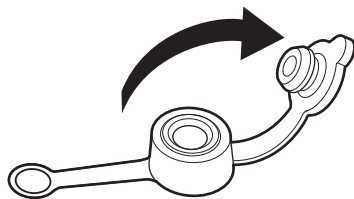

鉗子栓のフタが開いていることを確認します。

2

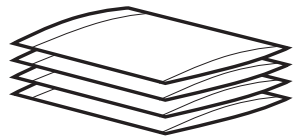


付属品を別々の滅菌パックに入れ、密封します。

!ポイント

- 滅菌方法に適した滅菌パックを使用してください。

3

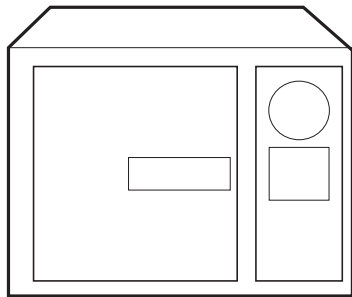


「2.9 オートクレーブ滅菌」の条件に従って、付属品をオートクレーブ滅菌します。

📖参照

- オートクレーブ装置の『取扱説明書』および種々のガイドラインを参照してください。

4

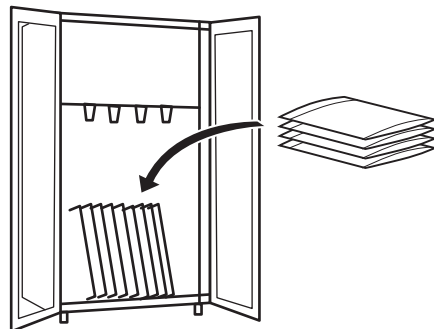

滅菌済みの付属品を保管します。

📖参照

- 「7.2 滅菌済みの内視鏡および付属品の保管」

6.6.3 エチレンオキサイドガス滅菌

エチレンオキサイドガス滅菌が適用可能な付属品は、「2.1 適用可能なリプロセス方法 - 表 2.1 内 視鏡および付属品の適用可能なリプロセス方法」で確認してください。

📖 参照

- 「2.1 適用可能なリプロセス方法」


⚠️ ポイント

- 滅菌済みの付属品は滅菌しないでください。

⚠️ 警告


- 付属品のエチレンオキサイドガス滅菌を行う場合は、付属品の表面が完全に乾燥していることを確認してください。水分が残留したまま滅菌を行うと、乾燥していない部分の滅菌が適切に行われず、感染の原因となるおそれがあります。
- 付属品のエチレンオキサイドガス滅菌を行う場合は、滅菌後の無菌状態を保つため、滅菌の種類に適した滅菌パックまたは梱包材を使用してください。適した滅菌パックまたは梱包材を使用しないと、付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。
- エチレンオキサイドガス滅菌を行った後に、滅菌パックに破れ、シール部のはがれがないことを確認してください。滅菌パックに破れ、シール部のはがれなどがあると、付属品が再汚染され、感染の原因となるおそれがあります。

1

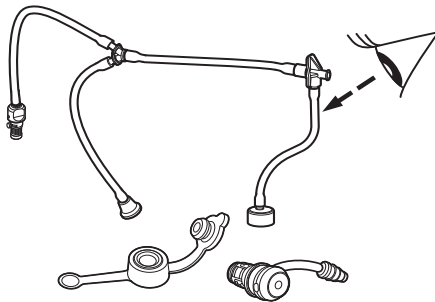


付属品が完全に乾いていることを確認します。

2

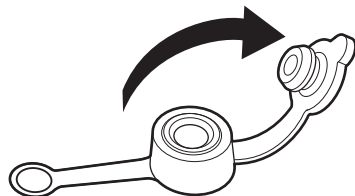

鉗子栓のフタが開いていることを確認します。

3

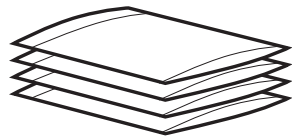


付属品を別々の滅菌パックに入れ、密封します。

❗ポイント

- 滅菌方法に適した滅菌パックを使用してください。

4

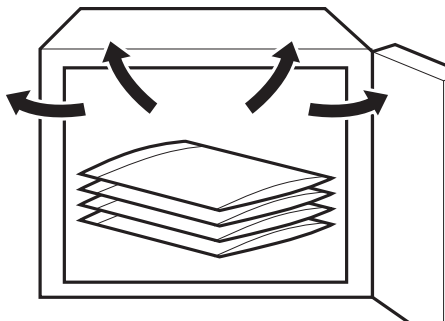


「2.7 エチレンオキサイドガス滅菌」の条件に従って、付属品のエチレンオキサイドガス滅菌とエアレーションを行います。

📖参照

- エチレンオキサイドガス滅菌器の『取扱説明書』を参照してください。

5

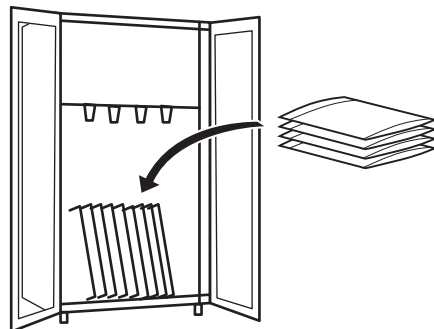

滅菌済みの付属品を「7.2 滅菌済みの内視鏡および付属品の保管」に従って保管します。

📖参照

- 「7.2 滅菌済みの内視鏡および付属品の保管」

第 7 章 保管と廃棄

この章では、内視鏡と付属品の保管と廃棄について説明します。

⚠ 警告

- リプロセスが行われた内視鏡および付属品が汚れた機器と接触しないように、適切な方法で運搬および保管してください。汚れた機器に接触すると、リプロセスが行われた内視鏡および付属品が汚染され、それに触れる患者または使用者が感染するおそれがあります。
- 専用の保管庫を清浄に保つため、専用の保管庫には適切にリプロセスを行った内視鏡および付属品のみを保管してください。専用の保管庫が汚染されると、感染の原因となるおそれがあります。
- 専用の保管庫の清掃および消毒方法、保管する物、利用者に関して、施設の指針を確立してください。保管庫の清浄性が確保できない場合、保管している物が再汚染される原因となるおそれがあります。
- 内視鏡や付属品を内視鏡のキャリングケースに入れて保管しないでください。キャリングケースは患者に使用する内視鏡の保管環境として適切ではありません。患者に使用する内視鏡をキャリングケースに入れて保管すると、菌が繁殖し感染の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡のキャリングケースは、内視鏡や付属品を輸送する場合だけに使用してください。キャリングケースから取り出した内視鏡や付属品は、患者へ使用する前または専用の保管庫で保管する前に必ずリプロセスを行ってください。リプロセスを行わない場合、感染の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

- 適切にリプロセスを行った内視鏡および付属品は適切な保管環境で保管してください。適切な保管庫で保管しない場合、内視鏡および付属品が損傷または再汚染するおそれがあります。
- 適切にリプロセスを行った内視鏡および付属品は、直射日光にあたる場所、高温多湿な場所、オゾンまたは X 線や紫外線にさらされる場所で保管しないでください。それらの場所に保管すると、内視鏡および付属品の故障または損傷の原因となるおそれがあります。
- 内視鏡の挿入部および LG 軟性部を直径 200mm より小さく丸めないでください。直径 200mm より小さく丸めて保管すると、内視鏡が故障または損傷するおそれがあります。

❗ポイント

- 内視鏡の先端および挿入部に負荷がかからないように注意して、内視鏡を垂直にしてつり下げて保管してください。
- 保管庫内に内視鏡を吊り下げるときは、先端部が床に接触しないように吊り下げてください。
- いくつかの国では、保管前や次の患者に使用する前に、アルコールフラッシュ後の乾燥工程として圧縮空気、エアーガン、エアー循環機能付き保管庫の使用が推奨されています。各国のガイドラインに従い各施設の手順を作成してください。

7.1 消毒済みの内視鏡および付属品の保管

⚠ 警告


- 内視鏡および付属品は、保管前に外表面および内面（管路など）を十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な状態で保管すると、菌が繁殖し、感染の原因となるおそれがあります。
- 専用の保管庫は清潔で乾燥した換気の良い状態を維持してください。多湿な環境では菌が繁殖し、感染の原因となるおそれがあります。
- 専用の保管庫のドアは閉めておいてください。保管されている機器への利用者以外の人物による接触を避けるため、保管庫の利用を制限してください。不用意な接触があると、感染の原因となるおそれがあります。
- 汚れた内視鏡および付属品と、リプロセスを行った内視鏡および付属品の混在を避けてください。交差感染するおそれがあります。

⚠ 注意

- 専用の保管庫のドアは閉めておいてください。保管されている機器への利用者以外の人物による接触を避けるため、保管庫の利用を制限してください。不用意な接触があると、機器が故障または再汚染するおそれがあります。

📌 ポイント

- 内視鏡は、消毒およびアルコールフラッシュ後、保管前または次の患者に使用する前にフィルターを通したろ過済み圧縮空気で乾燥することを推奨します。
- 内視鏡の軟性部および LG 軟性部を垂直にし、スコープコネクターは下向きにして、保管庫につり下げて保管することを推奨します。

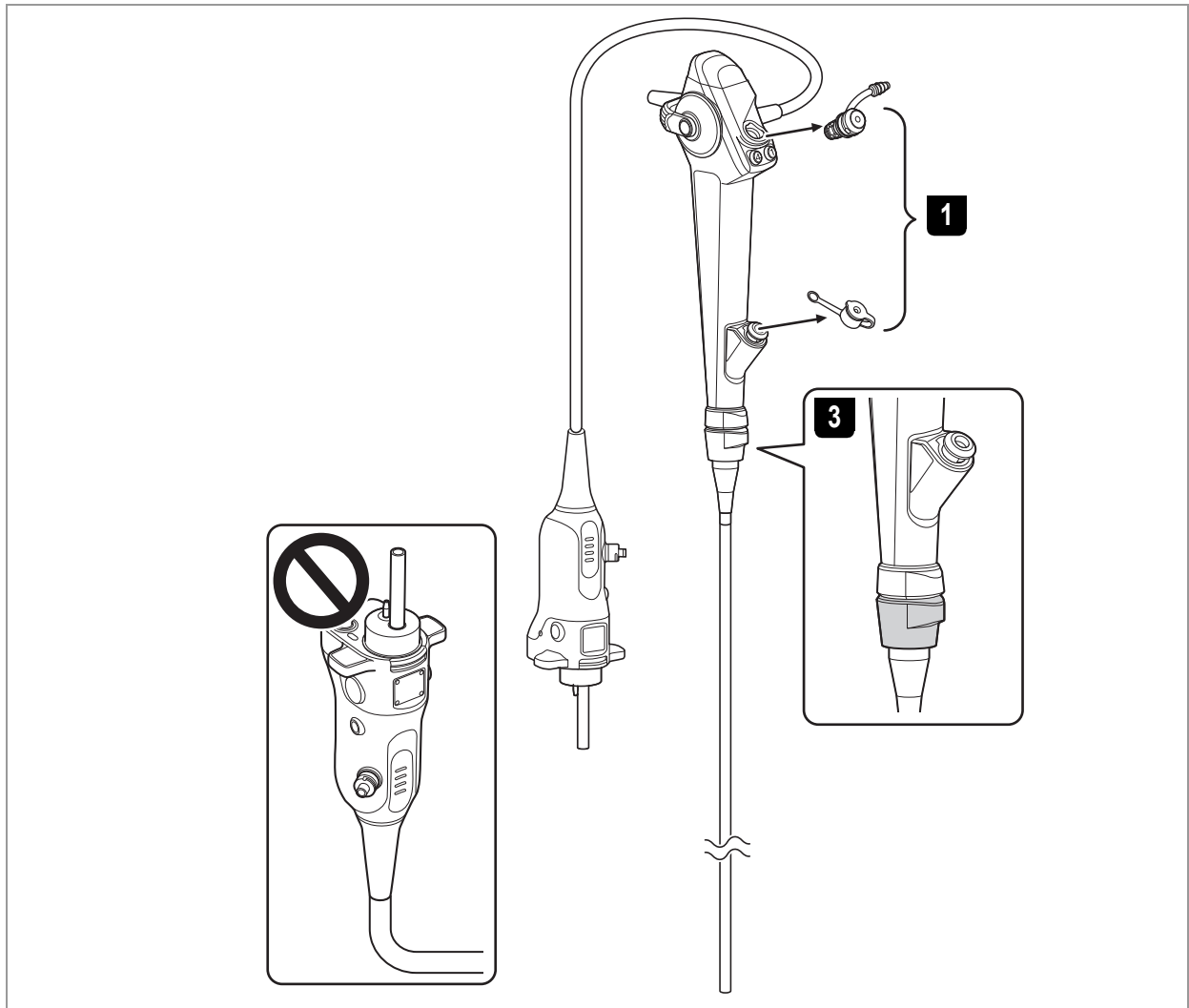

- 1** 吸引ボタン、鉗子栓などのすべての付属品が内視鏡から外れていることを確認します。
- 2** 内視鏡および付属品のすべての表面が乾燥していることを確認します。
- 3** 回転リングの突起部と操作部の指標部（突起部）を合わせます。
- 4** 各国専門機関のガイドラインに従って、消毒済みの乾燥した内視鏡および付属品を専用の保管庫で保管します。

7.2 滅菌済みの内視鏡および付属品の保管

1

各国専門機関のガイドラインに従って、滅菌済みの内視鏡および付属品を専用の保管庫で保管します。

❗ポイント

- 滅菌済みの内視鏡は、滅菌パックに入れて保管することもできます。
- 施設の指針に従い、滅菌パックに使用期限を記載してください。

7.3 廃棄

⚠ 警告

- 本製品を廃棄する場合は、廃棄前に必ずリプロセスを行ってください。リプロセスを行わずに廃棄すると廃棄関係者が感染するおそれがあります。

内視鏡、付属品、およびリプロセスで使用する器材（保護具、ガーゼおよびリプロセスに使用された液体など）を廃棄する場合、リプロセスを行う場所からの感染の広がりを防ぐ方法で取り扱い、国または地域の法律に従って廃棄してください。

📌 ポイント

- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、排出事業者である医療機関が、自らの責任で産業廃棄物を処理することが義務づけられました。自ら処分できない場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託することが必要となります。廃棄の委託を行う際は、法律に基づく処置をお願いします。

第 8 章 保証とアフターサービス

この章では、保証とアフターサービスについて説明します。

8.1 保証

本製品に問題が起きた場合は、取扱説明書をお読みください。
問題が解決しない場合は、営業所またはお買い上げの代理店にお問い合わせください。

8.2 アフターサービス

内視鏡を修理のために返送する場合は、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせください。

修理のために返送する前には、必ず内視鏡をリプロセスしてください。
リプロセスを行っていない製品が返送されると、使用者やサービススタッフ、その他の関係者が感染するおそれがあります。

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

型名 :
製造番号 :
故障の状況 : できるだけ詳しく
購入年月日 :
リプロセス方法（内視鏡洗浄消毒機、消毒液など）:

8.2.1 保証期間中の修理

無料修理規定に基づいて修理いたします。
保証期間は、お買い上げ日から 1 年^{※1}です。
※ 1 ただし消耗品は除く。

次の場合は保証の対象となりませんので、ご了承ください。

- 火災、風水害などの天災による損傷
- お取り扱い上の不注意、操作およびリプロセス方法の誤りによる機能障害および故障
- 他社製品が原因で弊社の製品が受けた故障または損傷
- 弊社指定の純正部品以外の補修部品を使用して改造、保守、修理されたもの

8.2.2 保証期間後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。

製品のお問い合わせ窓口について

製品のお問い合わせ先

電話番号：**0570-02-7007**（ナビダイヤル）

富士フイルムメディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布二丁目26番30号

電話番号：03-6419-8045

製造販売業者 **富士フイルム株式会社**
〒258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地