

バージョンアップのご案内 (V01.03.05.00)

新機能をご紹介します！



- (1) 1/2錠・1/4錠の表示改善 → 詳細は2ページ参照
- (2) ラベル印字内容の拡張 → 詳細は3～4ページ参照
- (3) 起動後24時間経過時の警告表示 → 詳細は5ページ参照

※その他視認性や操作性の改善を行いました。




業務終了のタイミングで「シャットダウン」ボタンより「バージョンアップ」の実施をお願い致します。

※バージョンアップは施設毎に順次配信されますので、最大3週間程度かかる場合があります。

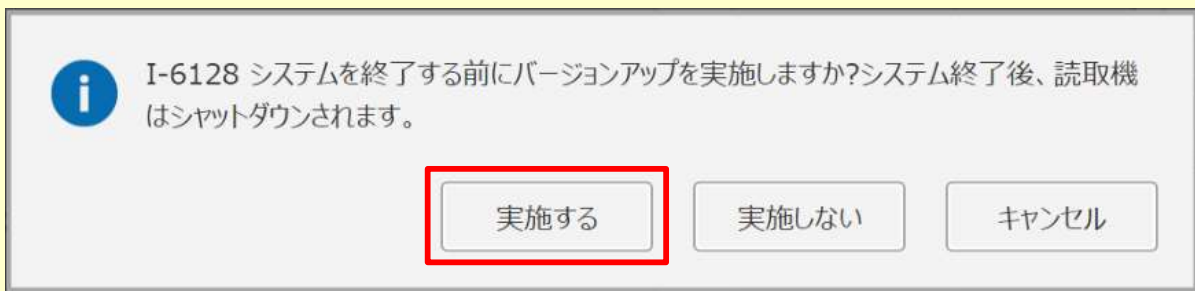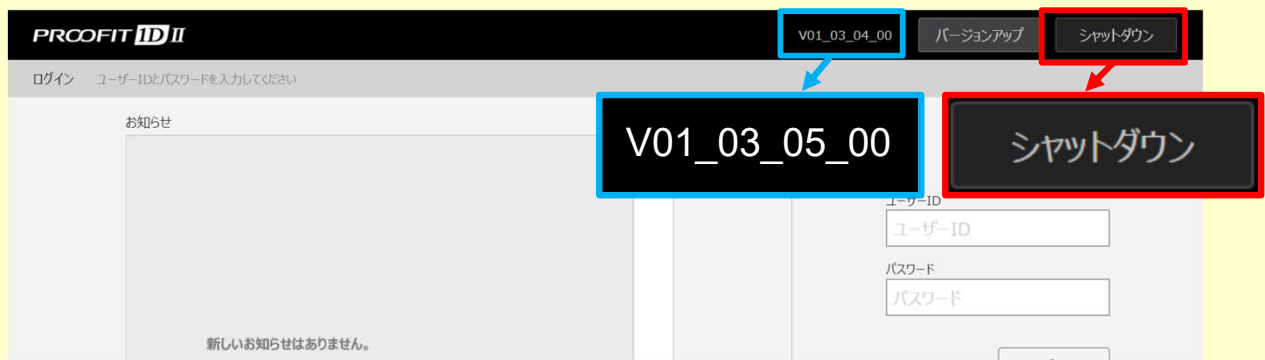

ログイン画面の「バージョンアップ」ボタンからも実施可能です。
なお、本バージョンアップには20分程度の時間がかかります。

※「バージョンアップ」ボタンから実施した場合はシャットダウンされませんので、ご注意ください。

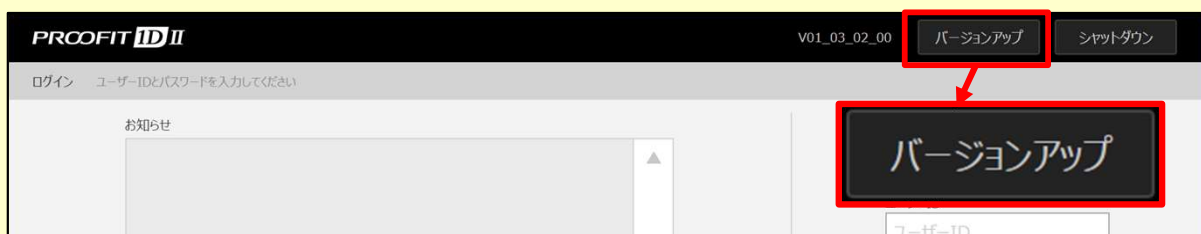

バージョンアップのご案内 (V01.03.05.00)

(1) 1/2錠・1/4錠の表示改善

💡 1/2錠や1/4錠を監査読みし、読み結果画面の薬剤名に「1/2」「1/4」と表示されるようになりました。



■バージョンアップ前 1錠と1/2錠の読み結果画面

富士 次郎 71歳0ヶ月 男性 読みリセット 分包装情報へもどる 患者一覧 監査完了

要確認 時点順 読み結果 タイル表示 要確認リストを参考に分包装を監査してください。 ラベル残数: 2129枚

1本目 14包

朝食後 不明物左寄せ 強制解除

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

再監査範囲指定

問題点: 目のマークが表示されているがどちらが「1/2」錠かわからない...

■バージョンアップ後 1錠と1/2錠の読み結果画面

富士 次郎 71歳0ヶ月 男性 読みリセット 分包装情報へもどる 患者一覧 監査完了

要確認 時点順 読み結果 タイル表示 要確認リストを参考に分包装を監査してください。 ラベル残数: 2129枚

1本目 14包

朝食後 不明物左寄せ 強制解除

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152 FF 152


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

再監査範囲指定

「1/2」と表示されるようになり、薬剤情報が分かりやすくなりました!

バージョンアップのご案内 (V01.03.05.00)

(2) ラベル印字内容の拡張

 オリジナルラベルフォーム作成の印字内容が拡張されました。
「メニュー」→「ラベルフォーム管理」の「新規作成」または「編集」から
ラベルフォームの編集画面にて印字内容の選択をしてください。



●文字サイズ 5pt 追加

	印字項目	印字行数	サイズ	文字調整
1行目	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2行目	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3行目	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4pt
5pt
6pt
8pt

●「薬剤名」「薬剤名-錠数」の選択項目追加

	印字項目	印字行数	サイズ	文字調整
1行目	薬剤名	5行分(5種迄)	8pt	フィットイン
1行目	薬剤名-錠数	5行分(5種迄)	8pt	フィットイン

5行分(5種迄)
5行分-2列(10種迄)
4行分-2列(8種迄)
3行分-2列(6種迄)
2行分(2種迄)
1行分(1種迄)

バージョンアップのご案内 (V01.03.05.00)

(2) ラベル印字内容の拡張

【分包機連携をお使いのお客様へ】

● 分包機連携コメントに「患者コメント」「処方コメント」を追加

8行目	服用日	▶	入力コメント	▼	▼	▼
9行目	処方日	▶	定型コメント	▼	▼	▼
10行目	調剤日	▶	分包機(用法)コメント	▼	▼	▼
11行目	処方区分	▶	分包機(患者)コメント	▼	▼	▼
	コメント	▶	分包機(処方)コメント	▼	▼	▼

バージョンアップ前の「分包機連携コメント」

※ 分包機のメーカーや機種、バージョンにより対応していない項目があります。
詳しくはサポートセンターへお問い合わせください。

【病院仕様をお使いのお客様へ】

● 「患者ID」を追加


	印字項目	印字行数	サイズ	文字調整
1行目	患者ID	1行分	8pt	フィットイン
2行目				
3行目				
4行目				
5行目				
6行目				

<未選択>
患者ID
患者漢字氏名
患者カナ氏名
患者属性情報 ▶

※患者IDを印字する際には、先頭に「ID : 」が印字されます。

バージョンアップのご案内 (V01.03.05.00)

(3) 起動後24時間経過時の警告表示

 起動後、24時間以上経過した際に、警告メッセージが表示されるようになりました。



24時間以上連続稼働するとフリーズや画面操作不能の現象が発生する可能性があります。
メッセージが表示された場合は、「OK」ボタンを押してメッセージを閉じて、
【ログイン画面】から「シャットダウン」を実施後、再度電源を入れてください。

